



Mode d'utilisation pour une Vista Mobile

Il est important avant tout de s'assurer qu'il est possible de déplacer l'appareil en toute sécurité et qu'il n'y a aucun obstacle qui peut nuire à la circulation de la plate-forme. Lorsque vous désirez installer la plate-forme élévatrice, il est important de respecter ces indications:

- 1- S'assurer que l'endroit où vous désirez installer la plate-forme soit sécuritaire, c'est à dire: qu'une paroi de protection lisse du bas jusqu'au palier supérieur afin qu'il n'y ait pas d'ouverture sous le palier où vous désirez monter la personne à mobilité réduite.
- 2- Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle à proximité de l'appareil, il faut donc avoir une distance minimum de 24'' entre tout obstacle de n'importe quel endroit de l'appareil.
- 3- La surface du sol doit être le plus lisse et droit possible, libre de débris, cailloux, etc.
- 4- Il doit y avoir une prise de courant standard à proximité de l'appareil afin d'effectuer le branchement, ou prévoir une rallonge pouvant être amené à l'appareil.

(Voir autre détail au verso)



NOTE

Pour la stabilisation de l'appareil et son bon fonctionnement vous devez :

- A- Approcher l'appareil près du palier que vous voulez desservir jusqu'à une distance de 7/16" à 1/2". Les interrupteurs de sécurité seront alors enclenchés et rendront l'appareil fonctionnel.
- B- Pour stabiliser l'appareil au sol, il suffit de dévisser les tiges filetées installées à chacune des roues pour les faire rétracter pour que l'appareil se dépose bien au sol. Des interrupteurs de sécurité situés sous l'appareil seront activés pour permettre le fonctionnement.
- C- Ajuster la course de l'appareil en déplaçant la poignée située à l'arrière de la colonne:
 - 1. Mesurer la hauteur du palier à desservir;
 - 2. Déplacer la poignée à la même mesure indiquée à la règle verticale.
- D- Brancher le fil électrique à une prise de courant à proximité.

Pour tester le fonctionnement, il faut d'abord s'assurer que tous les postes d'appels sont débarrés et par la suite appuyer sur le bouton de façon constante pour faire descendre ou monter le véhicule de l'appareil. Il va s'arrêter automatiquement lorsqu'arrivé au niveau désiré.