

DOMUS

DOMUS TEMPLATE PARA CRANIOPLASTIA

Anvisa nº 80463390008



O Domus - Template para Cranioplastia é desenvolvido individualmente sobre o exame tomográfico do paciente proporcionando a modelagem precisa do cimento ósseo acrílico. A sua utilização permite a confecção de uma prótese personalizada de alta qualidade.


INSTRUÇÃO DE USO

Contém informações detalhadas sobre a aplicação correta, manuseio seguro e condições ideais de armazenamento.



COMPOSIÇÃO:

- 1. Domus – Tampa do molde
- 2. Domus – Base do molde
- 3. Domus – Template
- 4. Domus – Réplica da falha óssea.

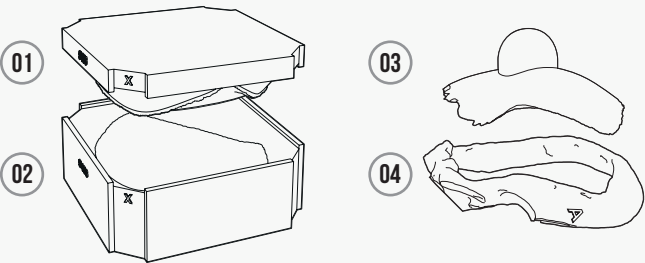

BENEFÍCIOS:

- Delimitação precisa da área de cranioplastia;
- Agilidade na obtenção da peça de reconstrução;
- Redução no centro cirúrgico;
- Melhoria na qualidade estética;
- Ganho de adaptação marginal da peça;
- Flexibilidade na escolha do material de reconstrução;
- Elimina os riscos da reação exotérmicas do cimento.

i Podem ser utilizados cimentos ósseos acrílicos devidamente registrados na ANVISA.

PROTOCOLO DE EXAME

>>> TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Parâmetro	Valor
Matriz	512X512
Espessura do Corte	1 mm
Intervalo de Reconstrução	1 mm
Sequência	Axial
Gantry Tilt	0°
Formato de Exportação	DICOM – Multi File
FOV	Crânio completo

PROCEDIMENTO DE MODELAGEM E INSTALAÇÃO



ETAPAS DE PRODUÇÃO

