




SKIN OXYMIZER

Maximize your Beauty

Was ist Skin OXYmizer ?

Die Skin OXYmizer-Technologie löst den natürlichen Prozess der Sauerstoffversorgung in der Haut aus und verwandelt sie von innen nach außen. Für eine erneuerte, glattere und revitalisierten Haut.

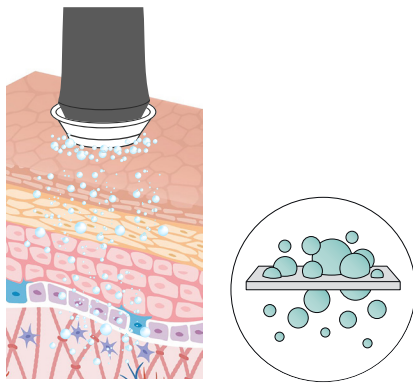

1 Sauerstoffanreicherung

Sauerstoffanreicherung von innen heraus:


Treffen die OXY Caps auf das OXY Gel, kommt es zu einer chemischen Reaktion, die feine CO_2 Bläschen auf der Hautoberfläche hinterlässt. Dadurch wird in der Haut ein natürlicher Prozess, bekannt als BOHR-Effekt ausgelöst, der die Sauerstoffversorgung in den Zellen steigert.

Vereinfacht erklärt:

Durch die Behandlung gelangt mehr CO_2 in die Haut. Dadurch wird ein Sauerstoffmangel vorgetäuscht. Um diesen Fehler zu beheben wird im Blut mehr Sauerstoff an das Hämoglobin gebunden. Die Mikrozirkulation wird gesteigert, die Bereitstellung von Zellenergie erhöht und die Zellaktivität durch die verbesserte Sauerstoffversorgung unterstützt.

Wie funktioniert Skin OXYmizer ?

Die Skin OXYmizer-Technologie vereint die Sauerstoffanreicherung von innen heraus mit einem Vibro-Peeling und verbessert die Wirkstoffversorgung der Haut. Die Vibro-Massage macht die Behandlung zu einer entspannenden Auszeit.

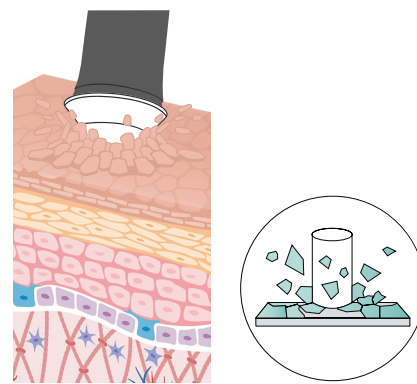


2 Vibro-Peeling

Bei der Behandlung lösen sich OXY Caps langsam auf und es entsteht eine raue Oberfläche. Durch die Vibration des Handstückes werden abgestorbene Hautzellen sanft abgetragen, Poren verfeinert und die Hauttextur deutlich verbessert.

3 Wirkstoffversorgung

Die in den OXY Caps enthaltenen Wirkstoffe werden erst aktiv, wenn sie mit dem OXY Gel in Kontakt kommen und dann mit dem Handstück in die Haut eingearbeitet.

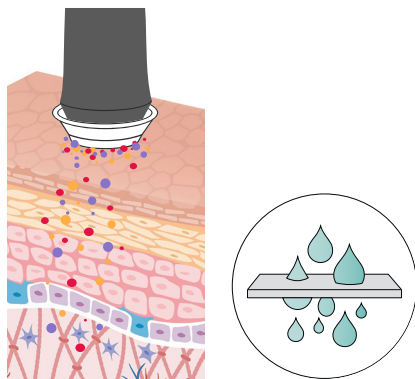

Wie kann ich die Behandlung unterstützen?

Damit die Haut nachhaltig von der Behandlung profitieren kann, wird eine auf das Hautbild abgestimmte Heimpflege empfohlen. Eine intensive Feuchtigkeitsversorgung, zusammen mit den optimalen, individuellen Wirkstoffen, wird die Haut in ihrer Regeneration unterstützen und für ein zielgerichtetes Behandlungsergebnis, sowie für ein unverwechselbares Hautgefühl sorgen.



Welche Behandlungsergebnisse können erreicht werden?

- Verbesserung der Hautvitalität und Strahlkraft
- Minderung von Hyperpigmentierung
- gesteigerte Hautelastizität und Spannkraft
- Reduzierung von Hautirritationen und Rötungen

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

Bereits nach der ersten Behandlung ist die Haut vitalisiert und erscheint frisch. Um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen werden 4-6 Behandlungen im Abstand von einer Woche empfohlen.

MORE THAN BEAUTY!

Wir beraten dich gerne!

CNC direct Code: _____

CNC direct Shop Deutschland: www.cnc-direct.de



CNC cosmetic® GmbH
Bruchstücker 9 | D-76661 Philippsburg

Tel: +49 7256 - 9320-0
Fax: +49 7256 - 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
Internet: www.cnc-cosmetic.de

CNC skincare GmbH
Aeschengraben 13 | CH-4051 Basel

Tel: +41 61 - 2716060
Fax: +41 61 - 2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
Internet: www.cnc-cosmetic.ch

BEAUNITED GmbH
Schönbrunnngasse 12 | AT-8043 Graz

Tel: +43 316 - 3218-00
E-Mail: mail@beaunited.com
Internet: www.beaunited.com



Stand 03/2024