


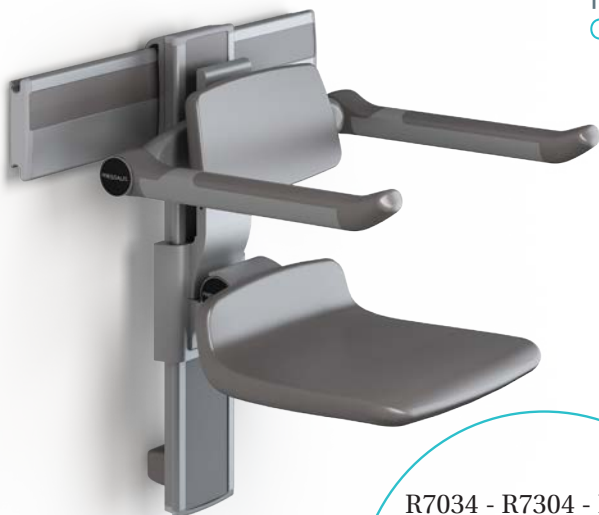

R7034 - R7304 - R7334
R7364 - R7114 - R7115
R7124 - R7134 - R7404
R7414 - R7415 - R7125
R7135 - R7424 - R7425
R7434 - R7435 - R7454
R7455 - R7464 - R7465

PLUS dusjsete 310/450

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

no

Innholdsfortegnelse

Monteringsanvisning	02
Visuell hurtigveiledning	02
Symboler brukt i denne brukerhåndboken	03
Generell sikkerhet	04
Produktetikett	05
Tiltenkt bruk	06
Krav til brukere	06
Krav til omgivelsene ved bruk	06
Modeller	07
Bruksanvisning	09
Vippe setet og armlenene	09
Justere setet og ryggstøtten	10
Justere armlenene	11
Justere sidelengs	11
Rengjøring	12
Slik fjerner du kalkavleiringer	12
Vedlikehold	13
Smøring	13
Serviceinspeksjon	14
Feilsøking	14
Tekniske data	15
Mål i mm	16
Kassering og gjenvinning	19

Monteringsanvisning



En monteringsanvisning er inkludert med dette produktet. Den kan også lastes ned fra www.pressaliticare.com.

Visuell hurtigveiledning



En visuell hurtigveiledning for dette produktet er tilgjengelig på våre nettsider: www.pressalit.com

Symboler brukt i denne brukerhåndboken

De følgende symbolene brukes i denne brukerhåndboken og i den tilhørende dokumentasjonen som følger med produktet.



ADVARSEL indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.



FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader. Det kan også brukes for å advare mot feilaktig bruk.



VIKTIG angir viktig informasjon om korrekt håndtering og bruk av produktet.



MERKNAD indikerer forhold som ikke er relatert til personlig sikkerhet.



Advarsel om håndskade.

Generell sikkerhet

ADVARSEL

- Les og forstå brukerhåndboken fullstendig før bruk. Oppbevar brukerhåndboken nær enheten.
- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken for å unngå ulykker som kan føre til alvorlig personskade.
- Dette produktet skal aldri brukes eller håndteres på andre måter enn som beskrevet i denne brukerhåndboken. Dette kan redusere sikkerheten for deg og føre til skade på produktet.
- Sørg for at alle som skal montere eller bruke produktet og systemene, har all nødvendig informasjon og tilgang til denne brukerhåndboken.


FORSIKTIG

- Følg disse instruksjonene for å unngå at produktet skades eller ødelegges.
- Ikke utfør reparasjoner, demonterings- eller monteringsoperasjoner, utvidelser, justeringer eller modifikasjoner på dette produktet. Dette skal kun utføres av Pressalit eller personer som er autorisert av Pressalit.
- La aldri barn bruke dette produktet uten tilsyn. Produktet er ikke et leketøy.
- Bruk aldri produktet hvis det er defekt eller skadet. Bruk ikke et defekt produkt før det er blitt reparert.

MERKNAD

- Informasjonen i denne brukerhåndboken forutsetter at produktet er riktig montert i samsvar med våre monteringsinstruksjoner.
- Pressalit kan ikke holdes ansvarlig hvis produktet brukes på annen måte enn som beskrevet i veiledningen.
- Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne brukerhåndboken uten varsel.

Produktetikett

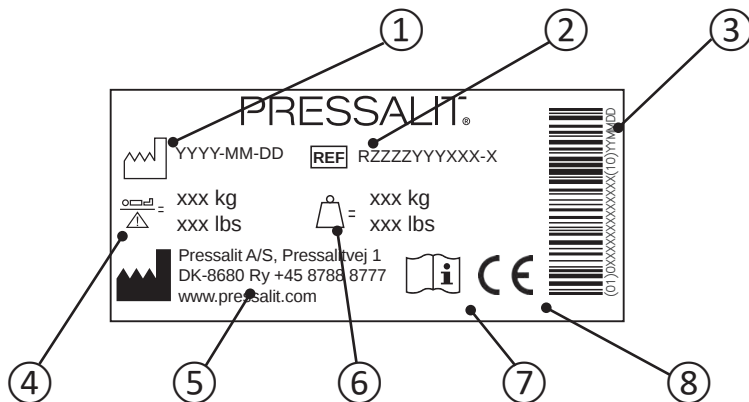

① Produksjonsdato

② Artikkelnummer

③ GS1-128 barcode

④ Maksimal brukervekt

⑤ Produsentens navn og adresse

⑥ Produktvegt

⑦ Se brukerhåndboken

⑧ Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivet om medisinsk utstyr 93/42/EØF, inkludert tilleggene til direktiv 2007/47/EØF. Du finner en samsvarserklæring på www.pressalitcare.com

Plassering av produktetikett ①.



Tiltenkt bruk

Dusjsetet brukes til å sitte på når en dusjer.

Krav til brukere

310-setet passer for barn og små voksne, mens 450-setet passer til større personer, som ikke veier mer enn **maksimalbelastningen på 200 kg**.

Krav til omgivelsene ved bruk

For bruk innendørs i våtrom, som bad eller vaskerom. Produktet kan brukes ved romtemperatur, som en frittstående installasjon, i private hjem, på pleiehjem og sykehus under normale driftsforhold.

MERKNAD

Hvis produktet installeres i omgivelser med høyt salt- eller kloridinnhold, reduseres garantien fra 3 år til 1 år.

Salt og klorid kan føre til korrosjon på produktets komponenter og vil føre til redusert produktlevetid. Skaden kan eventuelt reduseres ved å skylle produktet med vann fra springen daglig.

Modeller

Dusjsetet leveres i flere modeller



R7034



R7304



R7334



R7364



R7114



R7115



R7124



R7134



R7404



R7414



R7415



R7125

no



R7135



R7424



R7425



R7434



R7435



R7454



R7455



R7464



R7465

Bruksanvisning



Vippe setet og armlenene

Vipp dusjsetet og armlenene (hvis montert) helt ned.

Vipp de tilbake når de ikke er i bruk. Du hører et klikk når dusjsetet og armlenene er riktig vippet opp.




Vær forsiktig for å unngå håndskade når hendene er i nærheten av bevegelige deler som lukker seg ①.

VIKTIG

Pass på at setet tørkes av hvis det er kommet vann på det.



Justere setet og ryggstøtten

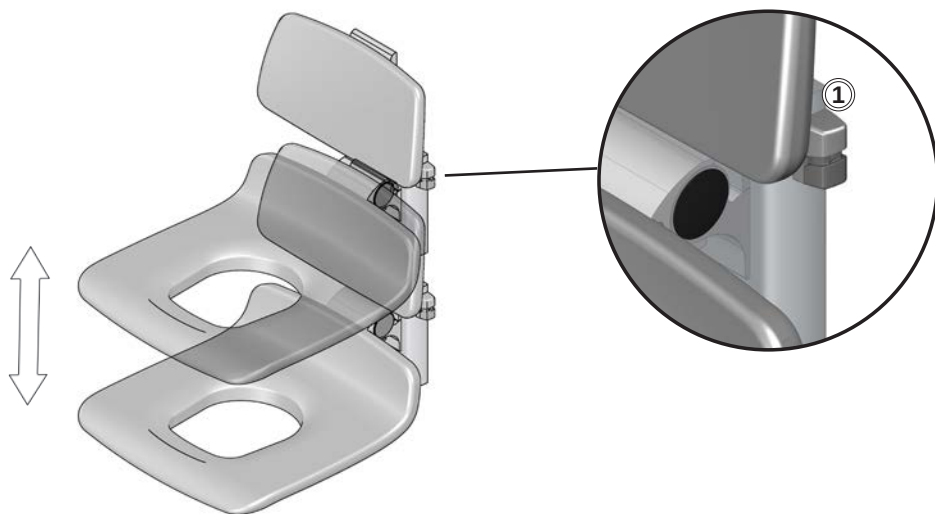

Dra dusjsetet oppover for å justere det oppover.

Juster nedover ved å trykke inn låseknappen ① og holde den inne mens dusjsetet dras nedover. Slipp låseknappen for å låse dusjsetet.

Pass på at låseknappen aktiveres i sporet.

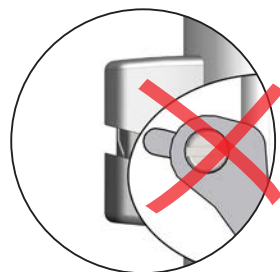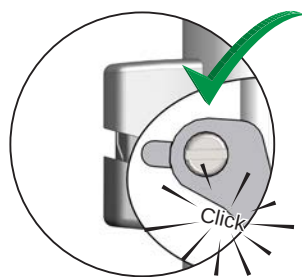


Justere armlenene

Armlenene kan også justeres uavhengig av setet og ryggstøtten.


Juster armlenene oppover ved å dra oppover mot skuldrene

① til du har oppnådd ønsket høyde og hører et klikk.

For å justere armlenene nedover må du dra armlenene helt til toppen, og deretter støtte dem helt ned til laveste posisjon, og deretter dra oppover igjen til ønsket posisjon og du hører et klikk.

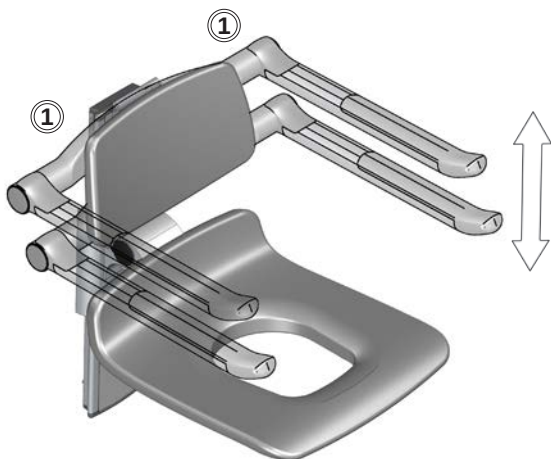

Justere sidelengs

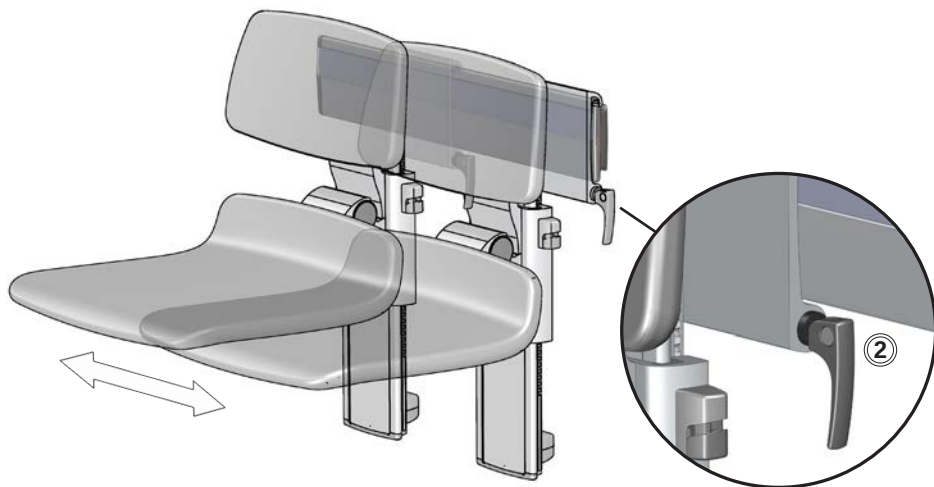

Løs ut låsehåndtaket ②, og flytt dusjsetet sidelengs. Stram låsehåndtaket igjen for å låse setet.

no

Rengjøring

Rengjør produktet etter hver bruk. Det antibakterielle middelet i stoffet som er brukt på PU-setene og ryggstøtten, gir en ren overflate etter 24 timer så lenge ikke noe annet substrat som lar bakteriene vokse, er tilstede.

Med dette i bakhodet er det viktig å holde overflaten fri for substanser som støv, smuss og fett, men det er ikke nødvendig å sterilisere overflaten.

Det anbefales derfor å kun bruke mildt såpevann når PU-komponentene rengjøres. Bruk av kraftigere midler kan føre til skade på den antibakterielle overflaten. Skyll med rent vann og tørk med en myk klut.

VIKTIG

- Ikke bruk autoklaving eller annen type damprengjøring.
- Unngå sterke rengjøringsmidler som inneholder syre eller klorid.
- Spray aldri produktet direkte med en høytrykksspyler.
- Unngå bruk av sterke, skurende, korroderende eller kloridbaserte rengjørings- eller desinfeksjonsprodukter.

Slik fjerner du kalkavleiringer

Fjern kalkavleiringer fra aluminiumdeler ved å bruke 3 deler 30 % husholdningseddik til 7 deler vann, og tørk deretter av delene med en klut vridd opp i rent vann.

I land der det er mye kalk i vannet, kan det være nødvendig å fjerne kalkavleiringer fra aluminiumdeler ved å bruke et kalkfjerningsmiddel som eddiksyre. Test dette først på et område som ikke er synlig når produktet er i bruk.

FORSIKTIG

Les alltid produktdatabladet (MSDS) og instruksjonene som følger med rengjørings-, desinfeksjons- eller kalkfjerningsmiddelet, og følg instruksjonene for sikker bruk, fortynning, skylling, tørking, håndtering og oppbevaring av middelet.

Vedlikehold




Forventet levetid for dusjsetet er 10 år, forutsatt at det vedlikeholdes som beskrevet nedenfor:

Fjern støv fra veggskinnene ① jevnlig. Tørk over veggskinnene med silikon.

Det anbefales å ukentlig justere produktet til maksimalposisjonene og å vippe setet og armlenene (hvis montert) opp og ned.


Smøring

Det anbefales å smøre leddene for setet og armlenene en gang i året.

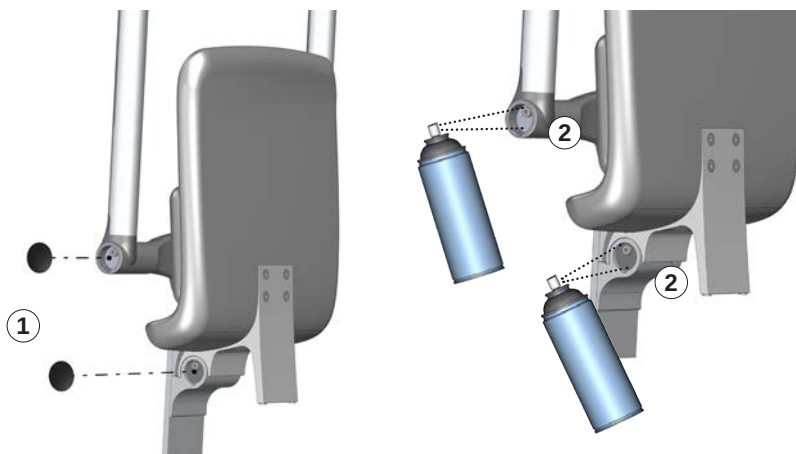

Bruk en skrutrekker til å fjerne dekslet ① fra leddene.

Smør leddet ② og de to leddhullene ③.

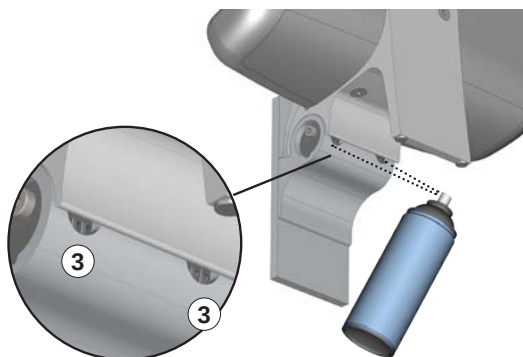

no

Serviceinspeksjon

Kontroller at alle skruer og bolter er strammet til, og sjekk funksjonaliteten til produktet.


Feilsøking

Symptom	Årsak	Tiltak
Produktet kan ikke beveges sidelengs eller opp og ned.	Det kan være smuss eller støv på veggskinnene.	Rengjør veggskinnene og smør med silikon.
Låsehåndtaket for horisontal justering låser ikke.	Låsen er ikke riktig justert.	Se monteringsinstruksjonene.


Tekniske data

Maks. last	200 kg
Materialer	Anodisert aluminium Rustfritt stål Polyuretanskum ABS SEBS
Vekt	R7034: 14,73 kg
	R7304: 5,83 kg
	R7334: 16,25 kg
	R7364: 17,09 kg
	R7114: 9,43 kg
	R7115: 8,45 kg
	R7124: 11,59 kg
	R7134: 15,73 kg
	R7404: 7,6 kg
	R7414: 10,45 kg
	R7415: 9,47 kg
	R7125: 10,61 kg
	R7135: 14,75 kg
	R7424: 13,12 kg
	R7425: 12,14 kg
	R7434: 17,26 kg
	R7435: 16,28 kg
	R7454: 15,14 kg
	R7455: 14,16 kg
	R7464: 19,28 kg
	R7465: 18,30 kg


Mål i mm

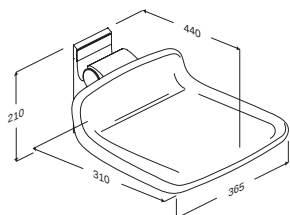


R7304

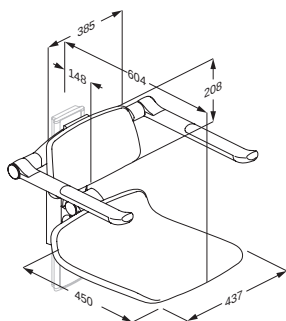


R7034, R7334

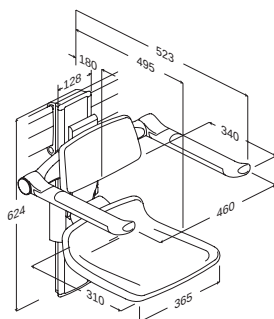


R7364

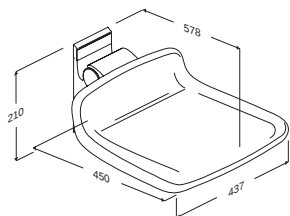


R7404

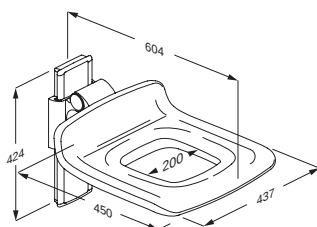


R7114, R7115, R7414, R7415

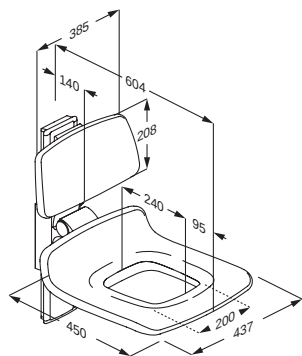


R7124, R7125, R7424, R7425

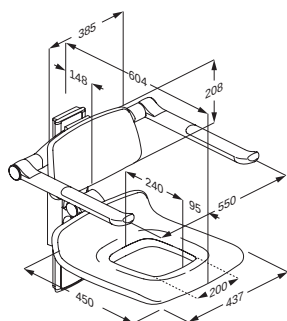

R7134, R7135, R7434, R7435

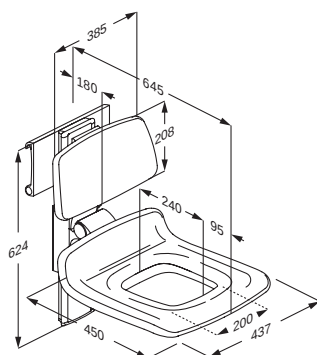

R7454, R7455

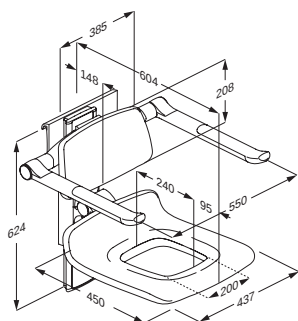

R7464, R7465

Kassering og gjenvinning

Enheten inneholder materiale som kan gjenvinnes. Det er ingen kjente farer eller risikoer forbundet med avhending av produktet. Alle komponenter kan kasseres når de er blitt rengjort og desinfisert.

Når produktet avhendes, anbefaler vi at det demonteres og sorteres i ulike avfallsgrupper for gjenvinning eller forbrenning.

Den følgende tabellen gir informasjon om gjenvinning og håndtering av produktet.

Aluminium	Aluminium er teoretisk sett 100 % gjenvinnbart uten tap av naturlige egenskaper. Dette krever kun 5 % av den energien som forbrukes ved produksjon av primæraluminium. Kvaliteten på gjenvunnet aluminium er så høy at det kan brukes igjen og igjen, selv om det gjelder anodiserte produkter, siden det anodiserte laget er en naturlig del av aluminium.
Stål	Stål kan gjenvinnes ved at det omsmeltes og inkluderes som et sekundærmateriale ved produksjon av nytt stål.
SEBS	Bruk plastsorterings- og -gjenvinningssystemer hvis slike finnes tilgjengelig lokalt. Hvis ikke, kan plasten brennes, noe som genererer ny energi som for eksempel kan brukes ved kombinert varme- og kraftproduksjon.
ABS	Siden nytt ABS er ganske dyrt, er det meget lønnsomt å resirkulere ABS. Resirkulert ABS kan blandes med nytt materiale for å produsere produkter til reduserte kostnader, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.
Polyuretan	I likhet med andre plastmaterialer kan polyuretan gjenvinnes på to måter: mekanisk gjenvinning, der materialet brukes på nytt i sin polymerform, og ved kjemisk gjenvinning, der materialet tilbakeføres til sine ulike kjemiske bestanddeler.

no

Pressalit A/S

Pressalitvej 1

8680 Ry

Denmark

Tel. : +45 8788 8788

Fax : +45 8788 8789

E-mail : pressalit@pressalit.com

www.pressalit.com

Besøk nettstedet vårt for å finne din lokale forhandler og få ytterligere informasjon om Pressalit Care og løsningene våre for bad og kjøkken.



Pressalit Care, Ry, Denmark

