


mobi-click[®]
your safety-kit

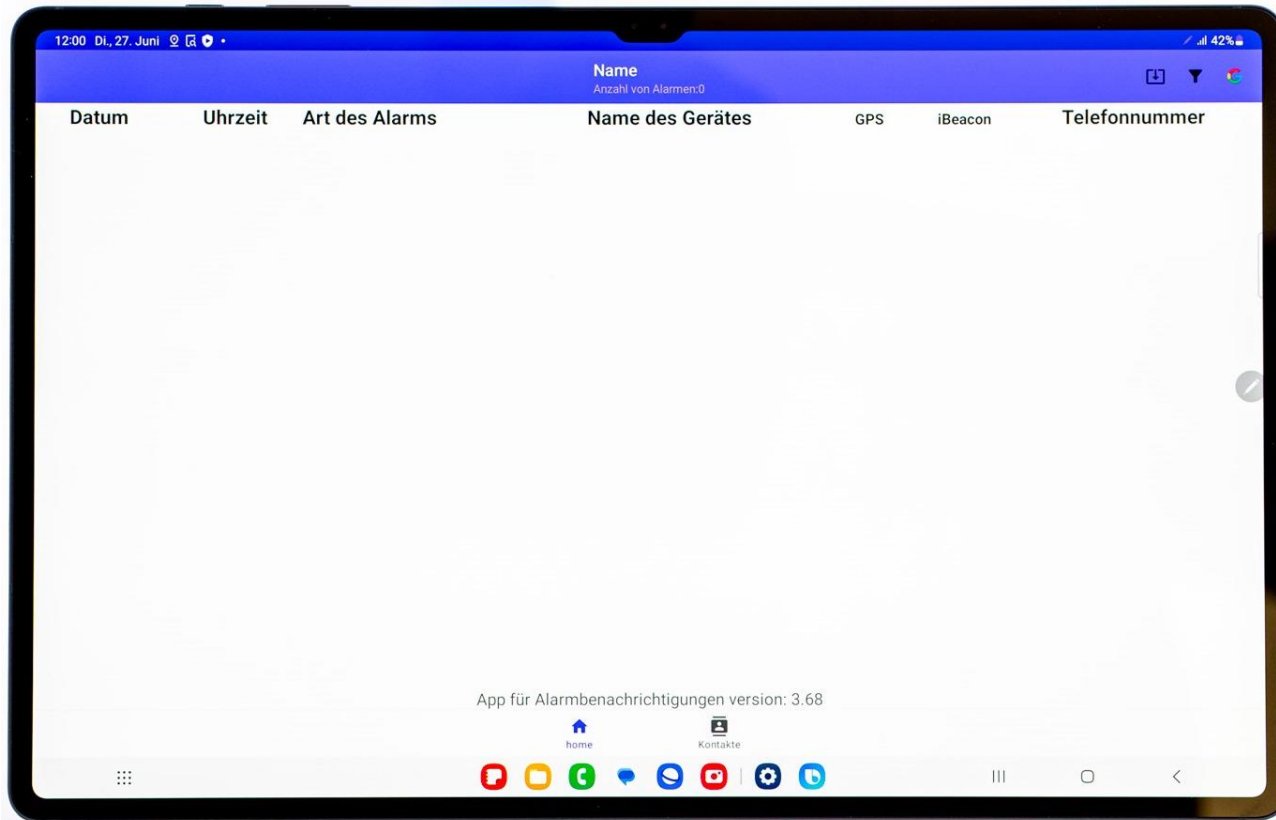

Bedienungsanleitung
**Personen – Notsignal –
Empfangszentrale (PNEZ-S)**

Version 4.42

TAB1

06.06.2025



Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot gewählt haben. Wir wünschen Ihnen eine störungsfreie Nutzung des Gerätes und unserer Applikation.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an:

E-Mail: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis


1. Lierferumfang.....	4
2. Funktionen von Tasten.....	5
3. Bedienung des Gerätes Samsung S8 Tab.....	6
4. Bedienung der App Datenbasis.....	10
5. Update der App.....	16
6. Kontakte speichern.....	18
7. Menu Kontakte.....	21
8. Selbsttest.....	27
9. Alarmer quittieren.....	32
10. LifeTel-Gerätebenachrichtigungen.....	33
11. Änderung der Benachrichtigungen (WLAN).....	36
12. Audio Einstellungen.....	38
13. Master Passwort.....	40
14. Einsatzbereitschaft.....	41
15. Entsorgung.....	41
16. Konformitätserklärung.....	41
17. Technische Daten.....	42

1. Lieferumfang:

- 1. Das Gerät
- 2. Griffel
- 3. USB- Kabel Typ C für Datenübertragung
- 4. Nadel zum Herausnehmen der SIM-Karte



2. Funktionen von Tasten

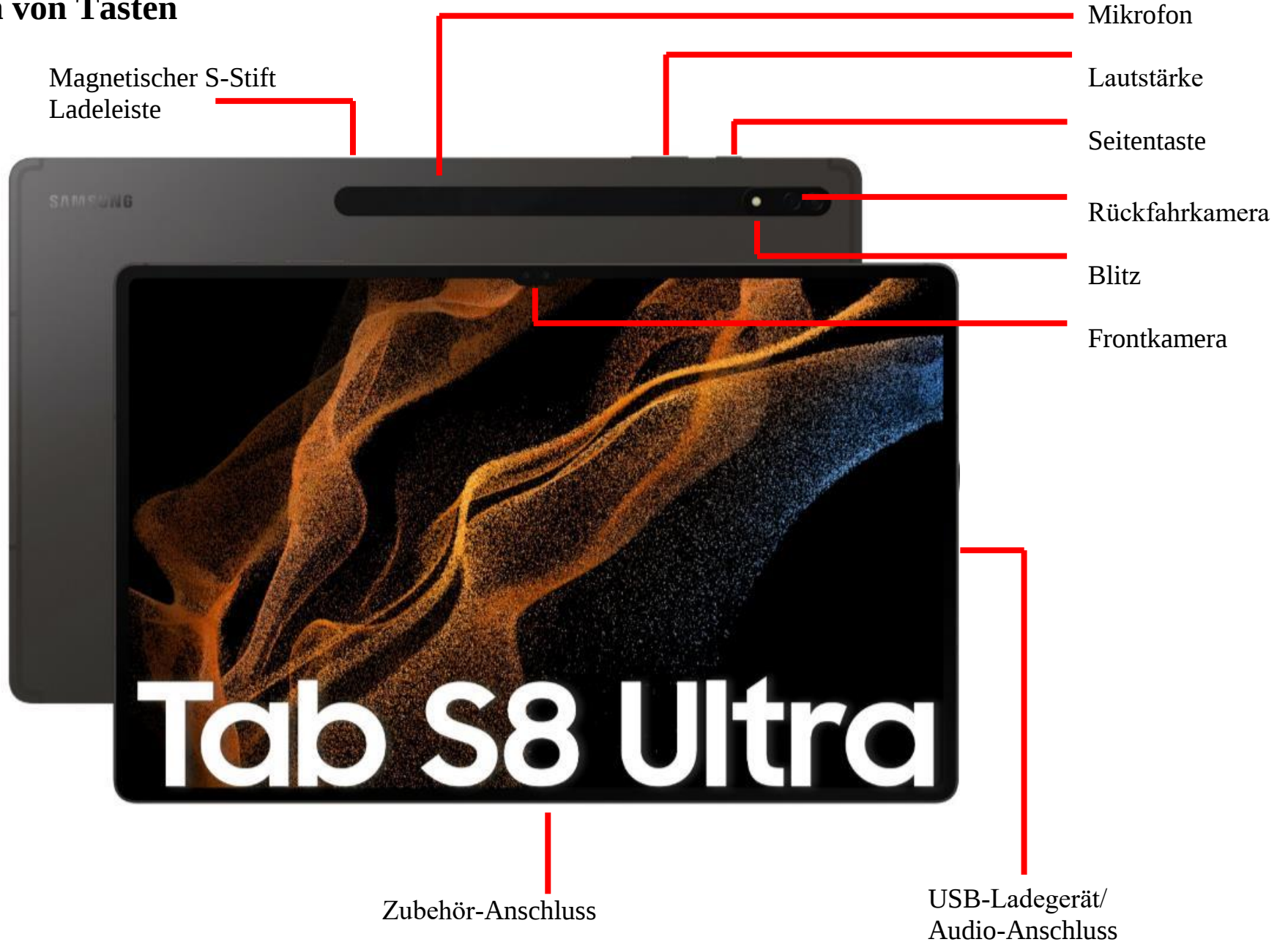

3. Bedienung des Gerätes Tablet Samsung S8 Tab

- **Einschalten des Gerätes:**

Bitte die Seitentaste drücken und gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.

- **Ausschalten des Gerätes:**

Bitte die Seitentaste drücken und gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. Bitte auf Ausschalten tippen und bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- **Sperren / Entsperren des Gerätes**

Verwenden Sie die Bildschirmsperrfunktionen Ihres Gerätes, um Ihr Gerät zu sichern. Standardmäßig wird das Gerät automatisch gesperrt, wenn auf dem Bildschirm eine Zeitüberschreitung auftritt. Weitere Informationen zu Bildschirmsperren finden Sie unter Sperrbildschirm und Sicherheit.

1. Anweisung : Seitentaste - Drücken Sie diese Taste zum Sperren. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm einzuschalten, und wischen Sie dann über den Bildschirm, um ihn zu entsperren.
2. Anweisung – bitte 2 mal auf den Bildschirm tippen, um ihn einzuschalten, und wischen Sie dann über den Bildschirm, um ihn zu entsperren

- **Installation der SIM-Karte**

Man installiert die SIM-Karte in dem Tablett, durch herausziehen des Halters. In dem gleichen Tablett kann man einen zusätzlichen Speicher (micro SD-Karte) installieren.



Bitte die mitgelieferte Nadel nutzen, um den Simkartenhalter herauszuziehen. Drücken Sie die microSD-Karte vorsichtig auf die Vorderseite des Tablets. Legen Sie die SIM-Karte auf der Rückseite des Halters ein.



- **Laden der Batterie**

Ihr Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Ein kompatibles, reversibles USB-Typ-C-Kabel ist im Lieferumfang des Geräts enthalten. Das USB-Typ-C-Kabel kann an einen USB-Typ-C-Reiseadapter, tragbare Ladegeräte,

Smartphones, Laptops, kabelloses Laden und andere Geräte verwenden werden, die USB-C-Anschlüsse sind sowohl zum Aufladen als auch zur Datenübertragung.

TIPP Während des Ladevorgangs können das Gerät und das Ladegerät sehr warm werden und den Ladevorgang einstellen. Dies hat in der Regel keinen Einfluss auf die Lebensdauer oder Leistung des Geräts und liegt im normalen Betriebsbereich des Geräts. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

- **Navigationsleiste**

Sie können auf Ihrem Gerät navigieren, indem Sie entweder die Navigationstasten oder Vollbildanzeigen verwenden. Verwenden Sie Tasten am unteren Bildschirmrand für eine schnelle Navigation.



- **S -Griffel**

Der S –Griffel bietet eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Verwenden Sie Ihren S-Griffel, um Apps zu starten, Notizen zu machen oder ein Bild zu zeichnen. Einige S-Griffel-Funktionen, z. B. das Tippen auf den Touchscreen, funktionieren möglicherweise nicht, wenn sich das Gerät in der Nähe eines Magneten befindet.



Air-Aktionen


Der S -Griffel kann verwendet werden, um Fernbedienungsfunktionen mit der Taste und Bewegungen oder Anzeigen auszuführen. Sie können Verknüpfungen zu Ihren Lieblings-Apps einrichten, auf Bildschirmen auf Ihren Geräten navigieren, Aktionen ausführen und vieles mehr.

Die S-Griffel-Fernbedienungsfunktion wird nur von Samsung-zugelassenen S-Griffel mit Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützt. Wenn sich der S-Griffel zu weit vom Gerät entfernt befindet oder Störungen auftreten, trennt sich der S-Griffel vom Gerät. Der S-Griffel muss angeschlossen sein, damit Air-Aktionen funktionieren.


4. Bedienung der App Datenbasis

Bitte die App aktivieren , indem Sie die Ikone Datenbasis anklicken.


Start

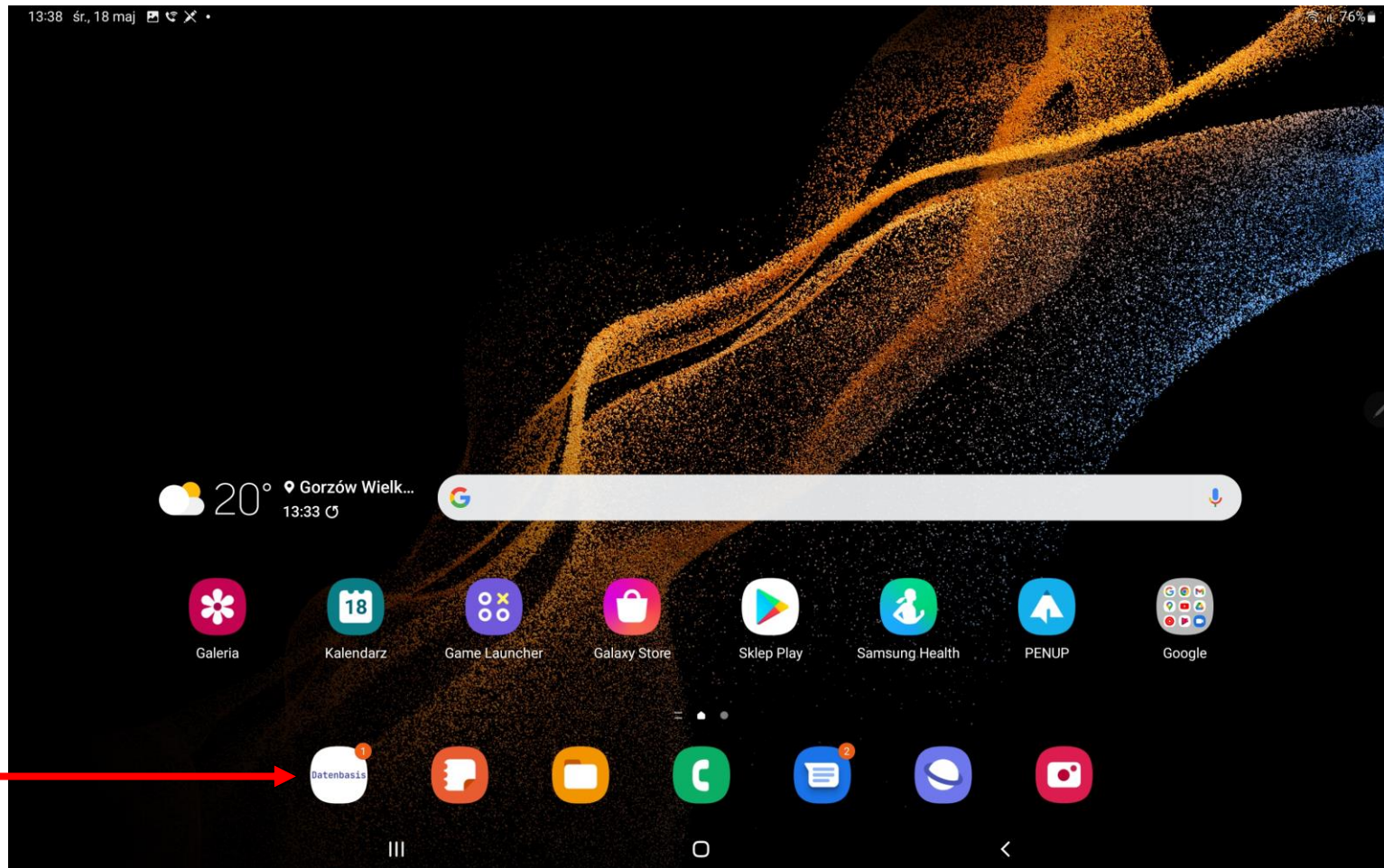


- **Hauptmenü der App**

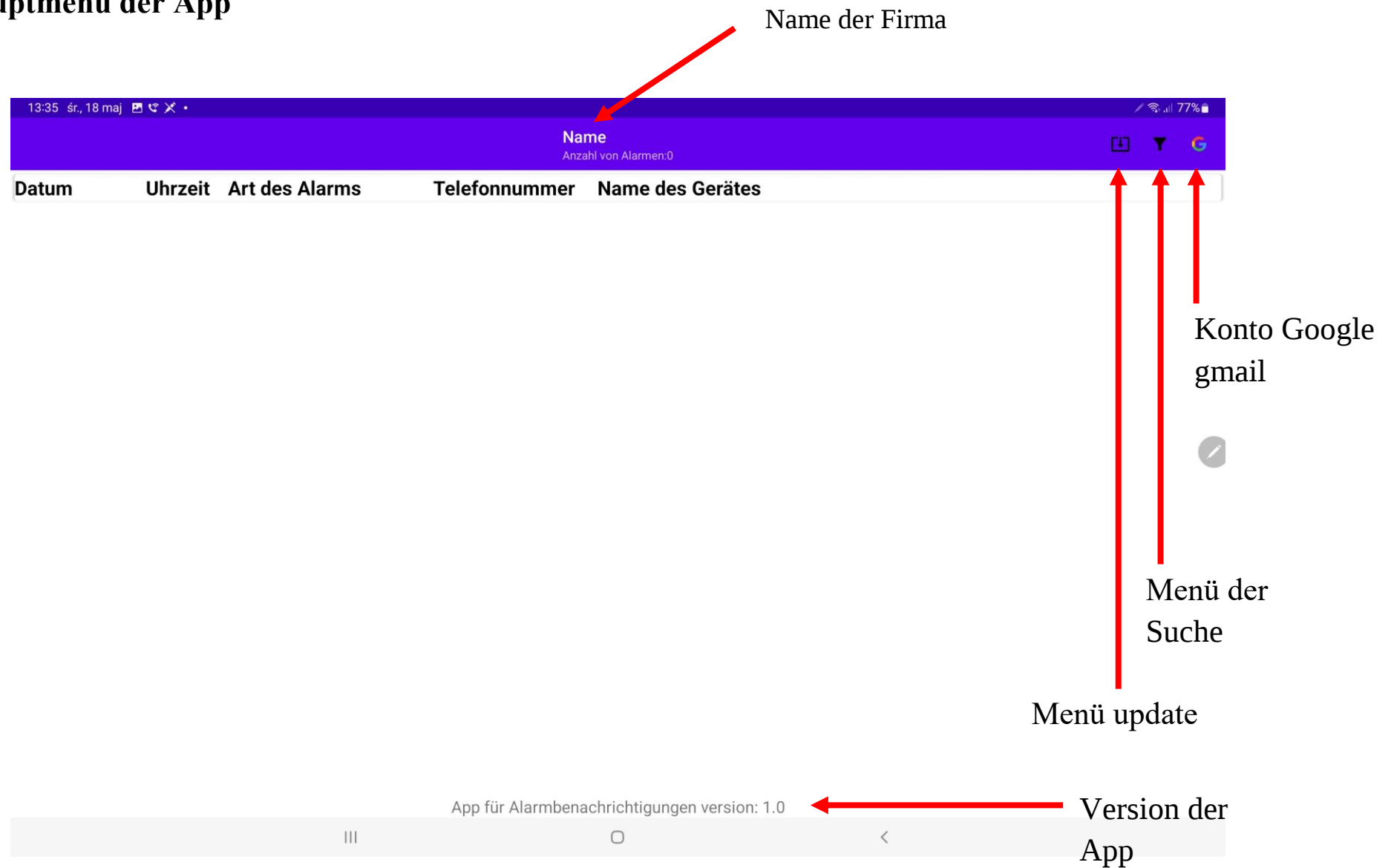

- Beim ersten Start sollten Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden – Google Mail. Wenn Sie kein Google Mail-Konto in Google haben, sollten Sie es einrichten. Sie benötigen ein Google-Konto, um Ihre Alarmdaten zu archivieren und zu speichern. Falls Sie das Gerät zurücksetzen müssen, verlieren Sie keine Daten. Die Daten werden auf einem externen Server gespeichert.
- Wenn Sie schon ein Google-Konto haben, bitte einloggen, indem Sie die Ikone Google in der App Datenbasis in der oberen rechten Ecke anklicken.

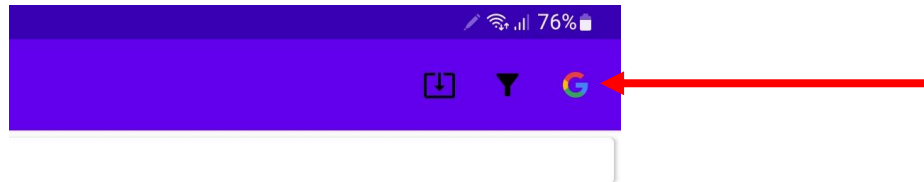

Das entsprechende Menü erscheint – klicken Sie auf das Konto, das Sie eingerichtet haben.

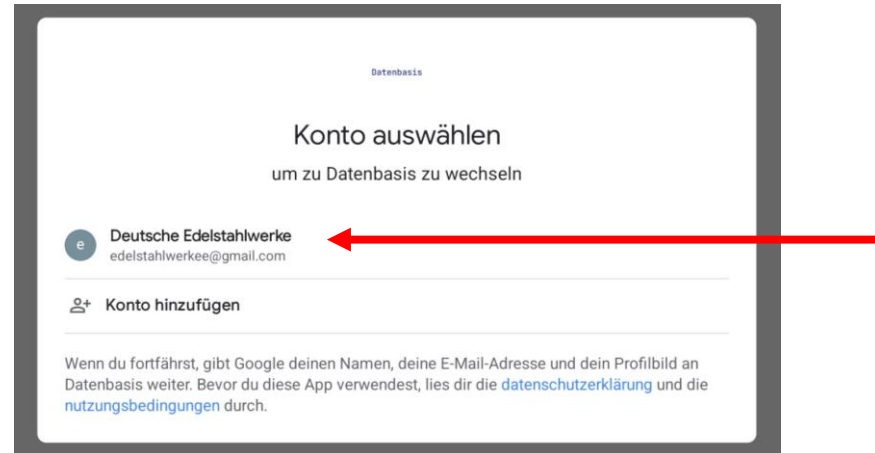

Nach dem richtigen Einloggen sollte die Ikone Google verschwinden.

- **Bedienung der App.**




Die App funktioniert vollautomatisch. Wenn Alarmer von LifeTel-Geräten angezeigt werden, werden die relevanten Daten (z. B. Uhrzeit und Datum des Alarmauftritts, Art des Alarms sowie Name und Nummer des Geräts, von dem sie stammen) im Speicher der App gespeichert.

Name						
Anzahl von Alarmen:9						
Datum	Uhrzeit	Art des Alarms	Telefonnummer		GPS	iBeacon
18.11.22	09:56	RUHEALARM	+48666095733			
31.10.22	09:05	TECH AKKU	+43688871320081			
31.10.22	09:04	LAGEALARM	+43688871320081			
28.10.22	15:13	STURZALARM	+48668022365			
28.10.22	15:12	STURZALARM	+48666095733			
27.10.22	10:47	STURZALARM	+48666095733			
27.10.22	10:46	STURZALARM	+48502244914			
27.10.22	09:47	STURZALARM	+48666095733			
27.10.22	09:29	STURZALARM	+48502244914			
App für Alarbenachrichtigungen version: 2.4						
 home  Kontakte						

Alle neuen Alarme haben die gelbe Farbe der Hintergrundbeleuchtung. Indem Sie auf die Zeile mit einem bestimmten Alarm klicken, bestätigen Sie, dass Sie den Alarm erhalten haben (die gelbe Farbe der Hintergrundbeleuchtung wird dann gelöscht).

• Event-Suche

Sie haben die Möglichkeit, eine erweiterte Suche durchzuführen. Nach einem Klick auf das Suchsymbol öffnet sich ein Fenster:

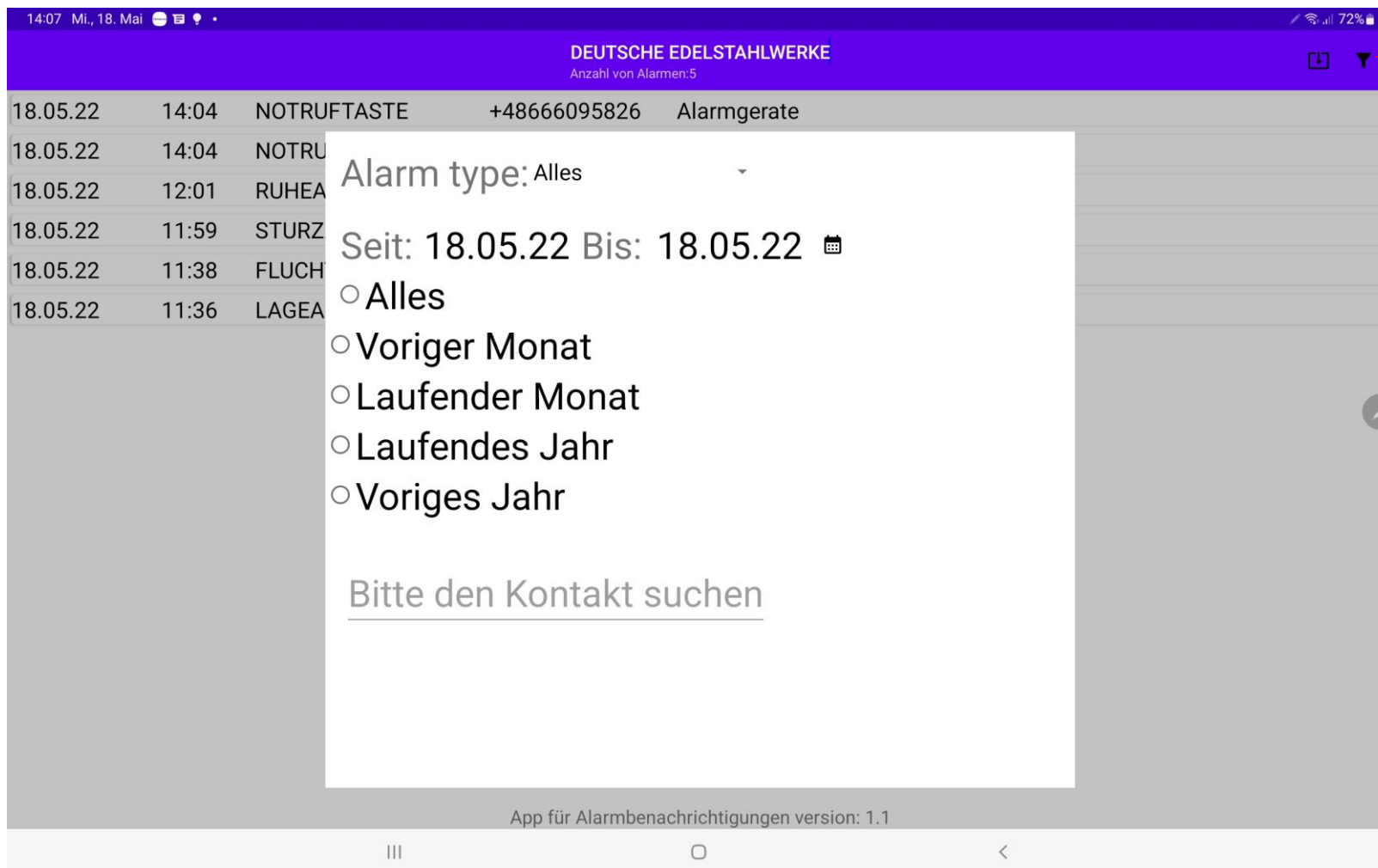

Möglichkeit der Suche von Alarmen:

- nach der Alarmart

Alles
Ruhealarm
Sturzalarm
Zeitalarm
Lagealarm
Fluchalarm
Notruftaste
Technischer Alarm

Nach Datum des Alarmauftritts

Seit: 18.05.22 Bis: 18.05.22 📅


- ☐ Alles
- ☐ Voriger Monat
- ☐ Laufender Monat
- ☐ Laufendes Jahr
- ☐ Voriges Jahr

- nach dem Kontaktnamen

Bitte den Kontakt suchen

5. Update der App

Die Nummer der installierten Softwareversion finden Sie unten auf der Seite der App.

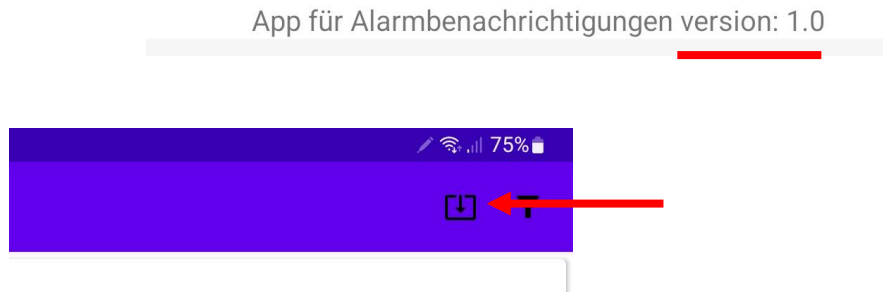

Nach dem Anklicken der Ikone des Updates, wird ein Fenster angezeigt:

Sie haben die aktuelle und gültige Version der App.

HERUNTERLADEN

Sollte das obige Fenster angezeigt werden, bedeutet das, dass Sie die neueste Version der App haben und Sie brauchen sie nicht aktualisieren.

Wenn es jedoch ein Update gibt, erhalten Sie Informationen darüber, was in Bezug auf die Version, die Sie haben, geändert wurde.

1.1 Änderung :
- Verbesserung des Funktionieren der APP.

HERUNTERLADEN

Um zu aktualisieren, bitte das HERUNTERLADEN anklicken, dann bitte die Installationstaste anklicken und bestätigen. Alle in der App gespeicherten Daten gehen nicht verloren.

6. Kontakte speichern

Wichtig.

Im Tablet bitte Telefonnummern in bestimmter Weise speichern (nur diese Telefonnummern, die zu Life Tel-Geräte zugeschrieben sind).

Kontaktaufzeichnungsschema:

XXX_(ABSTAND)**nr** **Name**_(ABSTAND) **#PIN**

Bezeichnungen:

XXX – **APP** - alle Geräte unterstützt durch die APP LifeTel z.B.: LifeTel 5mini / LifeTel 4L

PNA - Geräte LifeTel 1Plus/LifeTel2

PNG - Geräte LifeTel 3 mini

nr - Nummer des Gerätes (Nummern von Geräten sollten sich nicht wiederholen)

Name – Kontaktnamen angezeigt im Tablet

#PIN - wenn Sie den Standard – PIN Code 1513 auf einen anderen PIN geändert haben, dann sollten Sie den aktuellen PIN Code nach dem Zeichen # speichern. Wenn Sie weiterhin den Standard-PIN Code ausnutzen, dann brauchen Sie nichts machen.

Beispiel:

APP1 Johan /das Gerät mit der APP LifeTel, Standard-PIN Code 1513

PNA2 Hans /das Gerät LifeTel2, Standard-PIN Code 1513

PNA3 Karl #1111 /das Gerät LifeTel2, PIN Code 1111

PNG5 Matteo

//das Gerät LifeTel 3 mini, Ohne PIN Code

PNG6 Paul #4321

//das Gerät LifeTel 3 mini, PIN Code 4321

.....

APP95 Oskar #1234

/das Gerät mit der App LifeTel, PIN Code 1234



APP



PNA



PNG

PNA3 Karl



Anruf



SMS



Einrichten



Kontaktdaten




+43 688 871320081
Mobil



Hinzugefügt: 28. Okt. 2022 ((tslelektroniktest@gmail.com))

Bitte Kontakte (Telefonnummern) mit Vorwahl (+43 / + 49) eingeben


7. Menu Kontakte

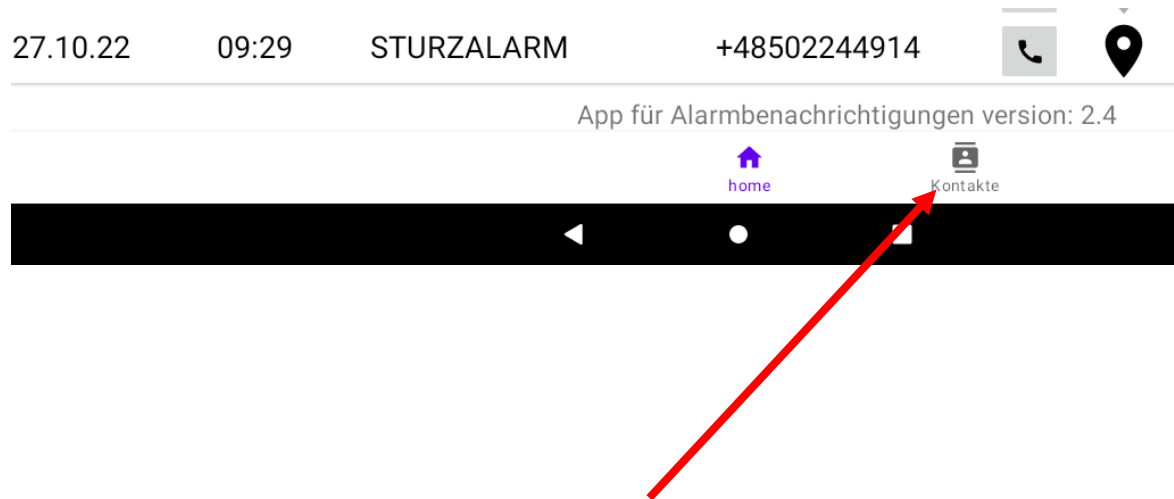

Am unten der App befindet sich die Taste zum Starten des Menüs

Wenn Sie das Kontaktemenü starten, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie alle in Ihren Kontakten gespeicherten Geräte sehen.

Wenn Sie das Kontaktemenü öffnen, sendet die App eine Statusanforderung an alle gespeicherten Geräte. Wenn es eine Antwort vom Gerät erhält, wird sein Status aktualisiert und die Information, dass das Gerät aktiv ist, wird in Form eines grünen Kreises angezeigt. Ein inaktives Gerät wird als roter Kreis angezeigt.

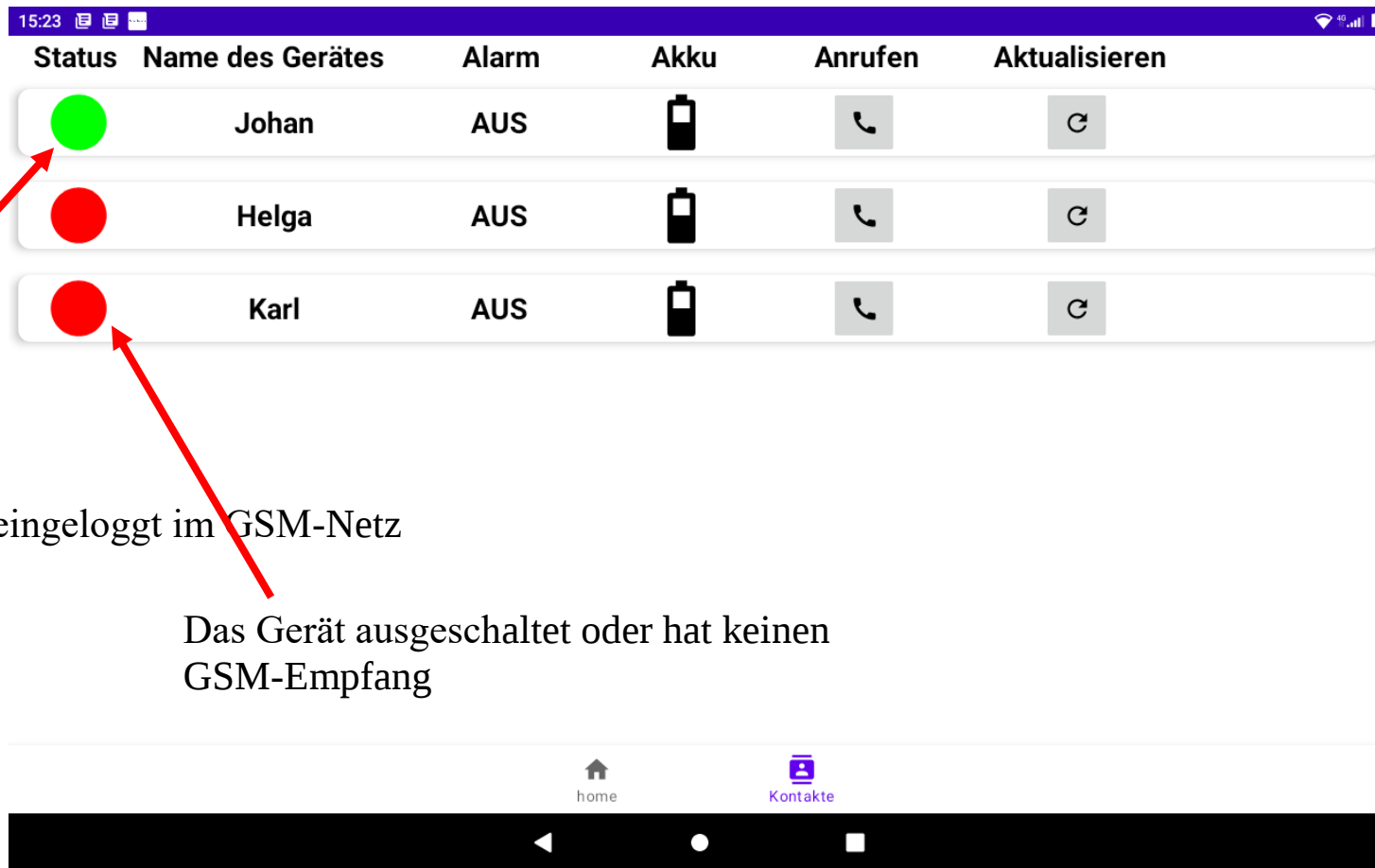

Das Gerät hat sich eingeloggt im GSM-Netz


Das Gerät ausgeschaltet oder hat keinen GSM-Empfang

Wichtig!

Die App speichert den Status des Gerätes nur durch einen bestimmten Tag. Der Status von gespeicherten Geräten wird am Ende des Tages gelöscht.

Beim Starten des Menüs "Kontakte" wird eine SMS mit der Frage nach dem Status an alle gespeicherten Geräte gesendet, dann senden die derzeit aktiven LifeTel-Geräte eine SMS mit dem aktuellen Status an die Tablet-App. Der

Status in der Tablet-App wird aktualisiert. Durch Klicken auf den Benutzernamen können Sie den letzten Status eines bestimmten Geräts an einem bestimmten Tag ansehen (am Ende des Tages wird der Status aus dem Speicher gelöscht).

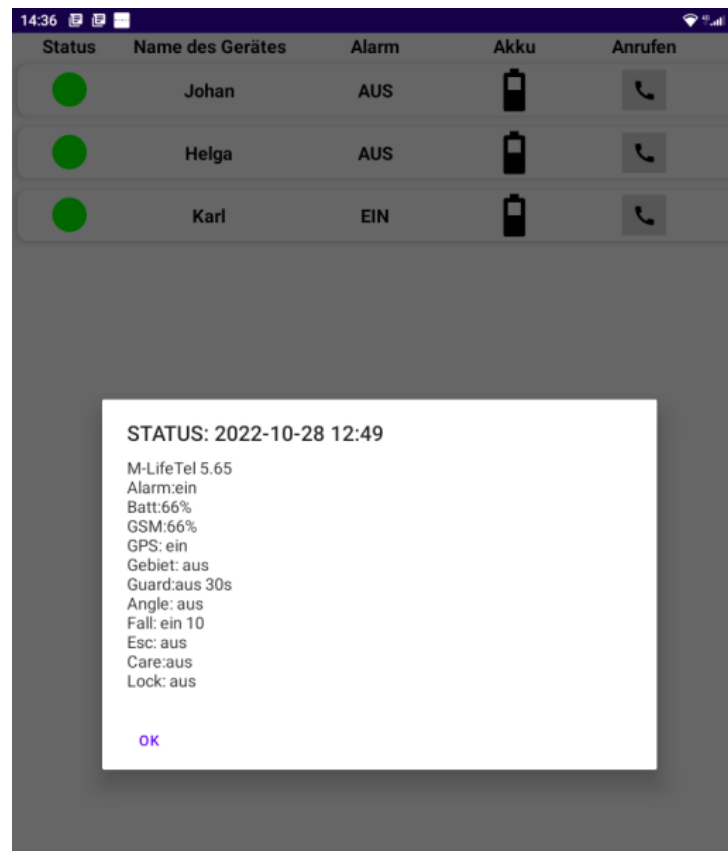


Den Status des Gerätes können Sie aktualisieren, indem Sie auf “Aktualisieren“ bei diesem Gerät anklicken.


Sie können auch eine automatische Aktualisierung vom Gerätestatus wählen.



Wenn Sie auf das Einstellungssymbol klicken, öffnet sich ein Menü, in dem Sie festlegen können, wie der Status eines Geräts aktualisiert werden soll. In diesem Menü können Sie wählen, ob der Status eines Geräts einmalig, nach einem Zeitplan oder nur manuell aktualisiert werden soll.

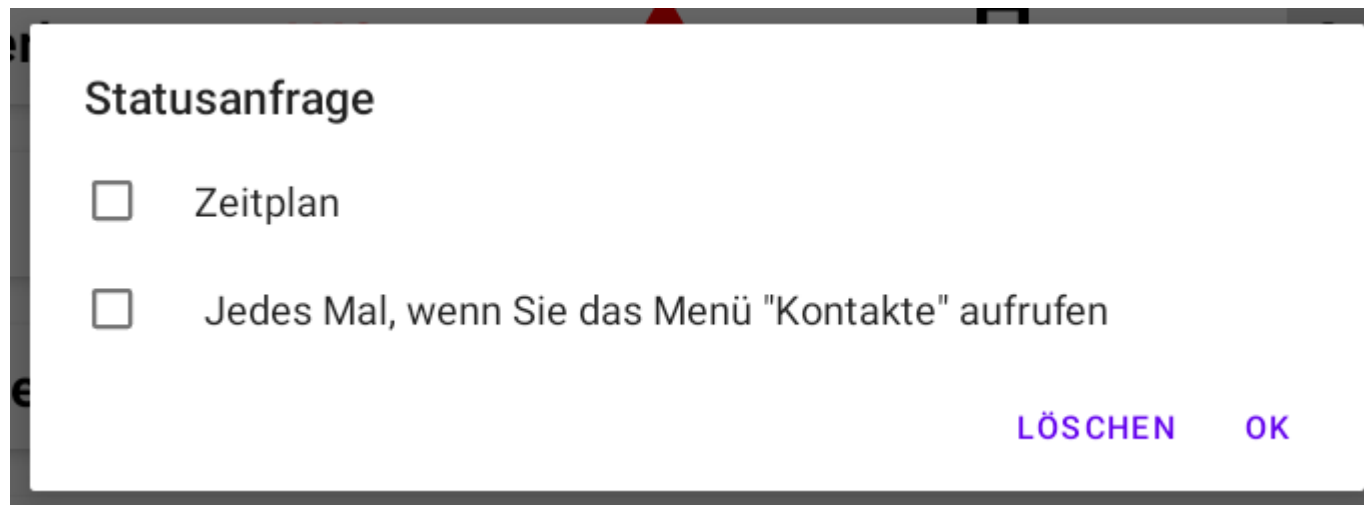

Einstellung für einen Zeitplan. Bitte auf Menü Einstellungen klicken.

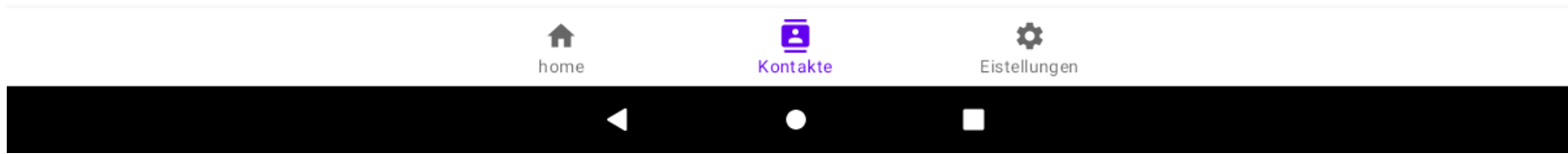

Sie können dann auswählen, an welchen Wochentagen und zu welchen Zeiten der Status der Geräte überprüft werden soll. Bitte legen Sie auch das Intervall fest, in dem die Statusabfrage gesendet werden soll.

STATUSSELBSTTESTWLAN

☒ Mo☒ Di☒ Mi☒ Do

☒ Fr☒ Sa☒ So☒ Alle

START 08:00

STOP 16:00

Intervall

0


015

130

LÖSCHEN

OK

Life Tel-Geräte, die an das Ladegerät angeschlossen wurden, sind mit Symbolen dargestellt.

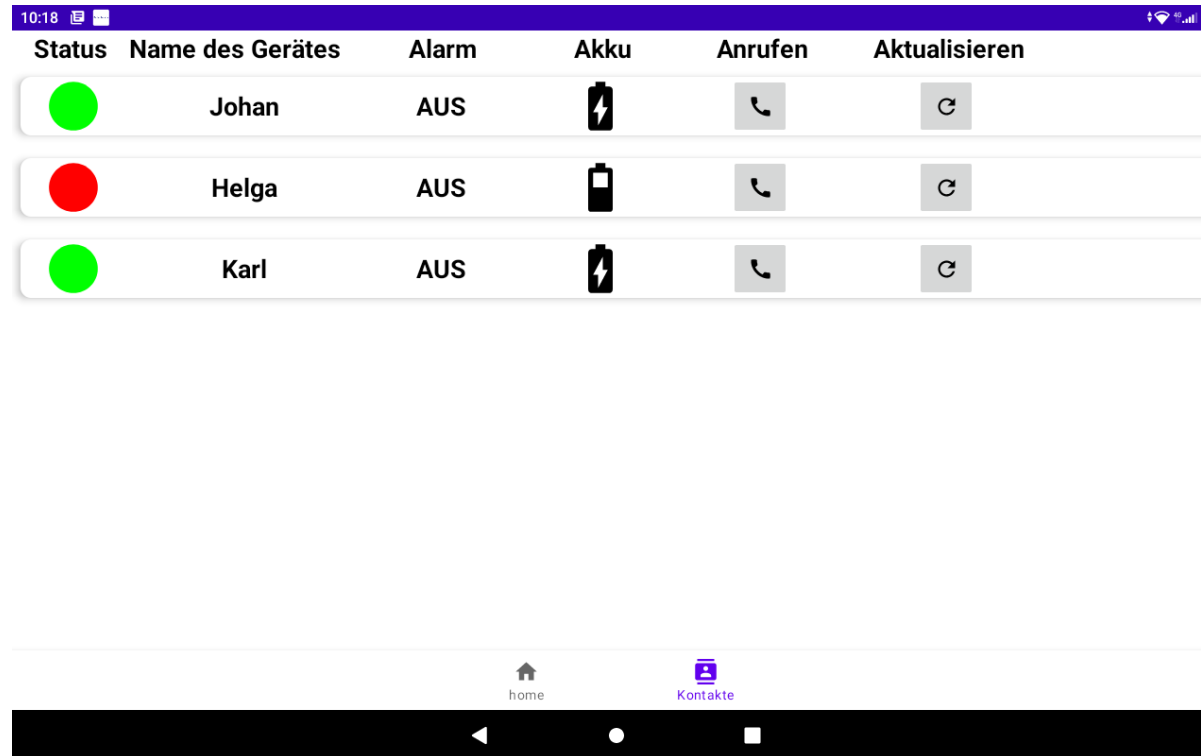

The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar. The status bar at the top shows the time 10:18, signal strength, and battery level. The main content area displays a list of three devices. Each device row has a status indicator (green or red circle), the device name, the alarm status (AUS), a battery icon, a call button, and an update button. The bottom navigation bar has two icons: a home icon and a contacts icon labeled 'Kontakte'.

Status	Name des Gerätes	Alarm	Akku	Anrufen	Aktualisieren
	Johan	AUS			
	Helga	AUS			
	Karl	AUS			

Im Menü Kontakte haben Sie 3 verschiedene Batteriesymbole:

- das Gerät, wenn aktiv ist, wird mit dem Akku betrieben
- das Gerät ist am Ladegerät angeschlossen
- Batteriekapazität unter 20% - erfordert Aufladen.



8. Selbsttest

LifeTel-Geräte verfügen über eine Selbsttest-Funktion. Jedes Mal, wenn Sie das LifeTel-Gerät einschalten, führt das Gerät die Selbststeuerungsfunktion aus:

- GPS-Sensor
- GSM-Empfang
- Batterie
- Bewegungssensor (Beschleunigungssensor)

Nach dem Selbsttest sendet das LifeTel-Gerät eine SMS an Datenbasis der App. Die App prüft die einzelnen Parameter des Selbsttests. Damit die App die Selbsttestparameter genehmigt, müssen die einzelnen Werte wie folgt aussehen:

- GPS-Sensor - muss OK sein
- Bewegungssensor (Beschleunigungssensor) – muss OK sein
- GSM-Empfang darf nicht weniger als 20% betragen
- Die Batterieladung darf nicht weniger als 15% betragen

Wenn die Werte aus der SMS mit der Selbsttestfunktion in diese Parameter fallen, leuchtet das Symbol grün, wenn nicht - das Symbol ist rot. Nach einem Klick auf das Symbol können wir mit der Selbsttestfunktion eine Vorschau des Inhalts der SMS anzeigen und es gibt das Datum und die Uhrzeit der Ausführung.

Status	Name des Gerätes	Alarm	Selbsttest	Akku	Anrufen	Aktualisieren
	Helga	AUS				
	Karl	AUS				

SELBSTTEST: 2022-12-16 11:15

M-LifeTel 5.70b
 Selbsttest
 Batt:100%
 GSM:63%
 GPS: OK
 Sensor: OK

OK

Sie können die Selbsttest-Parameter im Menü Einstellungen einstellen.

Min. Wert von Selbsttest

Parameter	Min. Wert von Selbsttest
AKKU	20%
GSM	15%

LÖSCHEN OK

Wenn sich der Selbsttest innerhalb der eingestellten Parameter befindet (grüne Markierung) – die Anwendung sendet eine SMS, die den Alarm im LifeTel-Gerät aktiviert.

Nach dem Einschalten führt das LifeTel-Gerät den Selbsttest durch. Darüber hinaus können Sie die Selbsttestfunktion auf LifeTel-Geräten über die Tablet-App aufrufen.

Die erste Möglichkeit ist das Berühren und Halten des Selbsttest-Symbols. Es wird eine einmalige Selbsttest-Anforderung an das LifeTel-Gerät gesendet.



Die zweite Option ist eine zyklische Selbsttest-Anfrage. Sie können das Intervall und die Zeiten einstellen, in denen die Anfrage gesendet werden soll.




Nachdem Sie das Intervall und die Zeiten eingestellt haben, müssen Sie diese Funktion aktivieren.



Einschalten des zyklischen Selbsttests. Bitte diese Ikone bei einem konkreten Kontakt anklicken.

Danach bitte Zeitplan abhacken.

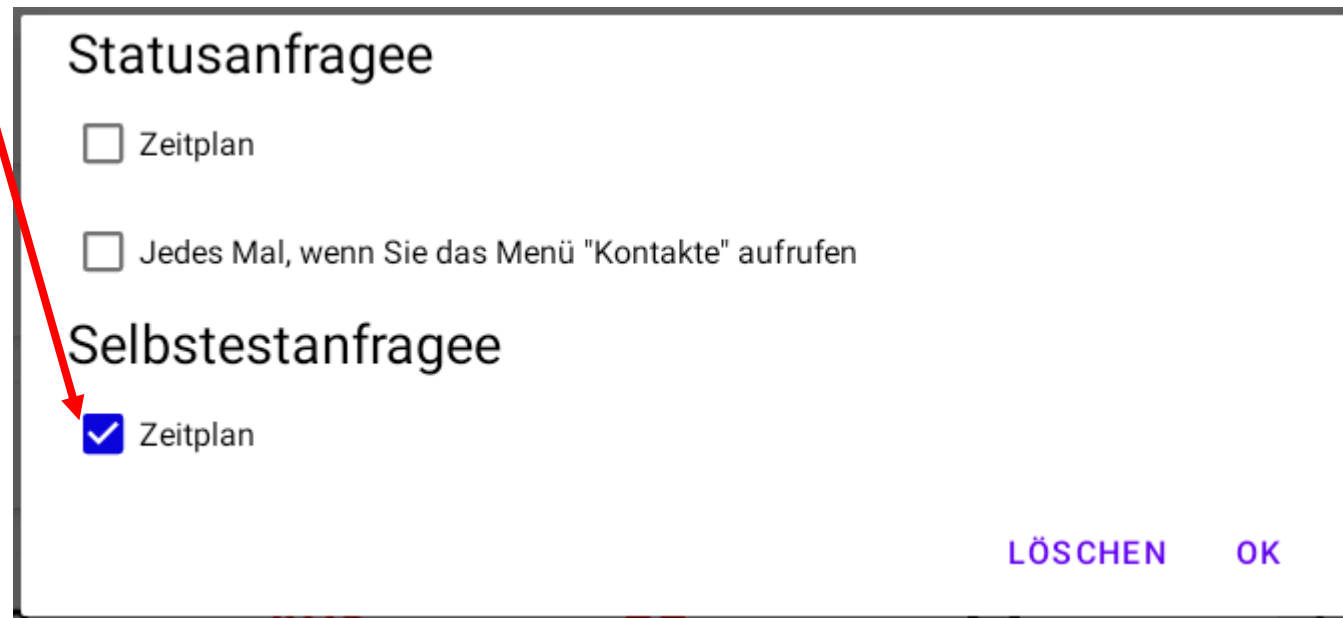

9. Alarmer quittieren

Wenn die Funktion "Deaktivierungssperre des Alarmmodus" eingestellt ist, soll beim Empfang einer SMS-Alarmbenachrichtigung der Empfang der Alarmnachricht durch Anklicken bestätigt werden und damit wird die Möglichkeit der Deaktivierung des Alarms am LifeTel-Gerät freigeschaltet.

Name						
Anzahl von Alarmen:382						
28.04.23	11:50	NOTRUFTASTE		+48502244914		
28.04.23	11:50	NOTRUFTASTE		+48502244914		
28.04.23	11:50	NOTRUFTASTE		+48502244914		
28.04.23	11:50	NOTRUFTASTE		+48502244914		
28.04.23	11:36	NOTRUFTASTE		+48502244914		

Alarmmeldung bestätigt

Alarmmeldung nicht bestätigt

10. LifeTel-Gerätebenachrichtigungen (nur für Smartphone-Geräte mit APP)

- Benachrichtigung über das Ausschalten von LifeTel

Nach dem Einstellen der entsprechenden Option in dem LifeTel-Gerät erhalten Sie in der Zentrale-Anwendung jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn das LifeTel-Gerät ausgeschaltet oder neu gestartet wird.

Die Benachrichtigung wird im "Kontaktmenü" angezeigt. Der Gerätestatuspunkt blinkt abwechselnd grün und rot und das Abschaltsymbol wird angezeigt. Außerdem wird ein spezieller Ton abgegeben. Um den Ton zu deaktivieren, berühren Sie den blinkenden Punkt.



Status	Name des Gerätes	Alarm	Selbsttest	Akku	Anrufen	Aktualisieren
	Testgerät					 
	Peter	AUS				 
	Matteo	AUS				 
	Sophia	AUS				 
	Otto	AUS				 

Status	Name des Gerätes	Alarm	Selbsttest	Akku	Anrufen	Aktualisieren
	Testgerät					 
	Peter	AUS				 

- **Benachrichtigung über eine fehlende oder beschädigte SIM-Karte im LifeTel-Gerät**

Wenn die entsprechende Option im LifeTel-Gerät eingestellt ist und die SIM-Karte fehlt oder beschädigt ist, werden Benachrichtigungen an die Zentrale gesendet.

Wichtig.

- Damit die Benachrichtigungen die Zentrale erreichen, müssen sowohl das LifeTel-Gerät als auch die Zentrale über WLAN-Abdeckung verfügen.
- Das LifeTel-Gerät sollte aktiv sein, d. h. in der Zentrale eingeloggt sein (in der App sollte neben dem Gerät ein grüner Punkt zu sehen sein).

Die Benachrichtigung wird im "Kontakte-Menü" angezeigt. Der Gerätestatuspunkt blinkt abwechselnd grün und rot und das Symbol für eine fehlende SIM-Karte wird angezeigt. Außerdem wird ein spezieller Ton abgegeben. Um den Ton zu deaktivieren, berühren Sie den blinkenden Punkt.

10:24   4G 

Status	Name des Gerätes	Alarm	Selbsttest	Akku	Anrufen	Aktualisieren	
 	Testgerät						
	Peter	AUS					
	Matteo	AUS					
	Sophia	AUS					
	Otto	AUS					

10:24   4G 


Status	Name des Gerätes	Alarm	Selbsttest	Akku	Anrufen	Aktualisieren	
	Testgerät						
	Peter	AUS					

11. Änderung der Benachrichtigungen (WLAN)


Die Zentrale mit der Anwendung Datenbasis bietet die Möglichkeit, die per SMS gesendeten Nachrichten auf die per WLAN gesendeten umzustellen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die WLAN-Kommunikation nur mit Geräten funktioniert, die die LifeTel-App auf Smartphones haben, z. B. LifeTel 4L/5mini/4LEX2/5LEX/6L/7L. Die WLAN-Kommunikation funktioniert nicht mit LifeTel 1Plus(M)/2(M)-Geräten.

Vorab verbinden Sie sich bitte mit dem vorhandenen WLAN-Netz.

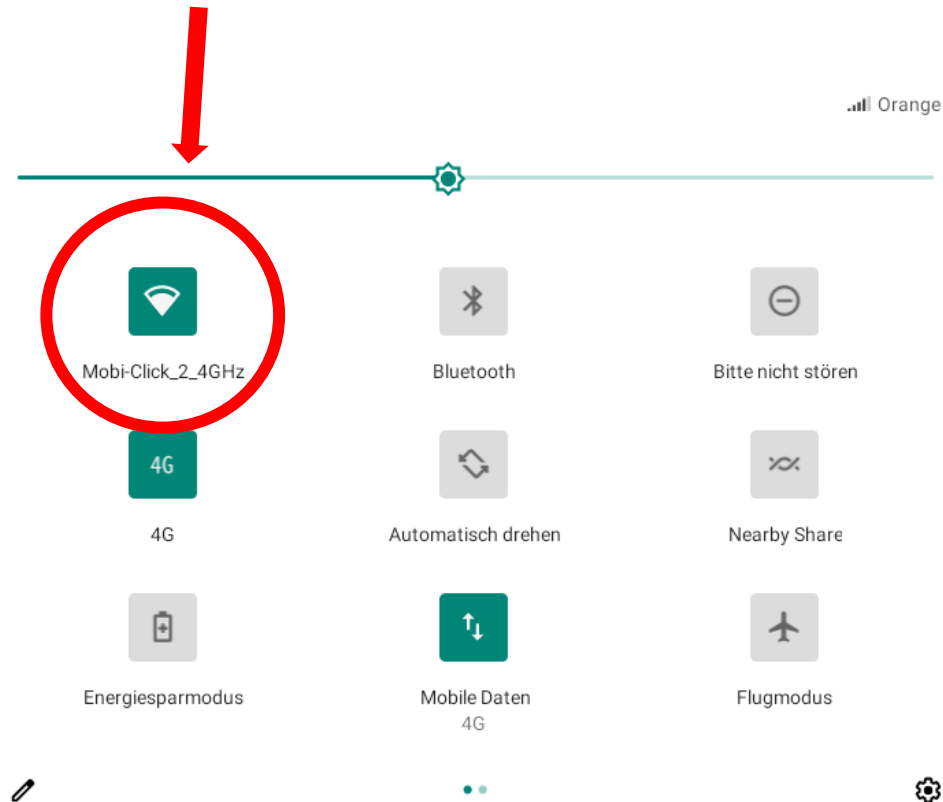

Die Funktion der Benachrichtigungen durch WLAN bitte im Menü Einstellungen unter Kontakte aktivieren.

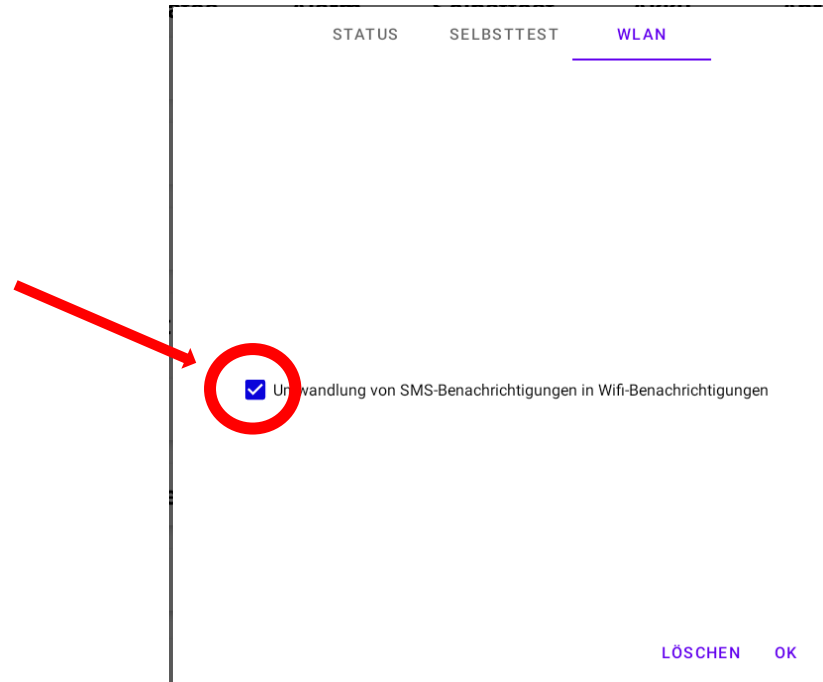

Bitte nicht vergessen, sich auch bei Lifetel-Geräten mit dem WLAN zu verbinden und bei LifeTel-Geräten die WLAN-Benachrichtigung zu aktivieren (wählen Sie entsprechend im Menü der Zentrale auf dem LifeTel-Gerät).

Danach bitte die Zentrale und das Life Tel – Gerät restarten. Die Kommunikation wird durch WLAN –Netz stattfinden. Verliert das Gerät das WLAN-Netz, dann wird die Kommunikation per SMS wiederhergestellt. Nur jedes Mal, wenn das LifeTel-Gerät ausgeschaltet wird, wird eine SMS-Nachricht gesendet.

12. Audio Einstellungen

In diesem Menü können wir verschiedene Töne für Alarime und andere Benachrichtigungen auswählen und festlegen, dass jeder Alarm bestätigt werden muss.

The screenshot shows the 'AUDIO' settings menu. At the top, there are tabs: STATUS, SELBSTTEST, WLAN, and AUDIO (highlighted in purple). Below the tabs is a purple button labeled 'PASSWORT'. The main settings area includes:

- A volume slider for 'Lautstärke von Benachrichtigungen' set to 2%.
- A dropdown menu for 'Auswahl des Benachrichtigungstons' currently set to 'Ton 2'. A red arrow points to this dropdown.
- A volume slider for 'Alarmlautstärke' set to 42%.
- A dropdown menu for 'Auswahl des Alarmtons' currently set to 'Ton 4'. A red arrow points to this dropdown.
- Two checked checkboxes:
 - ☒ Ausschalten des Tons nach der Bestätigung des Alarms
 - ☒ Ausschalten des Alarmblinken nach der Bestätigung des Alarms

At the bottom right are two buttons: 'LÖSCHEN' and 'OK'. To the right of the main menu, there are two vertical lists of tone options, each with 'Ton 1', 'Ton 2', 'Ton 3', and 'Ton 4'.

Wir können diese Menüs mit einem Passwort schützen. Wenn wir das eingestellte Passwort vergessen, geben Sie beliebige Buchstaben ein und es erscheint die Möglichkeit, das Passwort durch Eingabe des Master-Passworts zurückzusetzen.

passwort

passwort wiederholen

OK

Erstellen eines neuen Passworts

qwert

ICH HABE MEIN PASSWORT VERGESSEN

LÖSCHEN OK

Falsches Passwort

QR


70e692cd71b80491

Master passwort

OK

13. Master Passwort

Wenn Sie das Gerät (Tablet) zurücksetzen oder die App deinstallieren und die Datenbasis-App neu installieren müssen, werden Sie nach dem Master-Passwort gefragt. Das Master-Passwort ist dem Gerät beigelegt.

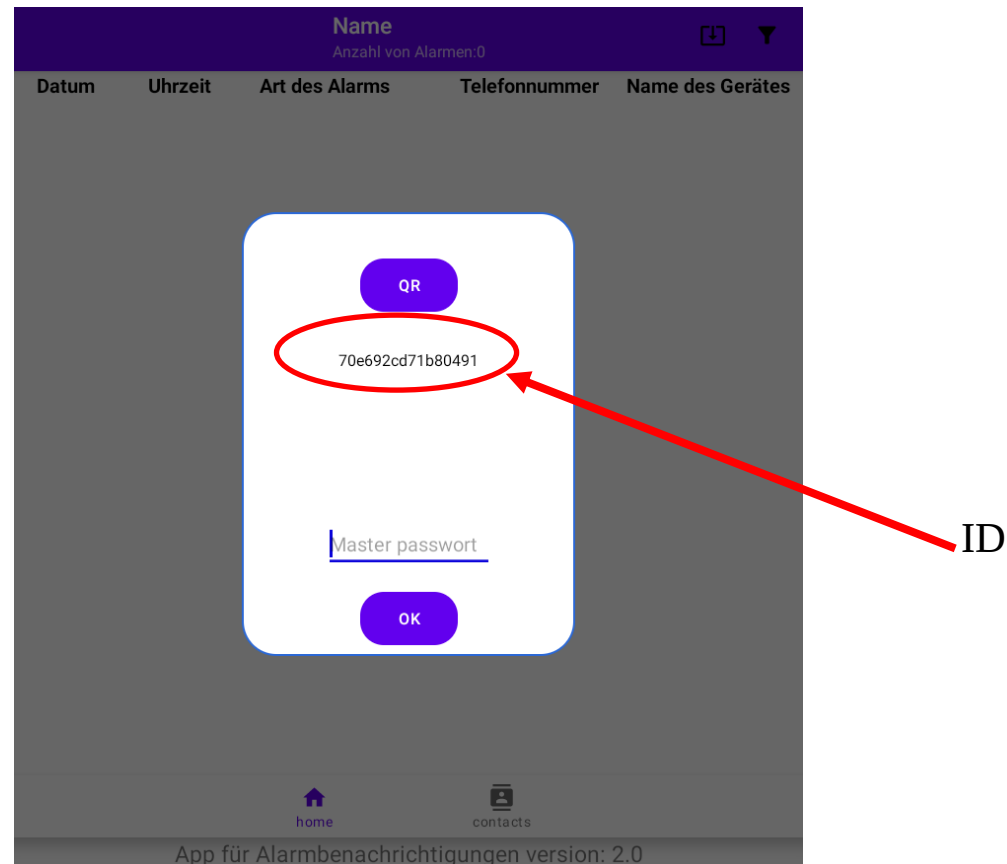

Wenn die App einen Passwortfehler meldet, senden Sie uns bitte die ID-Nummer (an die E-Mail-info@mobi-click.com) – dann generieren wir ein neues Passwort.

14. Einsatzbereitschaft

Wenn Sie alle vorherigen Schritte durchgeführt haben, ist Ihr Gerät konfiguriert und einsatzfähig.

15. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

16. Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, mobi - click Sp. z o.o., ul. Okólna 31, PL- 66-400 Gorzów Wlkp., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie RED 2014/53/EU befindet.

Wir, **MOBI- CLICK GmbH, Karl-Liebke-Str. 60, 15230 Frankfurt(Oder)**, erklären voll verantwortlich das Produkt: Tablet mit der App Datenbasis (geeignet für GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 2G; 850/900/2100 MHz 4G; 700 Mhz 5G), auf das diese Erklärung bezieht, den folgenden grundlegenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Union RED 2014/53/EU: Artikel 3.1 (a), 3.1(b) und 3.2. entspricht.

17. Technische Daten

- **Bildschirm**
Größe 14.6 “
Typ S-AMOLED
Touchscreen, Multi-Touch
Bildauflösung 1848 x 2960 pixel
Bildschirmschutz, vorhanden
- **Hardware**
Chipset, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 <4 nm>
OS Android 12, One UI 4.1
RAM, 8/12/16 GB
Datenspeicher 128/256/512 GB
MicroSD, ja
- **Kamera**
Hauptkamera, 13MP + 6MP
Eigenschaften, Panorama, HDR, LED flash
Frontkamera, 12MP + 12MP , plus HDR
- **Anschlussmöglichkeiten**
Bluetooth, 5.2, A2DP
Wi-Fi,
GPS,
USB, Type-C 2.0
- **Netz**
Netz, 2G, 3G, 4G, 5G
- **Batterie**
Li-Po 11200 mAh
schnelles Laden 45W