




EXOCAD CETVEL VE ÖRGÜ GÖRÜNTÜSÜNÜ AÇMA

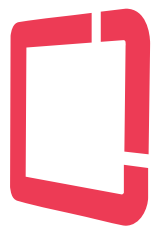

redon
the dental **experience**




EXOCAD CETVEL VE ÖRGÜ GÖRÜNTÜSÜNÜ AÇMA




Tasarım yaparken daha simetrik ve hizalı çalışabilmek ve ölçüm yapmak için ekranınıza cetvel ve örgü görünümünü ekleyebilirsiniz. Cetvel, ölçüleri doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olurken, örgü görünümü tasarımınızın konumunu ve hizasını daha kolay kontrol etmenizi sağlar.



1- Cetveli Göster:

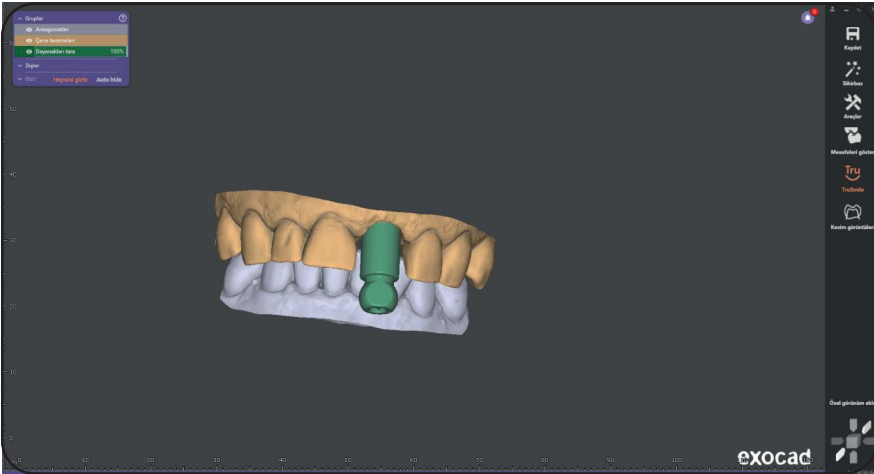

2- Cetvel görüntüsünü açmak için:

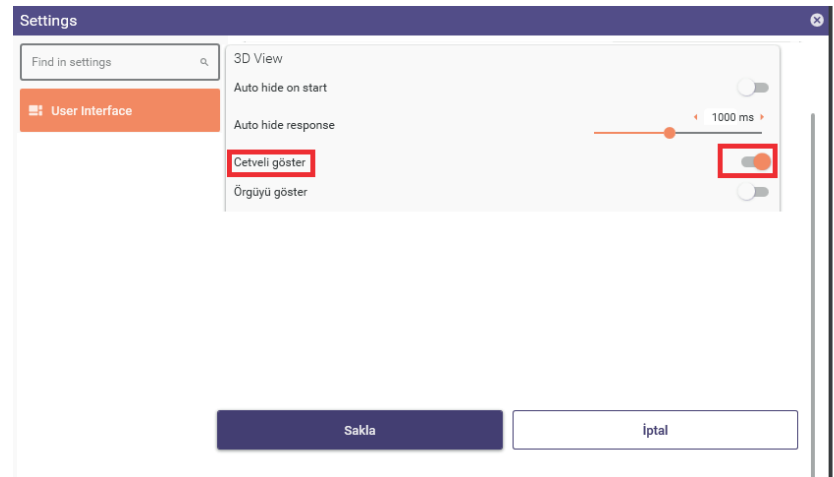

Ekranın alt ve sol tarafında ölçüm çizgileri çıkar, bu çizgiler model hizalaması için görsel destek sağlar.



Ayarlar menüsünü açın.



b. Kullanıcı Arayüzü> 3D Görünüm sekmesine gelin.




c. "Cetveli Göster" seçeneğini aktif hale getirin.




d. Değişiklikleri kaydetmek için Sakla butonuna basın.



3- Örgüyü Göster:

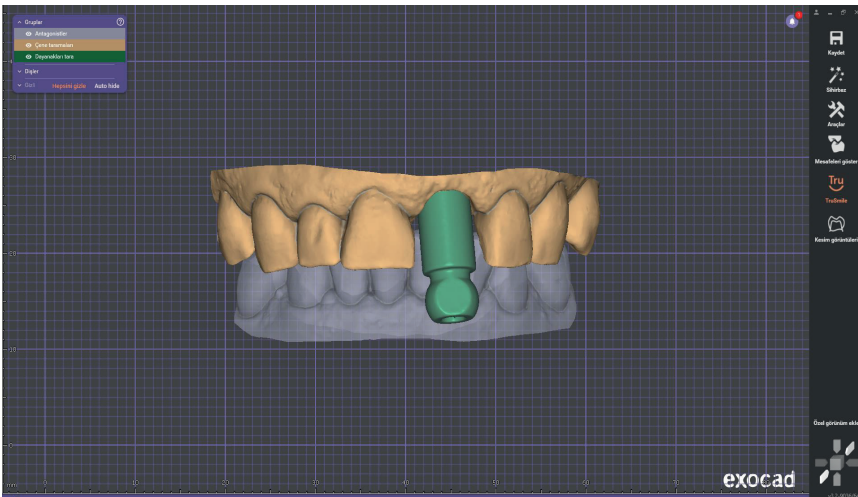

4- Örgü görüntüsünü açmak için:

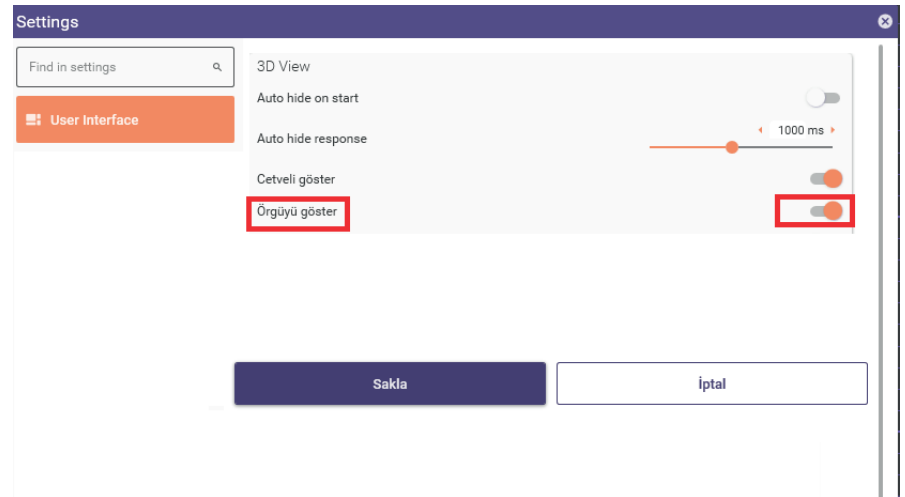

Arka planda örgü çizgileri aktif hale getirilir, böylece modelin hizalanması ve orantılı bir şekilde tasarlanması sağlanır.



Ayarlar menüsünü açın.



b. Kullanıcı Arayüzü> 3D Görünüm sekmesine gelin.



c. "Örgüyü Göster" seçeneğini aktif hale getirin.



d. Değişiklikleri kaydetmek için Sakla butonuna basın



Not: Bu görünümüler tasarıma etki etmez, sadece ekranda kolay hizalama ve ölçüm desteği sağlar.