


WORKNC DENTAL İMPLANT KÜTÜPHANESİ TANIMLAMA





WORKNC DENTAL İMPLANT KÜTÜPHANESİ TANIMLAMA

1)

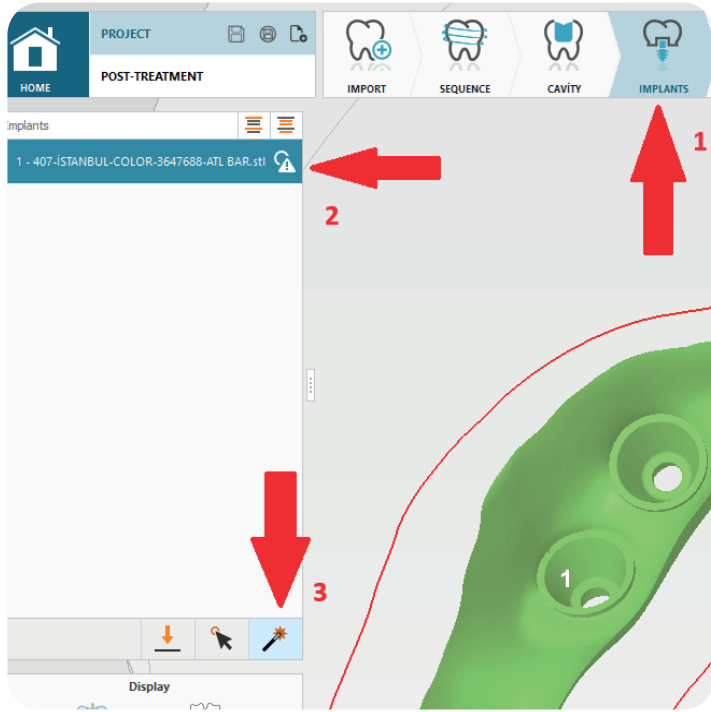


İmplant sekmesine gelinir, işlem yapılacak iş seçilir ve “Automatic Implant Detection” butonuna basılır.

2)




İmplant referansları bulunur ve uygun kütüphane otomatik yerleşir. Otomatik bulamadığı zaman Automatic Unknown yazısını görürsünüz. Bu durumda bulunan referansların hepsi shift+sol mause tuşu ile seçilerek ve “Edit selected Implant Reference” butonuna basarak manual olarak implantı kütüphane listemizden seçmemiz gerekir.

3)

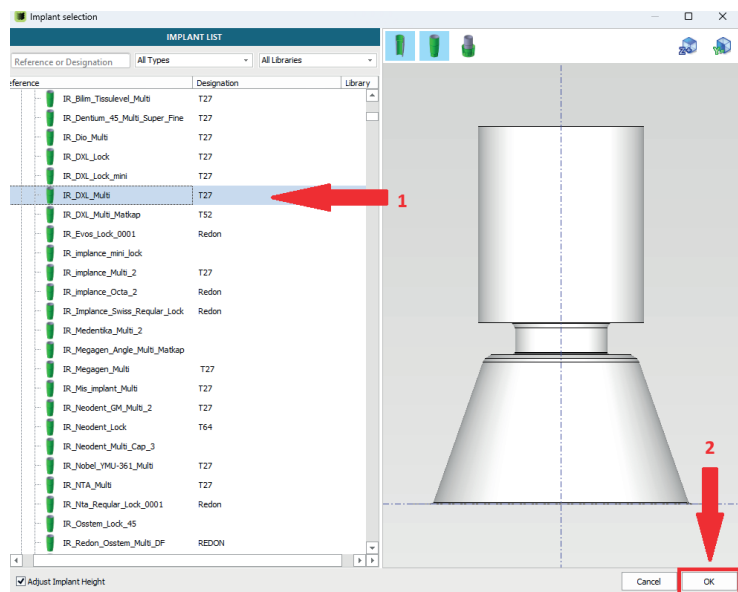

Açılan kütüphane listesinde markaya ait uygun kütüphane sol mause tuşu ile seçilir. Sonra “OK” butonuna basılır.

4)

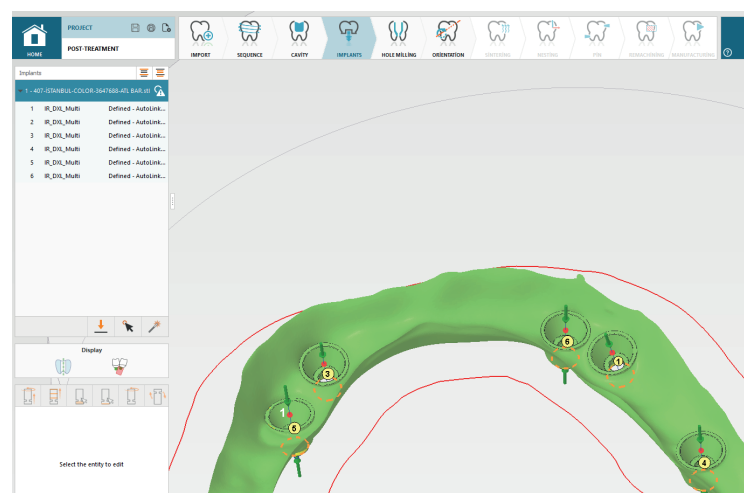

Böylece implant kütüphanelerimiz delik merkezlerine otomatik tanımlanmış olacaktır.