

HYPERDENT BACKUP YÜKLEMESİ







Hyperdent Kurulum

B&R otomasyon sistemine sahip cihazınızın ekranını bilgisayarınızda görüntülemek için VNC Viewer uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.

- 1-) Usb içerisinde gönderilen 'hyperDENTCPDB' klasörünü C:\Users\Public\Documents içerisine aktarılır.
- 2-) Usb içerisinde gönderilen Redon Postprocessor dosyasını C:\Users\Public\Documents\OPEN MIND\ Postprocessor klasörünün içerisine aktarılır.
- 3-) Aktarımlar tamamlandıktan sonra hyperdent programı açılır ve tanımlamalar yapılır.

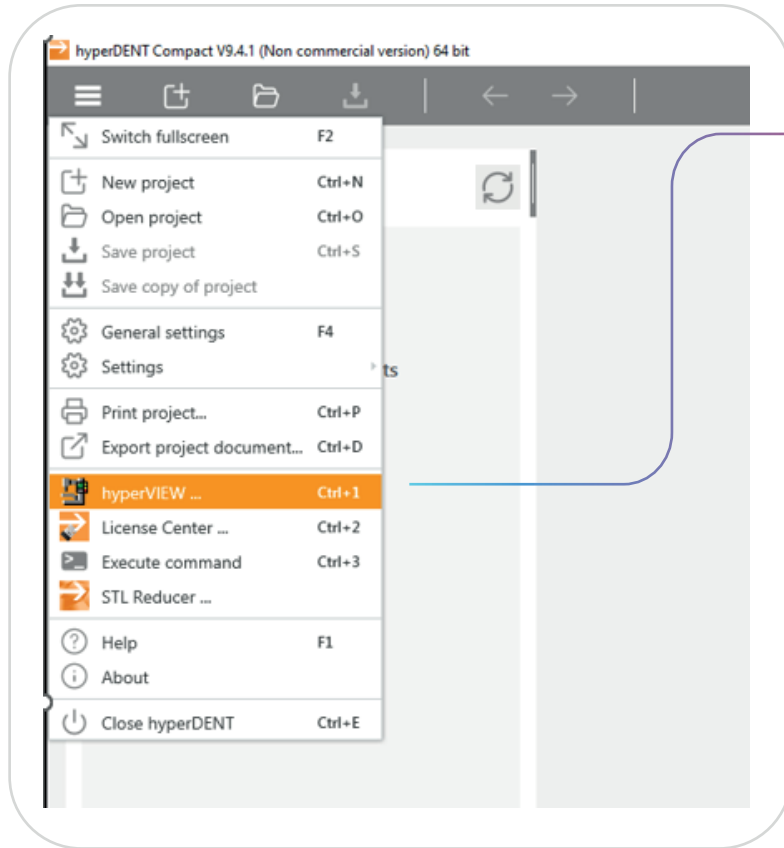


Açıldıktan sonra 3 noktaya tıklanır ve **hyperVIEW** ekranı açılır.

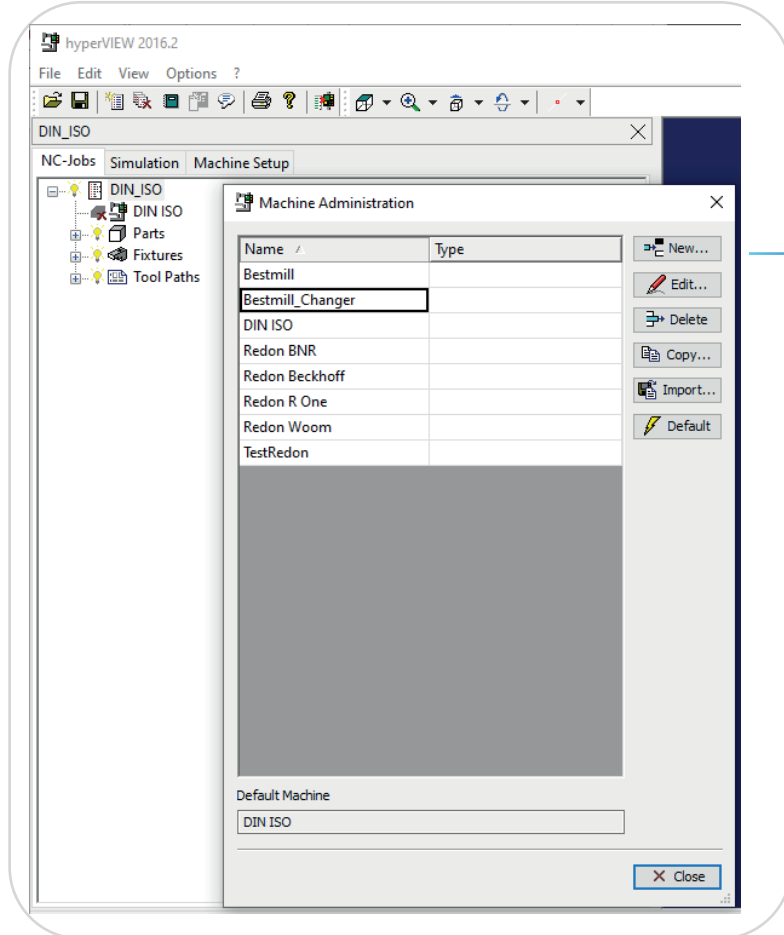


Açılan bu sayfada makine Postprocessor tanımlamaları yapılmaktadır. Yeni oluşturmak için **New** diyerek usb içerisinde gönderilen dosya seçilir ve kaydedilir.



Hyperdent Kurulum

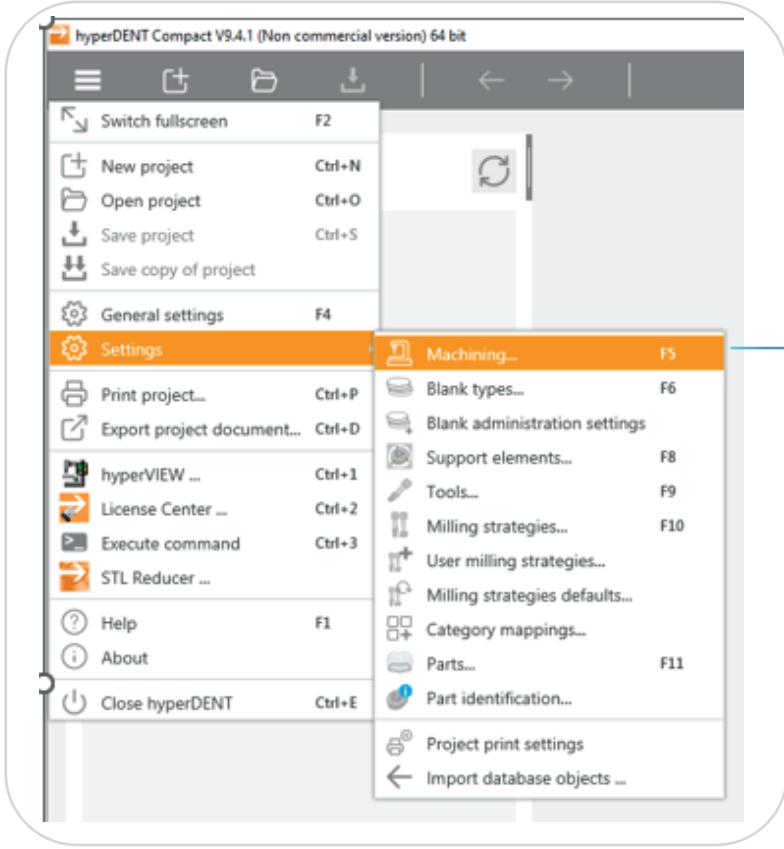

Daha sonra Settings – Machining bölümünden Holder tanımlamaları yapılmaktadır. 1 inci sekmeden açılan klasörün içerisinde hepsi olduğu için holderlar ve stratejiler otomatik yüklenecektir.

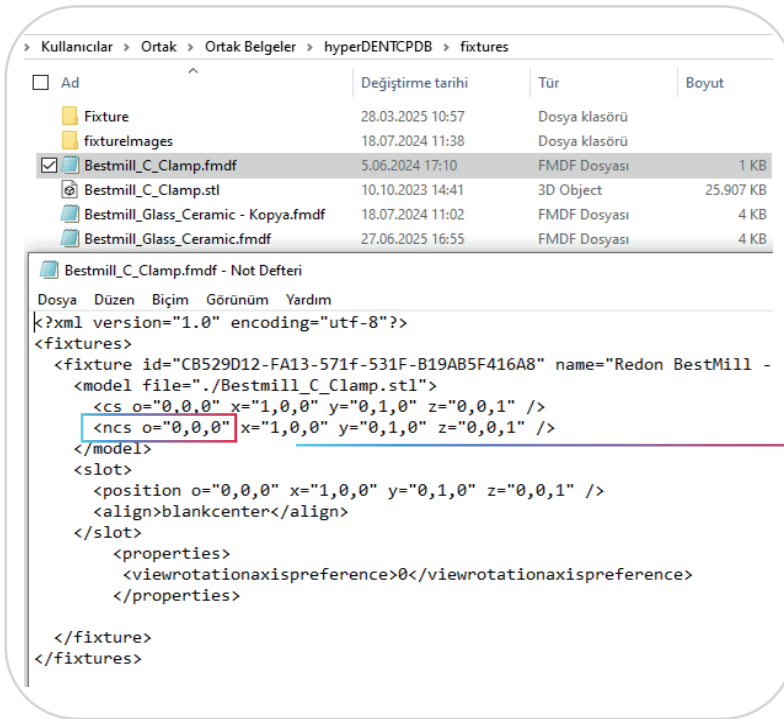

Holder blok merkezlerini girmek için;
C:\Users\Public\Documents\
hyperDENTCPDB\fixtures

Klasörü içinden .fmdf uzantılı dosyaları
açıp işaretlemiş olduğum
bölüme girebilirsiniz.

Blok merkezleri de girildikten sonra program kullanıma hazır hale gelmiştir.