


GTR WORKNC KURLUM





Worknc Dental Installation Stages


1-)

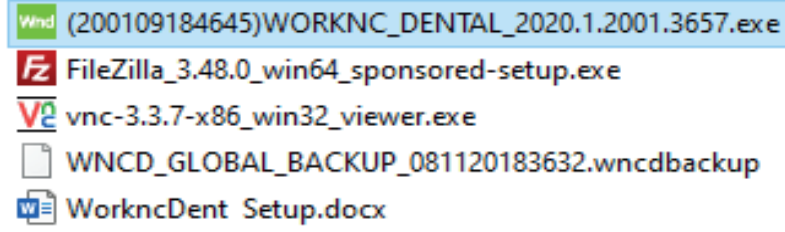

Follow respectively


Çalıştırmak için kurulum dosyasına çift tıklayın ve şu şekilde çalıştırın:

2-)

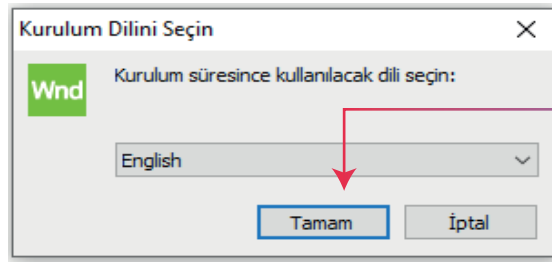


Kullanıcı dilini seçip devam ediyoruz.

3-)

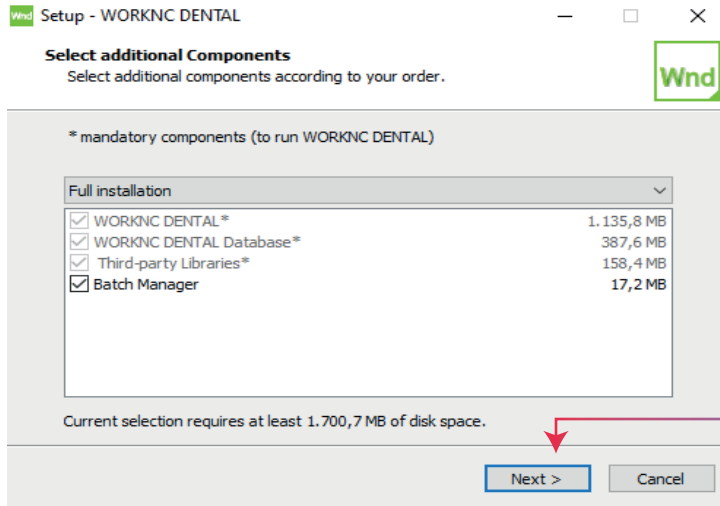

Tekrar ileri diyeceğiz ve devam edeceğiz

4-)

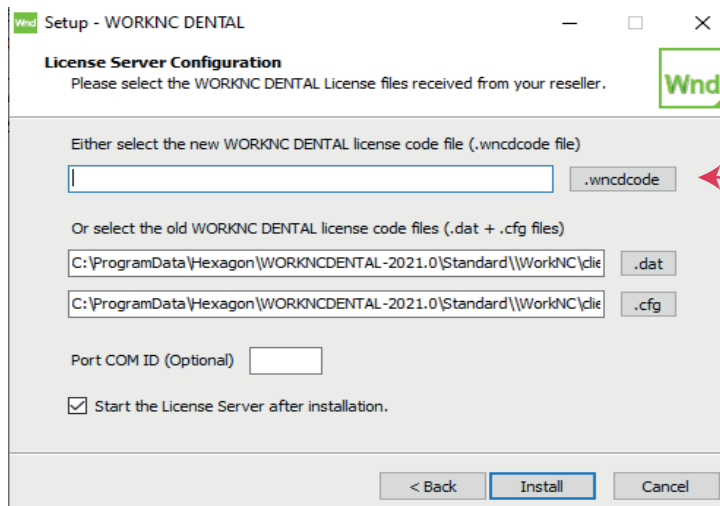

Açılan pencerede .wncdcode seçeneğine tıklayarak worknc lisans anahtarını seçiyorsunuz.




Worknc Dental Installation Stages

5-)

Wind (200109184645)WORKNC_DENTAL_2020.1.2001.3657.exe
9197-8923-3075-8207-7576-9567.wncdcode
FileZilla_3.48.0_win64_sponsored-setup.exe
vnc-3.3.7-x86_win32_viewer.exe
WNCD_GLOBAL_BACKUP_081120183632.wncdbbackup
WorkncDent Setup.docx

Size gönderilen Lisans kodunu seçiniz.

6-)

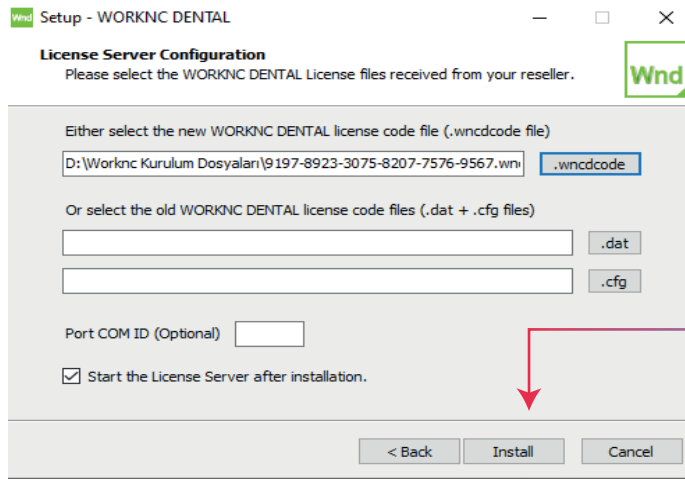

Kullanıcı dilini seçip devam ediyoruz.

Ardından çıkan pencerelerde Next diyerek kurulumu tamamlıyoruz, tamamlandıktan sonra worknc dental ekranında 'Data Manager' sayfası açılacak ve kaydedip kapatıyoruz. Ve workncDental kullanıma açıldı.


7-)

Wind (200109184645)WORKNC_DENTAL_2020.1.2001.3657.exe
9197-8923-3075-8207-7576-9567.wncdcode
FileZilla_3.48.0_win64_sponsored-setup.exe
vnc-3.3.7-x86_win32_viewer.exe
WNCD_GLOBAL_BACKUP_081120183632.wncdbbackup

Ardından kurulumumuzu tamamlayacak olan usb içerisindeki Backup dosyasını C: \ WORK DENTAL Backups konumuna taşımanız gerekmektedir.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra worknc dental açıyoruz ve utility sekmesinden Data Manager seçeneğini açıyoruz.

8-)

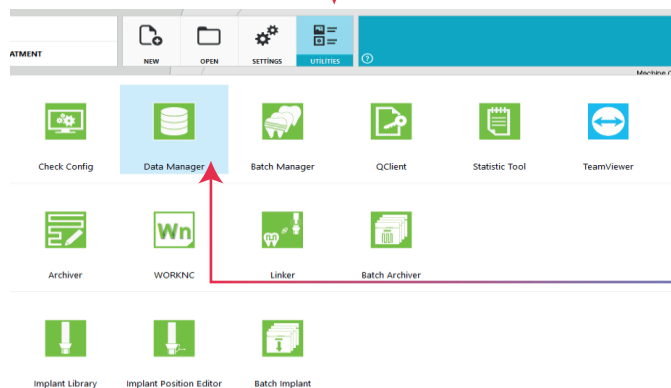

Tekrar ileri diyeceğiz ve devam edeceğiz


Açılan pencerede .wncdcode seçeneğine tıklayarak worknc lisans anahtarını seçiyorsunuz.



Worknc Dental Installation Stages


Açılan pencerede Restore Kısımına gelip 3.sekmeden Backup dosyasını seçip aşağıdaki 'Restore' kısmına tıklayıp kurulumun bitmesini bekliyoruz.Ardından worknc dental'ı kapatıyoruz.

9-)

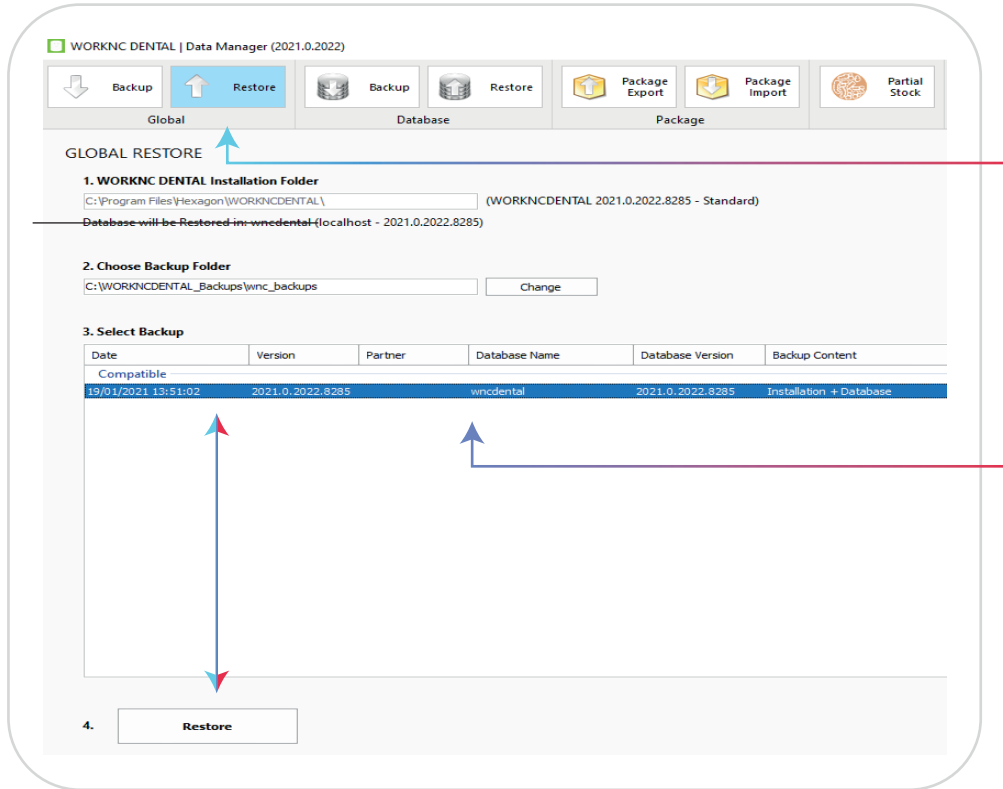

Son adım olarak usb içindeki lisans anahtarına çift tıklayarak lisansı tekrar aktif hale getiriyoruz ve worknc kurulumunu tamamlıyoruz.

10-)

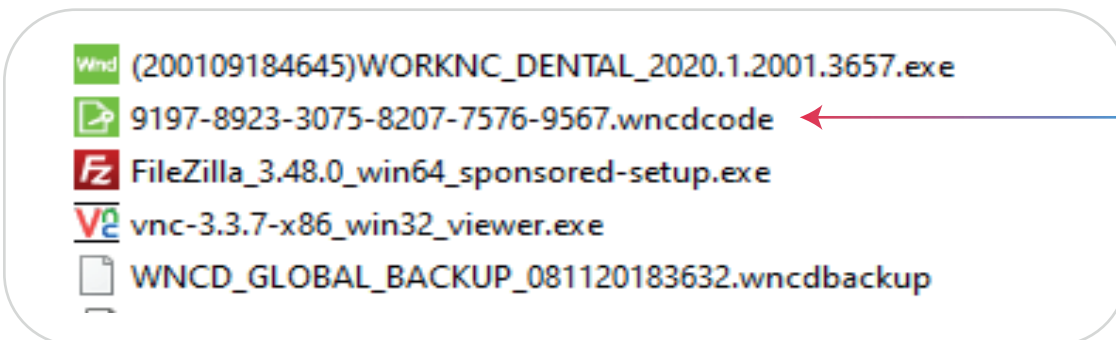

We double click

Gelen pencerede lisansı güncelle diyerek lisansı yenileyip kapatıyoruz.

NOT: Yedek yüklememizin amacı worknc içerisindeki makine ve kinematik tanımlarını daha kolay ayarlamaktır. Bu işlemler yapıldıktan sonra Worknc'de blok merkezleri ve tutucu seçenekleri tekrar ayarlanmalıdır.