


WOOM YÜKLEME İŞLEMİ




Woom Backup yükleme işlemi


1-) WorkNC kurulumunun tamamlanmasının ardından, Redon tarafından gönderilen USB bellek bilgisayara takılır.

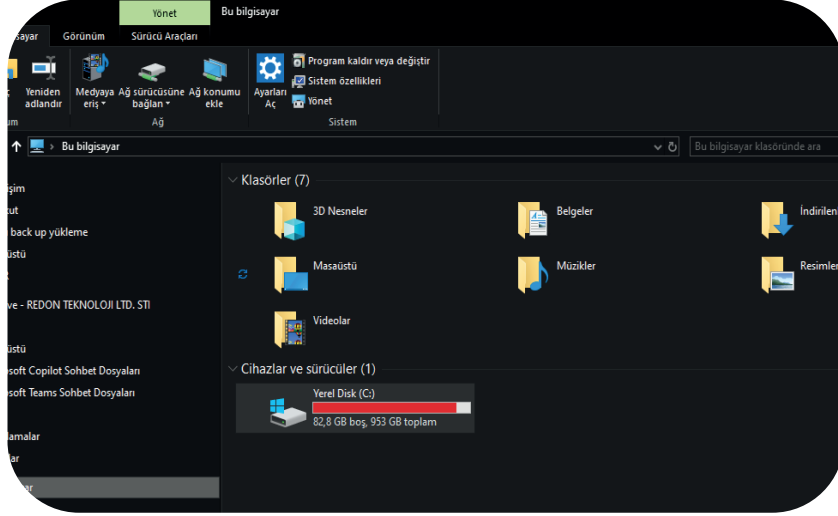


2-) USB belleğe erişilerek "WorkNC Backup" klasörü açılır.

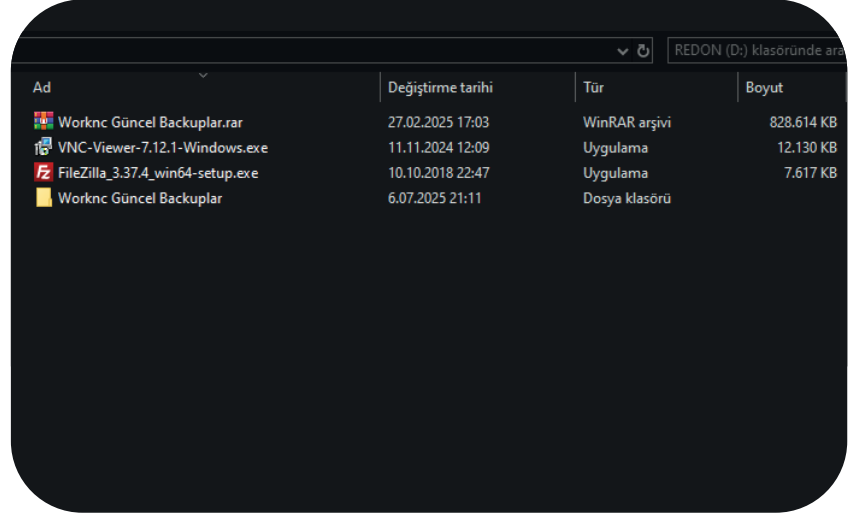


3-) Cihaza uygun yedekleme dosyası belirlenir ve ilgili WinRAR klasöründen çıkarılır.

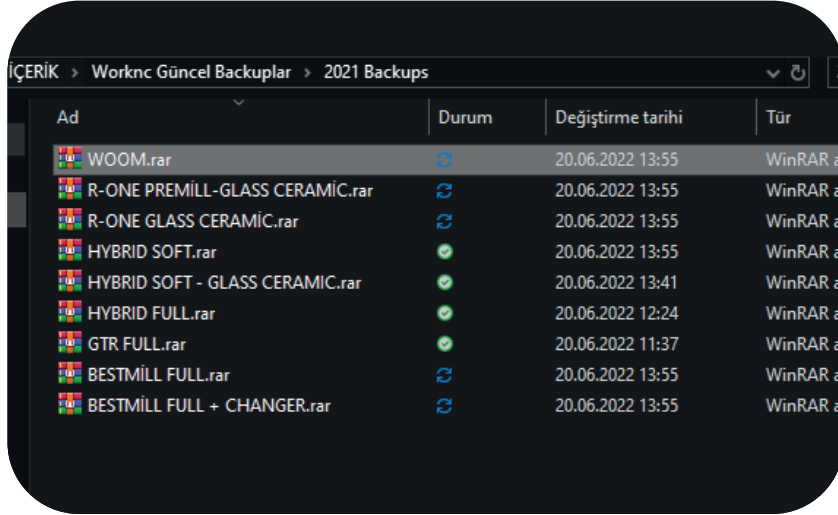


4-) Bilgisayarda Yerel Disk (C:) dizinine girilir.

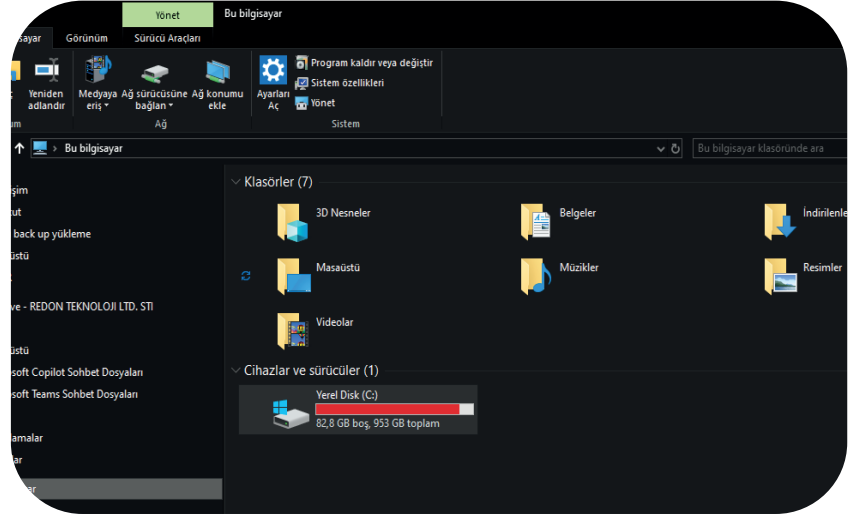

5-) "WorkNC_Dental_Backup" klasörü bulunarak açılır.

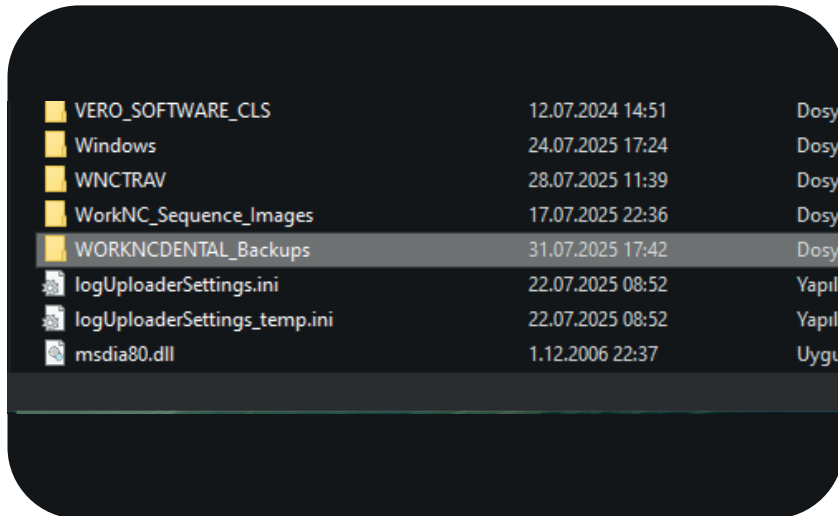


4-) Daha önce çıkarılan yedekleme dosyası bu klasör içerisine kopyalanır.

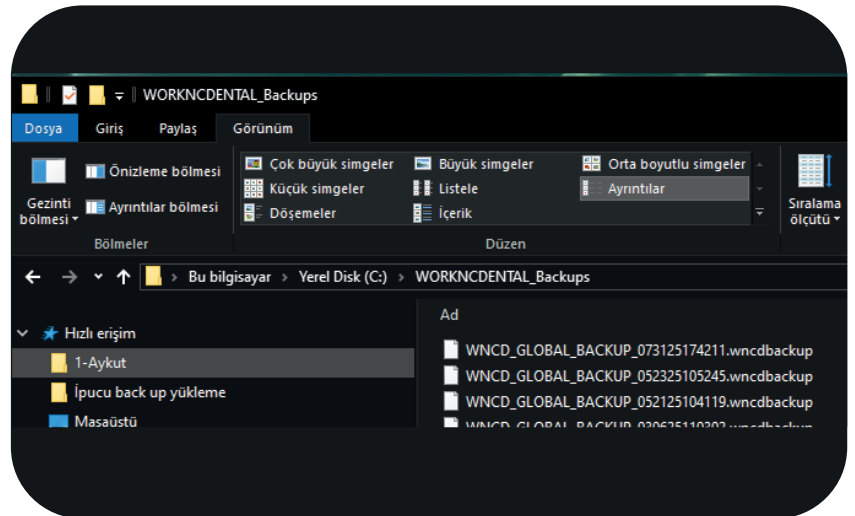





Woom Backup yükleme işlemi


5-) WorkNC yazılımı başlatılır ve **Settings (Ayarlar)** menüsüne girilir.

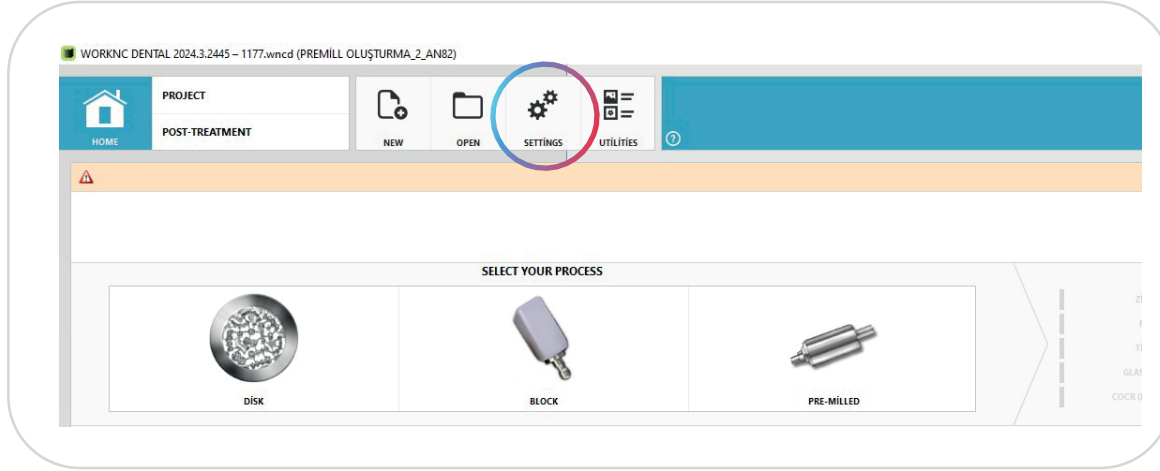


6-) **Data Manager** seçeneği tıklanır.

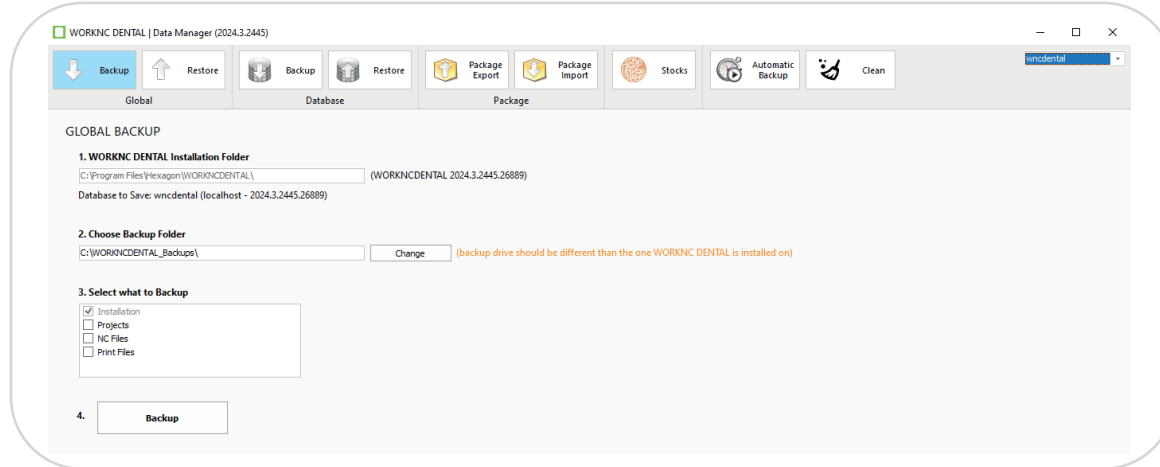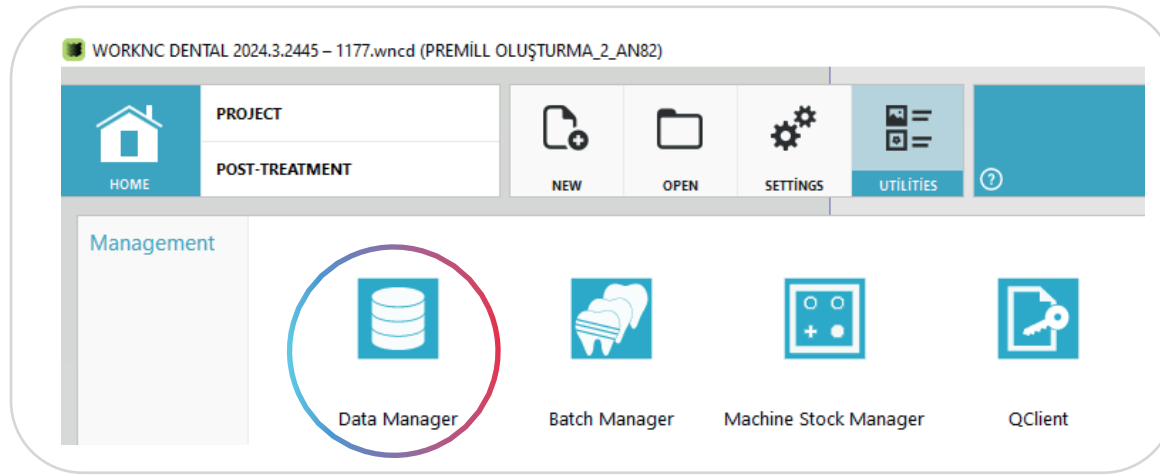

7-) Açılan pencerede **"Restore"** sekmesine geçilir.

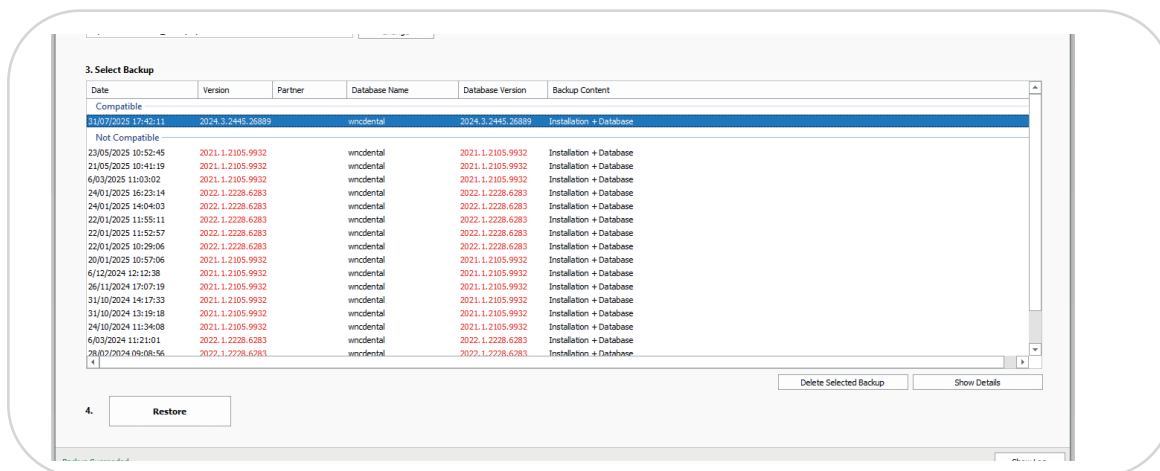

Yüklenmek istenen yedek dosya seçilir ve **"Restore"** butonuna tıklanır.

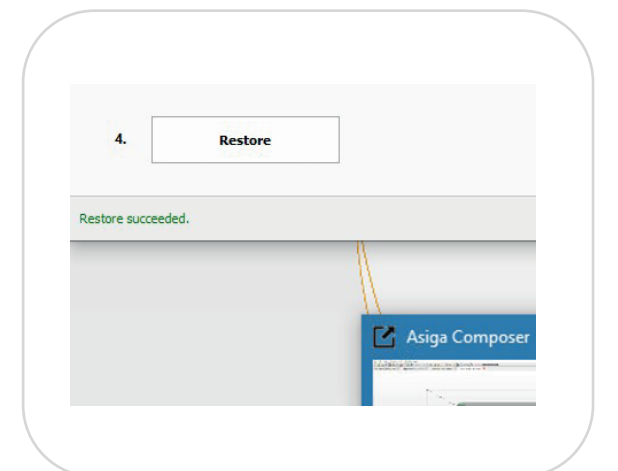

Alt kısımda **"Restore succeeded"** mesajı görüldüğünde işlem başarıyla tamamlanmış demektir. Bu aşamadan sonra WorkNC kapatılır ve tekrar açılır.