


WORKNC DENTAL INSTALLATION STAGES






Worknc Dental Installation Stages

1-) Follow respectively

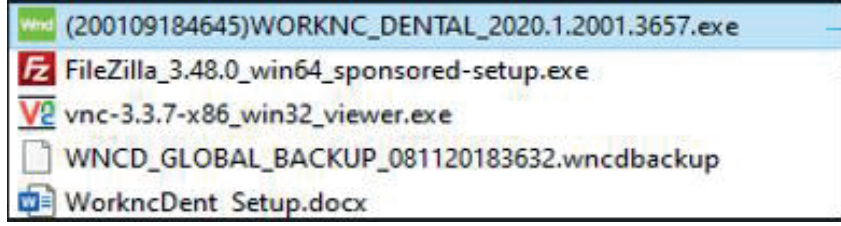


Çalıştırmak için kurulum dosyasına çift tıklayın ve şu şekilde çalıştırın.

2-)

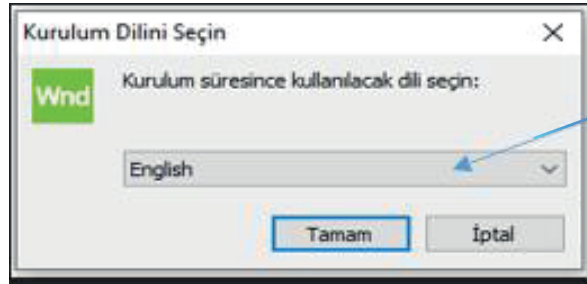


Kullanıcı dilini seçip devam ediyoruz.

2-)

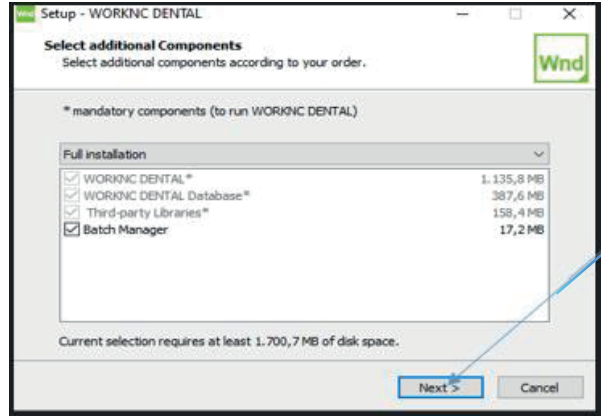

Tekrar ileri diyeceğiz ve devam edeceğiz.

3-)

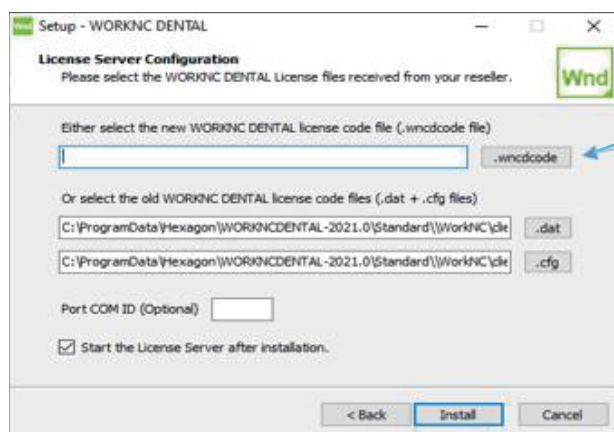


Açılan pencerede wncdcode seçeneğine tıklayarak worknc lisans anahtarını seçiyorsunuz.




HYBRID Backup yükleme işlemi

4-)

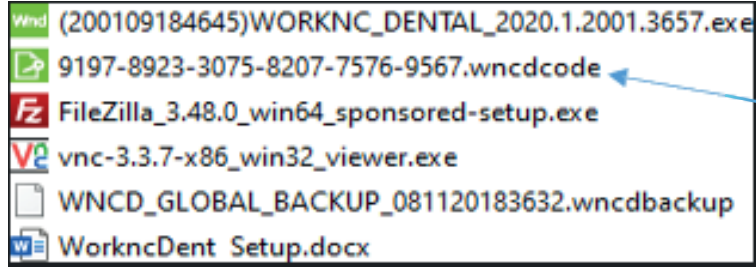

Size gönderilen Lisans kodunu seçiniz.


5-)

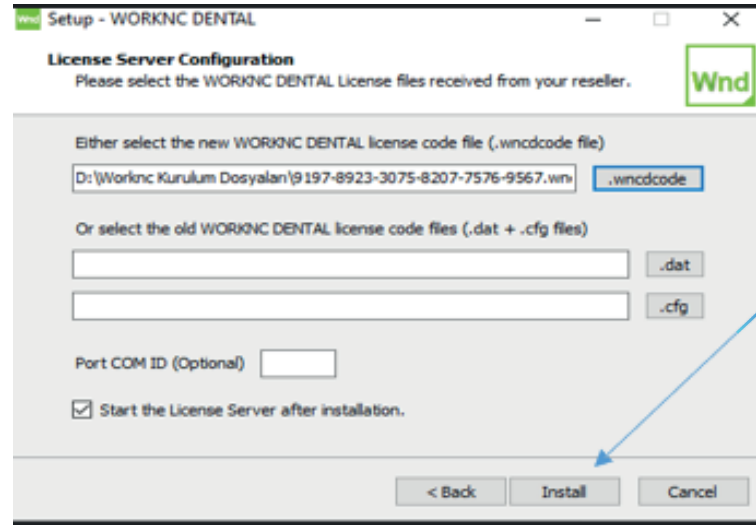

Lisans kodunu seçtikten sonra açılan pencerede kur diyerek kurulumu devam ediyoruz.


6-) Ardından çıkan pencerelerde Next diyerek kurulumu tamamlıyoruz, ramamladıktan sonra worknc dental ekranında 'Data Manager' sayfası açılacak ve kaydedip kapatıyoruz. Ve workncDental kullanıma açıldı.

7-)

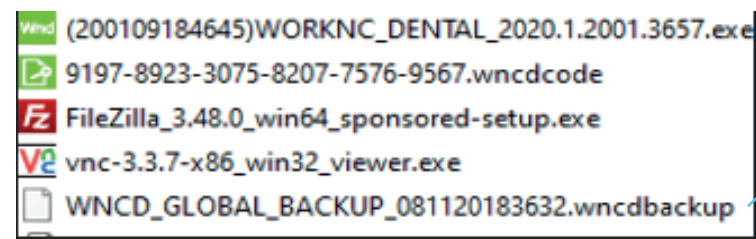

Ardından kurulumumuzu tamamlayacak olan usb içerisindeki Backup dosyasını C: \ WORK DENTAL Backups konumuna taşımanız gerekmektedir.

8-) Yularındaki işlemleri tamamladıktan sonra worknc dental açıyoruz ve utulity sekmesinden Data Manager seçeneğini açıyoruz.

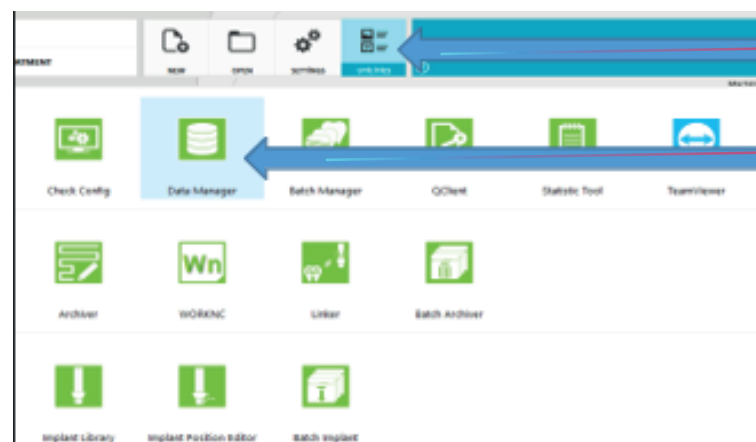


UTILITIES

Data Manager




HYBRID Backup yükleme işlemi

9-) Açılan pencerede Restore Kısımına gelip 3. sekmeden Backup dosyasını seçip aşağıdaki 'Restore' kısmına tıklayıp kurulumun bitmesini bekliyoruz.

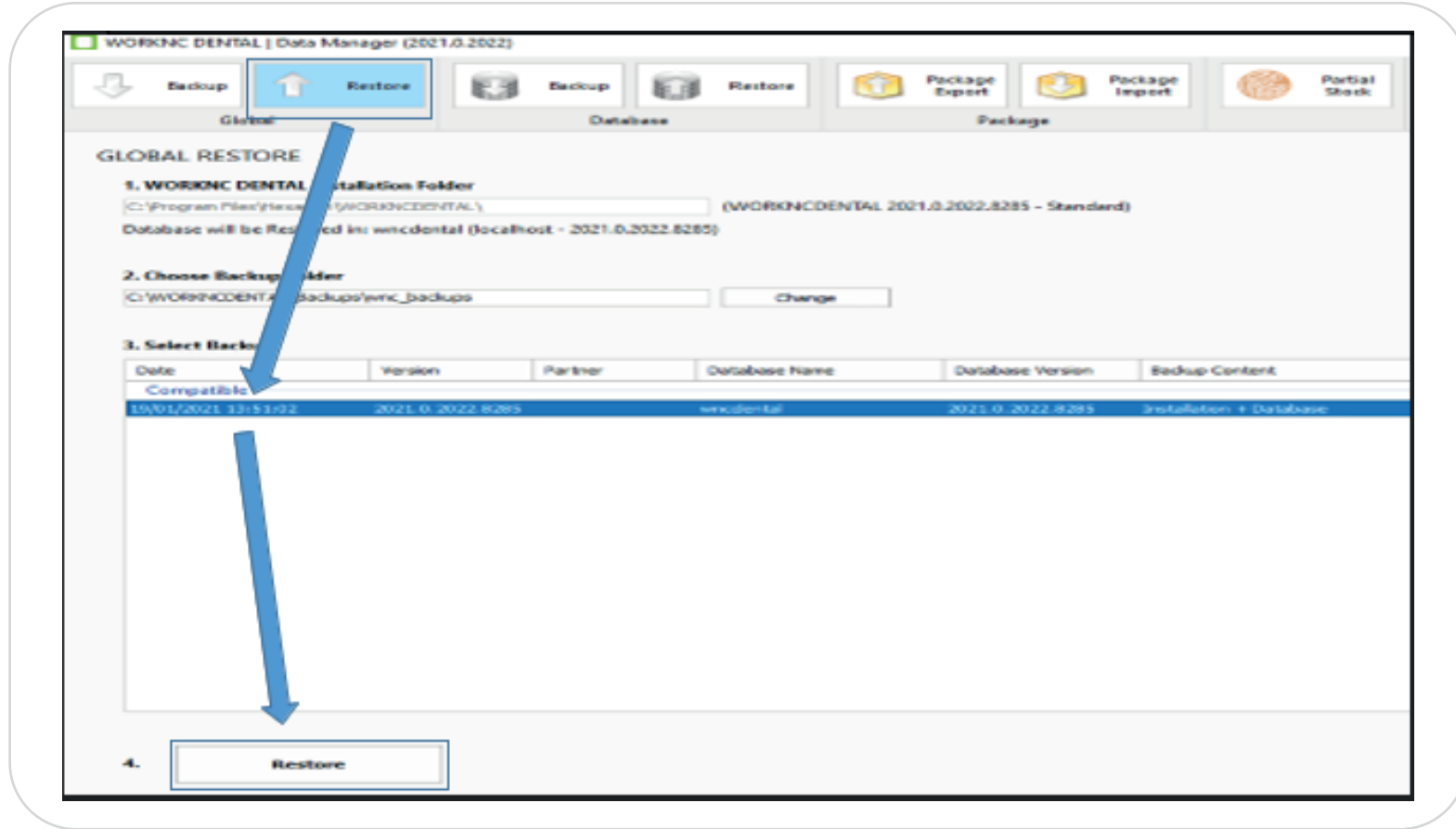


10-) Son adım olarak usb içindeki lisans anahtarına çift tıklayarak lisansı tekrar aktif hale getiriyoruz ve worknc kurulunubu tamamlıyoruz.

11-)

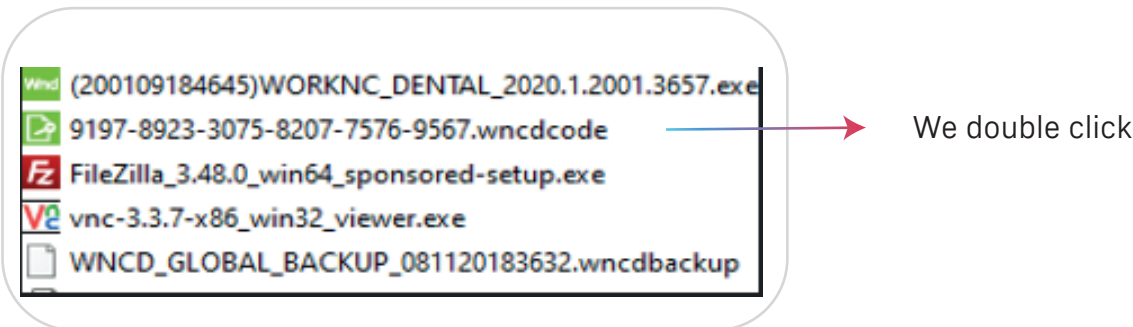

12-)

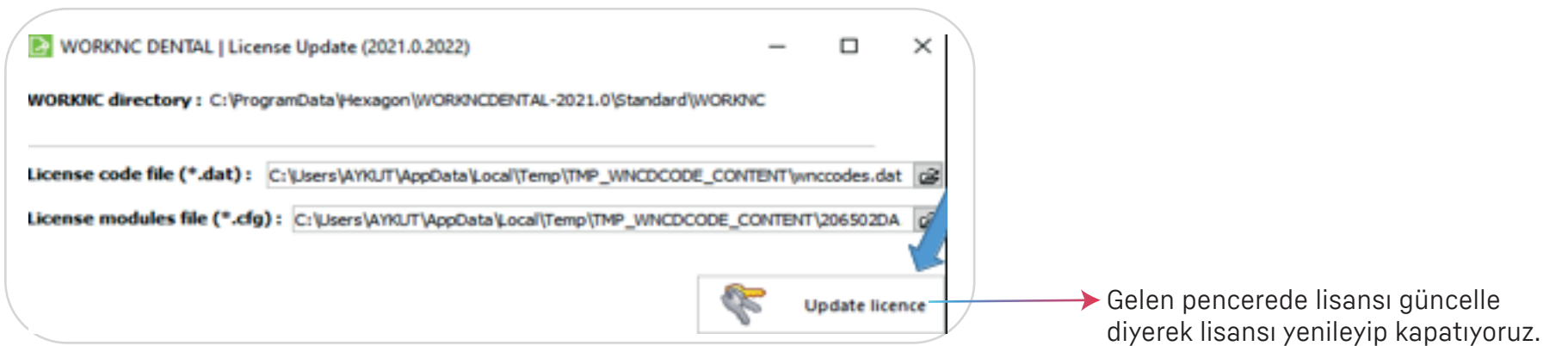

Not: Yedek yüklememizin amacı worknc içerisindeki makine ve kinematik tanımlarını daha kolay ayarlamaktır. Bu işlemler yapıldıktan sonra Worknc'de blok merkezleri ve tutucu seçenekleri tekrar ayarlanmalıdır.