


GTR BACKUP YÜKLEME İŞLEMİ




redon
the dental **experience**

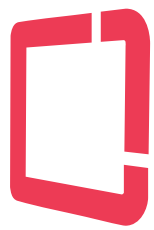


GTR Backup yükleme işlemi


1-J WorkNC kurulumunun tamamlanmasının ardından,
Redon tarafından gönderilen USB bellek bilgisayara takılır.

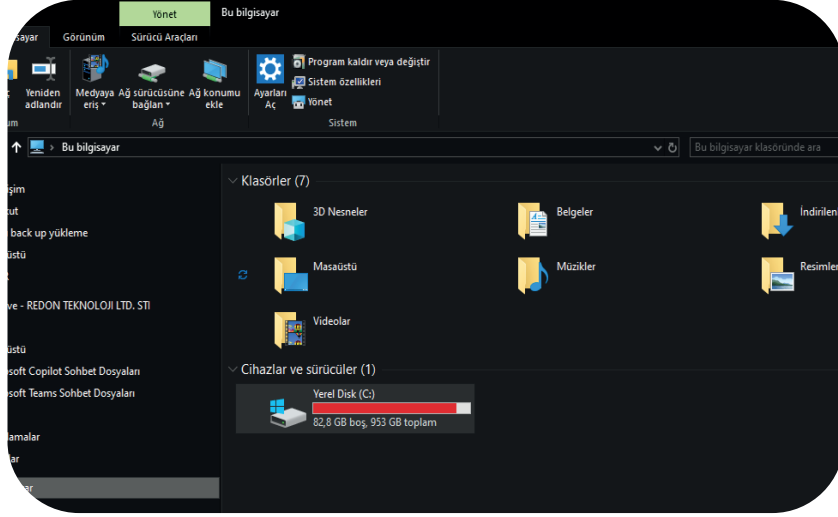


2-J USB belleğe erişilerek "**WorkNC Backup**" klasörü açılır.

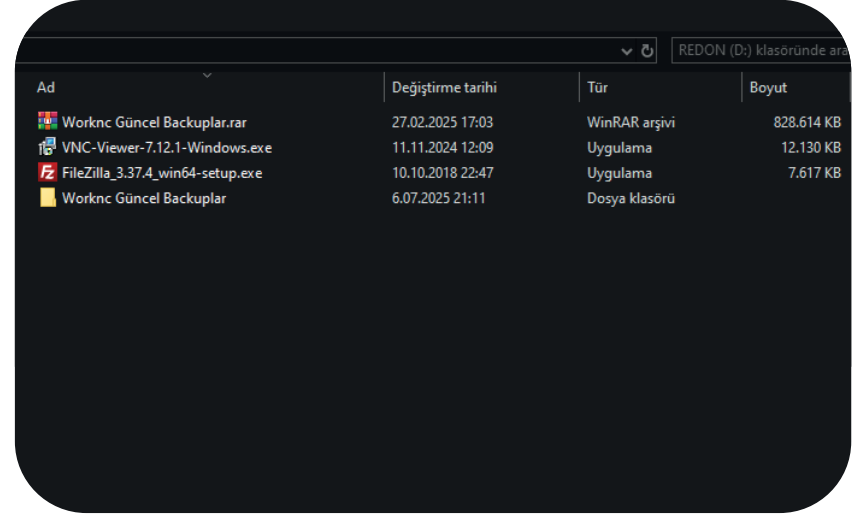


3-J Cihaza uygun yedekleme dosyası belirlenir ve ilgili WinRAR klasöründen çıkarılır.

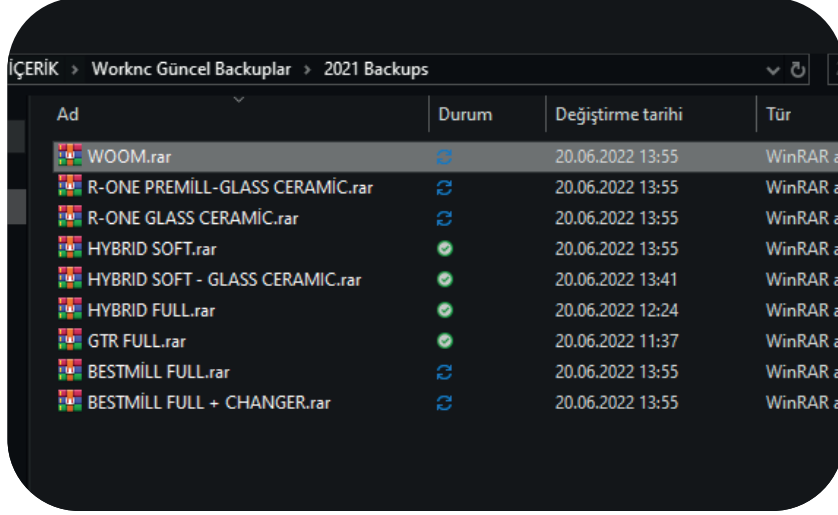


4-J Bilgisayarda **Yerel Disk (C:)** dizinine girilir.

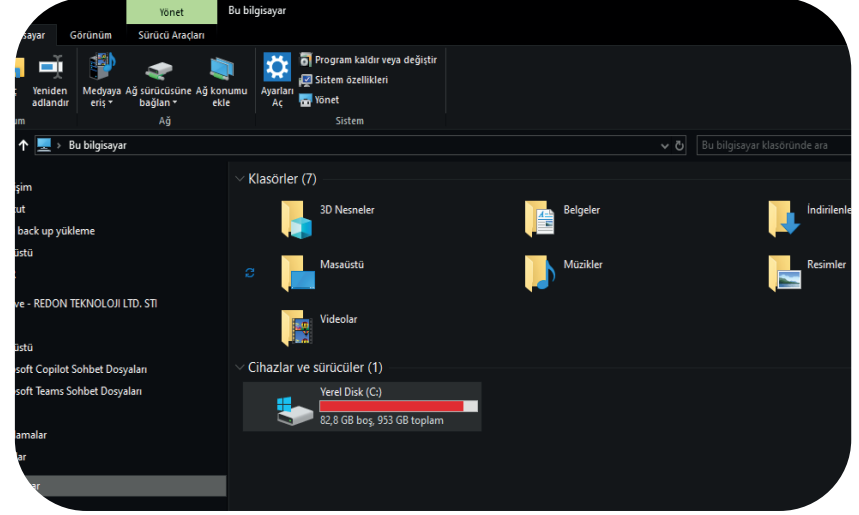

5-J "**WorkNC_Dental_Backup**" klasörü bulunarak açılır.

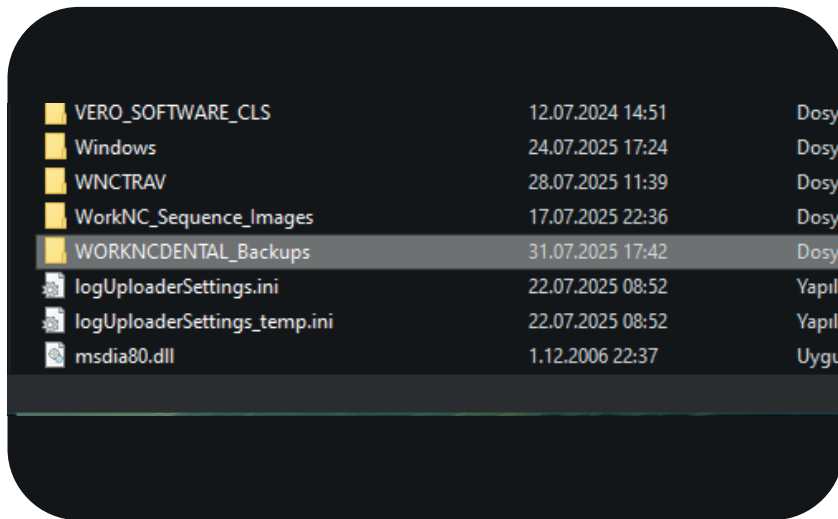


4-J Daha önce çıkarılan yedekleme dosyası bu klasör içerisine kopyalanır.

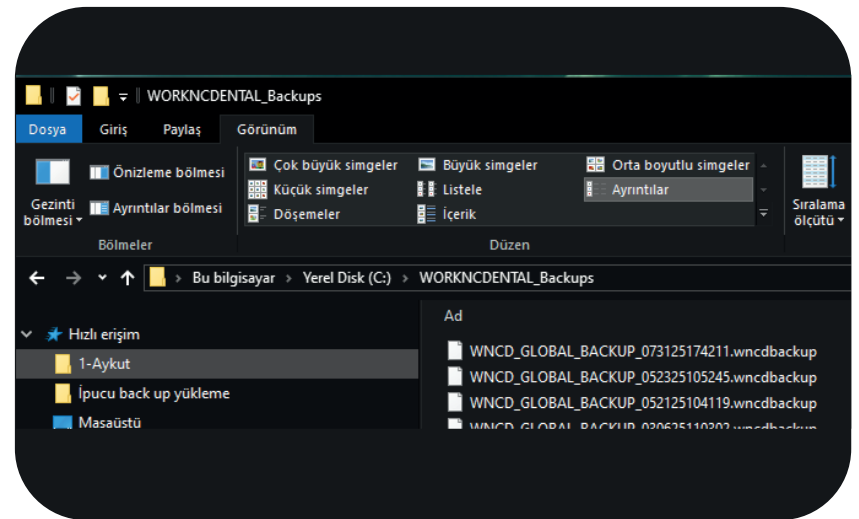





GTR Backup yükleme işlemi


5-) WorkNC yazılımı başlatılır ve **Settings (Ayarlar)** menüsüne girilir.

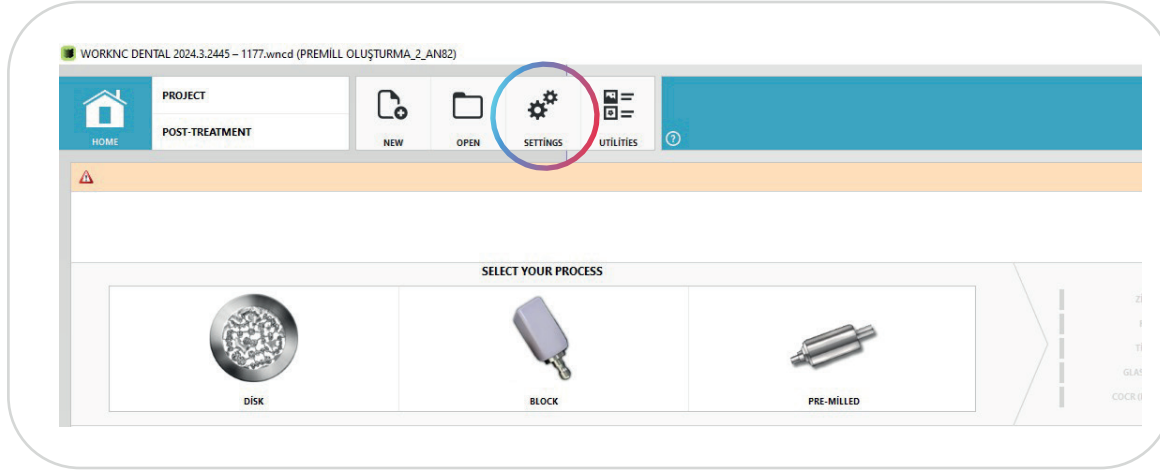


6-) Data Manager seçeneği tıklanır.

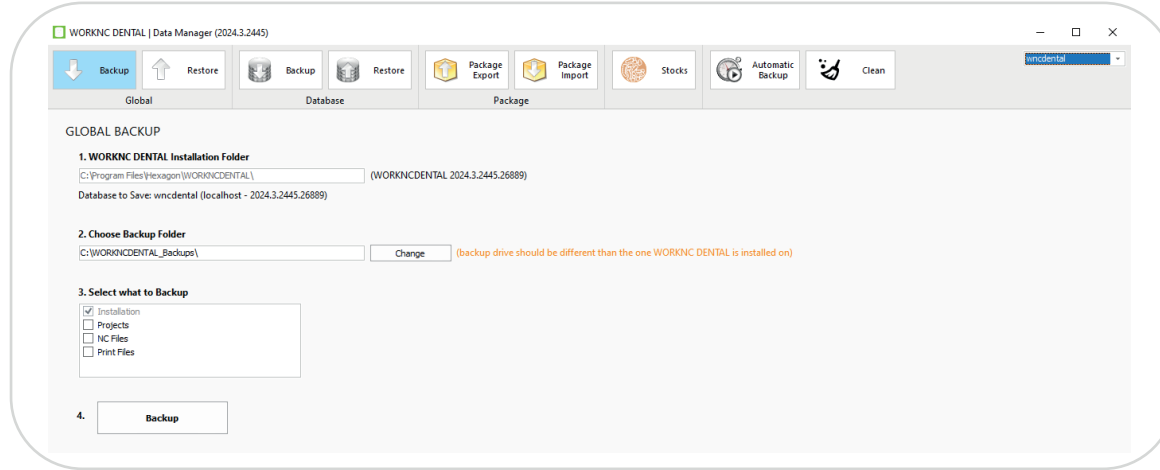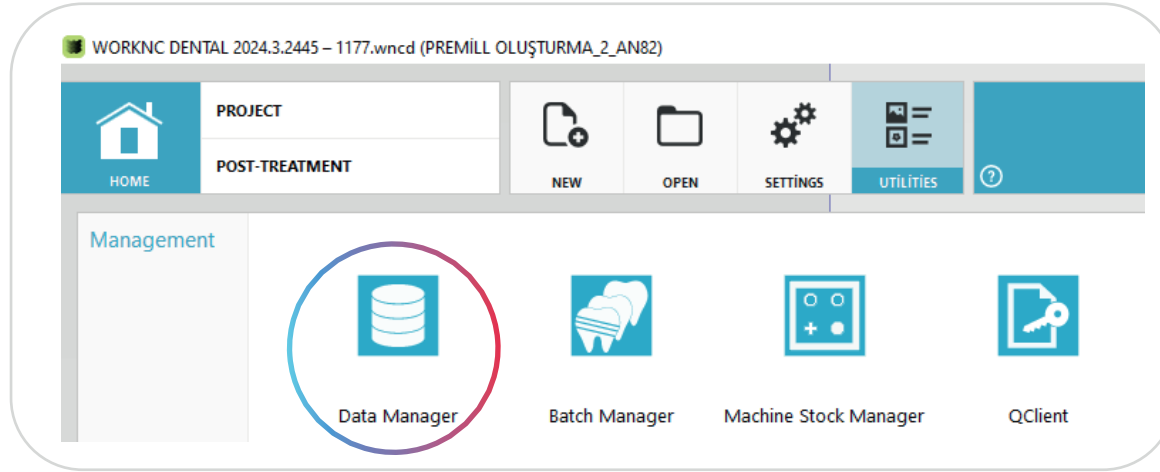

7-) Açılan pencerede **"Restore"** sekmesine geçilir.

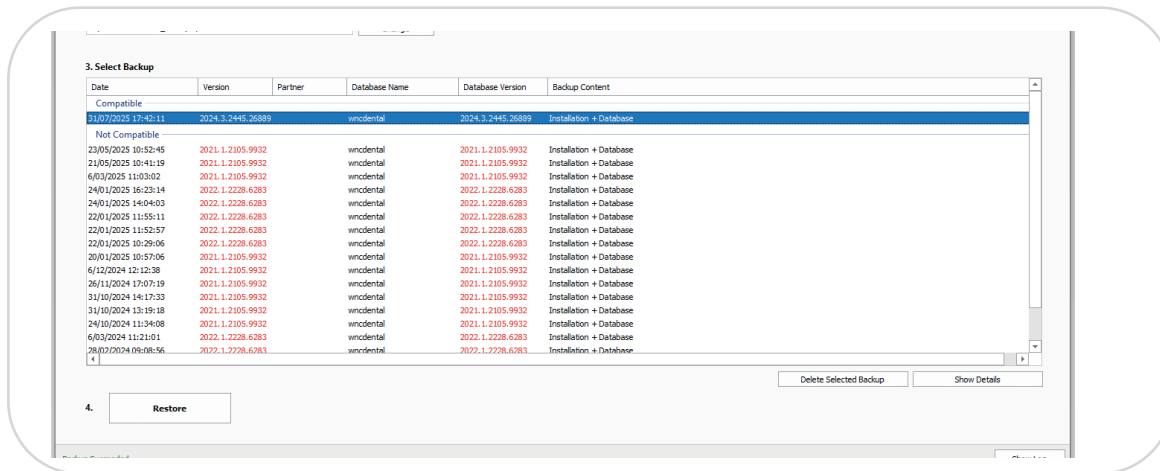

Yüklenmek istenen yedek dosya seçilir ve **"Restore"** butonuna tıklanır.

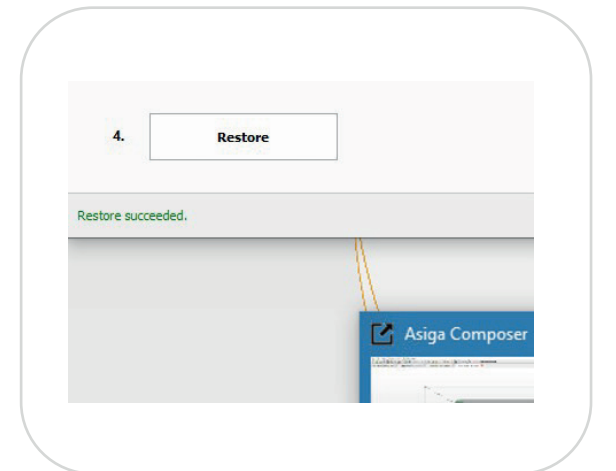

Alt kısımda **"Restore succeeded"** mesajı görüldüğünde işlem başarıyla tamamlanmış demektir. Bu aşamadan sonra WorkNC kapatılır ve tekrar açılır.