

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COM CABO DE SILICONE

Orientações para o uso das instruções de uso GOLGRAN em formato não impresso:
(conforme IN nº4, de 15/07/2012)

1. As instruções de uso das famílias Golgran estão disponibilizadas em formato não impresso e podem ser consultadas a qualquer tempo através do site Golgran (www.golgran.com.br/instrucoes);
2. Para identificar a instrução de uso do produto adquirido, o usuário deve observar no rótulo o número do **Registro ANVISA e seu respectivo nome comercial**. Com essas informações será possível identificar a instrução de uso correspondente ao seu produto;
3. As instruções de uso disponibilizadas apresentam as informações da revisão do documento e de sua data de emissão. É fundamental que o usuário consulte o rótulo do produto e observe qual a revisão da instrução de uso é correspondente ao produto fornecido;
4. O formato impresso das instruções de uso poderá ser solicitado **sem custo adicional** (inclusive de envio) pelo telefone +55 (11) 4223-6696 ou pelo e-mail sac@golgran.com.br. Na solicitação, o usuário deve informar a revisão da instrução de uso apresentada no rótulo do produto adquirido.

1. Identificação do Fabricante

Fabricante: GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA

CNPJ: 51.753.374/0001-19

Endereço: Rua Senador Vergueiro, 433 – São Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-320

Telefone: +55 (11) 4223-6696

Website: www.golgran.com.br

Responsável Técnico: Fernando T. Gimenez – CREA-SP 5062339362

2. Identificação do Produto

Produto (Nome Comercial): INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COM CABO DE SILICONE

Registro ANVISA: 10401310128

Código: Verificar rotulagem

Descrição: Verificar rotulagem

Validade: Indeterminado

3. Modelos Comerciais da Família:

800-146 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE AMARELO; 800-204 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-233 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-407 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE BEGE; 800-175 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE BRANCO; 800-262 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE LARANJA; 800-088 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE LILÁS; 800-059 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE PINK; 800-001 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE PRETO; 800-030 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE ROSA; 800-117 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE ROXO; 800-378 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE SALMÃO; 800-291 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE VERDE; 800-436 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-349 - CINZEL OCHSENBEIN 1 CABO SILICONE VERMELHO; 800-147 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE AMARELO; 800-205 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-234 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-408 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE BEGE; 800-176 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE BRANCO; 800-263 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE LARANJA; 800-089 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE LILÁS; 800-060 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE PINK; 800-002 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE PRETO; 800-031 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROSA; 800-118 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROXO; 800-379 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE SALMÃO; 800-292 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE; 800-437 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-350 - CINZEL OCHSENBEIN 1 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERMELHO; 800-148 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE AMARELO; 800-206 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-235 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-409 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE BEGE; 800-177 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE BRANCO; 800-264 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE LARANJA; 800-090 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE LILÁS; 800-061 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE PINK; 800-003 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE PRETO; 800-032 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE ROSA; 800-119 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE ROXO; 800-380 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-293 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE VERDE; 800-438 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-351 - CINZEL OCHSENBEIN 2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-149 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE AMARELO; 800-207 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-236 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-410 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE BEGE; 800-178 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE BRANCO; 800-265 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE LARANJA; 800-091 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE LILÁS; 800-062 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE PINK; 800-004 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE PRETO; 800-033 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROSA; 800-120 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROXO; 800-381 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE SALMÃO; 800-294 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE; 800-439 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-352 - CINZEL OCHSENBEIN 2 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERMELHO; 800-150 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE AMARELO; 800-208 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-237 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-411 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE BEGE; 800-179 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE BRANCO; 800-266 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE LARANJA; 800-092 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE LILÁS; 800-063 - CINZEL

OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE PINK; 800-005 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE PRETO; 800-034 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE ROSA; 800-121 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE ROXO; 800-382 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE SALMÃO; 800-295 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE VERDE; 800-440 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-353 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO SILICONE VERMELHO; 800-151 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE AMARELO; 800-209 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-238 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-412 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE BEGE; 800-180 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE BRANCO; 800-267 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE LARANJA; 800-093 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE LILÁS; 800-064 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE PINK; 800-006 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE PRETO; 800-035 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE ROSA; 800-122 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE ROXO; 800-383 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE SALMÃO; 800-296 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERDE; 800-441 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-354 - CINZEL OCHSENBEIN 3 CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERMELHO; 800-152 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AMARELO; 800-210 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-239 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-413 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE BEGE; 800-181 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE BRANCO; 800-268 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE LARANJA; 800-094 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE LILÁS; 800-065 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE PINK; 800-007 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE PRETO; 800-036 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROSA; 800-123 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROXO; 800-384 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE SALMÃO; 800-297 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE; 800-442 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-355 - CINZEL OCHSENBEIN 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERMELHO; 800-153 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE AMARELO; 800-211 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-240 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-414 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE BEGE; 800-182 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE BRANCO; 800-269 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE LARANJA; 800-095 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE LILÁS; 800-066 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE PINK; 800-008 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE PRETO; 800-037 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE ROSA; 800-124 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE ROXO; 800-385 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE SALMÃO; 800-298 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERDE; 800-443 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-356 - CINZEL OCHSENBEIN 3 TRACAO CABO OCO 80MM CABO SILICONE VERMELHO; 800-154 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE AMARELO; 800-213 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-241 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-415 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE BEGE; 800-183 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE BRANCO; 800-270 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO

SILICONE LARANJA; 800-096 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE LILÁS; 800-067 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE PINK; 800-009 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE PRETO; 800-038 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE ROSA; 800-125 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE ROXO; 800-386 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE SALMÃO; 800-299 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE VERDE; 800-444 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-357 - CINZEL OCHSENBEIN 4 CABO SILICONE VERMELHO; 800-155 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE AMARELO; 800-214 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-242 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-416 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE BEGE; 800-184 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE BRANCO; 800-271 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE LARANJA; 800-097 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE LILÁS; 800-068 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE PINK; 800-010 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE PRETO; 800-039 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROSA; 800-126 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROXO; 800-387 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE SALMÃO; 800-300 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE; 800-445 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-358 - CINZEL OCHSENBEIN 4 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERMELHO; 800-156 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AMARELO; 800-214 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-243 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-417 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE BEGE; 800-185 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE BRANCO; 800-272 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE LARANJA; 800-098 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE LILÁS; 800-069 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE PINK; 800-011 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE PRETO; 800-040 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROSA; 800-127 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE ROXO; 800-388 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE SALMÃO; 800-301 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE; 800-446 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-359 - CINZEL OCHSENBEIN TRACAO 3 MICRO / FEDI CABO SILICONE VERMELHO; 800-157 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE AMARELO; 800-215 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-244 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-418 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE BEGE; 800-186 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE BRANCO; 800-273 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE LARANJA; 800-099 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE LILÁS; 800-070 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE PINK; 800-012 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE PRETO; 800-041 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE ROSA; 800-128 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE ROXO; 800-389 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE SALMÃO; 800-302 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE VERDE; 800-447 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-360 - CINZEL OPENER ART CABO SILICONE VERMELHO; 800-161 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE AMARELO; 800-219 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-248 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-422 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE BEGE; 800-190 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE BRANCO; 800-277 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE LARANJA; 800-103 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE LILÁS; 800-074 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE PINK; 800-016 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO

SILICONE PRETO; 800-045 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE ROSA; 800-132 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE ROXO; 800-393 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE SALMÃO; 800-306 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE VERDE; 800-451 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-364 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO CABO SILICONE VERMELHO; 800-164 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE AMARELO; 800-222 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-251 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-425 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE BEGE; 800-193 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE BRANCO; 800-280 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE LARANJA; 800-106 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE LILÁS; 800-077 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE PINK; 800-019 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE PRETO; 800-048 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE ROSA; 800-135 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE ROXO; 800-396 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE SALMÃO; 800-309 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE VERDE; 800-454 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-367 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO CURVO + RETO CABO SILICONE VERMELHO; 800-162 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE AMARELO; 800-220 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-249 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-423 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE BEGE; 800-191 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE BRANCO; 800-278 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE LARANJA; 800-104 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE LILÁS; 800-075 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE PINK; 800-017 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE PRETO; 800-046 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE ROSA; 800-133 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE ROXO; 800-394 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE SALMÃO; 800-307 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE VERDE; 800-452 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-365 - CINZEL PERIOTOMO DUPLO RETO CABO SILICONE VERMELHO; 800-163 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE AMARELO; 800-221 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-250 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-424 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE BEGE; 800-192 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE BRANCO; 800-279 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE LARANJA; 800-105 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE LILÁS; 800-076 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE PINK; 800-018 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE PRETO; 800-047 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE ROSA; 800-134 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE ROXO; 800-395 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE SALMÃO; 800-308 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE VERDE; 800-453 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-366 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES CURVO CABO SILICONE VERMELHO; 800-165 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE AMARELO; 800-223 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-252 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-426 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE BEGE; 800-194 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE BRANCO; 800-281 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE LARANJA; 800-107 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE LILÁS; 800-078 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE PINK; 800-020 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE PRETO; 800-049 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES

RETO CABO SILICONE ROSA; 800-136 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE ROXO; 800-397 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE SALMÃO; 800-310 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE VERDE; 800-455 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-368 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO CABO SILICONE VERMELHO; 800-166 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE AMARELO; 800-224 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-253 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-427 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE BEGE; 800-195 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE BRANCO; 800-282 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE LARANJA; 800-108 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE LILÁS; 800-079 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE PINK; 800-021 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE PRETO; 800-050 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE ROSA; 800-137 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE ROXO; 800-398 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE SALMÃO; 800-311 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE VERDE; 800-456 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-369 - CINZEL PERIOTOMO SIMPLES RETO FLEXIVEL CABO SILICONE VERMELHO; 800-167 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE AMARELO; 800-225 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-254 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-428 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE BEGE; 800-196 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE BRANCO; 800-283 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE LARANJA; 800-109 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE LILÁS; 800-080 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE PINK; 800-022 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE PRETO; 800-051 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE ROSA; 800-138 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE ROXO; 800-399 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE SALMÃO; 800-312 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE VERDE; 800-457 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-370 - CINZEL RHODES 36-37 CABO SILICONE VERMELHO; 800-168 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE AMARELO; 800-226 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-255 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-429 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE BEGE; 800-197 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE BRANCO; 800-284 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE LARANJA; 800-110 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE LILÁS; 800-081 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE PINK; 800-023 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE PRETO; 800-052 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE ROSA; 800-139 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE ROXO; 800-400 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE SALMÃO; 800-313 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE VERDE; 800-458 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-371 - CINZEL TUNELIZADOR 1 CABO SILICONE VERMELHO; 800-169 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE AMARELO; 800-227 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-256 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-430 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE BEGE; 800-198 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE BRANCO; 800-285 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE LARANJA; 800-111 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE LILÁS; 800-082 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE PINK; 800-024 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE PRETO; 800-056 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE ROSA; 800-140 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE ROXO; 800-401 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-314 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE VERDE; 800-459 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-372 - CINZEL TUNELIZADOR 2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-170 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE AMARELO; 800-228 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-257 -

CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-431 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE BEGE; 800-199 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE BRANCO; 800-286 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE LARANJA; 800-112 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE LILÁS; 800-083 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE PINK; 800-025 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE PRETO; 800-057 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE ROSA; 800-141 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE ROXO; 800-402 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-315 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE VERDE; 800-460 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-373 - CINZEL WEDELSTAEDT 1-2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-171 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE AMARELO; 800-229 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-258 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-432 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE BEGE; 800-200 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE BRANCO; 800-287 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE LARANJA; 800-113 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE LILÁS; 800-084 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE PINK; 800-026 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE PRETO; 800-058 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE ROSA; 800-142 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE ROXO; 800-403 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE SALMÃO; 800-316 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE VERDE; 800-461 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-374 - CINZEL WEDELSTAEDT 3-4 CABO SILICONE VERMELHO; 800-172 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE AMARELO; 800-230 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-259 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-433 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE BEGE; 800-201 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE BRANCO; 800-288 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE LARANJA; 800-114 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE LILÁS; 800-085 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE PINK; 800-027 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE PRETO; 800-059 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE ROSA; 800-143 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE ROXO; 800-404 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE SALMÃO; 800-317 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE VERDE; 800-462 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-375 - CINZEL WEDELSTAEDT 5-6 CABO SILICONE VERMELHO; 800-173 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE AMARELO; 800-231 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-260 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-434 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE BEGE; 800-202 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE BRANCO; 800-289 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE LARANJA; 800-115 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE LILÁS; 800-086 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE PINK; 800-028 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE PRETO; 800-060 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE ROSA; 800-144 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE ROXO; 800-405 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE SALMÃO; 800-318 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE VERDE; 800-463 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-376 - CINZEL ZERFING DUPLO CABO SILICONE VERMELHO; 800-174 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE AMARELO; 800-232 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-261 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-435 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE BEGE; 800-203 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE BRANCO; 800-290 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE LARANJA; 800-116 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE LILÁS; 800-087 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE PINK; 800-029 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE PRETO; 800-061 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE ROSA; 800-145 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE ROXO; 800-406 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE SALMÃO; 800-319 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE VERDE; 800-464 - CINZEL ZERFING SIMPLES

CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-377 - CINZEL ZERFING SIMPLES CABO SILICONE VERMELHO; 600-226 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE AMARELO; 600-316 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-361 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-631 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE BEGE; 600-271 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE BRANCO; 600-406 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE LARANJA; 600-136 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE LILÁS; 600-091 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE PINK; 600-001 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE PRETO; 600-046 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE ROSA; 600-181 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE ROXO; 600-586 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE SALMÃO; 600-451 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE VERDE; 600-676 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-541 - CURETA GOLDMAN FOX 01 CABO SILICONE VERMELHO; 600-227 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE AMARELO; 600-317 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-362 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-632 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE BEGE; 600-272 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE BRANCO; 600-407 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE LARANJA; 600-137 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE LILÁS; 600-092 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE PINK; 600-002 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE PRETO; 600-047 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE ROSA; 600-182 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE ROXO; 600-587 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE SALMÃO; 600-452 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE VERDE; 600-677 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-542 - CURETA GOLDMAN FOX 02 CABO SILICONE VERMELHO; 600-228 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE AMARELO; 600-318 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-363 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-633 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE BEGE; 600-273 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE BRANCO; 600-408 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE LARANJA; 600-138 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE LILÁS; 600-093 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE PINK; 600-003 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE PRETO; 600-048 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE ROSA; 600-183 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE ROXO; 600-588 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE SALMÃO; 600-453 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE VERDE; 600-678 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-543 - CURETA GOLDMAN FOX 03 CABO SILICONE VERMELHO; 600-229 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE AMARELO; 600-319 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-364 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-634 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE BEGE; 600-274 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE BRANCO; 600-409 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE LARANJA; 600-139 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE LILÁS; 600-094 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE PINK; 600-004 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE PRETO; 600-049 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE ROSA; 600-184 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE ROXO; 600-589 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE SALMÃO; 600-454 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE VERDE; 600-679 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-544 - CURETA GOLDMAN FOX 04 CABO SILICONE VERMELHO; 600-230 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE AMARELO; 600-320 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-365 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-635 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE BEGE; 600-275 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE BRANCO; 600-410 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE LARANJA; 600-140 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE LILÁS; 600-095 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE PINK; 600-005 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE PRETO; 600-050 - CURETA GRACEY 11-12 CABO

SILICONE ROSA; 600-185 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE ROXO; 600-590 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE SALMÃO; 600-455 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE VERDE; 600-680 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-545 - CURETA GRACEY 11-12 CABO SILICONE VERMELHO; 600-231 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE AMARELO; 600-321 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-366 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-636 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE BEGE; 600-276 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE BRANCO; 600-411 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE LARANJA; 600-141 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE LILÁS; 600-096 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE PINK; 600-006 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE PRETO; 600-051 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE ROSA; 600-186 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE ROXO; 600-591 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE SALMÃO; 600-456 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE VERDE; 600-681 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-546 - CURETA GRACEY 1-2 CABO SILICONE VERMELHO; 600-232 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE AMARELO; 600-322 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-367 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-637 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE BEGE; 600-277 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE BRANCO; 600-412 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE LARANJA; 600-142 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE LILÁS; 600-097 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE PINK; 600-007 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE PRETO; 600-052 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE ROSA; 600-187 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE ROXO; 600-592 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE SALMÃO; 600-457 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE VERDE; 600-682 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-547 - CURETA GRACEY 13-14 CABO SILICONE VERMELHO; 600-233 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE AMARELO; 600-323 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-368 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-638 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE BEGE; 600-278 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE BRANCO; 600-413 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE LARANJA; 600-143 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE LILÁS; 600-098 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE PINK; 600-008 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE PRETO; 600-053 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE ROSA; 600-188 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE ROXO; 600-593 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE SALMÃO; 600-458 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE VERDE; 600-683 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-548 - CURETA GRACEY 15-16 CABO SILICONE VERMELHO; 600-234 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE AMARELO; 600-324 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-369 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-639 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE BEGE; 600-279 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE BRANCO; 600-414 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE LARANJA; 600-144 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE LILÁS; 600-099 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE PINK; 600-009 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE PRETO; 600-054 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE ROSA; 600-189 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE ROXO; 600-594 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE SALMÃO; 600-459 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE VERDE; 600-684 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-549 - CURETA GRACEY 17-18 CABO SILICONE VERMELHO; 600-235 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE AMARELO; 600-325 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-370 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-640 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE BEGE; 600-280 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE BRANCO; 600-415 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE LARANJA; 600-145 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE LILÁS; 600-100 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE PINK; 600-010 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE PRETO; 600-055 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE ROSA; 600-190 - CURETA GRACEY

3-4 CABO SILICONE ROXO; 600-595 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE SALMÃO; 600-460 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE VERDE; 600-685 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-550 - CURETA GRACEY 3-4 CABO SILICONE VERMELHO; 600-236 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE AMARELO; 600-326 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-371 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-641 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE BEGE; 600-281 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE BRANCO; 600-416 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE LARANJA; 600-146 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE LILÁS; 600-101 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE PINK; 600-011 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE PRETO; 600-056 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE ROSA; 600-191 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE ROXO; 600-596 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE SALMÃO; 600-461 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE VERDE; 600-686 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-551 - CURETA GRACEY 5-6 CABO SILICONE VERMELHO; 600-237 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE AMARELO; 600-327 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-372 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-642 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE BEGE; 600-282 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE BRANCO; 600-417 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE LARANJA; 600-147 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE LILÁS; 600-102 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE PINK; 600-012 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE PRETO; 600-057 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE ROSA; 600-192 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE ROXO; 600-597 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE SALMÃO; 600-462 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE VERDE; 600-687 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-552 - CURETA GRACEY 7-8 CABO SILICONE VERMELHO; 600-238 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE AMARELO; 600-328 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-373 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-643 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE BEGE; 600-283 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE BRANCO; 600-418 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE LARANJA; 600-148 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE LILÁS; 600-103 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE PINK; 600-013 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE PRETO; 600-058 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE ROSA; 600-193 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE ROXO; 600-598 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE SALMÃO; 600-463 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE VERDE; 600-688 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-553 - CURETA GRACEY 9-10 CABO SILICONE VERMELHO; 600-239 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE AMARELO; 600-329 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-374 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-644 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE BEGE; 600-284 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE BRANCO; 600-419 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE LARANJA; 600-149 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE LILÁS; 600-104 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE PINK; 600-014 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE PRETO; 600-059 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE ROSA; 600-194 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE ROXO; 600-599 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE SALMÃO; 600-464 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE VERDE; 600-689 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-554 - CURETA MCCALL 1-10 CABO SILICONE VERMELHO; 600-240 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE AMARELO; 600-330 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-375 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-645 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE BEGE; 600-285 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE BRANCO; 600-420 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE LARANJA; 600-150 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE LILÁS; 600-105 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE PINK; 600-015 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE PRETO; 600-060 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE ROSA; 600-195 - CURETA MCCALL 11-12 CABO

SILICONE ROXO; 600-600 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE SALMÃO; 600-465 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE VERDE; 600-690 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-555 - CURETA MCCALL 11-12 CABO SILICONE VERMELHO; 600-241 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE AMARELO; 600-331 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-376 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-646 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE BEGE; 600-286 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE BRANCO; 600-421 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE LARANJA; 600-151 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE LILÁS; 600-106 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE PINK; 600-016 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE PRETO; 600-061 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE ROSA; 600-196 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE ROXO; 600-601 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE SALMÃO; 600-466 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE VERDE; 600-691 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-556 - CURETA MCCALL 13-14 CABO SILICONE VERMELHO; 600-243 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE AMARELO; 600-333 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-378 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-648 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE BEGE; 600-288 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE BRANCO; 600-423 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE LARANJA; 600-153 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE LILÁS; 600-108 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE PINK; 600-018 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE PRETO; 600-063 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE ROSA; 600-198 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE ROXO; 600-603 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE SALMÃO; 600-468 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE VERDE; 600-693 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-558 - CURETA MCCALL 17-18 CABO SILICONE VERMELHO; 600-245 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE AMARELO; 600-335 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-380 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-650 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE BEGE; 600-290 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE BRANCO; 600-425 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE LARANJA; 600-155 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE LILÁS; 600-110 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE PINK; 600-020 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE PRETO; 600-065 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE ROSA; 600-200 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE ROXO; 600-605 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE SALMÃO; 600-470 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE VERDE; 600-695 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-560 - CURETA MCCALL 19-20 CABO SILICONE VERMELHO; 600-246 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE AMARELO; 600-336 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-381 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-651 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE BEGE; 600-291 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE BRANCO; 600-426 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE LARANJA; 600-156 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE LILÁS; 600-111 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE PINK; 600-021 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE PRETO; 600-066 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE ROSA; 600-201 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE ROXO; 600-606 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE SALMÃO; 600-471 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE VERDE; 600-696 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-561 - CURETA MCCALL 4-8 CABO SILICONE VERMELHO; 600-247 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE AMARELO; 600-337 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-382 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-652 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE BEGE; 600-292 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE BRANCO; 600-427 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE LARANJA; 600-157 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE LILÁS; 600-112 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE PINK; 600-022 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE PRETO; 600-067 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE ROSA; 600-202 - CURETA

MCCALL 7-9 CABO SILICONE ROXO; 600-607 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE SALMÃO; 600-472 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE VERDE; 600-697 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-562 - CURETA MCCALL 7-9 CABO SILICONE VERMELHO; 600-248 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE AMARELO; 600-338 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-383 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-653 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE BEGE; 600-293 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE BRANCO; 600-428 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE LARANJA; 600-158 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE LILÁS; 600-113 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE PINK; 600-023 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE PRETO; 600-068 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE ROSA; 600-203 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE ROXO; 600-608 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE SALMÃO; 600-473 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE VERDE; 600-698 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-563 - CURETA MINI FIVE 11-12 CABO SILICONE VERMELHO; 600-249 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE AMARELO; 600-339 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-384 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-654 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE BEGE; 600-294 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE BRANCO; 600-429 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE LARANJA; 600-159 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE LILÁS; 600-114 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE PINK; 600-024 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE PRETO; 600-069 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE ROSA; 600-204 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE ROXO; 600-609 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE SALMÃO; 600-474 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE VERDE; 600-699 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-564 - CURETA MINI FIVE 1-2 CABO SILICONE VERMELHO; 600-250 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE AMARELO; 600-340 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-385 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-655 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE BEGE; 600-295 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE BRANCO; 600-430 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE LARANJA; 600-160 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE LILÁS; 600-115 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE PINK; 600-025 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE PRETO; 600-070 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE ROSA; 600-205 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE ROXO; 600-610 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE SALMÃO; 600-475 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE VERDE; 600-700 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-565 - CURETA MINI FIVE 13-14 CABO SILICONE VERMELHO; 600-251 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE AMARELO; 600-341 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-386 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-656 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE BEGE; 600-296 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE BRANCO; 600-431 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE LARANJA; 600-161 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE LILÁS; 600-116 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE PINK; 600-026 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE PRETO; 600-071 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE ROSA; 600-206 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE ROXO; 600-611 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE SALMÃO; 600-476 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE VERDE; 600-701 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-566 - CURETA MINI FIVE 15-16 CABO SILICONE VERMELHO; 600-252 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE AMARELO; 600-342 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-387 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-657 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE BEGE; 600-297 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE BRANCO; 600-432 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE LARANJA; 600-162 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE LILÁS; 600-117 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE PINK; 600-027 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE PRETO;

600-072 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE ROSA; 600-207 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE ROXO; 600-612 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE SALMÃO; 600-477 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE VERDE; 600-702 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-567 - CURETA MINI FIVE 17-18 CABO SILICONE VERMELHO; 600-253 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE AMARELO; 600-343 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-388 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-658 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE BEGE; 600-298 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE BRANCO; 600-433 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE LARANJA; 600-163 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE LILÁS; 600-118 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE PINK; 600-028 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE PRETO; 600-073 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE ROSA; 600-208 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE ROXO; 600-613 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE SALMÃO; 600-478 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE VERDE; 600-703 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-568 - CURETA MINI FIVE 3-4 CABO SILICONE VERMELHO; 600-254 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE AMARELO; 600-344 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-389 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-659 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE BEGE; 600-299 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE BRANCO; 600-434 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE LARANJA; 600-164 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE LILÁS; 600-119 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE PINK; 600-029 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE PRETO; 600-074 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE ROSA; 600-209 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE ROXO; 600-614 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE SALMÃO; 600-479 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE VERDE; 600-704 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-569 - CURETA MINI FIVE 5-6 CABO SILICONE VERMELHO; 600-255 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE AMARELO; 600-345 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-390 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-660 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE BEGE; 600-300 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE BRANCO; 600-435 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE LARANJA; 600-165 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE LILÁS; 600-120 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE PINK; 600-030 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE PRETO; 600-075 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE ROSA; 600-210 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE ROXO; 600-615 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE SALMÃO; 600-480 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE VERDE; 600-705 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-570 - CURETA MINI FIVE 7-8 CABO SILICONE VERMELHO; 600-256 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE AMARELO; 600-346 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-391 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-661 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE BEGE; 600-301 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE BRANCO; 600-436 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE LARANJA; 600-166 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE LILÁS; 600-121 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE PINK; 600-031 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE PRETO; 600-076 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE ROSA; 600-211 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE ROXO; 600-616 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE SALMÃO; 600-481 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE VERDE; 600-706 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-571 - CURETA MINI FIVE 9-10 CABO SILICONE VERMELHO; 600-258 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE AMARELO; 600-348 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-393 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-663 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE BEGE; 600-303 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE BRANCO; 600-438 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE LARANJA; 600-168 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE LILÁS; 600-123 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE PINK; 600-033 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE PRETO;

600-078 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE ROSA; 600-213 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE ROXO; 600-618 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE SALMÃO; 600-483 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE VERDE; 600-708 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-573 - CURETA PERIO 0-0 CABO SILICONE VERMELHO; 600-259 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE AMARELO; 600-349 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-394 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-664 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE BEGE; 600-304 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE BRANCO; 600-439 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE LARANJA; 600-169 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE LILÁS; 600-124 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE PINK; 600-034 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE PRETO; 600-079 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE ROSA; 600-214 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE ROXO; 600-619 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE SALMÃO; 600-484 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE VERDE; 600-709 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-574 - CURETA PERIO 1-0 CABO SILICONE VERMELHO; 600-260 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE AMARELO; 600-350 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-395 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-665 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE BEGE; 600-305 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE BRANCO; 600-440 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE LARANJA; 600-170 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE LILÁS; 600-125 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE PINK; 600-035 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE PRETO; 600-080 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE ROSA; 600-215 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE ROXO; 600-620 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE SALMÃO; 600-485 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE VERDE; 600-710 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-575 - CURETA PERIO 204S SCALER CABO SILICONE VERMELHO; 600-261 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE AMARELO; 600-351 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-396 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-666 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE BEGE; 600-306 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE BRANCO; 600-441 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE LARANJA; 600-171 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE LILÁS; 600-126 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE PINK; 600-036 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE PRETO; 600-081 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE ROSA; 600-216 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE ROXO; 600-621 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE SALMÃO; 600-486 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE VERDE; 600-711 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-576 - CURETA PERIO 21 CABO SILICONE VERMELHO; 600-263 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE AMARELO; 600-353 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-398 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-668 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE BEGE; 600-308 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE BRANCO; 600-443 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE LARANJA; 600-173 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE LILÁS; 600-128 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE PINK; 600-038 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE PRETO; 600-083 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE ROSA; 600-218 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE ROXO; 600-623 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE SALMÃO; 600-488 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE VERDE; 600-713 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-578 - CURETA PERIO 34-35 CABO SILICONE VERMELHO; 600-265 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE AMARELO; 600-355 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-400 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-670 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE BEGE; 600-310 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE BRANCO; 600-445 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE LARANJA; 600-175 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE LILÁS; 600-130 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE PINK; 600-040 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE PRETO; 600-085 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE ROSA; 600-220 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO

SILICONE ROXO; 600-625 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE SALMÃO; 600-490 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE VERDE; 600-715 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-580 - CURETA PERIO SH 5-33 CABO SILICONE VERMELHO; 600-266 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE AMARELO; 600-356 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-401 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-671 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE BEGE; 600-311 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE BRANCO; 600-446 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE LARANJA; 600-176 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE LILÁS; 600-131 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE PINK; 600-041 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE PRETO; 600-086 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE ROSA; 600-221 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE ROXO; 600-626 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE SALMÃO; 600-491 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE VERDE; 600-716 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-581 - CURETA PL 1-2 FURCA CABO SILICONE VERMELHO; 600-267 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE AMARELO; 600-357 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-402 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-672 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE BEGE; 600-312 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE BRANCO; 600-447 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE LARANJA; 600-177 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE LILÁS; 600-132 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE PINK; 600-042 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE PRETO; 600-087 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE ROSA; 600-222 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE ROXO; 600-627 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE SALMÃO; 600-492 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE VERDE; 600-717 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-582 - CURETA PL 3-4 FURCA CABO SILICONE VERMELHO; 600-268 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE AMARELO; 600-358 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-403 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-673 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE BEGE; 600-313 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE BRANCO; 600-448 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE LARANJA; 600-178 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE LILÁS; 600-133 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE PINK; 600-043 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE PRETO; 600-088 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE ROSA; 600-223 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE ROXO; 600-628 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE SALMÃO; 600-493 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE VERDE; 600-718 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-583 - CURETA PL 5-6 FURCA CABO SILICONE VERMELHO; 600-269 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE AMARELO; 600-359 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-404 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-674 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE BEGE; 600-314 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE BRANCO; 600-449 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE LARANJA; 600-179 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE LILÁS; 600-134 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE PINK; 600-044 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE PRETO; 600-089 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE ROSA; 600-224 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE ROXO; 600-629 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE SALMÃO; 600-494 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE VERDE; 600-719 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-584 - CURETA PL 7-8 FURCA CABO SILICONE VERMELHO; 600-270 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE AMARELO; 600-360 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE AZUL CLARO; 600-405 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 600-675 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE BEGE; 600-315 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE BRANCO; 600-450 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE LARANJA; 600-180 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE LILÁS; 600-135 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE PINK; 600-045 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE PRETO; 600-090 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE ROSA; 600-225 - CURETA WS 14-15 CABO

SILICONE ROXO; 600-630 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE SALMÃO; 600-495 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE VERDE; 600-720 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 600-585 - CURETA WS 14-15 CABO SILICONE VERMELHO; 800-646 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE AMARELO; 800-704 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-733 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-907 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE BEGE; 800-675 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE BRANCO; 800-762 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE LARANJA; 800-587 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE LILÁS; 800-558 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE PINK; 800-500 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE PRETO; 800-529 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE ROSA; 800-617 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE ROXO; 800-878 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE SALMÃO; 800-791 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE VERDE; 800-936 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-849 - DESCOLADOR 24G CABO SILICONE VERMELHO; 800-647 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE AMARELO; 800-705 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-734 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-908 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE BEGE; 800-676 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE BRANCO; 800-763 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE LARANJA; 800-588 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE LILÁS; 800-559 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE PINK; 800-501 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE PRETO; 800-530 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE ROSA; 800-618 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE ROXO; 800-879 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE SALMÃO; 800-792 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE VERDE; 800-937 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-850 - DESCOLADOR BUSER 1 CABO SILICONE VERMELHO; 800-648 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE AMARELO; 800-706 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-735 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-909 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE BEGE; 800-677 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE BRANCO; 800-764 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE LARANJA; 800-589 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE LILÁS; 800-560 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE PINK; 800-502 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE PRETO; 800-531 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE ROSA; 800-619 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE ROXO; 800-880 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-793 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE VERDE; 800-938 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-851 - DESCOLADOR BUSER 2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-649 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE AMARELO; 800-707 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-736 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-910 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE BEGE; 800-678 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE BRANCO; 800-765 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE LARANJA; 800-590 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE LILÁS; 800-561 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE PINK; 800-503 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE PRETO; 800-532 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE ROSA; 800-620 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE ROXO; 800-881 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE SALMÃO; 800-794 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE VERDE; 800-939 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-852 - DESCOLADOR DISSECTOR CABO SILICONE VERMELHO; 800-650 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE AMARELO; 800-708 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-737 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-911 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE BEGE; 800-679 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE BRANCO; 800-766 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE LARANJA; 800-591 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE LILÁS; 800-562 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE PINK; 800-504 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE PRETO; 800-533 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE ROSA; 800-621 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE ROXO; 800-882 - DESCOLADOR FREER CABO

SILICONE SALMÃO; 800-795 - DESCOLADOR FREER CABO SILICONE VERDE; 800-940 -
DESCOLADOR FREER CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-853 - DESCOLADOR FREER CABO
SILICONE VERMELHO; 800-651 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE AMARELO; 800-
709 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-738 - DESCOLADOR
GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-912 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14
CABO SILICONE BEGE; 800-680 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE BRANCO; 800-
767 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE LARANJA; 800-592 - DESCOLADOR
GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE LILÁS; 800-563 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO
SILICONE PINK; 800-505 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE PRETO; 800-534 -
DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE ROSA; 800-622 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX
14 CABO SILICONE ROXO; 800-883 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE SALMÃO;
800-796 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE VERDE; 800-941 - DESCOLADOR
GOLDMAN FOX 14 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-854 - DESCOLADOR GOLDMAN FOX 14
CABO SILICONE VERMELHO; 800-652 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE
AMARELO; 800-710 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-739 -
DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-913 - DESCOLADOR MOLT 2-
4 BOLINHA CABO SILICONE BEGE; 800-681 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE
BRANCO; 800-768 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE LARANJA; 800-593 -
DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE LILÁS; 800-564 - DESCOLADOR MOLT 2-4
BOLINHA CABO SILICONE PINK; 800-506 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE
PRETO; 800-535 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE ROSA; 800-623 -
DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE ROXO; 800-884 - DESCOLADOR MOLT 2-4
BOLINHA CABO SILICONE SALMÃO; 800-797 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE
VERDE; 800-942 - DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-855 -
DESCOLADOR MOLT 2-4 BOLINHA CABO SILICONE VERMELHO; 800-653 - DESCOLADOR MOLT 9
CABO SILICONE AMARELO; 800-711 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-740
- DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-914 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO
SILICONE BEGE; 800-682 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE BRANCO; 800-769 -
DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE LARANJA; 800-594 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE
LILÁS; 800-565 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE PINK; 800-507 - DESCOLADOR MOLT 9
CABO SILICONE PRETO; 800-536 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE ROSA; 800-624 -
DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE ROXO; 800-885 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE
SALMÃO; 800-798 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE VERDE; 800-943 - DESCOLADOR MOLT 9
CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-856 - DESCOLADOR MOLT 9 CABO SILICONE VERMELHO; 800-
655 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE AMARELO; 800-713 - DESCOLADOR PRICHARD
CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-742 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE AZUL ESCURO;
800-916 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE BEGE; 800-684 - DESCOLADOR PRICHARD
CABO SILICONE BRANCO; 800-771 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE LARANJA; 800-596 -
DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE LILÁS; 800-567 - DESCOLADOR PRICHARD CABO
SILICONE PINK; 800-509 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE PRETO; 800-538 -
DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE ROSA; 800-626 - DESCOLADOR PRICHARD CABO
SILICONE ROXO; 800-887 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE SALMÃO; 800-800 -
DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE VERDE; 800-945 - DESCOLADOR PRICHARD CABO
SILICONE VERDE LIMÃO; 800-858 - DESCOLADOR PRICHARD CABO SILICONE VERMELHO; 800-657
- GENGVOTOMO BUCK CABO SILICONE AMARELO; 800-715 - GENGVOTOMO BUCK CABO
SILICONE AZUL CLARO; 800-744 - GENGVOTOMO BUCK CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-918 -
GENGVOTOMO BUCK CABO SILICONE BEGE; 800-686 - GENGVOTOMO BUCK CABO

SILICONE BRANCO; 800-773 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE LARANJA; 800-598 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE LILÁS; 800-569 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE PINK; 800-511 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE PRETO; 800-540 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE ROSA; 800-628 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE ROXO; 800-889 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE SALMÃO; 800-802 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE VERDE; 800-947 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-860 - GENGIVOTOMO BUCK CABO SILICONE VERMELHO; 800-658 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE AMARELO; 800-716 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-745 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-919 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE BEGE; 800-687 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE BRANCO; 800-774 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE LARANJA; 800-599 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE LILÁS; 800-570 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE PINK; 800-512 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE PRETO; 800-541 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROSA; 800-629 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROXO; 800-890 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE SALMÃO; 800-803 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE; 800-948 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-861 - GENGIVOTOMO GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERMELHO; 800-659 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE AMARELO; 800-717 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-746 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-920 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE BEGE; 800-688 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE BRANCO; 800-775 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE LARANJA; 800-600 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE LILÁS; 800-571 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE PINK; 800-513 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE PRETO; 800-542 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE ROSA; 800-630 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE ROXO; 800-891 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE SALMÃO; 800-804 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE VERDE; 800-949 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-862 - GENGIVOTOMO KIRKLAND 15-16 CABO SILICONE VERMELHO; 800-660 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE AMARELO; 800-718 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-747 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-921 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE BEGE; 800-689 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE BRANCO; 800-776 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE LARANJA; 800-601 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE LILÁS; 800-572 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE PINK; 800-514 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE PRETO; 800-543 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE ROSA; 800-631 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE ROXO; 800-892 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-805 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE VERDE; 800-950 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-863 - GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-661 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE AMARELO; 800-719 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-748 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-922 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE BEGE; 800-690 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE BRANCO; 800-777 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE LARANJA; 800-602 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE LILÁS; 800-573 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE PINK; 800-515 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE PRETO; 800-544 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE ROSA; 800-632 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE ROXO; 800-893 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE SALMÃO; 800-806 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE VERDE; 800-951 - LIMA BUCK 11-12 CABO

SILICONE VERDE LIMÃO; 800-864 - LIMA BUCK 11-12 CABO SILICONE VERMELHO; 800-662 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE AMARELO; 800-720 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-749 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-923 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE BEGE; 800-691 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE BRANCO; 800-778 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE LARANJA; 800-603 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE LILÁS; 800-574 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE PINK; 800-516 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE PRETO; 800-545 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE ROSA; 800-633 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE ROXO; 800-894 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE SALMÃO; 800-807 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE VERDE; 800-952 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-865 - LIMA BUCK PHD CABO SILICONE VERMELHO; 800-663 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE AMARELO; 800-721 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-750 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-924 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE BEGE; 800-692 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE BRANCO; 800-779 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE LARANJA; 800-604 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE LILÁS; 800-575 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE PINK; 800-517 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE PRETO; 800-546 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE ROSA; 800-634 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE ROXO; 800-895 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE SALMÃO; 800-808 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE VERDE; 800-953 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-866 - LIMA DUNLOP 1-2 CABO SILICONE VERMELHO; 800-664 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE AMARELO; 800-722 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-751 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-925 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE BEGE; 800-693 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE BRANCO; 800-780 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE LARANJA; 800-605 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE LILÁS; 800-576 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE PINK; 800-518 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE PRETO; 800-547 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE ROSA; 800-635 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE ROXO; 800-896 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE SALMÃO; 800-809 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE VERDE; 800-954 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-867 - LIMA DUNLOP 2-2A CABO SILICONE VERMELHO; 800-665 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE AMARELO; 800-723 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-752 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-926 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE BEGE; 800-694 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE BRANCO; 800-781 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE LARANJA; 800-606 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE LILÁS; 800-577 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE PINK; 800-519 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE PRETO; 800-548 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE ROSA; 800-636 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE ROXO; 800-897 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE SALMÃO; 800-810 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE VERDE; 800-955 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-868 - LIMA DUNLOP 2-5F CABO SILICONE VERMELHO; 800-667 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE AMARELO; 800-725 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-754 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-928 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE BEGE; 800-696 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE BRANCO; 800-783 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE LARANJA; 800-608 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE LILÁS; 800-579 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE PINK; 800-521 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE PRETO; 800-550 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE ROSA; 800-638 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE ROXO; 800-899 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE SALMÃO; 800-812 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE VERDE; 800-957 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-870 - LIMA DUNLOP 3-7 CABO SILICONE VERMELHO; 800-668 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE AMARELO; 800-726 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-755 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-929 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE BEGE;

800-697 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE BRANCO; 800-784 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE LARANJA; 800-609 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE LILÁS; 800-580 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE PINK; 800-522 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE PRETO; 800-551 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE ROSA; 800-639 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE ROXO; 800-900 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE SALMÃO; 800-813 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE VERDE; 800-958 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-871 - LIMA DUNLOP 4-5 CABO SILICONE VERMELHO; 800-669 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE AMARELO; 800-727 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-756 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-930 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE BEGE; 800-698 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE BRANCO; 800-785 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE LARANJA; 800-610 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE LILÁS; 800-581 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE PINK; 800-523 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE PRETO; 800-552 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE ROSA; 800-640 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE ROXO; 800-901 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE SALMÃO; 800-814 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE VERDE; 800-959 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-872 - LIMA HIRSCHFELD 10H-11F CABO SILICONE VERMELHO; 800-670 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE AMARELO; 800-728 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-757 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-931 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE BEGE; 800-699 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE BRANCO; 800-786 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE LARANJA; 800-611 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE LILÁS; 800-582 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE PINK; 800-524 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE PRETO; 800-553 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE ROSA; 800-641 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE ROXO; 800-902 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE SALMÃO; 800-815 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE VERDE; 800-960 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-873 - LIMA HIRSCHFELD 3-7 CABO SILICONE VERMELHO; 800-671 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE AMARELO; 800-729 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-758 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-932 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE BEGE; 800-700 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE BRANCO; 800-787 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE LARANJA; 800-612 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE LILÁS; 800-583 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE PINK; 800-525 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE PRETO; 800-554 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE ROSA; 800-642 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE ROXO; 800-903 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE SALMÃO; 800-816 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE VERDE; 800-961 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-874 - LIMA HIRSCHFELD 5-11 CABO SILICONE VERMELHO; 800-672 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE AMARELO; 800-730 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-759 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-933 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE BEGE; 800-701 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE BRANCO; 800-788 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE LARANJA; 800-613 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE LILÁS; 800-584 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE PINK; 800-526 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE PRETO; 800-555 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE ROSA; 800-643 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE ROXO; 800-904 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE SALMÃO; 800-817 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE VERDE; 800-962 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-875 - LIMA HIRSCHFELD 9-10 CABO SILICONE VERMELHO; 800-673 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE AMARELO; 800-731 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-760 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-934 -

LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE BEGE; 800-702 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE BRANCO; 800-789 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE LARANJA; 800-614 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE LILÁS; 800-585 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE PINK; 800-527 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE PRETO; 800-556 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE ROSA; 800-644 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE ROXO; 800-905 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE SALMÃO; 800-818 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE VERDE; 800-963 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-876 - LIMA SCHLUGER 9-10 CABO SILICONE VERMELHO; 800-674 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE AMARELO; 800-732 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE AZUL CLARO; 800-761 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE AZUL ESCURO; 800-935 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE BEGE; 800-703 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE BRANCO; 800-790 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE LARANJA; 800-615 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE LILÁS; 800-586 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE PINK; 800-528 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE PRETO; 800-557 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE ROSA; 800-645 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE ROXO; 800-906 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE SALMÃO; 800-819 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE VERDE; 800-964 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 800-877 - LIMA SCHLUGER PHD CABO SILICONE VERMELHO; 500-432 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE AMARELO; 500-440 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE AZUL CLARO; 500-444 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 500-468 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE BEGE; 500-436 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE BRANCO; 500-448 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE LARANJA; 500-424 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE LILÁS; 500-420 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE PINK; 500-412 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE PRETO; 500-416 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE ROSA; 500-428 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE ROXO; 500-464 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE SALMÃO; 500-452 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE VERDE; 500-472 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 500-460 - SONDA EXPLORADORA 5 CABO SILICONE VERMELHO; 500-433 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE AMARELO; 500-441 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE AZUL CLARO; 500-445 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 500-469 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE BEGE; 500-437 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE BRANCO; 500-449 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE LARANJA; 500-425 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE LILÁS; 500-421 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE PINK; 500-413 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE PRETO; 500-417 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE ROSA; 500-429 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE ROXO; 500-465 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE SALMÃO; 500-453 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE VERDE; 500-473 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 500-461 - SONDA EXPLORADORA 6 CABO SILICONE VERMELHO; 500-434 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE AMARELO; 500-442 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE AZUL CLARO; 500-446 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 500-470 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE BEGE; 500-438 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE BRANCO; 500-450 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE LARANJA; 500-426 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE LILÁS; 500-422 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE PINK; 500-414 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE PRETO; 500-418 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE ROSA; 500-430 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE ROXO; 500-466 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE SALMÃO; 500-454 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE VERDE; 500-474 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 500-462 - SONDA EXPLORADORA 7 CABO SILICONE VERMELHO; 700-116 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE AMARELO;

700-162 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-185 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-323 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE BEGE; 700-139 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE BRANCO; 700-208 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE LARANJA; 700-070 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE LILÁS; 700-047 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE PINK; 700-001 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE PRETO; 700-024 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE ROSA; 700-093 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE ROXO; 700-300 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE SALMÃO; 700-231 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE VERDE; 700-346 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-277 - SONDA MILIMETRADA 23 WILLIAMS CABO SILICONE VERMELHO; 700-117 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE AMARELO; 700-163 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-186 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-324 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE BEGE; 700-140 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE BRANCO; 700-209 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE LARANJA; 700-071 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE LILÁS; 700-048 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE PINK; 700-002 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE PRETO; 700-025 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE ROSA; 700-094 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE ROXO; 700-301 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE SALMÃO; 700-232 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE VERDE; 700-347 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-278 - SONDA MILIMETRADA 26G GLICKMAN CABO SILICONE VERMELHO; 700-118 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE AMARELO; 700-164 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-187 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-325 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE BEGE; 700-141 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE BRANCO; 700-210 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE LARANJA; 700-072 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE LILÁS; 700-049 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE PINK; 700-003 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE PRETO; 700-026 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE ROSA; 700-095 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE ROXO; 700-302 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE SALMÃO; 700-233 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE VERDE; 700-348 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-279 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR CABO SILICONE VERMELHO; 700-119 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE AMARELO; 700-165 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-188 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-326 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE BEGE; 700-142 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE BRANCO; 700-211 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE LARANJA; 700-073 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE LILÁS; 700-050 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE PINK; 700-004 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE PRETO; 700-027 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE ROSA; 700-096 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE ROXO; 700-303 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE SALMÃO; 700-234 - SONDA MILIMETRADA COM

EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE VERDE; 700-349 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-280 - SONDA MILIMETRADA COM EXPLORADOR PCP15 CABO SILICONE VERMELHO; 700-120 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE AMARELO; 700-166 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-189 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-327 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE BEGE; 700-143 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE BRANCO; 700-212 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE LARANJA; 700-074 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE LILÁS; 700-051 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE PINK; 700-005 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE PRETO; 700-028 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE ROSA; 700-097 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE ROXO; 700-304 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE SALMÃO; 700-235 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE VERDE; 700-350 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-281 - SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO SILICONE VERMELHO; 700-121 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE AMARELO; 700-167 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-190 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-328 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE BEGE; 700-144 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE BRANCO; 700-213 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE LARANJA; 700-075 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE LILÁS; 700-052 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE PINK; 700-006 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE PRETO; 700-029 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE ROSA; 700-098 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE ROXO; 700-305 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE SALMÃO; 700-236 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE VERDE; 700-351 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-282 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GLICKMAN CABO SILICONE VERMELHO; 700-122 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AMARELO; 700-168 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-191 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-329 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE BEGE; 700-145 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE BRANCO; 700-214 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE LARANJA; 700-076 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE LILÁS; 700-053 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE PINK; 700-007 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE PRETO; 700-030 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROSA; 700-099 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROXO; 700-306 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE SALMÃO; 700-237 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE; 700-352 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-283 - SONDA MILIMETRADA DUPLA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERMELHO; 700-123 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE AMARELO; 700-169 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-192 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-330 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE BEGE; 700-146 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE BRANCO; 700-215 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE LARANJA; 700-077 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE LILÁS; 700-054 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE PINK; 700-008 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE PRETO; 700-031 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE ROSA; 700-100 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE ROXO; 700-307 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE SALMÃO; 700-238 - SONDA

MILIMETRADA FOA CABO SILICONE VERDE; 700-353 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-284 - SONDA MILIMETRADA FOA CABO SILICONE VERMELHO; 700-124 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE AMARELO; 700-170 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-193 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-331 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE BEGE; 700-147 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE BRANCO; 700-216 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE LARANJA; 700-078 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE LILÁS; 700-055 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE PINK; 700-009 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE PRETO; 700-032 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE ROSA; 700-101 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE ROXO; 700-308 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE SALMÃO; 700-239 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE VERDE; 700-354 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-285 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN CABO SILICONE VERMELHO; 700-125 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AMARELO; 700-171 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-194 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-332 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE BEGE; 700-148 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE BRANCO; 700-217 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE LARANJA; 700-079 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE LILÁS; 700-056 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE PINK; 700-010 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE PRETO; 700-033 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE ROSA; 700-102 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE ROXO; 700-309 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE SALMÃO; 700-240 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERDE; 700-355 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-286 - SONDA MILIMETRADA GLICKMAN COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERMELHO; 700-126 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AMARELO; 700-172 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-195 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-333 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE BEGE; 700-149 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE BRANCO; 700-218 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE LARANJA; 700-080 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE LILÁS; 700-057 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE PINK; 700-011 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE PRETO; 700-034 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROSA; 700-103 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE ROXO; 700-310 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE SALMÃO; 700-241 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE; 700-356 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-287 - SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX CABO SILICONE VERMELHO; 700-127 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE AMARELO; 700-173 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-196 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-334 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE BEGE; 700-150 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE BRANCO; 700-219 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE LARANJA; 700-081 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE LILÁS; 700-058 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE PINK; 700-012 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE PRETO; 700-035 -

SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE ROSA; 700-104 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE ROXO; 700-311 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE SALMÃO; 700-242 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE VERDE; 700-357 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-288 - SONDA MILIMETRADA MACEIO CABO SILICONE VERMELHO; 700-128 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE AMARELO; 700-174 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-197 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-335 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE BEGE; 700-151 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE BRANCO; 700-220 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE LARANJA; 700-082 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE LILÁS; 700-059 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE PINK; 700-013 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE PRETO; 700-036 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE ROSA; 700-105 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE ROXO; 700-312 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE SALMÃO; 700-243 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE VERDE; 700-358 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-289 - SONDA MILIMETRADA MICHIGAN 23 CABO SILICONE VERMELHO; 700-129 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE AMARELO; 700-175 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-198 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-336 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE BEGE; 700-152 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE BRANCO; 700-221 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE LARANJA; 700-083 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE LILÁS; 700-060 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE PINK; 700-014 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE PRETO; 700-037 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE ROSA; 700-106 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE ROXO; 700-313 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE SALMÃO; 700-244 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE VERDE; 700-359 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-290 - SONDA MILIMETRADA NABERS 2N CABO SILICONE VERMELHO; 700-130 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE AMARELO; 700-176 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-199 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-337 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE BEGE; 700-153 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE BRANCO; 700-222 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE LARANJA; 700-084 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE LILÁS; 700-061 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE PINK; 700-015 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE PRETO; 700-038 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE ROSA; 700-107 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE ROXO; 700-314 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE SALMÃO; 700-245 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE VERDE; 700-360 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-291 - SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA CPUNC 15 CABO SILICONE VERMELHO; 700-131 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE AMARELO; 700-177 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-200 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-338 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE BEGE; 700-154 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE BRANCO; 700-223 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE LARANJA; 700-085 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE LILÁS; 700-062 -

SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE PINK; 700-016 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE PRETO; 700-039 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE ROSA; 700-108 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE ROXO; 700-315 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE SALMÃO; 700-246 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE VERDE; 700-361 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-292 - SONDA MILIMETRADA OMS CABO SILICONE VERMELHO; 700-132 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AMARELO; 700-178 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-201 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-339 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE BEGE; 700-155 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE BRANCO; 700-224 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE LARANJA; 700-086 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE LILÁS; 700-063 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE PINK; 700-017 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE PRETO; 700-040 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE ROSA; 700-109 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE ROXO; 700-316 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE SALMÃO; 700-247 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERDE; 700-362 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-293 - SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA CABO SILICONE VERMELHO; 700-133 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE AMARELO; 700-179 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-202 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-340 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE BEGE; 700-156 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE BRANCO; 700-225 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE LARANJA; 700-087 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE LILÁS; 700-064 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE PINK; 700-018 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE PRETO; 700-041 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE ROSA; 700-110 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE ROXO; 700-317 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE SALMÃO; 700-248 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE VERDE; 700-363 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-294 - SONDA MILIMETRADA OMS COM PCP12 CABO SILICONE VERMELHO; 700-134 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE AMARELO; 700-180 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-203 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-341 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE BEGE; 700-157 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE BRANCO; 700-226 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE LARANJA; 700-088 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE LILÁS; 700-065 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE PINK; 700-019 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE PRETO; 700-042 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE ROSA; 700-111 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE ROXO; 700-318 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE SALMÃO; 700-249 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE VERDE; 700-364 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-295 - SONDA MILIMETRADA PCP10 CABO SILICONE VERMELHO; 700-135 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE AMARELO; 700-181 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-204 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-342 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE BEGE; 700-158 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE BRANCO; 700-227 -

SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE LARANJA; 700-089 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE LILÁS; 700-066 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE PINK; 700-020 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE PRETO; 700-043 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE ROSA; 700-112 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE ROXO; 700-319 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE SALMÃO; 700-250 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE VERDE; 700-365 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-296 - SONDA MILIMETRADA PCP12 CABO SILICONE VERMELHO; 700-136 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE AMARELO; 700-182 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-205 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-343 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE BEGE; 700-159 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE BRANCO; 700-228 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE LARANJA; 700-090 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE LILÁS; 700-067 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE PINK; 700-021 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE PRETO; 700-044 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE ROSA; 700-113 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE ROXO; 700-320 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE SALMÃO; 700-251 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE VERDE; 700-366 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-297 - SONDA MILIMETRADA SIMPLES CABO SILICONE VERMELHO; 700-137 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE AMARELO; 700-183 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-206 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-344 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE BEGE; 700-160 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE BRANCO; 700-229 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE LARANJA; 700-091 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE LILÁS; 700-068 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE PINK; 700-022 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE PRETO; 700-045 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE ROSA; 700-114 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE ROXO; 700-321 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE SALMÃO; 700-252 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE VERDE; 700-367 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-298 - SONDA MILIMETRADA WILLIAMS CABO SILICONE VERMELHO; 700-138 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE AMARELO; 700-184 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE AZUL CLARO; 700-207 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE AZUL ESCURO; 700-345 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE BEGE; 700-161 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE BRANCO; 700-230 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE LARANJA; 700-092 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE LILÁS; 700-069 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE PINK; 700-023 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE PRETO; 700-046 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE ROSA; 700-115 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE ROXO; 700-322 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE SALMÃO; 700-253 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE VERDE; 700-368 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE VERDE LIMÃO; 700-299 - SONDA MILIMETRADA WM CABO SILICONE VERMELHO; 800-656 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ AMARELO; 800-714 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ AZUL CLARO; 800-743 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ AZUL ESCURO; 800-917 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ BEGE; 800-685 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ BRANCO; 800-772 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ LARANJA; 800-597 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ LILÁS; 800-568 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ PINK; 800-510 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ PRETO; 800-539 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ ROSA; 800-627 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ ROXO; 800-888 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ SALMÃO; 800-801 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ VERDE; 800-946 - DESCOLADOR HOURIGAN PHZ VERDE LIMÃO; 800-859 - DESCOLADOR

HOURIGAN PHZ VERMELHO; 800-654 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS AMARELO; 800-712 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS AZUL CLARO; 800-741 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS AZUL ESCURO; 800-915 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS BEGE; 800-683 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS BRANCO; 800-770 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS LARANJA; 800-595 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS LILÁS; 800-566 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS PINK; 800-508 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS PRETO; 800-537 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS ROSA; 800-625 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS ROXO; 800-886 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS SALMÃO; 800-799 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS VERDE; 800-944 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS VERDE LIMÃO; 800-857 - DESCOLADOR KRAMER NEVINS VERMELHO; 800-820 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM AMARELO; 800-821 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM AZUL CLARO; 800-822 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM AZUL ESCURO; 800-823 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM BEGE; 800-824 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM BRANCO; 800-825 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM LARANJA; 800-826 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM LILÁS; 800-827 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM PINK; 800-828 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM PRETO; 800-829 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM ROSA; 800-830 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM ROXO; 800-831 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM SALMÃO; 800-832 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM VERDE; 800-833 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM VERDE LIMÃO; 800-834 - DESCOLADOR MICRO FREER MILLENNIUM VERMELHO; 800-835 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR AMARELO; 800-836 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR AZUL CLARO; 800-837 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR AZUL ESCURO; 800-838 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR BEGE; 800-839 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR BRANCO; 800-840 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR LARANJA; 800-841 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR LILÁS; 800-842 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR PINK; 800-843 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR PRETO; 800-844 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR ROSA; 800-845 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR ROXO; 800-846 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR SALMÃO; 800-847 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR VERDE; 800-848 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR VERDE LIMÃO; 800-869 - DESCOLADOR MICRO RETRATOR VERMELHO

4. Indicação de Uso/Finalidade

Os Instrumentos, devidamente montados e concebidos para a finalidade (intervenção e apoio cirúrgico e odontológico, exames e procedimentos laboratoriais) cujas propriedades mecânicas, condizem com a sua finalidade e cujos nomes/nomenclaturas determinam padrões, tais como a descrição das medidas, o nome de seu inventor ou um composto científico relacionado ao tipo de cirurgia.

5. Modo de Uso do Produto

5.1 Instruções

O produto é um material de uso permanente, não estéril, portanto deverá ser esterilizado antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos. Após ser utilizado o produto deverá ser lavado e secado imediatamente.

5.2 Utilização

A utilização dos instrumentos descritos nesse processo deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita aos ambientes clínicos e hospitalares, com os seguintes cuidados:

Manuseio e movimentação:

Os instrumentos devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção técnica, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

Inspeção Técnica:

Todos os instrumentos da família, antes de serem disponibilizados para uso, devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado, objetivando a verificação da sua integridade. O instrumental reprovado deve ser separado para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinado para descarte.

Limpeza:

Os instrumentos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados. Em hipótese alguma utilize palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo quando utilizado o saponáceo para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Esterilização:

Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

NOTA: Todo o instrumental deve ser lavado imediatamente após sua utilização e antes que as secreções ou sangue possam secar. Aqueles que puderem devem ser lavados e desmontados.

5.3 Reutilização

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, cinco etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue e a secagem.

Limpeza prévia:

Para limpeza do instrumento, usar somente sabão neutro a 1% ou detergente enzimático neutro. Não usar solução química, por ser corrosiva.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Os instrumentais devem ser introduzidos abertos ou desmontados, quando pertinente.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo quando utilizado com saponáceos, para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microrganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do material, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

O instrumental deve ser mergulhado aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação:

É feita através da imersão do instrumental aberto ou desmontado, quando pertinente, em um

recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem:

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias. O instrumental, quando pertinente, deve ser desmontado e cada componente lavado isoladamente. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágue:

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

Inspeção e lubrificação:

Após o enxágue, deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de quaisquer sujidades ou outros resíduos.

O instrumental deve lubrificado, utilizando-se de óleo mineral não pegajoso, isento de silicone e solúvel em água (hidrosolúvel), que suporte autoclavagem.

Recomenda-se que, quando pertinente, sejam seguidas as instruções do fabricante do lubrificante.

5.4 Descarte

Quando da necessidade de se descartar o instrumental, o mesmo deve ser inutilizado imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais, deve-se seguir os procedimentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

5.5 Manutenção e conservação

5.5.1 Examine o instrumento antes do uso. NUNCA o utilize em caso de defeito, presumido ou aparente.

5.5.2 Em qualquer tipo de água há concentração de sais. Mesmo em uma água considerada

potável, existe a possibilidade de concentração de certos elementos químicos que poderão danificar os instrumentos.

5.5.3 Se na água houver alguma concentração de Ferro, Cobre, Manganês, Magnésio ou Silício poderá haver a formação de manchas com cores diversas: marrom, azul ou arco-íris. Nesse caso não se trata de corrosão, mas sim de manchas.

5.5.4 Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão.

5.5.5 Não armazenar o instrumental perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos, a saber: Cloro, Iodo e Ácidos em geral.

5.5.6 Cada instrumento foi criado e desenvolvido para executar uma determinada função, portanto, ele não deve ser utilizado fora dessas condições. Os instrumentos utilizados fora das suas condições normais de trabalho podem quebrar ou ter a sua vida útil reduzida.

5.6 Método de esterilização

Produto não Estéril, a esterilização é executada nos hospitais, clínicas e consultórios, cujo o processo mais utilizado é por auto clave nas seguintes temperaturas:

Temperatura (°C)	Tempo (min)
121 (1,0 atm)	20
126 (1,4 atm)	10
134 (2,0 atm)	3

O aquecimento e o esfriamento dos instrumentais provocam dilatações e contrações.

Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual, a qual poderá apresentar manchas e/ou corrosão no instrumental.

O produto após esterilizado deve ser armazenado em sua embalagem não violável, seguindo os cuidados básicos de armazenagem.

5.7 Condições de armazenamento

O instrumental deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e evitando danificação da embalagem. O indicado é armazenar em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Devem ser evitados riscos, dobras ou

entalhes dos instrumentos cirúrgicos, visto que tais fatores aumentam a possibilidade de corrosão dos produtos.

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação dos instrumentos devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos para saúde.

5.8 Condições para o transporte

Os instrumentais devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração de suas características físicas ou qualquer deterioração da embalagem. Não são aplicáveis parâmetros específicos de temperatura e umidade.

É recomendado que o responsável pelo transporte evite choques mecânicos.

5.9 Condições de Manipulação

Os instrumentos devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção prévia, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

5.10 Advertências

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para finalidades diferentes, podem prejudicar a evolução do procedimento. A combinação dos produtos GOLGRAN com os de outros fabricantes pode apresentar diferenciação em material, em desenho ou qualidade. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso dos instrumentais ou das suas partes. Havendo desempenho variado, perda de precisão, instabilidade ou falta de precisão, deve-se imediatamente substituir a peça.

5.11 Precauções

Os instrumentos devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilização e uso. Após o uso, deve ser realizada uma limpeza correta, a fim de evitar incrustações e corrosões. Verificar, a cada uso, se os instrumentais não sofreram dano.

Somente profissionais especializados e treinados nas técnicas cirúrgicas poderão utilizar estes instrumentais.

Os instrumentais não devem ser armazenados em local onde também são armazenados produtos químicos que podem exalar vapores corrosivos.

Ainda que os instrumentais sejam fabricados em material oxidável, o correto manuseio e manutenção adequada do material é imprescindível para a conservação de suas características. Dessa forma, é indicado que sejam seguidas as orientações do fabricante quanto aos processos de limpeza, esterilização, manuseio, transporte e armazenamento.

5.12 Contraindicações

Não se aplica

5.13 Efeitos adversos

Não se aplica

5.14 Restrições ao uso

Por se tratar de um instrumental cirúrgico ou odontológico o mesmo deverá ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas e a critérios médicos.