



# Accès à l'application HelloBetter (1/3)


Première étape : cliquer sur "Créer un compte"

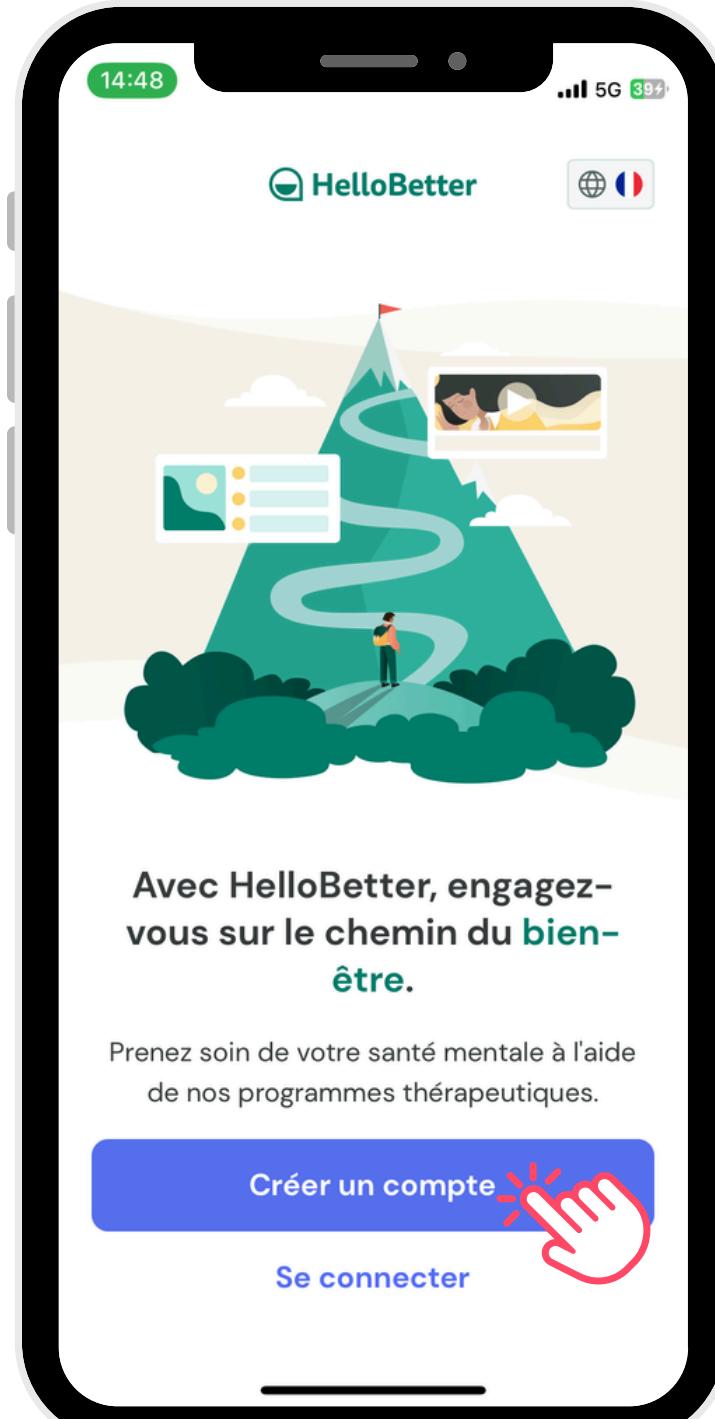

Cliquer sur "Insomnie"

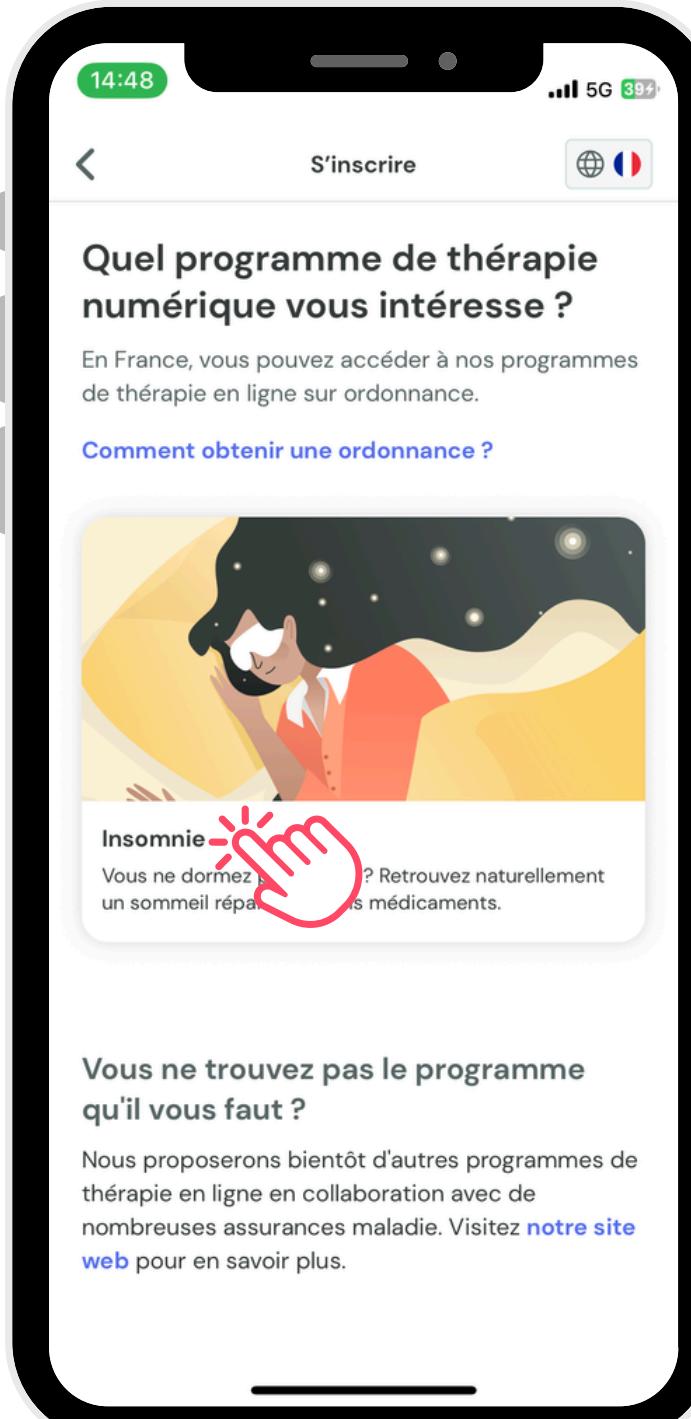


Entrer votre **code d'activation personnel\*** et votre adresse e-mail.  
Créer votre mot de passe et cliquer sur "Continuer"

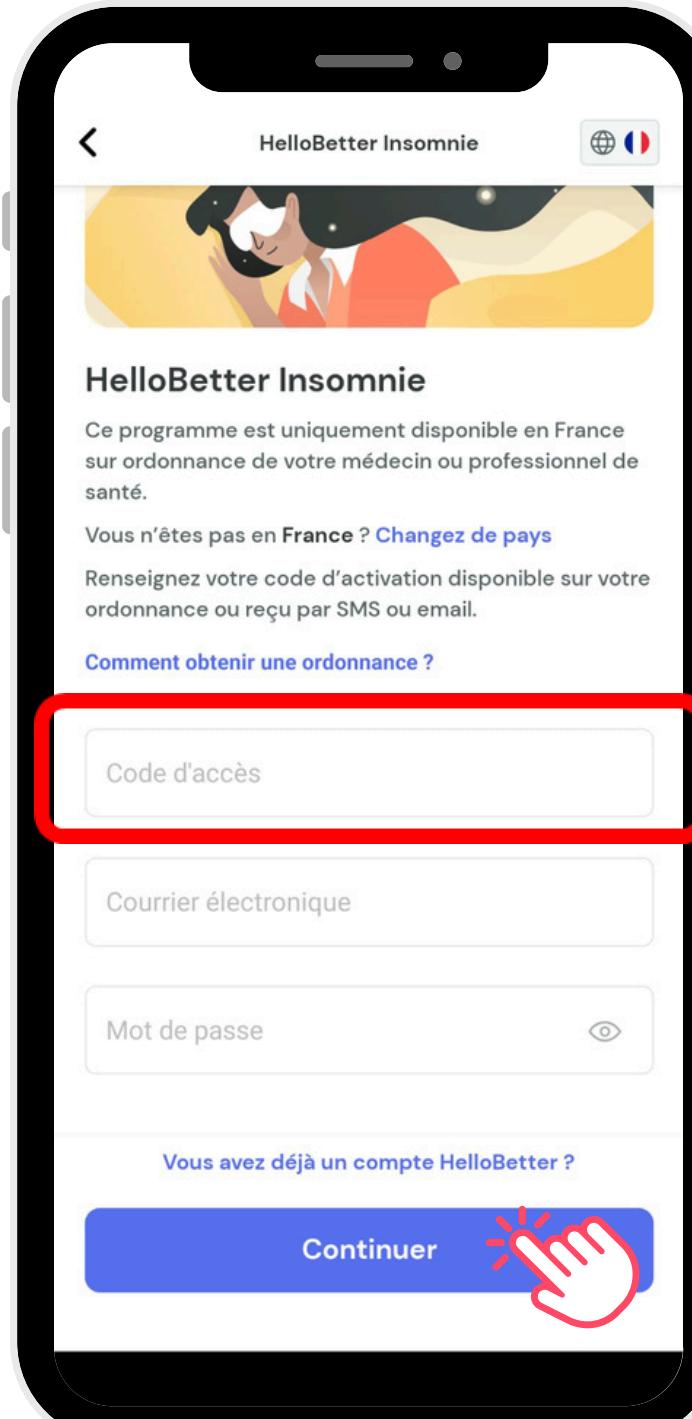


\*Le **code d'activation** figure dans l'**e-mail** et le **SMS** que vous avez reçus d'AppThera le jour de l'ordonnance

# Accès à l'application HelloBetter (2/3)

Cocher les 2 cases et cliquer sur "Approuver"

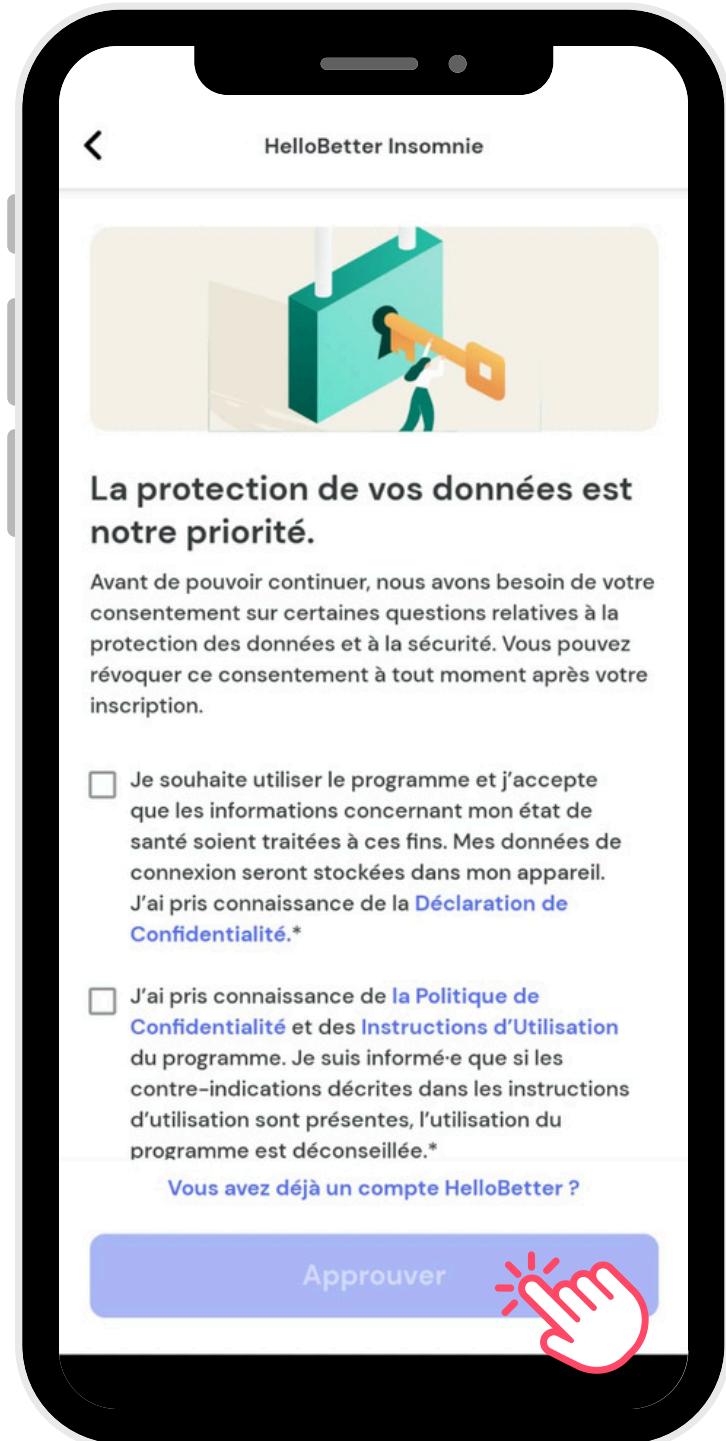

Renseigner vos informations et cliquer sur "Continuer"

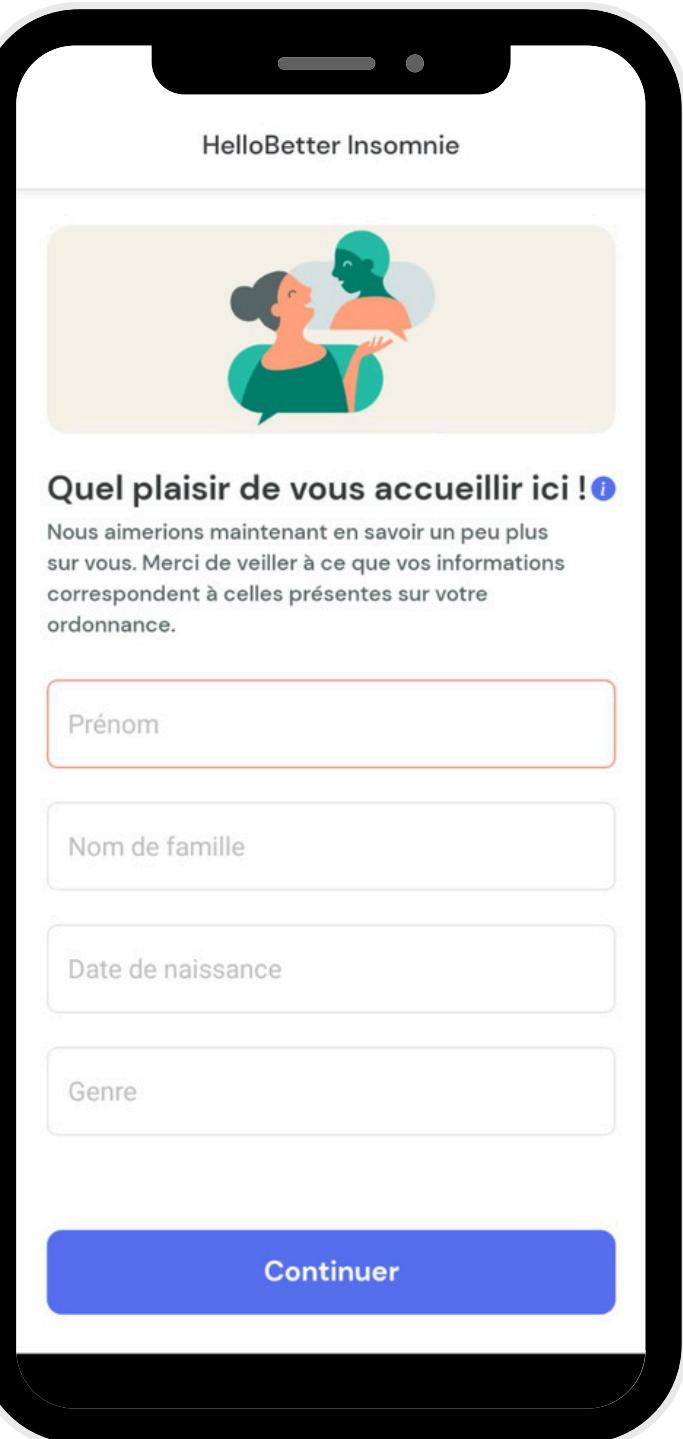

Cliquer sur "Commencer"




# Accès à l'application HelloBetter (3/3)

Renseigner votre **numéro de téléphone** et cliquer sur "**Envoyer le code**"



Renseigner le **code reçu par SMS** et cliquer sur "**Confirmer**"

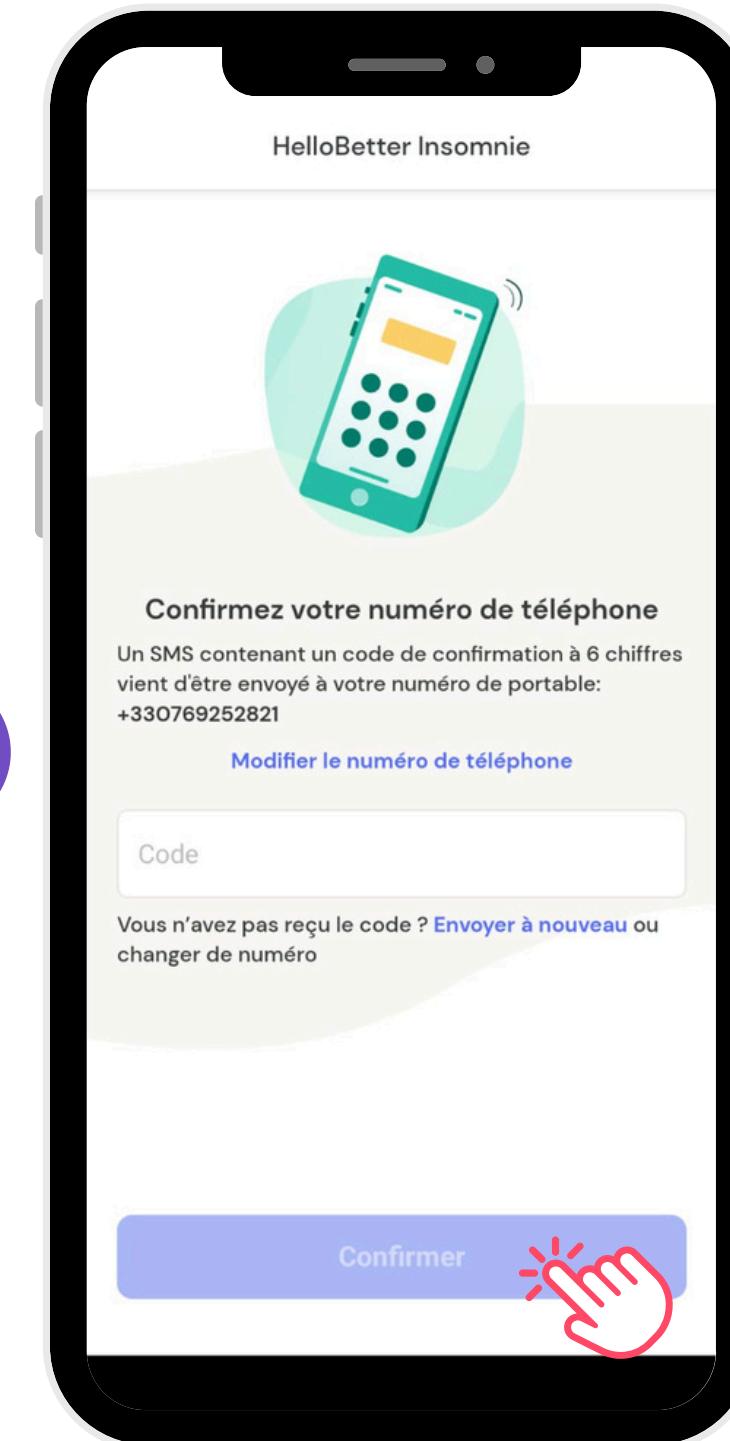

En cas de problème lors de la connexion, désinstaller et réinstaller l'application  
Si le problème persiste, contacter : [support@hellobetter.fr](mailto:support@hellobetter.fr)

Activer si vous le souhaitez votre authentification biométrique.



Vous pouvez commencer votre thérapie !

