

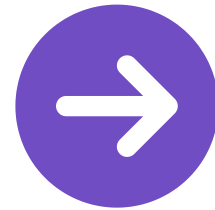
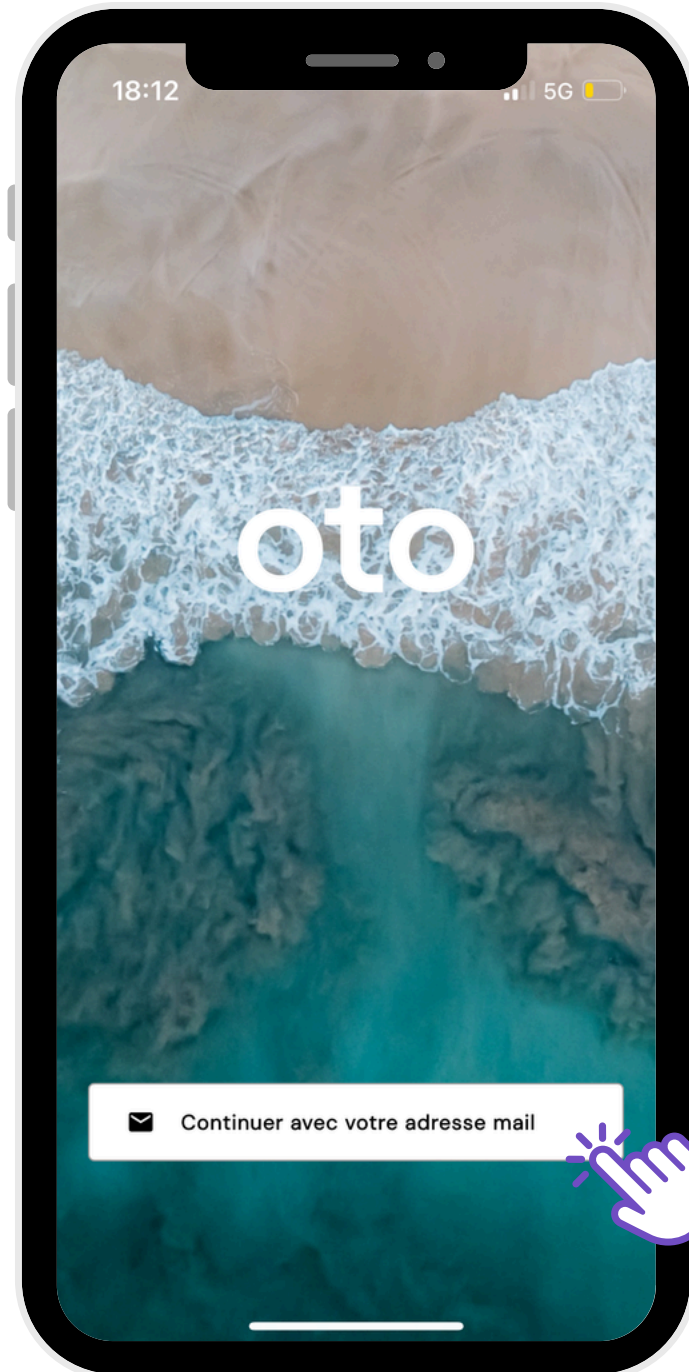


Accès à l'application Oto (1/4)


Cliquer sur **“continuer avec votre adresse mail”**

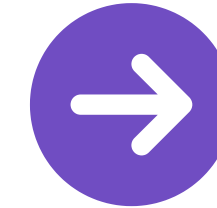

Cliquer sur **“S'inscrire”**

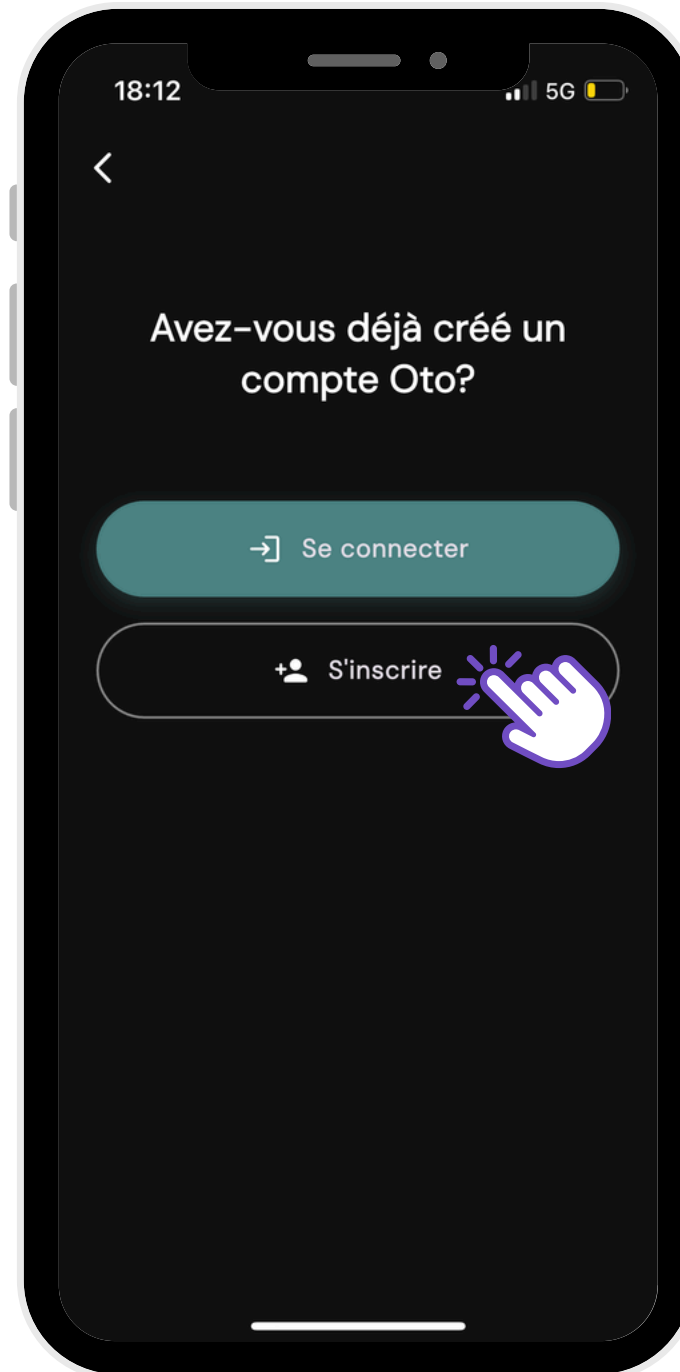



Entrer les informations demandées et cliquer sur **“S'inscrire”**

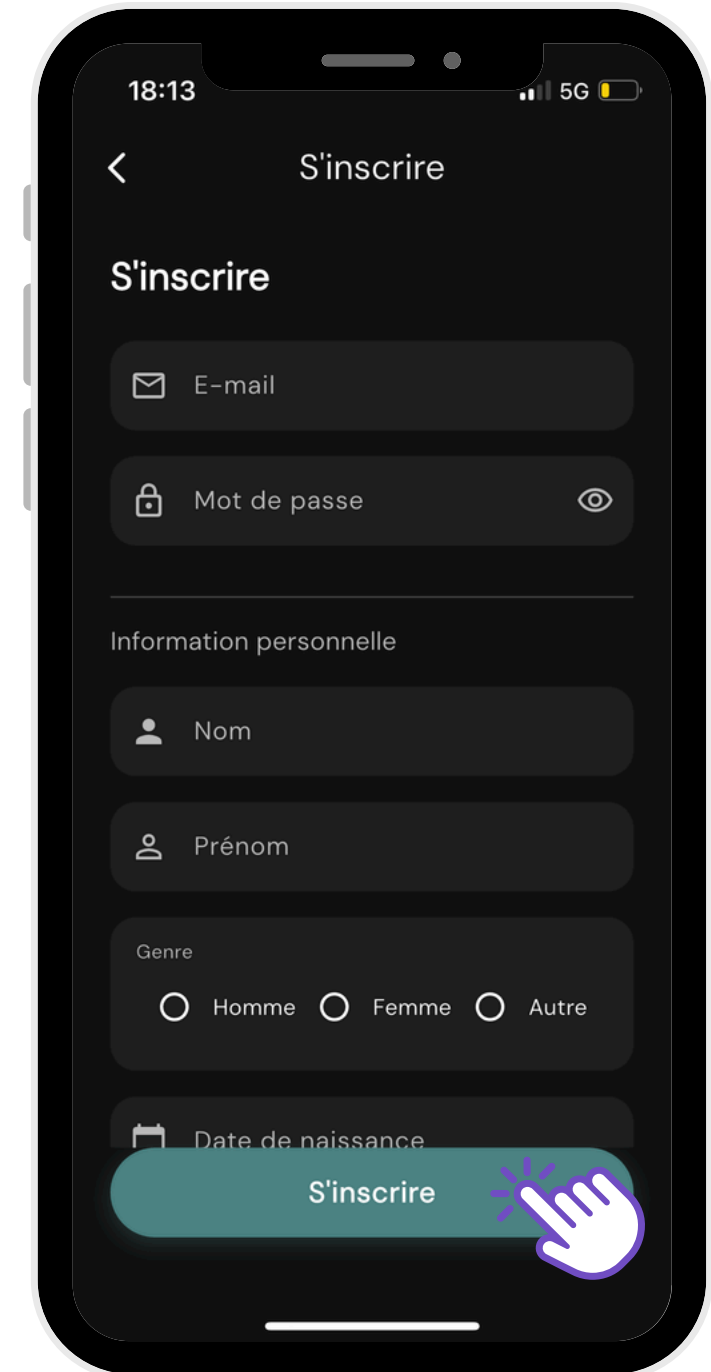



Accès à l'application Oto (2/4)

Un e-mail est envoyé à l'adresse indiquée. Cliquer sur le lien.


Retourner dans l'application, puis cliquer sur **"J'ai vérifié mon e-mail"**

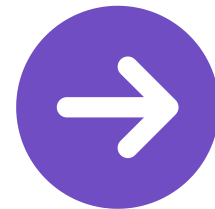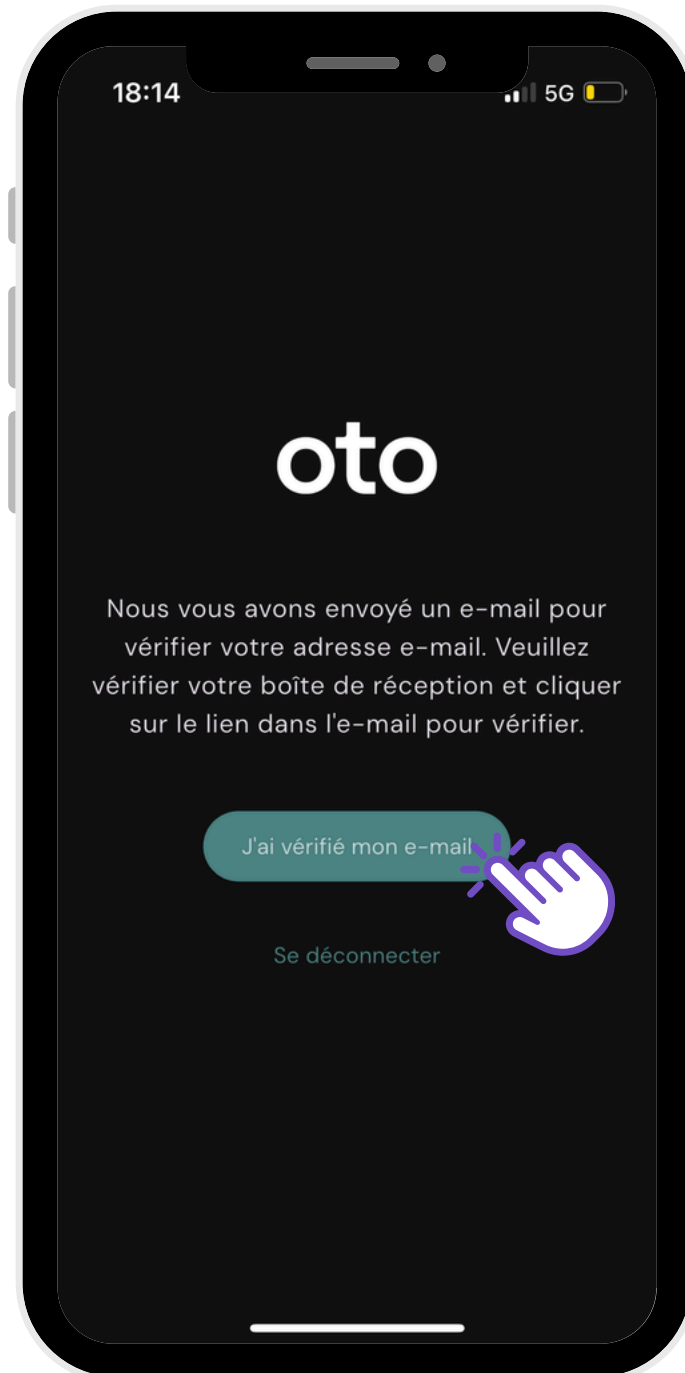

Entrer votre numéro de téléphone au format +336, cliquer sur **"Envoyer le code"**

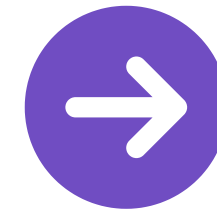
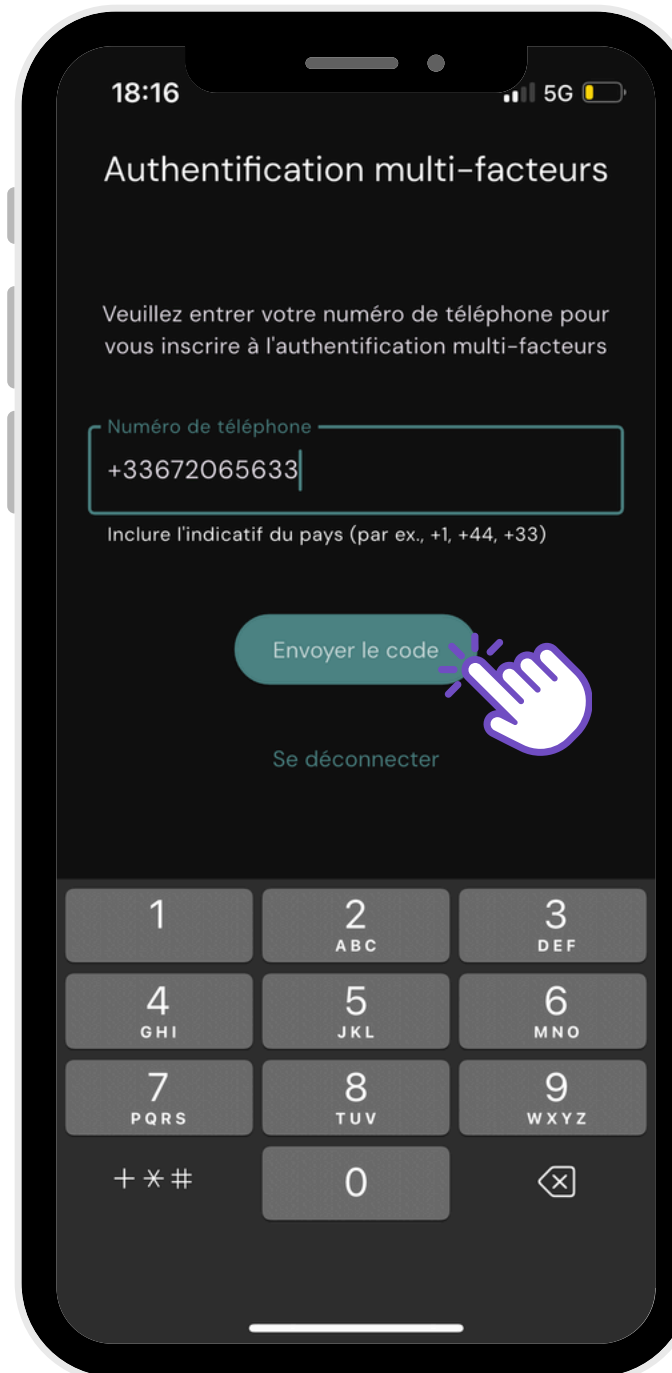


Un code est envoyé par SMS. Entrer le code dans l'espace et cliquer sur **"Confirmer"**


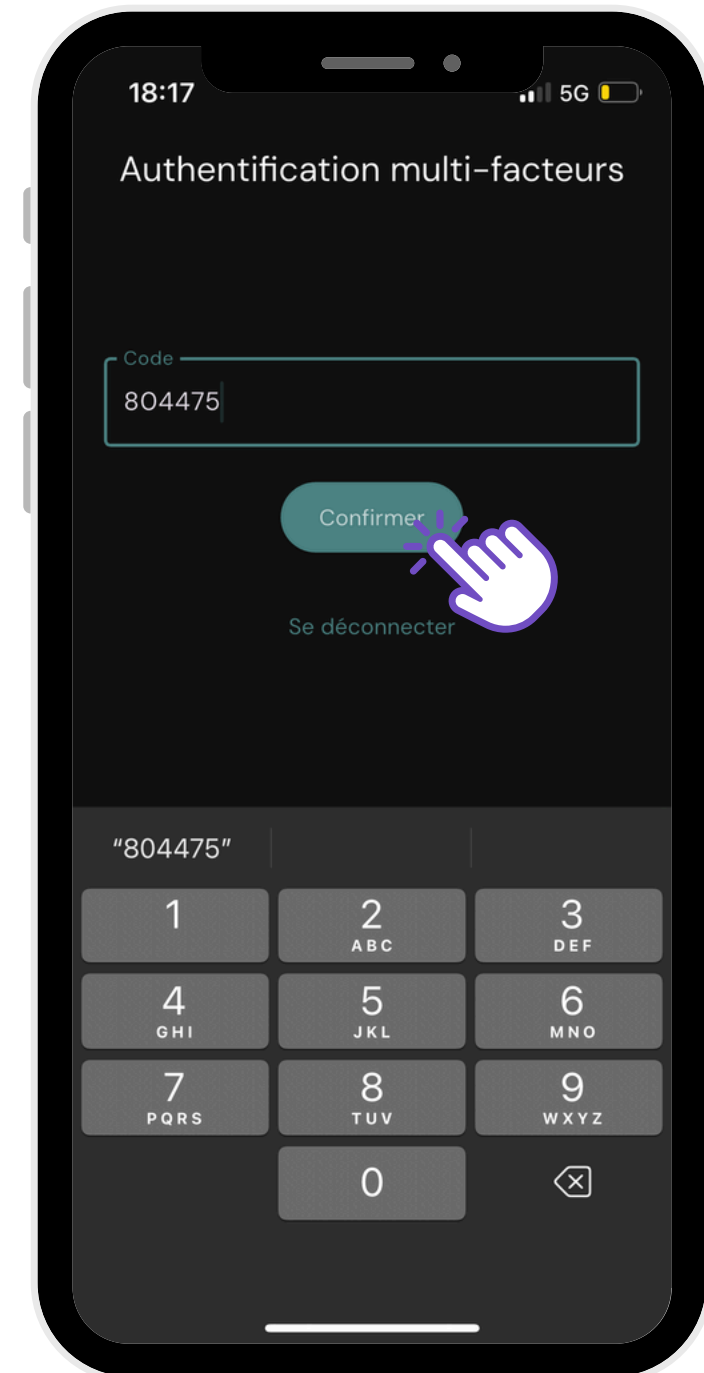


Accès à l'application Oto (3/4)

Choisir votre objectif et cliquer sur "**continuer**"

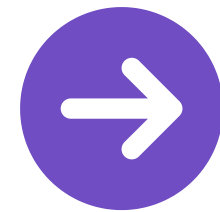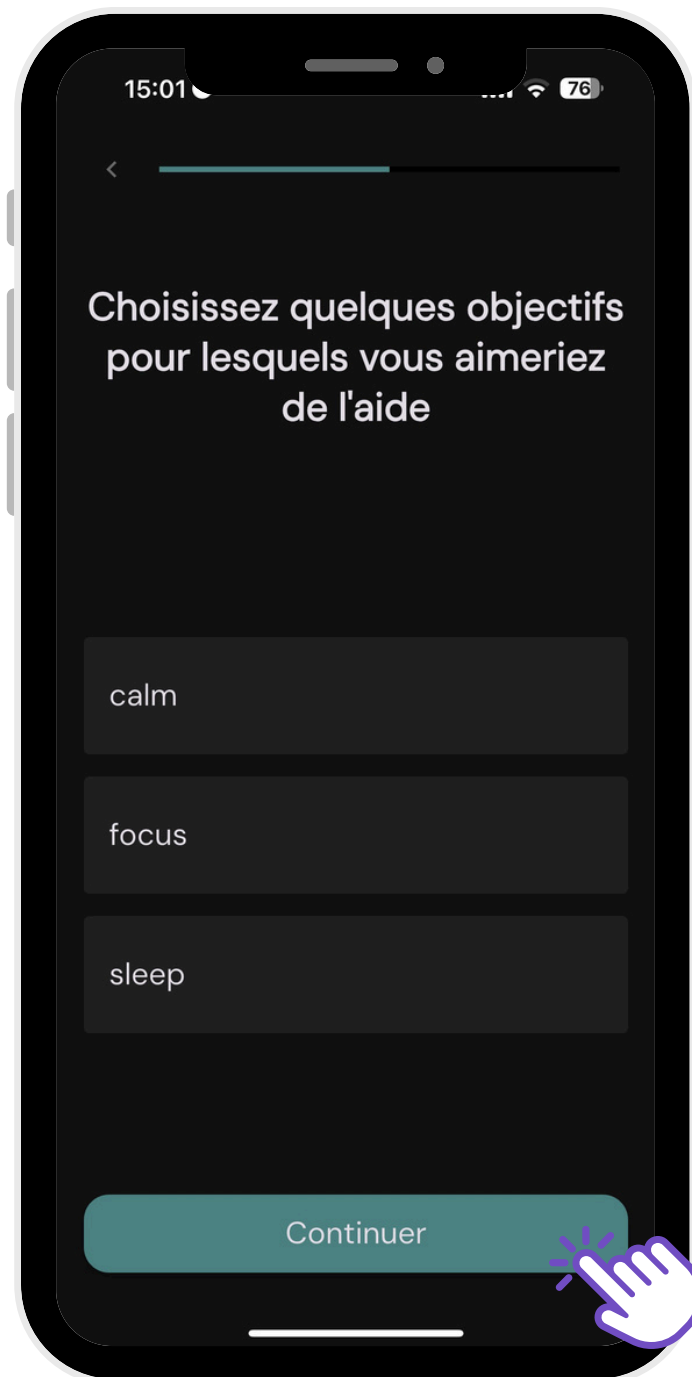

Autoriser les notifications. Cliquer sur "**Activer les notifications**"

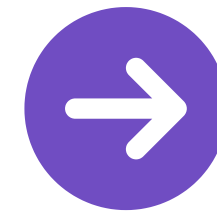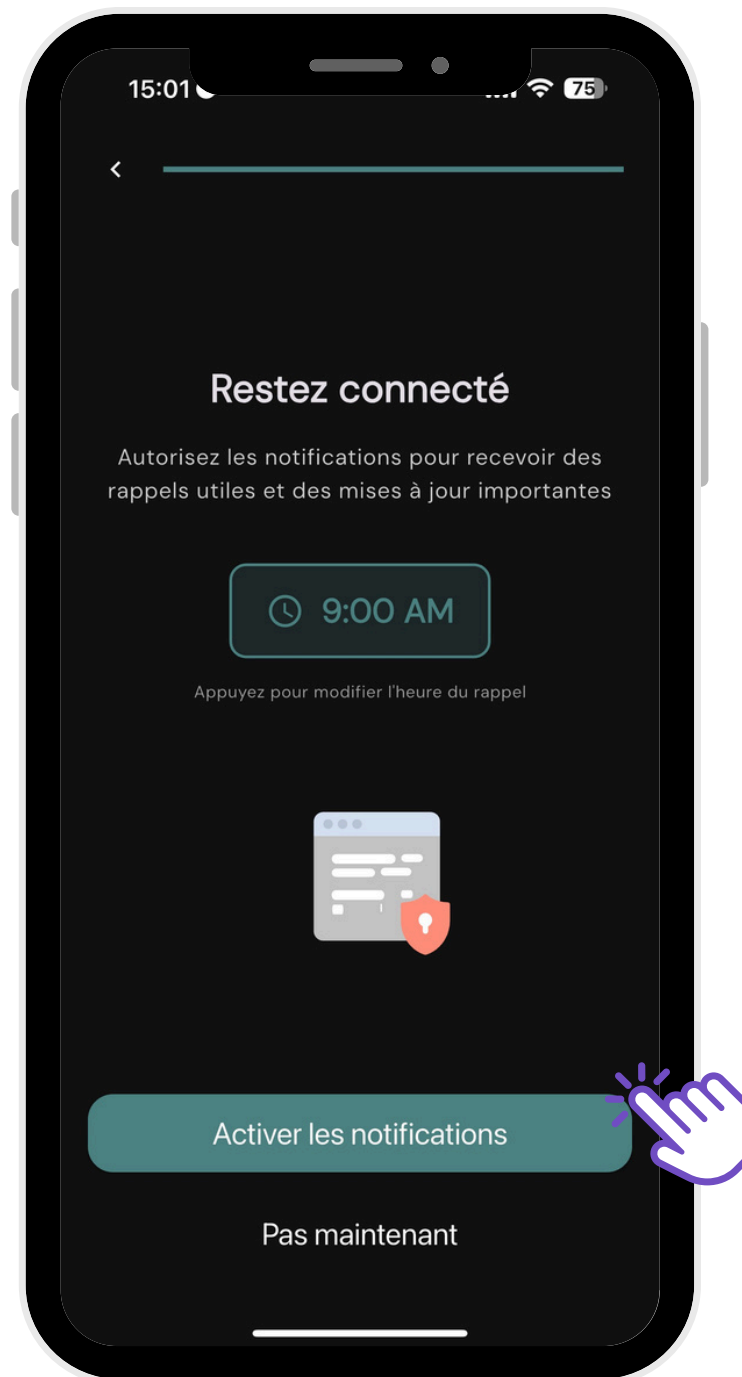



Entrer votre **code d'activation personnel** et cliquez sur **activer**



*Le **code d'activation** figure dans l'**e-mail** et le **SMS** que vous avez reçus d'AppThera le jour de l'ordonnance

Accès à l'application Oto (4/4)

Accès validé : cliquer sur
"Fermer"

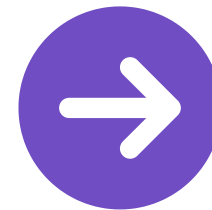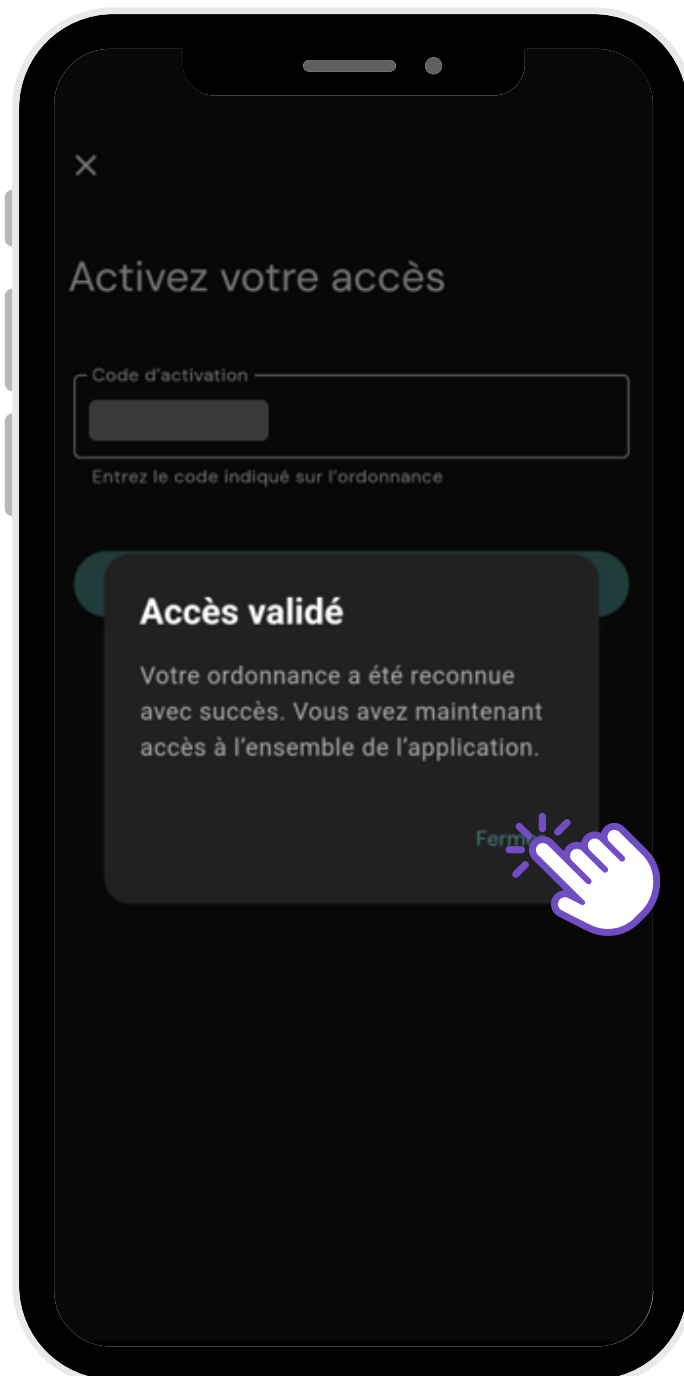

Vous pouvez **commencer votre
thérapie !**

