


Easymeeting Nattugla Brukermanual

Nattugla Trygghetskamera

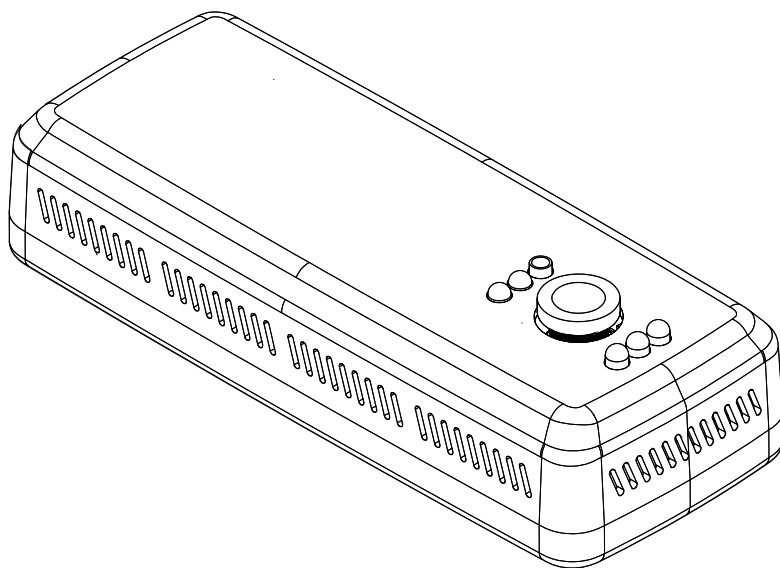

Innholdsfortegnelse	
Innhold i pakken	3
Kontaktinformasjon	3
Hva er Nattugla?	4
Advarsler og sikkerhet	5
Tekniske spesifikasjoner	5
Oppbygging	6
Vurderinger før montering	8
Montering	8
Montering med veggfeste	9
Oppsett og bruk av programvare	10

Innhold i pakken

Nattugla kamera
Veggfeste
USB-C kabel
Strømadapter
Festemateriell

Kontaktinformasjon

Easymeeting AS
Sykehusveien 21/23
9019 Tromsø

Telefon: +47 4000 4887
E-post: support@easymeeting.net

Hva er Nattugla?

Nattugla er et kamera med tilhørende programvare og administrasjonsgrensesnitt for å gjøre tilsyn hjemme hos mennesker som har behov for helsetjenester (tilsyn) på natt eller dag. Formålet med Nattugla er å kunne tilby et sikkert, brukervennlig og effektivt alternativ til fysiske tilsyn.

Nattugla monteres opp på vegg eller tak der man ønsker å gjøre tilsynet - det mest vanlige er på soverom, der kameraet rettes mot sengen for å kunne sjekke at pasient er i seng og har det bra. Nattugla kan også monteres opp i områder der personer vanligvis befinner seg - for eksempel i stue eller gang.

Advarsler og sikkerhet

For å installere og operere Nattugla bør du lese hele denne manualen. Følg instruksjonene for installering for å unngå skader på utstyret og sørge for optimal bruk.

Tekniske spesifikasjoner


Nattugla er bygget av Easymeeting AS i Tromsø. Videostrømmen er ende-til-ende kryptert og følger Normen for informasjons-sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Nattugla er godkjent av Norsk Helsenett som tredjeparts programvare.

Nattugla benytter 4G eller ethernet kabel, det er også mulighet for å benytte wifi, men på grunn av sikkerhetshensyn og enkelhet av oppsett, vil vi anbefale 4G/ethernet framfor lokalt wifi-nettverk.


Kameraet er et 120-graders kamera, som fungerer i både lys og mørket. Kameraet går automatisk over i nattmodus (infrarødt) når det blir mørkt i rommet. Kamera har infrarøde lys. Når disse er aktivert i mørket vil de lyse opp rommet med IR lys som ikke er synlig for mennesker.

Oppbygging


Forside

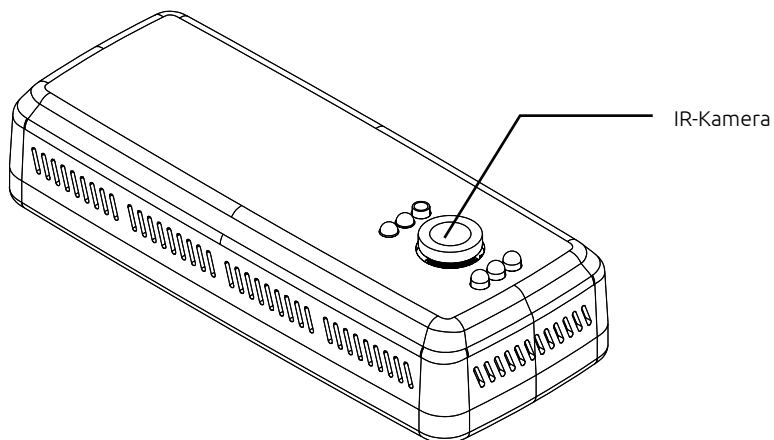

Bakside

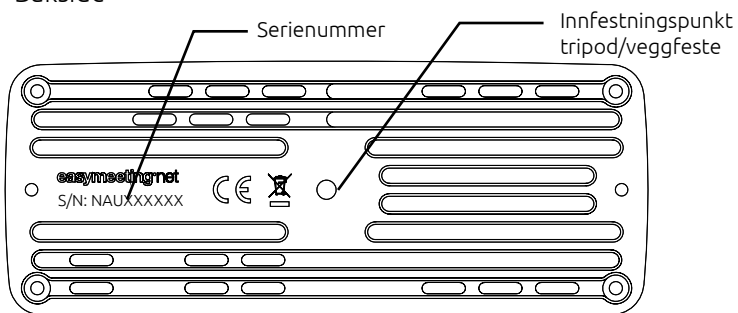

Tilkoblinger

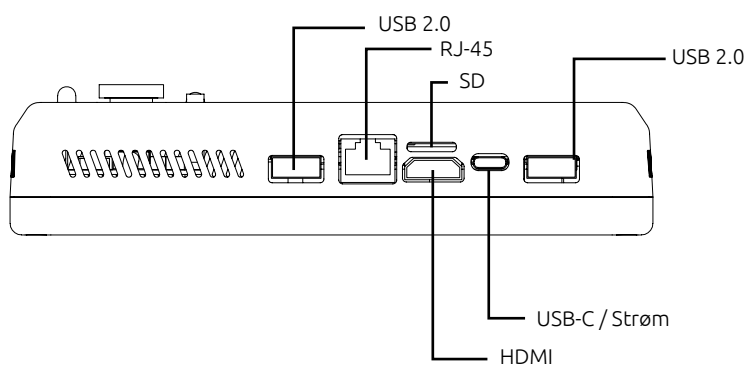

Montering

Før enhet sendes ut for montering på lokasjon, bør det settes opp brukere slik at montør kan gjennomføre et test-tilsyn for å se at bildet er tilfredstillende.

Nødvendig utstyr for montering på lokasjon:

- Målebånd
- Stjerneskrudjern/skrumaskin
- Bormaskin (ved montering i murvegg)
- Nattugla enhet som er innrullert og konfigurert på forhånd.

Vurderinger før montering

Nattugla monteres vanligvis på soverom, der kameraet rettes mot sengen.

Før montering, sjekk 4G-dekning i rommet enheten skal monteres. Dette gjøres ved å se på dekningen på en vanlig smarttelefon. Så lenge 4G-symbolet vises, og du har mer enn to "streker" på dekningsstyrke vil det som regel holde for å kunne bruke nattugla over 4G.

Om det ikke er dekning der nattugla skal stå, men det finnes ethernet eller stabilt wifi i huset, er det mulig å koble seg til dette.

Nattugla anbefales montert i en slik høyde at brukeren ikke får tak i enheten eller kan endre vinkel.

Nattugla bør monteres min. 30 cm. fra tilstøtende vegg eller annet montert utstyr (som lamper eller skap) for å unngå gjenskinnsstråling fra infrarøde dioder.

Nattugla monteres maks 4 meter fra området som skal observeres (for eksempel seng), grunnet rekkevidde på infrarøde dioder. Eventuelt test å se at bildet blir nok opplyst i mørket før montering.

Når du er fornøyd med plasseringen, skru veggfestet fast på ønsket posisjon.

Montering med veggfeste

Skru så Nattugla på ferdig montert veggfeste, og stram til med strammeskruen.

Plugg i strøm-kontakten i Nattugla, og sett så støpselet i stikkontakten. La Nattugla stå i fem minutter før du logger inn med bruker i tilsynsappen og gjennomfører et test-tilsyn.

Oppsett og bruk av programvare

Administrasjonspanel

Virksomheten som anskaffet Nattugla vil ha mottatt tilgang til Nattuglas administrasjonspanel. Her administreres tilgang for å gjøre tilsyn.

Applikasjon og webklient

Tilsyn gjennomføres med applikasjonen “Nattugla” på Android mobiler eller nettbrett. Applikasjonen ligger IKKE tilgjengelig på Playstore og rulles ut til brukere av deres IT-ansvarlig.

Det er også mulig å bruke web-klienten på alle enheter. Den finner du på web-adressen: <https://dinorganisasjon.nattugla.no>. Bytt ut “dinorganisasjon” med navnet på din organisasjon.

For å gjennomføre tilsyn må du logge på app eller web-klient med brukernavn og passord mottatt av administrator.

To-faktor

Vi anbefaler alle å sette opp to-faktor autentisering på profil-siden i applikasjonen. Ved å benytte autentiserings-app med engangskode forbedres sikkerheten betydelig. Din organisasjon kan også ha eget autentisering oppsett, vennligst sjekk med din IT-ansvarlig.

Gjennomføre tilsyn

Når du har logget inn finner du en oversikt over registrerte brukere du har tilgang til.

Ved å trykke på løpenummer/navn tilhørende brukeren, vil tilsynet gjennomføres. For å avslutte tilsynet, trykker du på den røde knappen.

Easymeeting AS
Sykehusveien 21/23
9019 Tromsø

Telefon: +47 4000 4887
E-post: support@easymeeting.net

Easymeeting AS
www.easymeeting.net

