

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO
E GINECOLÓGICO**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde de FMIT

SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profª Ma.
Dráuzio Oppenheimer, Prof. Dr.
Roger William Moraes Mendes, Prof. Me.

Autores

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Exame Pélvico e Ginecológico / Renata Pinto
Ribeiro Miranda, Dráuzio Oppenheimer, Roger William Moraes
Mendes. -- Itajubá: FMIT, 2019. - 8 f.

(POP - Laboratórios de Saúde da FMIT)

Revisores: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Simulador de Exame Pélvico e Ginecológico. 2. Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e Simulação. I.
Oppenheimer, Dráuzio. II. Mendes, Roger William Moraes.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	5
2.2 Abrangência:	5
1.3 Responsabilidade na execução do POP:.....	5
1.4 Objetivos específicos:	5
1.5 Materiais do simulador:	6
2.6 PROCEDIMENTO	7
3.PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	7
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	7
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	8
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	8
REFERÊNCIAS	9

1. APRESENTAÇÃO

O simulador de exame pélvico e ginecológico consiste em um conjunto de componentes ideais para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades no que se refere a aspectos da formação ginecológica, incluindo exame bimanual, a maneira correta de colocação do espelho e coleta da citologia cérvico-vaginal.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

2.1 Objetivo geral

Descrever a forma correta de uso do simulador de exame pélvico e ginecológico.

2.2 Abrangência:

Laboratórios de Saúde da FMIT.

1.3 Responsabilidade na execução do POP:

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

1.4 Objetivos específicos:

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

1.5 Materiais do simulador:

- Tronco pélvico;
- Almofada genital normal;
- Bloco de órgãos pélvicos com vagina e reto;
- Almofada em gel para região abdominal;
- Almofada têxtil para a região abdominal;
- Pele de borracha para cobertura abdominal;
- Oito peças de útero/colo (normal, retrovertido, câncer, DIU transparente, herpes, fibroides, pólipos, gravidez inicial);
- Quatro ovários destacáveis (normal, policístico, cisto pequeno, grande massa anexial);
- Inserção de bexiga;
- Inserção de órgão pélvico com prolapso;
- Talco para bebês;
- Palheta de maquiagem de feridas;
- Palheta de maquiagem com cores primárias;
- Mistura para sangue simulado;
- Seringas;
- Lubrificante;
- Manual de instruções;
- Estojo rígido de transporte.



2.6 PROCEDIMENTO

- Sempre utilizar luvas;
- Sempre utilizar lubrificante próprio;
- Evitar o uso de qualquer tipo de objeto como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores.

3.PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

- Limpar, sempre após o uso, com um pano úmido ou lenço umedecido;
- Passar o pano úmido, com água, ou o lenço em todas as peças utilizadas;
- Evitar que elas fiquem úmidas.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

- Evitar o uso de detergentes;
- Evitar friccionar;

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO

- Manter o torço e as peças cobertas com lençol, ou na bolsa de transporte, após o uso;
- Manter o ambiente em que o simulador estiver seco, limpo e com temperatura ambiente de 23 a 25°C;
- Evitar insolação direta.

REFERÊNCIAS

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Exame Pélvico e Ginecológico** [internet]. Disponível em:
<https://www.3bscientific.com.br/simulador-de-exame-pelvico-e-ginecologico-avancado-1019960lf01235,p_1453_27905.html>. Acesso em: 10 de maio de 2020.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE EXAME PÉLVICO E GINECOLÓGICO	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

