



AfyA

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

Desfibrilador Externo
Automático Life400

FMIT | AfyA

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Life400

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profª Ma.

Luciano Magalhães Vitorino, Prof. Dr.

Autores

Isadora Teixeira Lima

Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

M672d

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Desfibrilador Externo Automático / Renata Pinto Ribeiro

Miranda, Luciano Magalhães Vitorino. rev., [reimp.] -- Itajubá:
FMIT, 2024. - 9 f.

(POP – Laboratórios de Saúde da FMIT)

Revisora: Isadora Teixeira Lima

1. Desfibrilador Externo Automático. 2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e Simulação. I. Vitorino, Luciano Magalhães.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Life400	5
2.1 OBJETIVO GERAL	5
2.2 ABRANGÊNCIA.....	5
2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.5.....	5
2.5 MATERIAIS.....	6
2.6 PROCEDIMENTO.....	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ARMAZENAMENTO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.....	8
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.....	8
REFERÊNCIAS	9

1. APRESENTAÇÃO

Esse procedimento operacional padrão destina-se a especificar a forma correta de uso do DEA. O DEA Life400 Futura é um aparelho eletrônico portátil que diagnostica automaticamente as potencialmente letais arritmias cardíacas, como fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, assistolia e atividade elétrica sem pulso.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Life400

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso e armazenamento do desfibrilador externo automático.

2.2 ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da FMIT.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5

- Otimizar o uso do equipamento.
- Oferecer informações sobre o uso do equipamento.
- Oferecer informações sobre o armazenamento do equipamento.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao equipamento.

2.5 MATERIAIS

- 1 Desfibrilador Externo Automático;
- 2 pás autocolantes.
- 1 Bateria recarregável;
- 1 Bolsa para transporte.



2.6 PROCEDIMENTO

- Insira a bateria no desfibrilador;



- Instale o fio das pás no equipamento e posteriormente cole as pás no paciente simulado conforme desenho indicativo das mesmas;



- Pressione o botão verde;



- O equipamento está pronto para uso, pressionar o botão laranja em formato de coração para choque.



- Ao término do uso, retirar as pás do paciente simulado, retirar a bateria e apertar novamente o botão verde.

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ARMAZENAMENTO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

- Manter o DEA na bolsa de transporte após o uso;
- Manter o ambiente em que o equipamento estiver seco, limpo e com temperatura ambiente de 23 a 25°C;
- Evitar insolação direta.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizar luvas sempre;
- Utilizar somente em simuladores;
- Manter distancia ao acionar o choque;
- Em caso de dúvidas entre em contato com o professor ou técnico responsável.

REFERÊNCIAS

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. **Desfibrilador DEA Life400 Futura**. Disponível em:
<https://cmosdrake.com.br/loja-online/equipamentos-medicos/dea-life400-futura/?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHa3FOkH7uJMYsHUxrfpbDzDieR29cHjDv4L-UstSvYgQHOebTKhLWaxoCsVcQAvD_BwE>. Acesso em: 03 Mar. 2020.

Data da última revisão:	POP – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Life400	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

