

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA
INJEÇÕES INTRADÉRMICAS**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.

Luciano Magalhães Vitorino, Prof Dr

Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, Profa. Ma.

Autores

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Antebraço para Injeções Intradérmicas /
Renata Pinto Ribeiro Miranda, Luciano Magalhães Vitorino,
Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga. . rev., [reimp.] -- Itajubá:
FMIT, 2024. - 7 f.

(POP - Laboratórios de Saúde da FMIT)

Revisor: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Simulador de Antebraço - injeção intradérmica.
2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de
Habilidades e Simulação. I. Vitorino, Luciano Magalhães. II.
Gonzaga, Vanderléa Aparecida Silva.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS	5
2.1 OBJETIVO GERAL.....	5
2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.6 PROCEDIMENTO	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DOS SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS	6
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO INTRADÉRMICA	6
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO	6
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO INTRADÉRMICA	7
4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REMOÇÃO DO LÍQUIDO INJETADO NO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS	7
REFERÊNCIA	8

1. APRESENTAÇÃO

Este simulador consiste num modelo de um antebraço, o qual oferece condições realistas para prática das injeções intradérmicas. O modelo possui oito locais para a realização das injeções. Cada local de injeção pode ser utilizado por várias vezes.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de antebraço para injeções intradérmicas.

2.2 ABRANGÊNCIA:

Laboratórios de saúde da FMIT.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP


O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Oferecer informações sobre a remoção de líquido do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- 3 Terços de antebraço para injeção intradérmica;

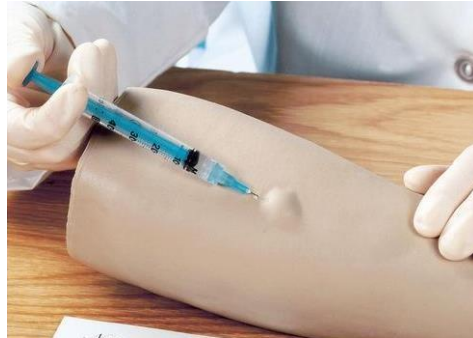

2.6 PROCEDIMENTO

- Sempre utilizar luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;
- A punção intradérmica correta forma uma pápula característica das punções intradérmicas.

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DOS SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO INTRADÉRMICA

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza;
- Secar completamente o simulador.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO INTRADÉRMICA

- Não utilizar detergentes;
- Não friccionar.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO DE INJEÇÃO INTRADÉRMICA

- Manter o simulador na bolsa de transporte ou coberto com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 e 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REMOÇÃO DO LÍQUIDO INJETADO NO SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS

- A pápula pode ser removida através da aspiração subsequente do líquido. Porém, após múltiplas utilizações, a retirada poderá se tornar difícil, conforme orientações do manual;
- Cada local de injeção pode ser utilizado várias vezes;
- Utilizar agulhas com tamanho máximo de 13 x 4,5 mm, adequadas para injeção intradérmica;
- Injetar no máximo 0,1 ml, conforme informações do fabricante.

REFERÊNCIA

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Injeção Intradérmica** [internet]. Disponível em:
<https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-injecoes-intradermicas-1005628-w44097lf01008u,p_1504_4970.html>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE ANTEBRAÇO PARA INJEÇÕES INTRADÉRMICAS	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

