

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE CABEÇA PARA
GESTÃO DE VIAS AÉREAS**

LIFE FORM

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM

Arthur Pereira de Oliveira,
Lucas Câmara
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

O48p

Oliveira, Arthur Pereira de

Procedimento Operacional Padrão: Simulador de Cabeça
para Gestão de Vias Aéreas Life Form / Arthur Pereira de
Oliveira, Lucas Câmara. -- Itajubá: FMIT, 2024. 8 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão.)

Revisora: Isadora Teixeira Lima

1. Simulador de Cabeça - Gestão de Vias Aéreas Life Form.
2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratórios de Saúde. I. Lima, Isadora Teixeira.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM.....	5
2.1. OBJETIVO GERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3. ABRANGÊNCIA	5
2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	6
2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR.....	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM	7
3.1. Procedimentos gerais para uso do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas	7
3.2. Procedimentos para limpeza do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas	7
REFERÊNCIAS	9

1. APRESENTAÇÃO

O simulador cabeça para gestão de vias aéreas Life form pode ser usado para demonstrar e praticar intubação, ventilação, aspiração e RCP.

Eles têm uma anatomia e marcações realistas, incluindo dentes, língua, faringe oral e nasal, laringe, epiglote, aritenóides, falsas cordas vocais, cordas vocais verdadeiras, traqueia, pulmões, esôfago e estômago. Escolha um dos treinadores econômicos e apresente para seus estudantes os desafios que eles podem enfrentar no mundo real.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM

2.1. OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas Life Form.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3. ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da FMIT.

2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas, aqui estabelecidas, é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR

- Simulador principal
- Modelo de demonstração das vias aéreas
- Conteúdo estomacal simulado (150 g)
- Lubrificante de treinamento 5. Seringa (60 mL)
- Documentos
- 10 Compressas
- Bomba e tubo de limpeza



3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM

3.1. Procedimentos gerais para uso do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas

- Utilizar sempre luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;
- Certificar que a peça está em condições para uso de alunos e professores;
- O simulador de gestão de vias aéreas simula um paciente não anestesiado para praticar técnicas de:
 - intubação,
 - ventilação,
 - aspiração
 - RCP.
- Essas práticas devem ser de acordo com o modo como o professor instruiu em aula.

3.2. Procedimentos para limpeza do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas

1. Abrir a trava;
2. Desconectar os tubos dos pulmões, removê-los e lavá-los em água corrente;
3. Desconectar, remover o estômago e lavá-lo em água corrente;
4. Quando o simulador de vômito for utilizado, colocar a torneira dentro da boca do manequim e lavá-lo com água corrente eliminando todo o conteúdo dos tubos, pulmão e estômago
5. Para limpar os tubos de conexão, usar o conector triplo e o Kit de limpeza na sequência a seguir:
 1. Conecte as conexões no conector triplo;
 2. Vire a cabeça para baixo e conecte o bico da seringa na entrada que sobrou;
 3. Injete a água com a seringa e lave bem as conexões até a saída total do conteúdo.
6. Coloque as peças sobre um pano limpo e seco até que escorra toda água. Tirar o excesso de água de cada peça, individualmente, com pano seco e limpo.

7. Deixar acabar de secar ao ar livre;
8. Após estar totalmente seco, recoloque as peças no simulador e prenda-o no suporte;
9. Guardar o simulador e seus componentes na embalagem original.

REFERÊNCIAS

3B. **SIMULADOR DE GESTÃO DE VIAS AÉREAS** [internet]. Disponível em: <
https://www.3bscientific.com/br/cabeca-de-treinamento-de-gestao-de-vias-aereas-adultas-1012740-w99999-184-lifeform-lf03667u,p_1375_27351.html>. Acesso em: 24 jun. 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE CABEÇA PARA GESTÃO DE VIAS AÉREAS LIFE FORM	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima



FMIT | Afya