

Afya



# Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE CATETERISMO  
VESICAL E CUIDADOS**

**FMIT** | Afya

Cristiane Resende  
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira  
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro  
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias  
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto  
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima  
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.  
José Henrique Gomes Torres, Prof. Esp.  
Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, Profa. Ma.

Autores

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

---

---

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Cateterismo Vesica l e Cuidados com  
Ostomias / Renata Pinto Ribeiro Miranda, José Henrique Gomes  
Torres, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga rev., [reimp.] –  
Itajubá: FMIT, 2024. - 7 f.

(POP -Laboratórios de Saúde da FMIT.)

Revisores: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Simulador de cateterismo vesical - cuidados - ostomias.
2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e Simulação. I. Torres, José Henrique Gomes. II. Gonzaga, Vanderléa Aparecida Silva.

---

Aissa Paula Nascimento  
CRB6 - 2984/O

## Sumário

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 OBJETIVO GERAL:.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 ABRANGÊNCIA: .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....</b>	<b>6</b>
<b>2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR.....</b>	<b>6</b>
<b>2.6 PROCEDIMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS .....</b>	<b>7</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>8</b>

## **1. APRESENTAÇÃO**

O simulador de cateterismo vesical masculino e feminino e cuidados com ostomia consiste em um conjunto de componentes que possibilita o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na prática do cateterismo vesical e nos cuidados referentes ao manejo de ostomias.

Compõe o simulador:

- Órgão genital feminino e masculino com repositório de líquido a fim de simular a saída da urina;
- Ostomias: colostomia transversa, ileostomia e ostomia suprapúbica, as quais podem ser dilatadas para a irrigação e colocação de bolsa de ostomia.

## **2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

### **2.1 OBJETIVO GERAL:**

Descrever a forma correta de uso do simulador de cateterismo vesical masculino e feminino, e cuidados com ostomia.

### **2.2 ABRANGÊNCIA:**

Laboratórios de Saúde da FMIT.

### **2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP**

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos da FMIT que fizerem uso deste simulador.

## 2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

## 2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- Tronco pélvico;
- 1 órgão genital masculino;
- 1 órgão genital feminino;
- Bolsa de colostomia;
- Reservatório para diurese; • Bolsa de transporte.



## 2.6 PROCEDIMENTO

1. Sempre utilizar luvas de procedimento;
2. Sempre utilizar lubrificante adequado;
3. Não utilizar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores.

### **3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

#### **3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza de todas as peças utilizadas;
- Secar completamente o material utilizado.

#### **3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

- Não usar detergentes;
- Não friccionar;

#### **3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS**

- Manter o torso e as peças na bolsa de transporte ou cobertas com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

**REFERÊNCIAS**

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Exame de Cateterismo Vesical e Cuidados com Ostomias** [internet]. Disponível em: <[https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-acateterizacao-masculina-e-feminina-e-cuidados-com-ostomias-](https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-acateterizacao-masculina-e-feminina-e-cuidados-com-ostomias-1005806w45068s23010m,p_1057_5291.html)

[1005806w45068s23010m,p\\_1057\\_5291.html](https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-acateterizacao-masculina-e-feminina-e-cuidados-com-ostomias-1005806w45068s23010m,p_1057_5291.html)>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.

Data da última revisão:	<b>POP – SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS</b>	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima



**FMIT** | Afya