

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE EXAME
DE PRÓSTATA**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.

Suélen Ribeiro Miranda

Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, Profa. Ma.

Autores

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Exame de Próstata / Renata Pinto Ribeiro

Miranda, Suélen Ribeiro Miranda, Vanderléa Aparecida Silva

Gonzaga. -- Itajubá: FMIT, 2019. - 6 f.

(POP – Laboratórios de Saúde da FMIT)

Revisor: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Simulador de exame de próstata. 2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e Simulação. I. Miranda, Suélen Ribeiro. II. Gonzaga, Vanderléa Aparecida Silva.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA	5
2.1 OBJETIVO GERAL	5
2.2 ABRANGÊNCIA.....	5
2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.5 MATERIAIS	5
1.6 PROCEDIMENTO	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA	6
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA	6
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA.....	6
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA	6
REFERÊNCIAS	7

1. APRESENTAÇÃO

O simulador de exame de próstata consiste em um conjunto de componentes ideal para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades no que se refere ao exame retal.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE EXAME DE PROSTÁTA

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de exame de próstata.

2.2 ABRANGÊNCIA

Laboratório de Habilidades e simulação da FMIT.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.

2.5 MATERIAIS

- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.
- 01 tumor benigno, levemente ampliado, sem condição patológica;
- • 01 estágio inicial de um carcinoma, com um nódulo individual fixo e palpável no quadrante superior;
- 01 representação da proliferação do carcinoma; com um pequeno nódulo;
- 01 próstata inteira afetada pelo carcinoma e apresentando uma textura dura e irregular.



1.6 PROCEDIMENTO

- Sempre utilizar luvas de procedimento;
- Sempre utilizar lubrificante próprio;
- Não utilizar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores.

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA

- Após o uso, limpar todas as peças utilizadas com pano úmido ou lenço umedecido;
- Secar completamente as peças.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA

- Não usar detergentes;
- Não friccionar.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA

- Manter as peças na bolsa de transporte ou cobertas com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 e 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Exame de Exame de Próstata** [internet]. Disponível em: <https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-o-exame-da-prostata-1005594-w44014lf00901u,p_1060_4892.html>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2019.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

