

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE HEMORRAGIA
PÓS-PARTO**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Isadora Teixeira Lima
Autor

Francielle Amanda Simão Nogueira De Sá
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTE.....	5
2.1	OBJETIVO GERAL	5
2.2	ABRANGÊNCIA.....	5
2.3	RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
2.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.5	MATERIAIS DO SIMULADOR.....	6
3.	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O SIMULADOR D TREINAMENTO OBSTÉTRICO	7
3.1	PROCEDIMENTOS.....	7
3.2	PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA.....	7
3.3	PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO.....	8
3.4	CUIDADOS IMPORTANTES	8
	REFERÊNCIA.....	9

1. APRESENTAÇÃO

O Simulador de hemorragia pós-parto foi desenvolvido para ser uma ferramenta de simulação obstétrica economicamente acessível, versátil e realista, que intensificará a competência e a confiança do profissional de saúde a oferecer os cuidados após o parto e a administrar a hemorragia pós-parto.

O simulador de hemorragia pós-parto oferece uma anatomia precisa, incluindo espinha isquiática, ossos púbicos e sacro.

Para uma sensação e textura realista, além da suavidade real, o canal vaginal e o colo do útero pós-parto foram fabricados com o silicone SKINlike™ de alta qualidade.

A bomba acessória permite um ajuste fácil do tônus uterino para simular um útero atônico ou contraído.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do Simulador de hemorragia pós-parto.

2.2 ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da FMIT.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP


O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- Parede abdominal (película de PVC macia com suporte de espuma)
- Unidade vaginal feita de silicone 3. Útero pós-parto com núcleo de espuma (inflável)
- 2 placentas (película)
- Inserto pélvico (espuma)
- Insuflador com tubo
- Suporte
- Bolsa e tubo (incl. braçadeira do tubo)
- Funil de enchimento (não mostrado aqui)
- Sangue em pó (100 gramas

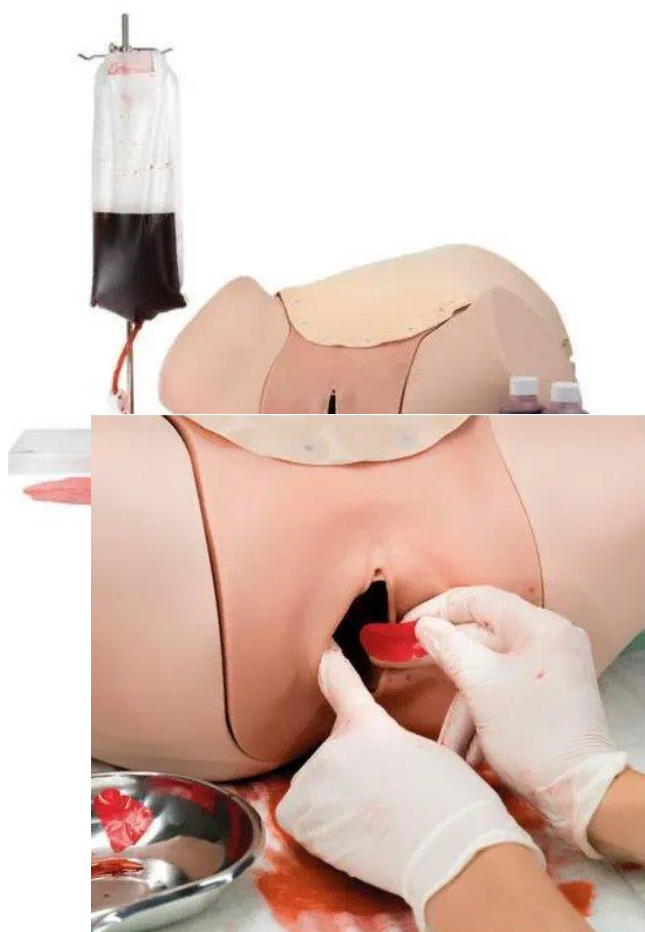

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO

3.1 PROCEDIMENTOS

- Usar luvas de procedimento ao manusear;
- O professor irá instruir o manuseio para os seguintes procedimentos vistos em aula teórica:
 - Expulsão da placenta, também incompleta;
 - Identificação da natureza da hemorragia pós-parto: sangramento do útero, sangramento do colo do útero (ruptura), sangramento vaginal (lesão);
 - Estimativa visual do volume da perda sanguínea para até 1,5 l;
 - Administração de útero atônico;
 - Prática de massagem fúndica;
 - Prática de compressão bimanual;
 - Prática de cateterização com cateter CH 14;

3.2 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

- Limpar, sempre após o uso, com um pano úmido ou lenço umedecido;
- Passar o pano úmido, com água, ou o lenço em todo o simulador, partes externas e internas;
- Passar o pano úmido, com água, ou o lenço em todo o simulador, no recém-nascido, na placenta e no cordão umbilical;
- Evitar que elas fiquem úmidas.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO

- Manter o simulador coberto com lençol, após o uso;
- Manter o ambiente em que o simulador estiver seco, limpo e com temperatura ambiente de 23 a 25°C;
- Evitar insolação direta.

3.4 CUIDADOS IMPORTANTES

- Evitar o uso de detergentes;
- Evitar friccionar.

REFERÊNCIA

3B SCIENTIFIC. **Simulador de hemorragia pós- Parto** [internet]. Disponível em:
<https://www.3bscientific.com/br/simulador-de-hemorragia-pos-parto-p97-1021568-p97-3b-scientific,p_895_30132.html>. Acesso em: 15 de jun de 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO	Responsável pela Revisão:
27/06/2024		Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira Ribeiro



