

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

**SIMULADOR DE GLÚTEO PARA
INJEÇÕES INTRAMUSCULARES**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.
José Henrique Gomes Torres, Prof. Me.
Luciano Magalhães Vitorino, Prof. Dr.
Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, Profa. Ma.

Autores

Itajubá - MG

CIIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

Miranda, Renata Pinto Ribeiro
Simulador de Glúteo para Injeções Intramusculares / Renata
Pinto Ribeiro Miranda... [et al.]. -- Itajubá: FMIT, 2019. - 7 f.

(POP – Laboratórios de Saúde da FMIT)
Revisores: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Simulador de Glúteo - injeção intramuscular.
 2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e Simulação. I. Torres, José Henrique Gomes Torres. II. Vitorino, Luciano Magalhães. III. Gonzaga, Vanderléa Aparecida Silva.
-

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.....	5
2.1 OBJETIVO GERAL	5
2.2 ABRANGÊNCIA	5
2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR.....	6
2.6 PROCEDIMENTO	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.....	6
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES	6
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES	7
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES	7
REFERÊNCIAS.....	8

1. APRESENTAÇÃO

O simulador de glúteo para injeções intramusculares possibilita o treinamento em três tipos de injeções intramusculares:

- Dorsogluteal,
- Ventrogluteal;
- Vasto lateral.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de glúteo para injeções intramusculares.

2.2 ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da FMIT.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- 3 Glúteos;
- Seringas;
- Maleta de transporte.



2.6 PROCEDIMENTO

- Sempre utilizar luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;
- Não infundir líquidos.

3.PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza;
- Secar completamente o simulador.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

- Não usar detergentes;
- Não friccionar.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES

- Manter o simulador na bolsa de transporte ou coberto com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 e 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

3B SCIENTIFIC. **Simulador de injeção intramuscular** [internet]. Disponível em: <https://www.3bscientific.com.br/im-simulador-de-injecao-1005586-w44004lf00961u,p_34_4882.html>. Acesso em: 05 de maio de 2019.

Data da última revisão:	POP –SIMULADOR DE GLÚTEO PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

