



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da FMIT

SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

Arthur Pereira de Oliveira
Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira Ribeiro
Lucas Câmara
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

O48p

Oliveira, Arthur Pereira de

Procedimento Operacional Padrão: Simulador de Punção Venosa / Arthur Pereira de Oliveira, Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira Ribeiro, Lucas Câmara. -- Itajubá: FMIT, 2024. 8 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão.)
Revisora: Isadora Teixeira Lima

1. Simulador de Punção Venosa. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratórios de Saúde. I. Ribeiro, Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira. II. Câmara, Lucas.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA.....	5
2.1. OBJETIVO GERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3. ABRANGÊNCIA	5
2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA....	6
3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA.....	6
3.2. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA.....	7
3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA.....	7
REFERÊNCIAS	8

1. APRESENTAÇÃO

O simulador de punção venosa oferece uma experiência de treinamento altamente simulada, projetada de acordo com a anatomia real do braço humano. Este kit proporciona uma oportunidade valiosa para estudantes, estagiários, enfermeiros e flebotomistas aprimorarem suas habilidades em punção venosa, injeção intravenosa, infusão e coleta de sangue. Seu design denso, mas leve, proporciona uma experiência realista e reutilizável.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

2.1. OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de punção venosa.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3. ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da FMIT.

2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas, aqui estabelecidas, é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR

- Inclui um braço Life/form® com pele;
- Agulha calibre 22;
- Conjunto borboleta;
- Conjunto de infusão;
- Seringa de 3 cc e seringa de 12 cc,
- Uma pinta de sangue Life/form®;
- Sacos de fornecimento de fluidos.



Figura 1: Materiais do Simulador de Punção Venosa

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

- Certificar que a peça está em condições para uso de alunos e professores.
- Não expor as peças a locais úmidos ou que possa causar algum dano.
- Retirar as peças da vitrine e posicionar em cima da bancada onde será utilizada pelos alunos e professores. Conferir o número de peças ao retirar e retornar para o local.

3.2. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

3.2.1 Materiais

- Água
- Sabão Neutro
- pano de algodão seco
- pano umedecido
- Álcool 70%
- Talco

3.2.2 Limpeza do equipamento

- A limpeza deverá ser feita periodicamente com pano limpo e úmido, tendo cuidado para não danificar a peça.
- Quando necessário utilizar um pano de algodão embebido de álcool 70% ou lavar em água corrente para remover as manchas e as sujeiras mais difíceis.
- Um vez ao semestre passar talco no simulador.

3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA

- Manter o simulador na bolsa de transporte ou coberto com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23° a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

3B Scientific. **BRAÇO PARA INJEÇÃO I.V. P50/1**

[internet]. Disponível em: https://www.3bscientific.com/product-manual/P50-1_PT.pdf.

Acesso em: 24 jun. 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE PUNÇÃO VENOSA	Responsável pela Revisão:
06/06/2024		Isadora Teixeira Lima

