

Afya

Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica
Cirúrgica

INSPEÇÃO DO
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

INSPEÇÃO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

José Marcos dos Reis, Prof. Dr.

Autor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

R375i

Reis, José Marcos

Inspeção do Instrumental Cirúrgico / José Marcos Dos Reis.
rev., [reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 6 f.

(POP - Laboratório de Técnica cirúrgica)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Procedimento Operacional Padrão - POP.
2. Instrumental Cirúrgico - inspeção. I. Reis, José Marcos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO INSPEÇÃO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	5
1.1 OBJETIVO	5
1.2 ABRANGÊNCIA.....	5
1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
1.4 MATERIAIS.....	5
1.5 PROCEDIMENTO	5
1.6 RECOMENDAÇÕES.....	6
REFERÊNCIAS.....	7

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO INSPEÇÃO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

1.1 OBJETIVO

Obter o instrumental cirúrgico adequado ao uso em aulas práticas no Laboratório de Técnica Cirúrgica da FMIT.

1.2 ABRANGÊNCIA

Laboratório de Técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

Docentes, técnicos, discentes e demais usuários do laboratório de técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.4 MATERIAIS

- a) Instrumental cirúrgico;
- b) Lupa;
- c) Luva de procedimento;
- d) Fitas marcadoras;
- e) Máscara descartável.

1.5 PROCEDIMENTO

- I. Higienizar as mãos;
- II. Colocar a máscara;
- III. Calçar as luvas;
- IV. Conferir as caixas cirúrgicas retirando os instrumentais danificados;
- V. Revitalizar os instrumentais com produtos adequados (lubrificantes ou removedores de manchas e ferrugem);

- VI. Inspecionar com uma lupa a presença de microfissuras;
- VII. Identificar o instrumental com as fitas marcadoras, quando necessário.
- VIII. Enviar para preparo;
- IX. Retirar as luvas ao final das atividades e higienizar as mãos.

1.6 RECOMENDAÇÕES

Quando necessário substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos, comunicar o técnico ou assistente de laboratório para que o mesmo possa estar repassando as informações para seu superior para a resolução.

REFERÊNCIAS

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. UFS, 2020. Disponível em:
<<http://hospital.ufs.br/sites/default/files>>. Acesso em: 12, jun de 2020.

Data da última revisão:	POP – INPEÇÃO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

