



Afya

Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica
Cirúrgica

INSPEÇÃO DOS MATERIAIS
APÓS LIMPEZA

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

INSPEÇÃO DOS MATERIAIS APÓS LIMPEZA

José Marcos dos Reis, Prof. Dr.

Autor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação FMIT,
Biblioteca, Processos Técnicos

R375i

Reis, José Marcos

Inspeção dos Materiais Após Limpeza/José Marcos Dos
Reis. rev., [reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 6 f.

(POP - Laboratório de Técnica Cirúrgica)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Procedimento Operacional Padrão - POP. 2 .
Inspeção - Materiais - Limpeza. I. Reis, José Marcos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – INSPEÇÃO DOS MATERIAIS APÓS A LIMPEZA	4
1.1 OBJETIVO	5
1.2 ABRANGÊNCIA.....	5
1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
1.4 MATERIAIS.....	5
1.5 PROCEDIMENTOS	5
1.6 RECOMENDAÇÕES.....	5
REFERÊNCIAS.....	7

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – INSPEÇÃO DOS MATERIAIS APÓS A LIMPEZA

1.1 OBJETIVO

Identificar falhas e sujidades nos materiais.

1.2 ABRANGÊNCIA

Materiais utilizados nas aulas no Laboratório de Técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

Docentes, técnicos, discentes e demais usuários do laboratório de técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.4 MATERIAIS

- a) Mesa de material de aço inox;
- b) Campos de tecidos de cor clara;
- c) Álcool a 70%;
- d) Máscara descartável.

1.5 PROCEDIMENTOS

- a) Higienizar as mãos;
- b) Realizar desinfecção da mesa com álcool a 70%, friccionando 03 (três vezes);
- c) Colocar a máscara descartável;
- d) Colocar o material na mesa, sobre os campos de tecidos de cor clara, para facilitar a visualização da sujidade;
- e) Inspeccionar o material com lupa;
- f) Encaminhar para o expurgo o material em que foram identificadas sujidades;
- g) Deixar a unidade limpa e em ordem;
- h) Higienizar as mãos

1.6 RECOMENDAÇÕES

- a) Comunicar ao enfermeiro para substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados;
- b) No caso de manchas passíveis de limpeza o material deverá ser avaliado pela enfermeira.

REFERÊNCIAS

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E. M. **Enfermagem em Centro de Material e Esterilização**. Barueri: Manole, 2011.

RECEPÇÃO DE PACIENTE. *UFS*, 2020. Disponível em:

<<http://hospital.ufs.br/sites/default/files/11/1-pop-recepcao-de-pacientes-no-centro-cirurgico> >.

Acesso em: : 08, fev de 2020.

Data da última revisão:	POP – INPEÇÃO DOS MATERIAIS APÓS LIMPEZA	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

