



Afya

Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica
Cirúrgica

**PREPARO DE BANDEJA E CAIXA
DE INSTRUMENTAL**

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

PREPARO DE BANDEJA E CAIXA DE INSTRUMENTAL

José Marcos dos Reis, Prof. Dr.

Autor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação FMIT,
Biblioteca, Processos Técnicos

R375p

Reis, José Marcos

Preparo de bandeja e caixa de instrumental / José Marcos
dos Reis. rev., [reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 6 f.

(POP - Laboratório de Técnica Cirúrgica)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Procedimento Operacional Padrão - POP. 2.
Bandeja - preparo. 3. Caixa instrumental I. Reis, José Marcos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PREPARO DE BANDEJA E CAIXA DE INSTRUMENTAL.....	5
1.1 OBJETIVO.....	5
1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO	5
1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
1.4 MATERIAIS.....	5
1.5 PROCEDIMENTOS.....	5
1.6 RECOMENDAÇÕES	6
REFERÊNCIAS	7

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PREPARO DE BANDEJA E CAIXA DE INSTRUMENTAL

1.1 OBJETIVO

Padronizar o preparo de instrumentais em bandejas e caixas metálicas, dispondo-os de maneira organizada, de forma que seja assegurado que o vapor da esterilização penetre na caixa/bandeja e atinja todos os instrumentais.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Laboratório de Técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

Docentes, técnicos, discentes e demais usuários do laboratório de técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.4 MATERIAIS

- a) Rotinas das bandejas ou caixas;
- b) Bandejas ou caixas com os instrumentais;
- c) Integrador;
- d) Máscara descartável;
- e) Campo de algodão simples;
- f) Campo de algodão duplo ou Manta (SMS);
- g) Fita adesiva;
- h) Fita indicadora de processo.

1.5 PROCEDIMENTOS

- I. Higienizar as mãos;
- II. Colocar a máscara descartável;
- III. Conferir se os instrumentais estão limpos e secos;
- IV. Abrir um campo simples dentro da caixa ou bandeja;
- V. Conferir o número de peças;

- VI. Organizar o instrumental dentro da bandeja ou caixa, sobre o campo simples com todas as articulações abertas, seguindo a rotina e observando condições de limpeza, lubrificação, integridade e funcionalidade;
- VII. Agrupar as pinças prendendo-as com Backaus, no máximo 10 pinças em um Backaus;
- VIII. Colocar as peças mais leves e menores sobre as maiores e mais pesadas;
- IX. Colocar as pinças curvas com a curvatura voltada para a tampa da caixa;
- X. Colocar as cúpulas e afastadores de Farabeuf separados;
- XI. Colocar as cúpulas com a abertura voltada para o fundo da caixa; e colocar as cúpulas com a abertura voltada para cima nas bandejas;
- XII. Colocar integrador químico com data em todas as caixas;
- XIII. Checar, datar e assinar 02 (duas rotinas), colocar uma dentro da bandeja sobre o instrumental;
- XIV. Virar as bordas do campo simples, no sentido do comprimento de modo que cubra todo o instrumental, e em seguida dobrar as laterais;
- XV. Empacotar em campo de algodão duplo ou Manta (SMS) conforme POP de técnica de envelope;
- XVI. Fechar com fita adesiva e afixar a outra rotina com data e assinatura;
- XVII. Colocar fita indicadora de processo para vapor em cima do pacote no tamanho de aproximadamente 05 cm;
- XVIII. Encaminhar para a esterilização;
- XIX. Recolher material;
- XX. Deixar a unidade limpa e em ordem;
- XXI. Higienizar as mãos.

1.6 RECOMENDAÇÕES

- 1) As caixas perfuradas devem ser fechadas antes de empacotar;
- 2) Colocar os instrumentais mais pesados em baixo e os mais delicados por último;
- 3) Se na inspeção do instrumental detectar alguma sujidade, ferrugem, trincas, manchas e não conformidades devolver para ao expurgo para novo processo de lavagem;

REFERÊNCIAS

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E. M. **Enfermagem em Centro de Material e Esterilização**. Barueri: Manole, 2011.

RECEPÇÃO DE PACIENTE. *UFS*, 2020. Disponível em:
<<http://hospital.ufs.br/sites/default/files/11/1-pop-recepcao-de-pacientes-no-centro-cirurgico>>.
Acesso em: : 08, fev de 2020.

Data da última revisão:	POP – PREPARO DE BANDEJA E CAIXA DE INSTRUMENTAL	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima



FMIT | Afya