



Afya

Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica
Cirúrgica

**TÉCNICA DE EMPACOTAMENTO
TIPO ENVELOPE**

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratório de Técnica Cirúrgica

TÉCNICA DE EMPACOTAMENTO TIPO ENVELOPE

José Marcos dos Reis, Prof. Dr.
Autor

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação FMIT,
Biblioteca, Processos Técnicos

R375t

Reis, José Marcos

Técnica de Empacotamento Tipo Envelope / José Marcos
dos Reis. rev., [reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 6 f.

(POP - Laboratório de Técnica Cirúrgica)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Procedimento Operacional Padrão - POP. 2.
Bandeja - preparo. 3. Caixa instrumental I. Reis, José Marcos

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - EMAPCOTAMENTO TIPO ENVELOPE.....	5
1.1	OBJETIVO	5
1.2	ABRANGÊNCIA	5
1.3	RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
1.4	MATERIAIS	5
1.5	PROCEDIMENTOS.....	5
1.6	RECOMENDAÇÕES	6
	REFERÊNCIAS	7

1.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - EMAPCOTAMENTO TIPO ENVELOPE

1.1 OBJETIVO

Garantir a abertura de pacote com técnica asséptica.

1.2 ABRANGÊNCIA

Laboratório de Técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

Docentes, técnicos, discentes e demais usuários do laboratório de técnicas cirúrgicas da FMIT.

1.4 MATERIAIS

- a) Campo duplo de algodão ou Manta (SMS);
- b) Material a ser empacotado;
- c) Fita adesiva;
- d) Integrador químico;
- e) Fita indicadora de processo;
- f) Máscara descartável.

1.5 PROCEDIMENTO

1. Após higienizar as mãos, posicione o material no centro do invólucro, em posição diagonal;
2. Fazer a dobra “a” e uma pequenadobra na ponta do invólucro, cobrindo totalmente o material;
3. Fazer a dobra “b” e uma pequena dobra na ponta do invólucro;
4. Repetir o mesmo procedimento na ponta d”;
5. Trazer a ponta “c” do invólucro em direção ao operador;

6. Pegar a ponta “c” do invólucro e introduzir sobre as dobras realizadas, deixando a ponta para fora do pacote para facilitar sua abertura e evitar contaminação na hora de abrir;
7. Lacrar o pacote com fita crepe própria para esterilização (indicador de processo).
8. Identificar o pacote, anotando os artigos contidos e o responsável pela esterilização.

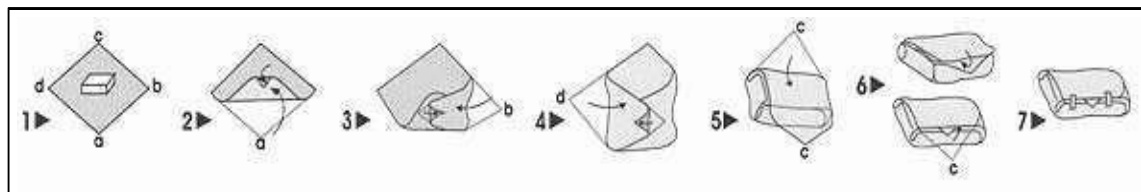


Figura 1: Empacotamento tipo envelope

1.6 RECOMENDAÇÕES

- Identifique o conteúdo do pacote para esterilização anotando: a descrição do conteúdo, data do empacotamento, data da validade, nome do preparador.
- Os campos de algodão devem ser lavados antes do 1º uso para remoção do excesso de goma que dificulta a penetração do vapor
- A esterilização do artigo deve ocorrer após término da validade da esterilização e com a troca da embalagem;
- O tamanho do campo deve ser adequado ao tamanho da bandeja ou caixa.
- Panos com furos ou cerzidos não servem como embalagem, pois reduzem a eficiência da barreira microbiana, devem ser devolvidos à lavanderia.
- Deixar o ambiente em ordem;
- Higienizar as mãos.

REFERÊNCIAS

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E. M. **Enfermagem em Centro de Material e Esterilização**. Barueri: Manole, 2011.

Data da última revisão:	POP – TÉCNICA DE EMPACOTAMENTO TIPO ENVELOPE	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

