



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

**SIMULADOR DE INTUBAÇÃO
PEDIÁTRICO**

Afya **FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO

Arthur Pereira de Oliveira
Lucas Câmara
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

O48s

Oliveira, Arthur Pereira de.

Simulador de intubação pediátrico / Arthur Pereira de Oliveira,
Lucas Câmara. -- Itajubá: Afya Itajubá, 2024. 7 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2026

1. Simulador de intubação pediátrico. 2. Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e
Simulação.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE ENTUBAÇÃO PEDIÁTRICO	5
2.1 OBJETIVO GERAL	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.3 ABRANGÊNCIA	5
2.4 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	6
2.5 MATERIAIS	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE ENTUBAÇÃO PEDIÁTRICO.	6
3.1 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE ENTUBAÇÃO PEDIÁTRICO	6
3.2 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE ENTUBAÇÃO PEDIÁTRICO	7
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE ENTUBAÇÃO PEDIÁTRICO.....	7
REFERÊNCIAS	8

1. APRESENTAÇÃO

Modelo anatômico, simulador da cabeça de um bebê, com pescoço, traqueia, pulmões para treinamento de procedimentos técnicos de intubação orotraqueal neonatal. Ideal para utilização em aulas práticas, o modelo apresenta a boca aberta e oferece estruturas anatômicas necessárias para realização da técnica de intubação. Confeccionado em poli-elastômero.

O simulador permite:

- Treino de intubação orotraqueal;
- Visualizar expansão dos pulmões durante as ventilações;
- Visualização da expansão do estômago, quando a intubação for feita incorretamente.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso, armazenamento e limpeza corretos do simulador.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3 ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá.

2.4 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas, aqui estabelecidas, é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5 MATERIAIS

- 1 simulador de paciente pediátrico
- Lubrificante;
- Talco;
- Cânula.



3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO.

3.1 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO

- Utilizar sempre luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;

3.2 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza de todas as peças utilizadas;
- Secar completamente o material utilizado;
- Não usar detergentes;
- Não friccionar.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO

- Manter o simulador na bolsa de transporte ou coberto com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23° a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

GLOBAL TRADE. **Simulador para treinamento de intubação infantil**. Disponível em:
<https://www.globaltradebr.com.br/simulador-para-treinamento-de-intubacao-infantil/p>.
Acesso em: 27 jun. 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO	Responsável pela Revisão:
13/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

**FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

