


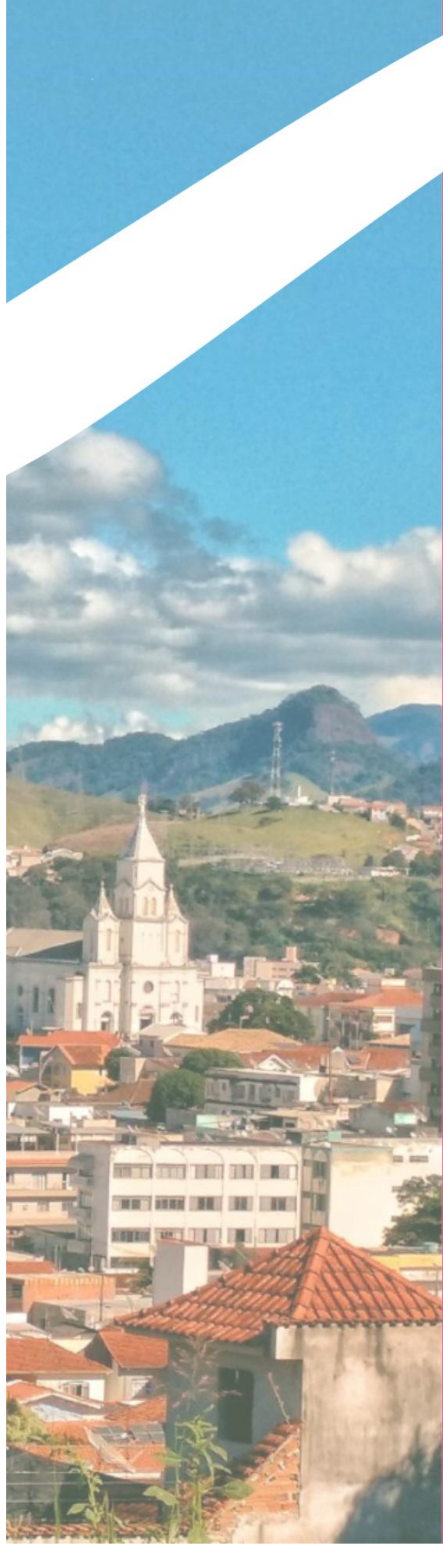

Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

**SIMULADOR DE TREINAMENTO
OBSTÉTRICO**

Afya **FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da AFya Itajubá

SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO

Isadora Teixeira Lima

Autor

Francielle Amanda Simão Nogueira De Sá

Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

L732I

Lima, Isadora Teixeira.

Procedimento Operacional Padrão: Simulador de
Treinamento Obstétrico / Isadora Teixeira Lima. -- Itajubá:
Afya Itajubá, 2024. - 9 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2026

1. Simulador de Treinamento Obstétrico. 2. Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratórios de Saúde. I. Sá,
Francielle Amanda Simão Nogueira de.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO	5
2.1	OBJETIVO GERAL	5
2.2	ABRANGÊNCIA.....	5
2.3	RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
2.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.5	MATERIAIS DO SIMULADOR.....	6
3.	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O SIMULADOR D TREINAMENTO OBSTÉTRICO	6
3.1	PROCEDIMENTOS.....	6
3.2	PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA.....	7
3.3	PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO.....	7
3.4	CUIDADOS IMPORTANTES	7
	REFERÊNCIA.....	8

1. APRESENTAÇÃO

Este SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO proporciona a seus alunos a prática de parto vaginal normal, bem como procedimentos de parto de nádegas e apresentação em vértice do feto.

Este simulador contém duas coberturas abdominais intercambiáveis - uma contendo um feto adicional em saco de fluido amniótico simulado para prática da manobra de Leopold, a outra transparente para permitir a visualização da posição fetal durante o trabalho de parto.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO.

2.2 ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- Pelve feminina anatomicamente correta com representação de marcos internos, como coluna vertebral, canal de parto angulado, ligamentos íleo, ísquio, sacro, sacro espinhal e incisão isquiática maior.
- Feto completo com fontanelas e suturas craniais
- Placenta com seis cordões umbilicais descartáveis e grampos
- Vulva de fácil reposição
- Pó de sangue simulado
- Bolsa macia para transporte



3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O SIMULADOR D TREINAMENTO OBSTÉTRICO

3.1 PROCEDIMENTOS

- Usar luvas de procedimento ao manusear;
- O professor irá instruir o manuseio para os seguintes procedimentos vistos em aula teórica:
 - Procedimento para um parto de emergência;
 - Demonstração de distocia do ombro, atitude fetal, estação fetal, mentira fetal, prolapso do cordão umbilical;
 - Apresentação composta e locais de incisão de cesariana podem ser discutidos durante as aulas;

3.2 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

- Limpar, sempre após o uso, com um pano úmido ou lenço umedecido;
- Passar o pano úmido, com água, ou o lenço em todo o simulador, partes externas e internas;
- Passar o pano úmido, com água, ou o lenço em todo o simulador, no recém-nascido, na placenta e no cordão umbilical;
- Evitar que elas fiquem úmidas.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO

- Manter o simulador coberto com lençol, após o uso;
- Manter o ambiente em que o simulador estiver seco, limpo e com temperatura ambiente de 23 a 25°C;
- Evitar insolação direta.

3.4 CUIDADOS IMPORTANTES

- Evitar o uso de detergentes;
- Evitar friccionar.

REFERÊNCIA

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Parto** [internet]. Disponível em:
https://www.3bscientific.com/br/simulador-de-parto-1000002-w44525-simulaid-110-180-pp00180u-sb23536u-pp00180u-sb23536u,p_895_5111.html. Acesso em: 15 de jun de 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO	Responsável pela Revisão:
13/01/2026		Isadora Teixeira Lima

