



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

**SIMULADOR INFANTIL DE
REANIMAÇÃO**

Afya **FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO

Arthur Pereira de Oliveira,
Lucas Câmara
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

O48p

Oliveira, Arthur Pereira de

Procedimento Operacional Padrão: Simulador Infantil de
Reanimação / Arthur Pereira de Oliveira, Lucas Câmara. --
Itajubá: Afya Itajubá, 2024. 9 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão.)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2026

1. Simulador Infantil de Reanimação. 2. Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratórios de Saúde. I. Lima,
Isadora Teixeira.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO.....	5
2.1. OBJETIVO GERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3. ABRANGÊNCIA	5
2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR.....	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO	7
3.1. Procedimentos gerais para uso do simulador infantil de reanimação.....	7
3.2. Procedimentos para limpeza do simulador infantil de reanimação	7
3.3. Procedimentos para armazenamento do simulador infantil de reanimação.....	7
REFERÊNCIAS	8

1. APRESENTAÇÃO

Este simulador é um sistema completo de treinamento em ressuscitação projetado para ensinar técnicas de salvar vidas de bebês. Ideal para suporte avançado de vida pediátrico.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO

2.1. OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador de cabeça para gestão de vias aéreas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3. ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá.

2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas, aqui estabelecidas, é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR

- 1 simulador pediátrico;
- Sistema para aferição de pressão arterial;
- Seringas;
- Líquidos corpóreos simulados;
- Bolsa de transporte.



3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO

3.1. Procedimentos gerais para uso do simulador infantil de reanimação

- Utilizar sempre luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;
- Possibilita procedimentos de via aérea avançada, como intubação orotraqueal, ventilação com Bolsa-Válvula-Máscara ou Máscara Pocket;
- Permite aferição de pressão arterial;
- É possível realizar punção intraóssea, IV e femoral.

3.2. Procedimentos para limpeza do simulador infantil de reanimação

- Limpar sempre, após o uso, com pano umedecido com água ou lenço umedecido;
- Secar completamente, evitando que eles fiquem úmidos;
- EVITAR O USO DE DETERGENTES;
- EVITAR FRICÇÃO.

3.3. Procedimentos para armazenamento do simulador infantil de reanimação

- Mantê-lo na bolsa de transporte ou coberto, após o uso;
- Mantê-lo sempre coberto, se em maca ou bancada, após o uso;
- Manter o ambiente que tiver o simulador sempre seco, limpo e com temperatura de 23° a 25oC;
- Evitar a luz do sol direta sobre os simuladores.

REFERÊNCIAS

SIMULADOR DE CRIANÇA PARA MEDIDAS DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NO SAV.

Life/Form Complete Child Crisis Manikin. Disponível
em:<<https://www.simulaid.com/product/170-LF3616>> Acesso em: 03 Mar. 2020.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR INFANTIL DE REANIMAÇÃO	Responsável pela Revisão:
13/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ