



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

**SIMULADOR PARA IMPLANTE
CONTRACEPTIVO**

Afya **FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO

Arthur Pereira de Oliveira,
Lucas Câmara
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

O48p

Oliveira, Arthur Pereira de

Procedimento Operacional Padrão: Simulador para
implante contraceptivo / Arthur Pereira de Oliveira, Lucas
Câmara. -- Itajubá: Afya Itajubá, 2024. 9 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão.)

Revisora: Isadora Teixeira Lima, 2026

1. Simulador para implante contraceptivo.
2. Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratórios de
Saúde. I. Lima, Isadora Teixeira.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO.....	5
2.1. OBJETIVO GERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3. ABRANGÊNCIA	5
2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	6
2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO.....	7
3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO	7
3.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO	7
3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE INJEÇÃO AVANÇADA....	7
REFERÊNCIAS	8

1. APRESENTAÇÃO

O contraceptivo subdérmico é um dos métodos contraceptivos mais eficazes que existem, com uma taxa de falha inferior a %1. Da mesma forma, o implante é um dos métodos menos restritivos, uma vez que foi inserido sob a pele na altura do braço. O implante tem o tamanho de um fósforo e sua função se baseia na difusão dos hormônios progestágenos que bloqueiam a fertilidade da mesma forma que a pílula desse tipo faz.

É possível preparar a área de aplicação e realizar uma inserção e remoção do implante hormonal no modelo, sempre seguindo as normas médicas vigentes.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO

2.1. OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso do simulador para implante contraceptivo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Oferecer informações sobre a remoção de líquido do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3. ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Habilidades e simulação da Afya Itajubá.

2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5. MATERIAIS QUE COMPÕE O SIMULADOR

- 1 seção do braço.



O modelo 7086 Erler Zimmer Planning Device Application Simulator representa uma seção do braço que foi fabricada a partir de um material que se assemelha tanto quanto possível ao tecido humano. Da mesma forma, é possível preparar a área de aplicação e inserir e retirar o implante hormonal no modelo, sempre seguindo as normas médicas vigentes. A produção deste simulador foi idealizada por um fabricante de implantes hormonais que idealizou o modelo com o objetivo de propor uma ferramenta de treinamento adaptada a estudantes de medicina que necessitam aprender a realizar este procedimento.

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO

3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO

- Sempre utilizar luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;
- Verificar o local adequado para aplicação do contraceptivo;
- Preparar a área de aplicação;
- Inserir e retirar o implante hormonal no modelo com o auxílio do professor.

3.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza;
- Secar completamente o simulador.
- Não utilizar detergente;
- Não friccionar.

3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE INJEÇÃO AVANÇADA

- Manter o simulador na bolsa de transporte ou coberto com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

GIRODMEDICAL. Simulador de aplicação de implante [internet]. Disponível em:< Simulador de aplicación de implante anticonceptivo 7086 Erler Zimmer a 129,07 € (girodmedical.es)>. Acesso em: 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR PARA IMPLANTE CONTRACEPTIVO	Responsável pela Revisão:
13/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ

