



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

SIMULADOR DE SUTURA

EDISIOTOMIA

Afya

**FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.
Luiz Armando Teixeira, Prof Esp.
Roger William Moraes Mendes, Prof. Me.
Autores

Isadora Teixeira Lima
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Sutura de Episiotomia /Renata Pinto Ribeiro
Miranda, Luiz Armando Teixeira, Roger William Moraes Mendes.
. rev., [reimp.] -- Itajubá: Afya Itajubá, 2024. - 6 f.

(POP – Laboratórios de Saúde)

Revisor: Isadora Teixeira Lima, 2026.

1. Simulador de Sutura de Episiotomia. 2.Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades
e Simulação. I. Teixeira, Luiz Armando. II. Mendes,
Roger William Moraes.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 APRESENTAÇÃO	5
2.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL	5
2.1 OBJETIVO	5
2.2. ABRANGÊNCIA.....	5
2.3. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP.....	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.5 MATERIAIS.....	5
2.5 PROCEDIMENTO.....	6
3.0 PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE	6
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA	6
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA.....	6
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA	6
REFERÊNCIAS.....	7

1.0 APRESENTAÇÃO

O simulador de sutura de episiotomia consiste em um conjunto de três componentes para o desenvolvimento de habilidades nos discentes no que se refere a realização da episiotomia em ambiente seguro e controlado.

2.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL

2.1 OBJETIVO

Descrever a forma correta de uso do simulador de sutura de episiotomia.

2.2. ABRANGÊNCIA

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador na Afya Itajubá.

2.3. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste equipamento na Afya Itajubá

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS

- Simulador de Sutura Mediana;
- Simulador de Sutura Mediolateral Esquerda;
- Simulador de Sutura Mediolateral Direita.



2.5 PROCEDIMENTO

- Sempre utilizar luvas;
- Utilizar fios cirúrgicos e agulha própria para sutura;
- Evitar o uso de qualquer tipo de objeto como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores.

3.0 PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA

- Limpar, sempre após o uso, com um pano úmido ou lenço umedecido;
- Passar o pano úmido (com água) ou o lenço em todas as peças utilizadas;
- Evitar que elas fiquem úmidas.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA

- Evitar o uso de detergentes;
- Evitar friccionar.

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA

- Manter as vulvas cobertas com lençol, ou em caixas, após o uso;
- Manter o ambiente em que o simulador estiver seco, limpo e com temperatura ambiente de 23 a 25°C;
- Evitar insolação direta.

REFERÊNCIAS

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Sutura de Episiotomia** [internet]. Disponível em: <
https://www.3bscientific.com.br/simulador-de-sutura-de-episiotomia-conjunto-de-31005627-w44-096-lf00690u,p_895_4969.html>. Acesso em: 01 de março de 2020

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMIA	Responsável pela Revisão:
13/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ

