



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

SIMULADOR DE CATETERISMO

Afya **FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

Renata Pinto Ribeiro Miranda, Profa. Ma.
José Henrique Gomes Torres, Prof. Esp.
Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, Profa. Ma.

Autores

Isadora Teixeira Lima

Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

M672s

Miranda, Renata Pinto Ribeiro.

Simulador de Cateterismo Vesica l e Cuidados com
Ostomias / Renata Pinto Ribeiro Miranda, José Henrique Gomes
Torres, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga rev., [reimp.] –
Itajubá: Afya Itajubá, 2024. - 7 f.

(POP -Laboratórios de Saúde.)

Revisores: Isadora Teixeira Lima, 2026.

1.Simulador de cateterismo vesical - cuidados - ostomias.
2.Procedimento Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de
Habilidades e Simulação. I. Torres, José Henrique Gomes. II.
Gonzaga, Vanderléa Aparecida Silva.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	5
2.1 OBJETIVO GERAL:	5
2.2 ABRANGÊNCIA:	5
2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR.....	6
2.6 PROCEDIMENTO.....	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	7
3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	7
3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	7
3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	7
REFERÊNCIAS	8

1. APRESENTAÇÃO

O simulador de cateterismo vesical masculino e feminino e cuidados com ostomia consiste em um conjunto de componentes que possibilita o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na prática do cateterismo vesical e nos cuidados referentes ao manejo de ostomias.

Compõe o simulador:

- Órgão genital feminino e masculino com repositório de líquido a fim de simular a saída da urina;
- Ostomias: colostomia transversa, ileostomia e ostomia suprapúbica, as quais podem ser dilatadas para a irrigação e colocação de bolsa de ostomia.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

2.1 OBJETIVO GERAL:

Descrever a forma correta de uso do simulador de cateterismo vesical masculino e feminino, e cuidados com ostomia.

2.2 ABRANGÊNCIA:

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá.

2.3 RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos da FMIT que fizerem uso deste simulador.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre o uso do simulador.
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador.
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.5 MATERIAIS DO SIMULADOR

- Tronco pélvico;
- 1 órgão genital masculino;
- 1 órgão genital feminino;
- Bolsa de colostomia;
- Reservatório para diurese; • Bolsa de transporte.



2.6 PROCEDIMENTO

1. Sempre utilizar luvas de procedimento;
2. Sempre utilizar lubrificante adequado;
3. Não utilizar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores.

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

3.1 PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

- Após o uso, utilizar lenço umedecido ou pano úmido para a limpeza de todas as peças utilizadas;
- Secar completamente o material utilizado.

3.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

- Não usar detergentes;
- Não friccionar;

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS

- Manter o torso e as peças na bolsa de transporte ou cobertas com lençol;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23 a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIAS

3B SCIENTIFIC. **Simulador de Exame de Cateterismo Vesical e Cuidados com Ostomias** [internet]. Disponível em: <https://www.3bscientific.com.br/simulador-para-acateterizacao-masculina-e-feminina-e-cuidados-com-ostomias-1005806w45068s23010m,p_1057_5291.html>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL E CUIDADOS COM OSTOMIAS	Responsável pela Revisão:
12/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

**FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**