



Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da
Afya Itajubá

**SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA
ADULTO**

Afya

**FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ**

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica
e
Procuradora Institucional

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá - MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá

SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA ADULTO

Arthur Pereira de Oliveira
Lucas Câmara
Autores

Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira Ribeiro
Revisora

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Afya Itajubá, Biblioteca, Processos Técnicos

O48s

Oliveira, Arthur Pereira de.

Simulador Cricotiotomia Adulto / Arthur Pereira de Oliveira,
Lucas Câmara. -- Itajubá: Afya Itajubá 2024. 7 f.

(POP - Procedimento Operacional Padrão)

Revisora: Francismeire Aureliana Fonseca Nogueira Ribeiro

1. Simulador de Cricotiotomia Adulto. 2. Procedimento
Operacional Padrão - POP. 3. Laboratório de Habilidades e
Simulação.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA	5
2.1. OBJETIVO GERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3. ABRANGÊNCIA	5
2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.5. MATERIAIS	6
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA. ...	6
3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA	6
3.2. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA.....	7
3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA	7
REFERÊNCIA	8

1. APRESENTAÇÃO

O Simulador de cricotirotomia é uma reprodução realista da cabeça de um paciente adulto. É projetado especificamente para treinar profissionais na prática de cricotirotomia cirúrgica e por agulha.

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA

2.1. OBJETIVO GERAL

Descrever a forma correta de uso, armazenamento e limpeza correta do simulador.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre o uso do simulador;
- Oferecer informações sobre a limpeza e armazenamento do simulador;
- Proporcionar conforto, segurança e durabilidade ao simulador.

2.3. ABRANGÊNCIA

Laboratórios de Saúde da Afya Itajubá.

2.4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas, aqui estabelecidas, é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste simulador.

2.5. MATERIAIS

- 1 - Cabeça Cricoide Stick
- 1 - Traqueia rígida intercambiável
- 1 - Traqueia macia intercambiável
- 1 - Pulmão Balão
- 1 - Cinta de Retenção
- 1 - Pele do pescoço
- 1 – Base



3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA USO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA.

3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA

- Utilizar sempre luvas de procedimento;
- Não usar objetos como: caneta, lápis, pincel ou materiais perfurocortantes, que possam danificar os simuladores;

- Não deixe a pele do pescoço em contato com o pescoço do modelo por períodos prolongados. Isso causará a migração de plásticos, resultando em bolhas na pele do modelo e viscosidade na pele do pescoço.
- Evite armazenar a pele em calor excessivo. A pele do pescoço pode ser usada repetidamente movendo a pele para a direita ou esquerda.

3.2. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA

- 1- Limpe com água e sabão neutro; não submerja o simulador ou as peças em líquidos de limpeza ou água.
- 2- Use apenas em superfície limpa. Evite marcadores de ponta porosa, canetas tinteiro, acetona, iodo ou outros produtos que manchem e evite colocar o simulador sobre jornal ou linhas com tinta de qualquer tipo.
- 3- Para garantir a longevidade, o simulador e as peças devem ser limpos após cada sessão de treinamento e uma inspeção geral deve ser realizada regularmente.
- 4- O simulador e todas as outras peças devem ser drenados e secos ao ar completamente antes de serem armazenados e desinfetados quando necessário.
- 5- As peças articuladas se beneficiarão de uma leve aplicação de talco antes das sessões de treinamento.
- 6- Armazene adequadamente entre as sessões de treinamento.

3.3. PROCEDIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DO SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA

- Manter o simulador na caixa organizadora;
- Manter o simulador em ambiente seco, limpo e com temperatura entre 23° a 25°C;
- Abrigar o simulador da luz solar.

REFERÊNCIA

LAERDAL. **Cricoid Stick Simulator DFU rev A**. [s.l.]: Laerdal, 2003. Disponível em: <https://laerdalcdn.blob.core.windows.net/downloads/f1925/ABZNKTMA/Cricoid-Stick-Simulator-DFU-rev-A.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2024.

Data da última revisão:	POP – SIMULADOR DE CRICOTIROTOMIA	Responsável pela Revisão:
12/01/2026		Isadora Teixeira Lima



Afya

FACULDADE
DE MEDICINA
DE ITAJUBÁ