


Fiche d'aide

pour lire et interpréter les antibiogrammes



Antibiogo

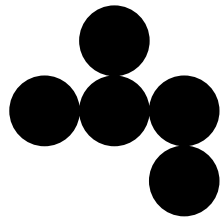


LA FONDATION

V9 - 29/07/2026 pour 2.5


Étape 0

Installer le photobooth

- 1 Fond** : pièce rectangulaire de feutre noir mat de taille A4 (21 x 30 cm)
 - 2 Supports** : deux objets ou plus pour soutenir le carton supérieur. Environ 21 cm de haut, comme une bouteille ou un bécet
 - 3 Carton supérieur** : plaque rigide de carton noir mat, de format A3 (42 x 30 cm) ou plus
- ⚠ **Placer la boîte de Pétri** au milieu du **Fond** face vers le haut et couvercle retiré.

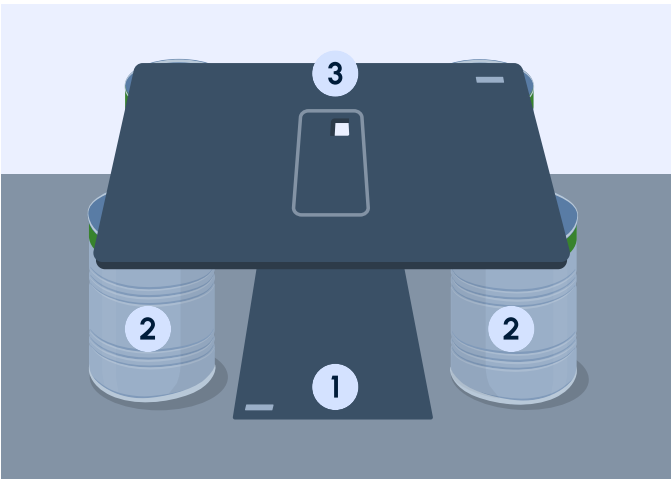

- Étape 1** Créer un antibiogramme
- Étape 2** Remplir les informations, dont le nombre de boîte de Petri
- Étapes 3 & 4** Prendre et confirmer la photo
- Étape 5** Confirmer ou modifier le nombre de disques
- Étape 6** Si besoin, ajouter les disques non identifiés
- Étape 7** Confirmer le nom, la concentration et le code de l'antibiotique. Modifier si nécessaire.

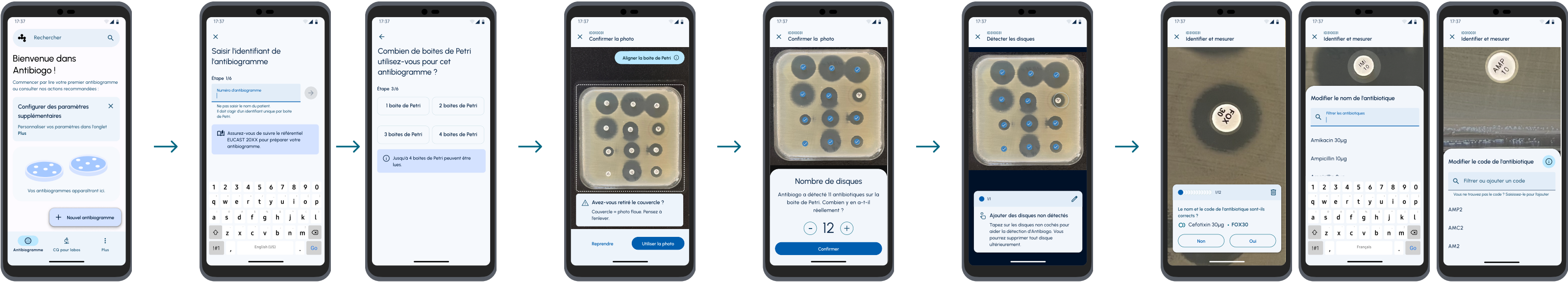

- Étape 8** Confirmer ou ajuster le DZI
- Étape 9** Lancer l'interprétation. Si demandé, répondre aux questions d'interprétation
- Étape 10** Revoir et valider le résumé. Si besoin, modifier.
- Étapes 11 & 12** Afficher & Partager la feuille de paillasse et/ou le rapport clinique en suivant les règles de votre laboratoire. (ex : par email ou impression)

