



MUND-HEIL-GEL

Medizinprodukt

Zur Linderung von Schmerzen und Unbehagen durch Aphthen Beschleunigt den Heilungsprozess

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SOS Mund-Heil-Gel lindert sowohl den Schmerz von Aphthen (schmerzhafte, geschwürartige Wunden), die auf Zunge, Mundschleimhaut und Lippen auftreten; als auch bei kleinen Verletzungen durch Zahnsplangen. Das Gel legt sich wie ein schützender Film über die Wunde und bildet so eine Barriere vor äußeren Einflüssen (z. B. scharfem Essen, säurehaltigen Säften) und fördert die natürliche Wundheilung.

Allgemeiner Hinweis:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, bevor Sie das SOS Mund-Heil-Gel anwenden, auch wenn Sie das Medizinprodukt schon einmal verwendet haben. Die Informationen können aufgrund neuer Forschungsergebnisse und Erkenntnisse geändert worden sein, seit Sie die letzte Packung geöffnet haben. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei erhältlich. Dennoch sollte das SOS Mund-Heil-Gel sorgfältig angewendet werden, um ein gutes Behandlungsergebnis zu erzielen. Heben Sie diese Gebrauchsinformation für den Fall auf, dass Sie diese später nochmals lesen möchten.

Anwendung:

Das SOS Mund-Heil-Gel ist ein Medizinprodukt mit mechanischer und physikalischer Wirkung zur Behandlung von Aphthen und Vorbeugung gegen die Entwicklung von Aphthen bei Menschen mit normalem Immunsystem ab dem Alter von 12 Jahren. Das Gel legt eine mechanische Barriere über die Aphthe und wirkt schmerzlindernd. Gleichzeitig unterstützt es die Geweberegeneration.

Dosierung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren:

Eine geringe Menge des Gels auf eine saubere Fingerspitze geben und sanft auf die Aphthe auftragen. Nach der Anwendung eine Zeit lang nichts essen oder trinken. Zwei- bis dreimal täglich anwenden, bis die Aphthe abgeheilt ist. Wenden Sie das SOS Mund-Heil-Gel nicht länger als 30 Tage hintereinander für eine Behandlung an.

⚠️ Warnhinweise:

- Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren;
- Verwenden Sie das SOS Mund-Heil-Gel nicht, wenn Sie überempfindlich gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe sind;
- Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums verwenden.

Mögliche Nebenwirkungen: Bislang wurden bei der Anwendung des SOS Mund-Heil-Gels keine Nebenwirkungen festgestellt.

Anwendung während der Schwangerschaft und oder Stillzeit:

Es liegen keine Daten zur Anwendung des SOS Mund-Heil-Gels während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie dieses Produkt anwenden.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Glycerin, Siliciumdioxid, PVP, hydriertes PEG-40-Rizinusöl, Cellulosegummi, Xylitol, Butylenglykol, Pentylenglykol, Xanthangummi, Dimeticon, Benzylalkohol, Duftstoff, Allantoin, Natriumhyaluronat, Natriumbenzoat, Bisabolol, Sorbinsäure, Hydroxyphenyl-Propamidobenzoesäure, Ascorbylpalmitat.



Aufbewahrungshinweise:

Bewahren Sie das Produkt bei einer Temperatur von 5–25 °C, trocken und vor Licht geschützt im Originalbehältnis und für kleine Kinder unzugänglich auf.

Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums verwenden.

Medizinprodukt:

Das SOS Mund-Heil-Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA gemäß Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG.




Letztes Datum der Anwendung:

Wir raten davon ab, das SOS Mund-Heil-Gel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum zu verwenden.



Hersteller:

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

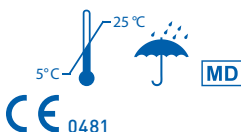

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Standort Bielefeld
Heidsieker Heide 114
DE-33739 Bielefeld

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Hersteller



Vertrieb



Temperaturbegrenzung



Trocken lagern



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Gebrauchsinformation beachten

Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchsinformation:

März 2020/053589-V1.3

Inhalt:

15 ml-Tube