



NAGELPILZ-STIFT

Medizinprodukt



Lesen Sie bitte vor der Anwendung des SOS Nagelpilz-Stifts mit Pinsel diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig durch.

Der SOS Nagelpilz-Stift ist für die Behandlung von Nagelpilz an Finger- und Zehennägeln sowie bei Nagelverfärbungen und zur Nagelpflege indiziert.

Nagelpilz

Nagelpilz, auch Onychomykose genannt, ist eine häufige Erkrankung, die in Form eines weißen oder gelben Flecks unter dem Rand der Finger- oder Zehennägel beginnt. Wenn die Pilzinfektion tiefer reicht, kann Nagelpilz dazu führen, dass sich der Nagel verfärbt, verdickt und am Rand brüchig wird. Der Pilz kann sich weiter auf das Nagelbett und die Nagelwurzel ausbreiten. Außerdem springt er oft von einem Nagel auf andere Nägel über.

Infizierte Nägel können sich vom Nagelbett lösen. Dies kann Schmerzen und einen unangenehmen Geruch verursachen. Nagelpilz tritt häufiger an Zehen- als an Fingernägeln auf.

SOS Nagelpilz-Stift

Der SOS Nagelpilz-Stift besteht aus einem Nagelpilzstift und der vorliegenden Gebrauchsanweisung.

Wenn der Wirkstoff auf die Nageloberfläche aufgetragen wird, dringt er sofort in den Nagel ein und wirkt durch Aufheben der Überlebensmöglichkeit für den Pilz. Aufgrund der Molekülstruktur der Stiftflüssigkeit und der Absorption in den Nagelgruben und -zwischenräumen wird der Nagelpilz an der Ausbreitung gehindert.

Eine sichtbare Wirkung entsteht binnen weniger Wochen. Die Behandlung wird bis zum vollständigen Nachwachsen des Nagels fortgesetzt (6–8 Monate bei Fingernägeln und 8–12 Monate bei Zehennägeln).

Der SOS Nagelpilz-Stift ist zur Behandlung von Kindern ab 8 Jahren geeignet. Der SOS Nagelpilz-Stift ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit sicher anwendbar.



Vorsichtsmaßnahmen:

Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Handhaben Sie das Produkt sorgfältig und gemäß dieser Gebrauchsanweisung. Personen mit Diabetes mellitus wird empfohlen, vor der Anwendung ihren Arzt zu konsultieren.

Wenden Sie den SOS Nagelpilz-Stift nicht an, wenn Sie bekanntermaßen überempfindlich gegen die Inhaltsstoffe sind.

Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit der gesunden Nagelhaut.



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.



Bei Kindern unter 8 Jahren nicht ohne ärztliche Verordnung anwenden.

Der SOS Nagelpilz-Stift ist für die punktgenaue Anwendung auf den Nägeln bestimmt. Nicht auf andere Körperteile wie Augen oder Schleimhäute auftragen.

Die Anzahl der empfohlenen Anwendungen darf nicht überschritten werden.

Bei Auftreten einer allergischen Reaktion oder Reizung ist die Anwendung abzubrechen.

Sollte der Wirkstoff versehentlich in die Augen gelangen, spülen Sie sie mit viel Wasser aus.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG des SOS Nagelpilz-Stifts:
Die Kappe vom SOS Nagelpilz-Stift abnehmen

- **ERSTE ANWENDUNG:** Das obere Ende des Stifts so weit drehen, bis Flüssigkeit auf den Pinsel läuft. Bei der ersten Anwendung können einige Drehungen notwendig sein. Drehen Sie langsam, um sicher zu gehen, dass nicht zu viel Flüssigkeit aufgetragen wird.
- **ANSCHLIESSEND:** Das obere Ende des Stifts drehen, wenn mehr Flüssigkeit benötigt wird.

Tragen Sie den Wirkstoff mit der Spitze sanft auf die betroffenen Nägel auf. Bedecken Sie möglichst die gesamte Nageloberfläche, nicht aber die umliegende gesunde Haut.

Lassen Sie die Lösung vollständig in den Nagel einziehen (1–5 Minuten, je nach aufgetragenem Flüssigkeitsvolumen).

Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei Mal am Tag, d. h. morgens und abends.

Nach 3–4 Wochen kann die Anwendung auf einmal pro Tag reduziert werden, bis ein gesunder Nagel nachgewachsen ist.

Zur Vorbeugung einmal wöchentlich auftragen.

Vor der Applikation stets den Nagellack entfernen. Der Nagellack kann nach der Behandlung wieder aufgetragen werden.

Der Stift kann 12 Monate nach der erstmaligen Anwendung verwendet werden und muss dann entsorgt werden.



Nebenwirkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Schwerwiegende Vorkommnisse sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Lagerung:

Zwischen 2 und 30 Grad Celsius und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. In der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 12 Monate nach dem erstmaligen Abnehmen der Kappe vom Stift nicht mehr anwenden. Den Stift nach Gebrauch fest verschließen. Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden.

Inhalt: 4 ml



Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.



Hersteller:

Unigroup ApS
Diplomvej 373
DK-2800 Lyngby
Dänemark

CE 0425

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
60549 Frankfurt



Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Verpackung lagern.



Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.



Eindeutige Produktidentifizierung



Chargenbezeichnung



Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.



Bei 2–30 °C lagern.



Einzelner Patient
Mehrfach anwendbar



Modellnummer



Nur zur äußeren Anwendung.



Medizinprodukt



101042



04

TECHNISCHE DATEN – Produktname: SOS Nagelpilz-Stift
Produkt: Der SOS Nagelpilz-Stift ist für die Behandlung von Nagelpilz an Finger- und Zehennägeln sowie bei Nagelverfärbungen und zur Nagelpflege indiziert.

Inhaltsstoffe: [INCI]: Ethyllactat, Dimethylisobutylsorbit, Milchsäure (3,76 %), Glycerin, Wasser

Inhalt: 4 ml, ausreichend für mindestens 250 Anwendungen. Zulassung: Der SOS Nagelpilz-Stift ist klassifiziert und zugelassen als Medizinprodukt der Klasse IIa.

Aufbewahrung: Bei 2–30 Grad Celsius vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zusammen mit dieser Gebrauchsinformation in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Hersteller: Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Dänemark, www.nilocin.com.

Stand der Information: 09.2023