



WARZEN-EX-PFLASTER

Medizinprodukt

Was ist eine Warze?

Warzen sind gutartige Wucherungen an der Oberhaut, die vor allem an Fingern, Fußsohlen, im Gesicht oder im Genitalbereich auftreten können. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, wobei fast alle durch eine Infektion mit humanen Papilloviren (HPV) hervorgerufen werden.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster ist zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen geeignet.

Wie lässt sich eine Infektionsausbreitung und eine Ansteckung vermeiden?

Auslöser für gewöhnliche Warzen ist eine Infektion mit humanen Papilloviren (HPV). Die Übertragung erfolgt durch Kontakt- und Schmierinfektion. Die Erreger werden häufig über eine Kontaktinfektion direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Über winzige Risse oder Verletzungen können die Viren in die oberste Hautschicht eindringen (Schmierinfektion). Zwischen Ansteckung und dem ersten Auftreten der Warze (Inkubationszeit) können vier Wochen bis acht Monate vergehen. Nicht immer bricht das Virus aus.

Nach einer Infektion erhöht sich jedoch das Risiko für zukünftige Ausbrüche.

Verschiedene Faktoren begünstigen das Entstehen einer Warze: Personen mit leicht schwitzenden Füßen, keinen atmungsaktiven Schuhen oder feuchten Händen leiden häufiger an Warzen. Das Risiko wird durch ein schwaches Immunsystem, Allergien, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Stress und eine angegriffene Haut (bspw. Neurodermitis) erhöht.

Was ist das SOS Warzen-Ex-Pflaster und wofür wird es verwendet?

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster entfernt

gewöhnliche Warzen effektiv und gleichzeitig schonend. Das wasserfeste Pflaster wird direkt auf die betroffene Stelle an Händen und Füßen geklebt, wo es bis zu 12 Stunden wirkt und gleichzeitig Schutz vor einer Infektionsausbreitung bietet. Die verhornte Hautschicht der Warze wird durch die hochkonzentrierte Salicylsäure aufgeweicht und nach und nach abgetragen, bis die Infektion beseitigt ist.

Das Pflaster ist dünn und flexibel, was für ein besonders angenehmes Tragegefühl und ein dezentes Erscheinungsbild sorgt.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster zeichnet sich besonders durch eine leichte und schonende Entfernung aus und ist somit auch ideal zur Anwendung für empfindliche Hände und Füße geeignet.

Was müssen Sie vor der Verwendung des SOS Warzen-Ex-Pflasters beachten?

Das Warzen-Ex-Pflaster kann bei Erwachsenen angewendet werden. Bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren darf das SOS Warzen-Ex-Pflaster nicht angewendet werden.

Nur zur äußeren Anwendung. Nur für die Behandlung von Warzen. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.

Verwendung bei Schwangerschaft und Stillzeit

Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

Wie ist das SOS Warzen-Ex-Pflaster anzuwenden?

Waschen Sie sich vor dem Anbringen des SOS Warzen-Ex-Pflasters sorgfältig die Hände. Das Pflaster ist auf sauberer und trockener Haut anzuwenden. Vor dem Aufkleben die Schutzschicht des Pflasters entfernen und das Pflaster sorgfältig an der zu behandelnden Stelle andrücken. Setzen Sie die Okklusionstherapie einige Tage fort, wobei empfohlen wird, das SOS



Warzen Ex- Pflaster alle 12 Stunden zu wechseln. Nach einigen Tagen können Sie die aufgeweichten Hautschichten mit einem sauberen Scheuermittel für den persönlichen Gebrauch (z. B. einer Fußfeile) entfernen. Wiederholen Sie die Behandlung, bis die Warze verschwunden ist.

Anwendungsgebiet:

Zur effektiven und schonenden Entfernung gewöhnlicher Warzen. Das SOS Warzen-Ex-Pflaster schützt vor äußeren Einflüssen, hält den Bereich um die Warze während des Heilungsprozesses feucht und begünstigt dadurch auch das Weichwerden der Haut, was die mechanische Entfernung der Warze erleichtert. Durch diese besondere Wirkung kann das SOS Warzen-Ex-Pflaster das entstehende Mikroklima ohne den Einsatz von Arzneimitteln unter Kontrolle halten.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster ist dermatologisch getestet und zur Anwendung für empfindliche Hände und Füße geeignet.

Warnhinweise:

Nur zur äußeren Anwendung. Nur für die Behandlung von Warzen. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden. Sobald eine Sensibilisierung oder Reizung auftritt, muss die Behandlung sofort abgebrochen werden. Konsultieren Sie vor Verwendung des Produkts einen Arzt, wenn Sie Diabetiker sind, an Durchblutungsstörungen leiden, schwanger sind, stillen, das Produkt an Kindern unter 16 Jahren angewandt werden soll oder sonstige Zweifel bestehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält 35-40 % Salicylsäure. Ohne

vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt nicht länger als 2 Wochen anwenden. Bei schwerwiegenden Zwischenfällen sind der Hersteller und die zuständige Behörde zu benachrichtigen.

Lagerung:

Das Produkt in der Originalpackung an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort, fern von Wärmequellen, aufbewahren.

Inhalt: 24 Pflaster



Hersteller:

EUROSIREL S.p.A

Viale Europa, 30

20047 Cusago (MI) Italy

eurosirel@eurosirel.com



Vertrieb:

DISTRICON GmbH

Standort Bielefeld

Heidsieker Heide 114

DE-33739 Bielefeld

Stand der Information: 2023.11

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Hersteller



Vertrieb



Medizinprodukt



Verwendbar bis



Nicht wieder-
verwenden



Chargen-
bezeichnung



Vor Sonnenlicht
geschützt auf-
bewahren



Bitte Gebrauchs-
anweisung
beachten



Trocken lagern