



# WARZEN-EX-STIFT

## Medizinprodukt



**WICHTIG:** Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Medizinprodukts beginnen. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Der SOS Warzen-Ex-Stift ist mit einem ätzenden Wirkstoff versehen.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist der SOS Warzen-Ex-Stift und wofür wird er angewendet?
2. Wie wirkt der SOS Warzen-Ex-Stift?
3. Was sollten Sie vor der Anwendung des SOS Warzen-Ex-Stiftes beachten?
4. Wie ist der SOS Warzen-Ex-Stift anzuwenden?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist der SOS Warzen-Ex-Stift aufzubewahren?
7. Weitere Informationen über den SOS Warzen-Ex-Stift.

### 1. Was ist der SOS Warzen-Ex-Stift und wofür wird er angewendet?

Der SOS Warzen-Ex-Stift ist ein Medizinprodukt, das für die Behandlung von Warzen an Händen, Füßen, Rumpf, Armen und Beinen angewendet wird. Er ist für die Anwendung bei **Erwachsenen und Kindern ab vier Jahren** geeignet.

Warzen und Dornwarzen sind kleine Hautwucherungen, die durch das humane Papillomavirus (HPV) hervorgerufen werden. Warzen treten häufig an den Fingern oder am Handrücken auf. Gewöhnliche Warzen sind an ihrem groben „blumenkohllartigen“ Aussehen an der Oberfläche zu erkennen. Dornwarzen treten nur unter der Fußsohle auf. Sie können schmerzhaft sein und sehen häufig wie ein kleiner, weißer Hautring mit schwarzen Punkten in der Mitte aus. Das Virus ist sehr ansteckend. Dies bedeutet, dass Warzen und Dornwarzen insbesondere, wenn sie nicht behandelt werden, wachsen und sich ausbreiten können. Das Virus kann auch auf andere Körperpartien und andere Personen übertragen werden.

### 2. Wie wirkt der SOS Warzen-Ex-Stift?

Der SOS Warzen-Ex-Stift ist speziell für die lokale Anwendung direkt auf Warzen und Dornwarzen bestimmt. Nach der Anwendung wird die Flüssigkeit lokal in die Warze bzw. Dornwarze aufgenommen. Der Stift enthält Ameisensäure, welche die Warze bzw. Dornwarze durch Austrocknung der infizierten Haut behandelt.

### 3. Was sollten Sie vor der Anwendung des SOS Warzen-Ex-Stiftes beachten?

Der SOS Warzen-Ex-Stift **darf nicht angewendet** werden, wenn Sie bekanntermaßen **allergisch** (überempfindlich) gegen einen der in Abschnitt 7 genannten Bestandteile oder **Bienen-/Ameisenstiche** sind.

- Er darf bei Kindern im Alter von unter 4 Jahren nicht angewendet werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie Diabetes oder eine Kreislauftörung (periphere Gefäßerkrankung) an Händen oder Füßen haben.
- Wenden Sie den Warzenstift nicht in der Nähe von Gesicht, Hals, Achseln, Brüsten, Gesäß oder Genitalien an.
- Wenden Sie ihn nicht bei „Warzen“, aus denen Haare wachsen, bei Gesichtswarzen, Muttermalen, Leberflecken, Pigmentflecken oder anderen Flecken an. Fragen Sie vor Behandlungsbeginn bei Ihrem Arzt, Apotheker oder medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Warze oder Dornwarze haben, die sich für die Behandlung mit dem SOS Warzen-Ex-Stift eignet.

- Wenden Sie den SOS Warzen-Ex-Stift nicht auf entzündeten oder blutenden Warzen, gereizter, entzündeter, bläsiger oder geschädigter Haut an. Warten Sie, bis die Haut abgeheilt ist.
- Wenden Sie ihn nicht zusammen mit anderen Warzenbehandlungen an.
- Vermeiden Sie eine unnötige Sonneneinstrahlung, da dies zu einer vorübergehenden Verfärbung (Verdunklung oder Aufhellung) der behandelten Haut kommen kann.
- Bedecken Sie den behandelten Bereich nicht mit einem Pflaster. Die Bedeckung mit einem Pflaster nach der Behandlung kann zur Schädigung der Haut führen.

Bei der Anwendung dieses Produkts ist **besondere Vorsicht geboten**, da es einen stark riechenden, ätzenden Wirkstoff enthält. **Nicht inhalieren. Wenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Raum an. Den Stift nicht schütteln. Öffnen Sie den Stift stets in einer waagerechten Position über einem Waschbecken.**

Wenden Sie das Produkt **vorsichtig** und nur auf einer Warze oder Dornwarze an. Sie müssen nur wenig Produkt auftragen:

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf die umliegende gesunde Haut gelangt. Dies gilt insbesondere für die empfindliche Haut von kleinen Kindern, weil es bei falscher oder übermäßiger **Produktanwendung zu Blasen, Entzündungen, Gewebeschäden, Narbenbildung, Verbrennungen oder anderen Wunden kommen kann.**
- Bei der Behandlung von Kindern muss die Anwendung stets durch einen Erwachsenen erfolgen. In schwer zugänglichen Bereichen sollte die Lösung stets durch einen zweiten Erwachsenen aufgetragen werden.
- Es sind keine besonderen Risiken für schwangere oder stillende Frauen bekannt. Dennoch sollten Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal fragen.
- **WENN DAS PRODUKT VERSEHENTLICH MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN IN KONTAKT GEKOMMEN IST, SPÜLEN SIE SOFORT 15 MINUTEN LANG MIT REICHLICH WASSER UND KONTAKTIEREN SIE EINEN ARZT.**

### 4. Wie ist der SOS Warzen-Ex-Stift anzuwenden?

Der SOS Warzen-Ex-Stift gibt eine geringe Menge einer farblosen Lösung ab. Den Stift nicht schütteln, da er hierdurch beschädigt und undicht werden könnte. Drücken Sie vor der ersten Anwendung oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Stiftspitze ausgetrocknet ist, die Spitze auf ein saugfähiges Stück Papier, um die Flüssigkeitsabgabe zu prüfen. Sie sollten das Produkt zunächst nur sehr kurz auftragen. Die genaue Einwirkzeit in Sekunden hängt von Größe, Alter und Lokalisation der zu behandelnden Warze bzw. Dornwarze ab. **Im Zweifelsfall ist es besser, zu wenig Produkt aufzutragen.**



Den SOS Warzen-Ex-Stift gemäß den im Folgenden beschriebenen Schritten jeden zweiten Tag (an den Tagen 1, 3 und 5), gefolgt von zwei Tagen Pause, anwenden. Nur bei Warzen und Dornwarzen an Stellen anwenden, für die der Stift indiziert ist. Wenden Sie den Stift auf diese Weise so lange an, bis sich die Warze oder Dornwarze zurückgebildet hat, längstens jedoch 6 Wochen. **Überschreiten Sie nicht die Häufigkeit oder Anzahl der empfohlenen Anwendungen oder die maximale Kontaktzeit.**

**1.** Es wird empfohlen, den betroffenen Bereich mindestens 5 Minuten lang in lauwarmes Wasser zu tauchen, um die Haut vor der Behandlung aufzuweichen.

**2.** Wenn die Warze oder Dornwarze von harter Haut bedeckt ist, die harte Haut behutsam abrubbeln. Dabei ist darauf zu achten, die Haut nicht zu verletzen und an der Warze bzw. Dornwarze selbst nicht zu rubbeln.

**3.** Öffnen Sie den Stift vorsichtig: Öffnen Sie den Stift stets in einer waagerechten Position über einem Waschbecken. Die Kappe des Stifts durch Herunterdrücken und Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn entfernen.



**4.** Die Warze sanft mit der Spitze des SOS Warzen-Ex-Stifts bestreichen. Dabei die Kontaktzeit beachten (siehe folgende Empfehlung). Die Lösung dringt sofort in die äußere Schicht der Warze bzw. Dornwarze ein. Achten Sie darauf, die gesamte Warze bzw. Dornwarze zu behandeln, dabei jedoch nicht die umliegende gesunde Haut zu berühren oder das Produkt auf sie zu verschütten.

**5.** Den Stift nach der Anwendung wieder fest verschließen.

**6.** Die Behandlung jeden zweiten Tag (an den Tagen 1, 3 und 5), gefolgt von zwei Tagen Pause, durchführen und so lange wiederholen, bis sich die Warze oder Dornwarze zurückgebildet hat, längstens jedoch 6 Wochen.

**7.** Waschen Sie sich die Hände, nachdem Sie Warzen oder Dornwarzen berührt haben.

Bei der ersten Anwendung ist Vorsicht geboten, da nur wenig Produkt zur Behandlung erforderlich ist. Behandeln Sie anfangs eine einzelne Warze bzw. Dornwarze eine Sekunde lang, um zu sehen, wie die Haut reagiert. Wenn die Haut nicht reagiert und die Behandlung gut vertragen wird, die Kontaktzeit schrittweise verlängern. Hierbei die folgenden Hinweise beachten:

- Bei kleineren Kindern (im Alter von 4 bis 11 Jahren), Personen mit empfindlicher Haut, kleinen Warzen bzw. Dornwarzen behutsam beginnen und die Kontaktzeit schrittweise auf **bis zu 10 Sekunden** verlängern.
- Bei größeren Warzen oder hartnäckigen Dornwarzen unter der Fußsohle behutsam beginnen und die Kontaktzeit schrittweise auf **bis zu 20 Sekunden** verlängern.

Bei Beschwerden oder Schmerzen die Anwendung abbrechen. Wenn Sie ein Brennen oder Stechen verspüren oder die Lösung auf gesunde Haut gelangt ist, spülen Sie mit kaltem Wasser.

**5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wichtig ist, das Produkt wie angegeben anzuwenden. Verwenden Sie keine zu große Menge des Produkts, da dies zu Hautschäden führen kann.

- Gelegentlich ist über 10 bis 15 Minuten nach der Behandlung ein leichtes Kribbeln oder Brennen zu spüren.
- Bei Anwendung auf gesunder Haut kann es zu vorübergehenden Nebenwirkungen wie Stechen, Reizungen, Rötung, Schmerzen oder Blutungen kommen. Brechen Sie die Behandlung ab, bis sich die Haut vollständig erholt hat, und halten Sie den Bereich sauber, um eine mögliche Infektion zu vermeiden.
- Möglicherweise kann es bei einer Sonneneinstrahlung zu einer vorübergehenden Verfärbung der behandelten Haut kommen.

- Das Produkt riecht stark. Es kann Reizungen von Atemwegen, Rachen und/oder Augen hervorrufen. Riechen Sie nicht direkt am Stifthinhalt, da dies Nebenwirkungen wie eine laufende Nase, tränende Augen oder Atembeschwerden hervorrufen kann.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal. Schwerwiegende Vorkommnisse sollten dem Hersteller bzw. der zuständigen Behörde gemeldet werden.

**6. Wie ist der SOS Warzen-Ex-Stift aufzubewahren?**

Zwischen 2 und 25 ° C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Stift nach Gebrauch stets fest wieder verschließen. Das Produkt sicher entsorgen, wenn es nicht mehr benötigt wird.

**7. Weitere Informationen über den SOS Warzen-Ex-Stift**

Was der SOS Warzen-Ex-Stift enthält: Ameisensäure (85%), Dimethylisoborbid, Wasser

**Inhalt der Packung:**

- Ein SOS Warzen-Ex-Stift enthält 3 ml Flüssigkeit (ausreichend für mindestens 220 Anwendungen)
- Diese Gebrauchsinformation, die Sie sorgfältig durchlesen müssen, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen.

**Hersteller:**

Unigrup ApS, Diplomvej 373  
DK-2800 Lyngby, Dänemark



**Vertrieb:**

DISTRICON GmbH, Bessie-Coleman-Straße 13  
60549 Frankfurt a. M., Deutschland

MD REF 101060 # 01

Stand der Information: 2024.11

**Bedeutung der Symbole auf Packung:**

Beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung.

Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und in der Originalverpackung.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Chargenbezeichnung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung bei 2 – 25 °C.

Zur Anwendung bei einem einzelnen Patienten. Zur Mehrfachanwendung.

Nur zur äußeren Anwendung. Im Zweifelsfall ist es besser, wenn Sie weniger Flüssigkeit auftragen. Eine übermäßige Anwendung kann zu Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, absterbendem Gewebe (Nekrose), Narben und Verätzung führen.

Nicht ohne ärztliche Empfehlung bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.

Ätzend

Eindeutige Produktidentifizierung

Modellnummer