



WÄRME FLEECE-GÜRTEL

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Verwendungszweck:

Wärmetherapie zur vorübergehenden Linderung leichter Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schmerzen in Verbindung mit Überbelastung, Verspannungen, Zerrungen und Arthritis, Rückenschmerzen und anderen Krämpfen und Verspannungen.

Modell:

12 Stunden konstante Wärmeleistung

Gebrauchsanweisung:

1. Beutel unmittelbar vor der Anwendung aufreißten und Wärmepad entnehmen. Wärmepad in der Hand halten und einige Minuten warten, bis die Wärmereaktion eingetreten ist. Wärmepad in die dafür vorgesehene Spezialtasche des Fleecegürtels einlegen.
2. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
3. Es wird empfohlen, den Gürtel mit den Wärmepads 12 Stunden lang zu tragen, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Nicht länger als 12 Stunden tragen. Nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden tragen.
4. Fleecegürtel flach auf der Haut platzieren. Nicht falten oder knicken, da sonst das Risiko für Verbrennungen erhöht ist.
5. Wärmepads nur zur einmaligen Anwendung. Nach der Anwendung entsorgen.

Indikation:

SOS Wärme Fleece-Gürtel wurde speziell dafür entwickelt, Schmerzen in Verbindung mit Muskelkater, Muskelsteifheit, Verspannungen, Muskelzuckungen und -krämpfen sowie Rückenschmerzen und anderen Krämpfen und Verspannungen zu lindern.

Gegenindikationen:

SOS Wärme Fleece-Gürtel darf nicht von Personen angewendet werden, die unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen sind, wie z. B. bei Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen behandeln.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Kleinkindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Dieses Produkt ist zur einmaligen Anwendung. Dieses Produkt kann bei empfindlicher Haut oder unsachgemäßer Anwendung Juckreiz, Rötungen oder leichte Verbrennungen der Haut verursachen. Nicht während des Schlafs verwenden. Haut während der Anwendung häufig kontrollieren.

Fragen Sie vor der Anwendung einen Arzt um Rat, wenn Sie Diabetes, Durchblutungsstörungen oder eine Herzerkrankung haben, an rheumatoider Arthritis leiden oder schwanger sind.

Bei Auftreten einer Hautreizung oder Verbrennung das Produkt sofort entfernen.

Die Wärmezellen enthalten Eisen, das bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein kann. Bei Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und unverzüglich das Giftinformationszentrum kontaktieren. Bei Kontakt von Haut oder Augen mit dem Inhalt des Wärmepads den betroffenen Bereich sofort mit Wasser spülen. Das Produkt nicht in der Mikrowelle erwärmen oder versuchen, dieses erneut zu erwärmen, da die Wärmepads sich entzünden könnte.

Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen.

Während der Verwendung dieses Produkts:

Haut häufig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasenbildung kontrollieren und ggf. Anwendung des Produkts abbrechen. Wenn die Temperatur des Produkts unangenehm hoch erscheint, die Anwendung abbrechen. Keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt ausüben. Zur Vermeidung eines erhöhten Verbrennungsrisikos Produkt vor einer magnetresonanztomographischen Untersuchung (MRT) entfernen.

Nicht verwenden:

- Wenn der Inhalt einer Wärmezelle austritt und/oder der Umschlag beschädigt oder eingerissen ist.
- Länger als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden.
- In Verbindung mit einzureibenden Schmerzmitteln oder medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.



- Auf erkrankter, geschädigter oder verletzter Haut.
- Auf Bereichen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die vor weniger als 48 Stunden aufgetreten sind.
- An Körperstellen, an denen Sie keine Wärme empfinden können.
- Zusammen mit anderen Wärmequellen.
- Bei Personen, die das Produkt nicht selbst abnehmen können, darunter Kinder, Säuglinge und manche ältere Personen.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung vollständig zu befolgen.

Anwendung beenden und einen Arzt aufsuchen

Wenn die Schmerzen sich verschlechtern oder länger als 7 Tage anhalten. Wenn Sie an der Stelle, an der der Umschlag getragen wird, anhaltende Beschwerden, Verbrennungen, Schwellungen, Ausschläge oder andere Hautveränderungen bemerken.

Transport und Aufbewahrung:

Das Produkt bei Raumtemperatur trocken und in einer belüfteten Umgebung aufbewahren und transportieren.

Wichtigste Inhaltsstoffe

Zusammensetzung Wärmepad: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid
Material des Gürtels: 100 % Polyester

Verfallsdatum: 3 Jahre

Inhalt:

- 1 Fleece-Gürtel (160 x 14 cm) +
- 2 Wärmepads (13 x 9 cm)

EC REP Autorisierter Vertreter in Europa:

Prolinx GmbH
Brehmerstraße 56
D-40239 Düsseldorf



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt



Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International
Tech Park, South Waihuan Road, Linyi
276017 Shandong, P. R. China
Werk: Wenlv Healthcare Park
No. 18, Zhenbei Road, Xinyi City
221400 Jiangsu, P. R. China

CE 0197

Stand der Information: 03.2025

Bedeutung der Symbole auf der Packung:



Hersteller



Herstellungsdatum



Trocken lagern



Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung



Nicht wieder verwenden



Autorisierter Vertreter in Europa



Chargennummer



eindeutige Produktidentifikationsnummer



Vertrieb



Lagertemperatur



Vor Sonnenlicht schützen



Halten Sie sich bei der Verwendung an die Gebrauchsanweisungen



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Medizinprodukt



Verfallsdatum

648_REV01/G01