



WÄRME FLEECE-SCHAL

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Verwendungszweck:

Liefert therapeutische Wärme für vorübergehende Linderung leichter Muskel- und Gelenksbeschwerden und Schmerzen in Verbindung mit Überanstrengung, Zerrungen, Verstauchungen sowie Nackenschmerzen und sonstigen Krämpfen oder Verspannungen.

Modell:

12 Stunden konstante Wärmeleistung

Die effektive Tiefenwärme dieses Wärme-Pflasters dauert 12 Stunden an. Nachdem der Schmerz gelindert ist, kann die Wirkung weitere 4 Stunden anhalten – für insgesamt bis zu 16 Stunden Schmerzlinderung.

Gebrauchsanweisung:

1. Wenn Sie das Produkt verwenden wollen, reißen Sie den Beutel auf und nehmen das Pad heraus. Warten Sie einige Minuten und halten Sie das Pad in der Hand, um die thermische Reaktion einzuleiten. Legen Sie das Pad in die spezielle Tasche im Fleecechal.
2. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
3. Für maximale Wirksamkeit empfehlen wir, das Produkt 12 Stunden lang zu tragen. Tragen Sie es nicht länger als 12 Stunden. Tragen Sie es innerhalb von 24 Stunden nicht länger als insgesamt 12 Stunden.
4. Legen Sie die den SOS Wärme Fleece-Schal glatt auf Ihre Haut. Nicht falten oder knittern. Das erhöht die Gefahr von Verbrennungen.
5. Nur für einmaligen Gebrauch. Nach der Verwendung entsorgen.

Indikation:

SOS Wärme Fleece-Schal wurde speziell dafür entwickelt, Schmerzen in Verbindung mit Muskelbeschwerden, Steifheit, Verspannung, Muskelspasmen und Krämpfen sowie Nackenschmerzen und sonstige Krämpfe und Verspannungen zu lindern.

Gegenindikationen:

SOS Wärme Fleece-Schal sollte nicht bei Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Temperaturextremen sind, wie z. B. Menschen mit

Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung von Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen notwendig.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Kleinkindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Wegwerfprodukt. Dieses Produkt kann bei Personen mit empfindlicher Haut oder bei falscher Verwendung Juckreiz, Hautrötungen oder leichte Verbrennungen verursachen. Gehen Sie nicht mit dem SOS Wärme Fleece-Schal schlafen. Überprüfen Sie während der Verwendung regelmäßig Ihre Haut.

Fragen Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Herzkrankheiten, rheumatischer Arthritis leiden oder schwanger sind. Sollten Sie Hautirritationen oder Verbrennungen bemerken, entfernen Sie das Produkt umgehend.

Das Wärmepad enthält Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Wenn Sie etwas verschluckt haben, waschen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und verständigen Sie den Giftnotruf. Nach Kontakt des Wärmepad-Inhalts mit Haut oder Augen, spülen Sie das betreffende Körperteil umgehend mit Wasser.

Wärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle auf oder versuchen, es erneut zu erhitzen, da die Wärmepads Feuer fangen könnten. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Während der Verwendung dieses Produkts:

Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Sollten Sie diese feststellen, beenden Sie die Verwendung. Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, beenden Sie die Verwendung. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus. Um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden, entfernen Sie das Produkt, bevor Sie sich jeglicher Formen von MRT (Magnetresonanztomographie) unterziehen.

Nicht verwenden:

- wenn das Wärmepad undicht ist und/oder der Fleecechal beschädigt oder gerissen ist.
- für eine längere Zeit als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden.



- in Kombination mit Schmerzsalben, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- bei ungesunder, geschädigter oder verletzter Haut.
- auf Hautarealen mit Schwellungen oder Hämatomen, die jünger sind als 48 Stunden.
- auf Hautarealen ohne Temperaturempfinden.
- in Kombination mit anderen Wärmequellen.
- bei Personen, die das Produkt nicht selbstständig entfernen können, einschließlich Kinder, Kleinkinder und manche ältere Menschen.
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, alle Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

Wann Sie die Verwendung beenden und einen Arzt fragen sollten:

Bei Schmerzen, die sich verschlimmern oder für mehr als 7 Tage anhalten. Bei Unwohlsein, Verbrennungen, Schwellungen, Ausschlägen oder sonstigen anhaltenden Hautveränderungen an der Tragestelle.

Transport und Aufbewahrung:

Das Produkt kann bei Raumtemperatur in trockener und gut gelüfteter Umgebung gelagert und transportiert werden.

Hauptmaterialien und Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung Wärmepad: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid
Nackenbinde (Fleeceschal): Polyester und Elasthan

Verfallsdatum: 3 Jahre

Inhalt:

1 Fleece-Schal (59 x 13 cm) +
2 Wärmepads (13 x 9 cm)

Autorisierter Vertreter in Europa:

Prolinx GmbH
Brehmerstraße 56
40239 Düsseldorf



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main

Ein Unternehmen der  **MERZ**
LIFECARE



Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International
Tech Park, South Waihuan Road, Linyi,
276017 Shandong, P. R. China

Werk: Wenlv Healthcare Park,
No. 18, Zhenbei Road, Xinyi City,
221400 Jiangsu, P. R. China

 0197

Stand der Information: 04.2023

Bedeutung der Symbole auf der Packung:



Hersteller



Vertrieb



Herstellungs-
datum



Lagertemperatur



Trocken lagern



Vor Sonnenlicht
schützen



Achtung! Verweis
auf Warnhinweise
in Gebrauchs-
anweisung



Halten Sie sich bei
der Verwendung
an die Gebrauchs-
anweisungen



Nicht wieder-
verwenden



Nicht verwenden,
wenn die Verpackung
beschädigt ist



Autorisierter
Vertreter
in Europa



Medizinprodukt



Chargennummer



Verfallsdatum



eindeutige Produktidentifikationsnummer

MN 180005100

587_REV03/G05