


VERSORGUNGSHANDBUCH

Phlebologie · Lymphologie · Orthopädie

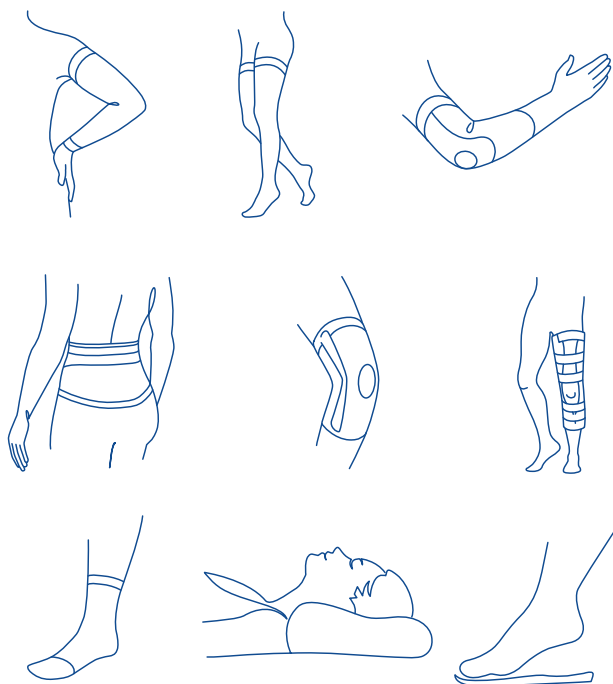

Schiebler

Medizinische Kompression
und Bandagen seit 1949.

Gute Versorgung ist mehr als ein Rezept.

Gute Produkte sind wichtig. Verlässliche Partner ebenso. Mit Schiebler unterstützen Sie Ihre Patienten mit wirksamen Lösungen – und können sich dabei auf starken Service verlassen.

Verordnen mit Sicherheit. Versorgen mit Vertrauen.


Seit 1949 steht der Name Schiebler für medizinische Kompression und Bandagen auf höchstem Niveau – entwickelt und gefertigt in Deutschland. Unsere Produkte verbinden therapeutische Wirksamkeit, verlässliche Qualität und angenehmen Tragekomfort. Dieses ausgewogene Zusammenspiel macht unsere Lösungen zu einem echten Gewinn – für Patienten und für die tägliche Arbeit im medizinischen Fachbereich.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – und darauf, Sie und Ihre Patienten bestmöglich zu unterstützen.



Persönlich, schnell und unkompliziert sind wir für Sie da: Montag bis Freitag, 7.45 – 16.30 Uhr unter 0461 978999200 oder jederzeit per E-Mail an info@schiebler.de



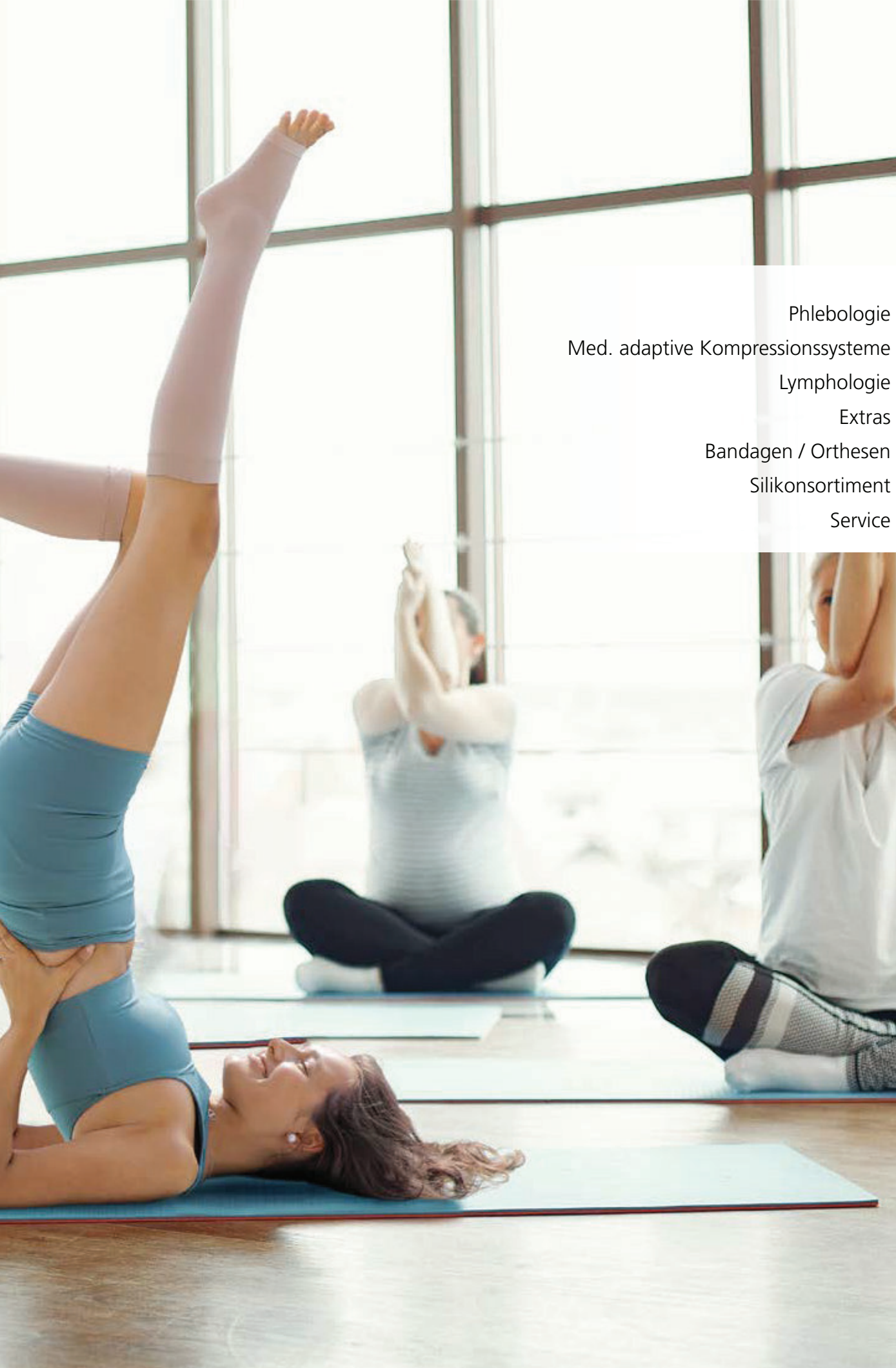

THEMEN

Phlebologie	ab 06
Med. adaptive Kompressionssysteme	ab 16
Lymphologie	ab 22
Extras	ab 28
Bandagen / Orthesen	ab 30
Silikonsortiment	ab 58
Service	ab 60

Zusammen bringen wir die Freude am Leben zurück.

In unserer Flensburger Manufaktur entstehen medizinische Hilfsmittel mit Sorgfalt, Erfahrung und technischem Know-how. Für Produkte, die den Alltag von Patientinnen und Patienten spürbar verbessern.

Hoch hinaus. Mit modernster Technik und Fingerspitzengefühl.

Sie erwarten beste therapeutische Wirksamkeit und hohen Tragekomfort einer zuverlässigen Versorgung. Wir auch. Und so entwickeln wir in enger Abstimmung mit Mediziner*innen und dem Fachhandel Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Mit modernster Technik und handwerklicher Präzision werden unsere Produkte umgesetzt und stetig weiter entwickelt. Diese Kombination aus jahrzentelangem Fachwissen, Flexibilität, Innovation und Liebe zum Detail macht den Unterschied. Sie sorgt dafür, dass Versorgung von Schiebler mehr ist als nur ein Produkt.



Hand in Hand aus Ihrer Manufaktur in Flensburg: Vom Maschinenführer bis zur Näherin sind wir für Sie da.



Innovationen seit 1949

Seit 1949 entwickeln wir bei Schiebler hochwertige medizinische Hilfsmittel – mit dem Anspruch, Versorgungsqualität kontinuierlich weiterzudenken. Unsere erste patentierte Lösung stammt aus dem Jahr 1954 – und der Innovationsgeist treibt uns zum Wohle Ihrer Patienten bis heute an.

www.schiebler.de/unternehmen



Verlässliche Qualität

Wir setzen auf wirksame Kompression, funktionale Konstruktion und schnitttechnische Präzision. Ob 3D-Wellengestrick oder Zusatzdetails in der Strumpfhose – unsere hochwertigen Produkte bieten zuverlässige Unterstützung im Versorgungsalltag und geben Patientinnen und Patienten ein gutes Gefühl.

www.schiebler.de/



Hilfe nach Maß

Wenn Standard nicht passt: Unsere Manufaktur fertigt individuelle medizinische Hilfsmittel – genau abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen und Patienten. In Strickerei und Näherei verbinden qualifizierte Fachkräfte modernste Technik mit handwerklichem Können – für höchste Passgenauigkeit und optimalen Therapieerfolg.

shop.schiebler.de



Digitales vermessen

Die Schiebler 3D-Vapp macht Ihr Smartphone zum digitalen Maßband. Vermessen Sie rundgestrickte Kompressionsstrümpfe – für mehr Effizienz und Komfort in der Versorgung. Berührungslos, präzise und schnell: Maßband aus, Zukunft an und „let's go“ mit der 3D-Vapp in die digitale Vermessung.

www.schiebler.de/vapp

Kompressionsstrümpfe für die Venentherapie

Schiebler steht für wirksame Kompression: fundiertes medizinisches Fachwissen trifft auf langjährige Strickkompetenz und technologische Präzision. Kompression mit System – aus der Manufaktur für individuelle Lösungen.

Ihre Versorgungsoptionen nach Krankheitsbildern.

Befund nach CEAP*	Produkteignung						KKL
C0 Keine sichtbaren Zeichen einer venösen Erkrankung	↓	↓	↓				
C1 Besenreiser, Teleangiektasien oder retikuläre Venen	↓	↓	↓				KKL 1 18 – 21 mmHg
C2 Varikose ohne klinische Zeichen einer CVI	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
C3 Ödem, bedingt durch venöse Insuffizienz	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
C4 Varikose mit trophischen Hautveränderungen	↓	↓	↓	↓	↓		KKL 2 23 – 32 mmHg
C5 abgeheiltes Ulcus cruris venosum			↓	↓			KKL 3 34 – 46 mmHg
C6 florides Ulcus cruris venosum				↓			
Die sinnvolle Kompressionsstrumpfauswahl	Venesso	Venex	Veni	Doktus ohne Naht	Star Cotton	Business & Holliday	
Seite	9	10	10	11	11	14	

* Das **CEAP-Klassifikationssystem** (Clinical condition; Etiology; Anatomic Location; Pathophysiology) bietet eine sechsstufige Einteilung chronischer venöser Erkrankungen nach Erfassung anatomischer und pathophysiologischer Aspekte.

Bitte bedenken Sie: Ausgehend von der **s2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“** der DGP ist das Material des Kompressionsstrumpfes um so kräftiger zu wählen, je ausgeprägter die körperlichen Belastungsfaktoren (weiches Gewebe, Körpergewicht, Hautfalten oder ein fortgeschrittener Krankheitsverlauf) sind.

Kompression mit System – individuelle Lösungen aus unserer Manufaktur




Für eine leitliniengerechte und zugleich praxisnahe Versorgung bieten unsere Kompressionsstrümpfe die verlässliche Lösung. Sie werden auf höchstem technischen Niveau gefertigt und zeichnen sich durch durchdachte Produkteigenschaften aus, die die Trageakzeptanz Ihrer Patienten gezielt fördern. Unsere zertifizierten medizinischen Kompressionsstrümpfe punkten nicht nur in ihrer Ausstattungsvielfalt: Auf Wunsch fertigen auch nach Maß in 24 Stunden.

Ihre überzeugenden Produktvorteile

Wählen Sie aus unserem Programm je nach Indikation und Patientenwunsch den passenden Kompressionsstrumpf. Näheres dazu erfahren Sie auf den folgenden Detailseiten und auf www.schiebler.de

Zielgruppe	Versorgung	Positionierung	Hauptmerkmale	Seite
Standardversorgung	Venesso	Basis (Alltag)	Farbenfroher, weichelastischer Alltagsstrumpf, perfekte Passform, viele Farben, für Preisbewusste	9
Komfortorientiert	Venex	Premium (Technisch)	Komfort durch mikrofeine Hightech-Garne, thermoregulierendes Tragegefühl, moderne Optik	10
Stil-/Komfortbewusst	Veni	Premium (Modisch)	Eleganter Premiumstrumpf, edles Design mit feinsten Maschentransparenz bei hoher Materialqualität	10
Medizinisch anspruchsvoll	Doktus	Premium (Medizinisch)	Sehr strapazierfähig, hohe Elastizität und zuverlässige Druckwirkung, nahtlos, formstabil, über den ganzen Tag hochwirksam	11
Hautsensibel, naturbewusst	Star Cotton	Premium (Naturfaser)	Hautkontakt ausschließlich mit dem hohen Baumwollanteil, empfindliche Haut, sehr hautfreundlich, blickdicht	11

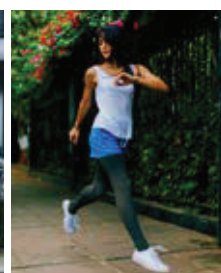




Wenn es schnell gehen soll

Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe sind auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden versandbereit. Doch bei Sondermodellen, speziellen Farben oder individuellen Anpassungen kann es zu längeren Produktionszeiten kommen. Wenn es besonders schnell gehen muss, empfehlen wir unseren Klassiker Venesso (KKL 1 und 2) in den Farben Apricot, Karamell, Rauch oder Schwarz.



Venesso

Der verlässliche Kompressionsstrumpf-Klassiker.

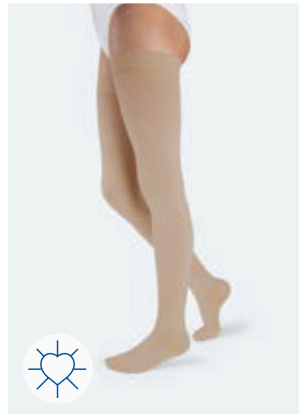

- starke Varicosis
- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)

Merkmale

- Alltagskompressionsstrumpf in extra zuverlässigem Gestrick mit leichter An- und Ausziehcharakteristik. Weichelastisch, nahtlos, schmiegt sich der Figur wie eine zweite Haut an.
- salbenunempfindlich
- unempfindlich gegen Sonne
- Größe I-VII in über elf Farben für Maß- und Serieprodukte
- in sämtlichen Extra-Varianten lieferbar*

Indikationen

KKL 1

- mäßige Kompression
- mäßige Varicosis
- Schwangerschaftsvarizen
- Besenreiser

KKL 2

- mittlere Kompression

HVN

KKL 1

KKL 2

Wadenstrümpfe AD:

Serie 17.06.01.0126 17.06.01.1044

Maß 17.06.10.0089 17.06.10.1005

Schenkelstrümpfe AG:

Serie 17.06.03.0108 17.06.03.1124

Maß 17.06.12.0077 17.06.12.1005

Strumpfhosen AT:

Serie 17.06.04.0110 17.06.04.1034

Maß 17.06.13.0074 17.06.13.1005

Umstandshosen AT/U:

Serie 17.06.04.0110 17.06.04.1034

17.99.99.2019 17.99.99.2019

Maß 17.06.13.0074 17.06.04.1005

17.99.99.2019 17.99.99.2019


Materialien

KKL 1: 59 % Polyamid, 41 % Elasthan

KKL 2: 56 % Polyamid, 44 % Elasthan




Strumpfmusterdesigns in Maß und in Serie gegen Aufpreis

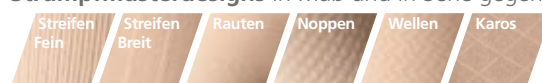

* **Haftbänder, Hosenbund-Varianten sowie Farb- und Strickmuster** finden Sie über die Produktbeschreibung auf www.schiebler.de oder den QR-Code

Venex

Der thermoregulierende Aktiv-Kompressionsstrumpf.

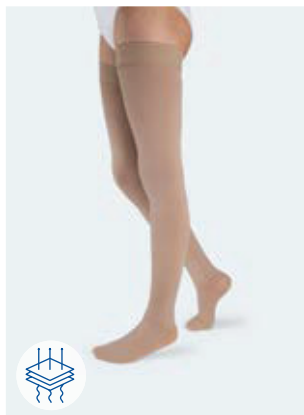

- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)

Merkmale

- Hightech-Microfasern gewährleisten optimalen Luftaustausch und angenehm weiches Gefühl auf der Haut in optischer Feinstrumpfqualität
- salbenunempfindlich
- Größe I-VII in sieben Farben für Maß- und Serieprodukte
- in sämtlichen Extra-Varianten lieferbar*

Indikationen

KKL 1 – mäßige Kompression:

- mäßige Varicosis
- Schwangerschaftsvarizen
- Besenreiser

KKL 2 – mittlere Kompression:

- starke Varicosis

HVN

KKL 1

Wadenstrümpfe AD :

Serie 17.06.01.0052

Maß 17.06.10.0003

Schenkelstrümpfe AG:

Serie 17.06.03.0048

Maß 17.06.12.0003

Strumpfhosen AT:

Serie 17.06.04.0052

Maß 17.06.13.0003

Umstandshosen AT/U:

Serie 17.06.04.0052

17.99.99.2019

Maß 17.06.13.0003

17.99.99.2019

KKL 2

17.06.01.1112

17.06.10.1003

17.06.03.1102

17.06.12.1003

17.06.04.1088

17.06.13.1003

17.06.04.1088

17.99.99.2019

17.06.13.1003

17.99.99.2019

Materialien


KKL 1: 54 % Elasthan, 46 % Polyamid

KKL 2: 58 % Elasthan, 42 % Polyamid



Veni

Die semitransparente Kompressionsstrumpf-Eleganz.

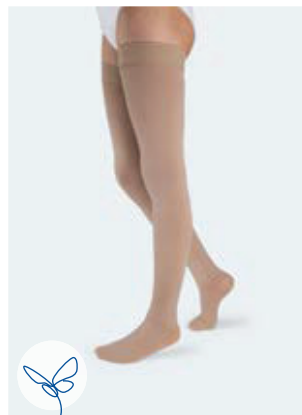

- tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)
- KKL 3 – kräftige Kompression:
- starke Ödemneigung oder nach Abheilung venös bedingter Ulcera
- postthrombotisches Syndrom
- chronisch venöse Insuffizienz

Merkmale

- feinste, rundgestrickte Maschentransparenz; bei hoher Materialqualität kaum vom Modestumpf zu unterscheiden
- salbenunempfindlich
- Größe I-VII in sieben Farben für Maß- und Serieprodukte
- in sämtlichen Extra-Varianten lieferbar*

Indikationen

KKL 1 – mäßige Kompression:

- mäßige Varicosis
- Schwangerschaftsvarizen
- Besenreiser

KKL 2 – mittlere Kompression:

- starke Varicosis
- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der

HVN

KKL 1

Wadenstrümpfe AD

Serie 17.06.01.0021

Maß 17.06.10.0002

Schenkelstrümpfe AG

Serie 17.06.03.0046

Maß 17.06.12.0002

Strumpfhosen AT

Serie 17.06.04.0020

Maß 17.06.13.0002

Umstandshosen AT/U

Serie 17.06.04.0020

17.99.99.2019

Maß 17.06.13.0002

17.99.99.2019

KKL 2

17.06.01.1043

17.06.10.1002

17.06.03.1098

17.06.12.1002

17.06.04.1033

17.06.13.1002

17.06.04.1033

17.99.99.2019

17.06.13.1002

17.99.99.2019

KKL 3

-

17.06.10.2002

-

17.06.12.2002

-

17.06.13.2002

-

17.06.13.2002

17.99.99.2019

Materialien

KKL 1, 54 % Elastan, 46 % Polyamid

KKL 2, 58 % Elastan, 42 % Polyamid


KKL 3, 58 % Elastan, 42 % Polyamid (nur nach Maß)



* Haftbänder, Hosenbund-Varianten sowie Farb- und Strickmuster finden Sie über die Produktbeschreibung auf www.schiebler.de oder den QR-Code

Doktus

Die strapazierfähige Kompressionsstrumpf-Institution.

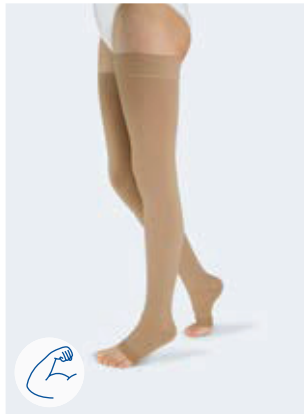

- Muskelrissen, Sklerosierung)
KKL 3 – kräftige Kompression:
- starke Ödemneigung oder nach Abheilung venös bedingter Ulcera
 - postthrombotisches Syndrom
 - chronisch venöse Insuffizienz

Merkmale

- hohe Strapazierfähigkeit und zuverlässige Druckwirkung zur Behandlung mittlerer und schwerer Indikationen. Nahtlos, hochelastisch für perfekten Sitz und hoher Formstabilität
- nahtlos, salbenunempfindlich
- besonders kräftig
- Größe I-VII in sechs Farben für Maß- und Serieprodukte

Indikationen

- KKL 2 – mittlere Kompression:
- starke Varicosis
 - mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
 - Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
 - bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen,

HVN

	KKL 2	KKL 3
Wadenstrümpfe AD:		
Serie	17.06.01.1042	17.06.01.2023
Maß	17.06.10.1004	17.06.10.2003
Schenkelstrumpf AG:		
Serie	17.06.03.1040	17.06.03.2021
Maß	17.06.12.1004	17.06.12.2003
Strumpfhose AT:		
Serie	17.06.04.1032	17.06.04.2016
Maß	17.06.13.1004	17.06.13.2003
Umstandshose AT/U:		
Serie	17.06.04.1032 / 17.99.99.2019	17.06.04.2016 / 17.99.99.2019
Maß	17.06.13.1004 / 17.99.99.2019	17.06.13.2003 / 17.99.99.2019


Materialien

KKL 2: 54 % Polyamid, 46 % Elasthan
KKL 3: 56 % Polyamid, 44 % Elasthan



Star Cotton

Der weiche Naturfaser-Kompressionsstrumpf.

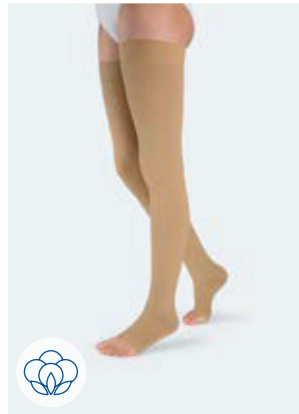

- starke Varicosis
- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)

Merkmale

- mit hautfreundlichen Baumwollfasern umwobenes Kompressionsgarn. Hautsympatisches, unauffälliges Maschenbild, Hautkontakt ausschließlich mit dem Baumwollanteil
- strapazierfähig, nahtlos
- mit Ferse ohne Spitze
- Größe I-VII in zwei Farben für Maß- und Serieprodukte

Indikationen

- KKL 1 – mäßige Kompression:
- mäßige Varicosis
 - Schwangerschaftsvarizen
 - Besenreiser
- KKL 2 – mittlere Kompression:

HVN


	KKL 1	KKL 2
Wadenstrümpfe AD:		
Serie		17.06.01.1046
Maß	17.06.10.0098	17.06.10.1007
Schenkelstrumpf AG:		
Serie		17.06.03.1042
Maß	17.06.12.0085	17.06.12.1007
Strumpfhose AT:		
Serie		17.06.04.1064
Maß	17.06.13.0080	17.06.13.1007
Umstandshose AT/U:		
Serie		17.06.04.1064
		17.99.99.2019
Maß	17.06.13.0080	17.06.13.1007
		17.99.99.2019

Materialien

KKL 1: (Maß), 29 % Baumwolle, 29 % Elastan, 42 % Polyamid
KKL 2: 42 % Baumwolle, 32 % Elasthan, 26 % Polyamid



Serienmaße

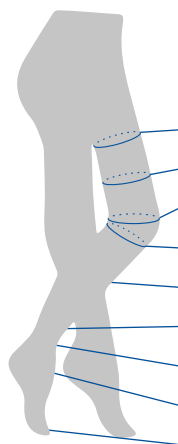

Seriengrößen Rundstrick (ohne Naht)

Um- fang	1	1 Plus	2	2 Plus	3	3 Plus	4	4 Plus	5	5 Plus	6	6 Plus	7	7 Plus
cG	43-48	43-55	45-51	45-59	49-55	49-63	53-59	53-66	57-63	57-69	61-66	61-72	64-69	64-75
cF	39-43	39-49	41-46	41-52	44-49	44-55	47-52	47-58	50-55	50-61	53-58	53-64	56-61	56-67
cE	30-34	30-37	33-37	33-39	35-39	35-41	38-41	38-44	40-44	40-46	42-46	42-48	44-48	44-52
cD	28-30	28-34	30-34	30-36	32-36	32-38	34-38	34-41	36-41	36-43	38-43	38-45	40-45	40-49
cC	29-33	29-35	31-35	31-37	33-37	33-39	35-39	35-42	37-42	37-45	39-45	39-47	41-48	41-52
cB1	24-26	24-26	26-28	26-28	28-30	28-30	30-33	30-33	32-35	32-35	34-37	34-37	36-39	36-39
cB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-28	26-28	28-30	28-30	30-32	30-32
cY	26-31	26-31	28-33	28-33	29-34	29-34	31-36	31-36	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41
cA	17-21	17-21	19-23	19-23	21-25	21-25	23-27	23-27	25-29	25-29	27-31	27-31	29-33	29-33

Beinlängen

	KKL	AD	AG / AT	
Veni	1+2			
Venex Micro Light	1+2	kurz	33-37	kurz 57-67
Venesso Soft	1+2	normal	38-43	normal 68-80
Business & Holiday*	2	lang	44-48	lang 81-90
Doktus	2	kurz	33-37	kurz 60-67
Star Cotton	2	normal	38-42	normal 68-75
		lang	43-46	lang 76-82
Doktus Dur	3	kurz	33-37	kurz 62-67
		normal	38-41	normal 68-73
		lang	42-45	lang 74-80

Fußlängen

Variante	Schuhgr.	mit Spitze	ohne Spitze
klein	35-38	21-23 cm	13-15 cm
normal	39-42	24-26 cm	16-18 cm
groß	43-46	27-29 cm	19-21 cm
XL	47-50	30-32 cm	22-24 cm

Leibteilvarianten

Variante	Länge
kurz	bis 28 cm
normal	29-33 cm
lang	über 34 cm



Ausführliche Informationen zu Haftbändern, Hosenbund-Varianten sowie Farb- und Strickmuster finden Sie über die Produktbeschreibung auf www.schiebler.de oder den QR-Code

Varianten und Extras im Überblick

• Serienversorgung • Maßversorgung

REF	Variante (REF)	Venesso	Venex	Veni	Doktus	Star Cotton	B&H	Reisestr.	Ulcus Cruris
	KKL 1	••	••	••		•			
	KKL 2	••	••	••	••	••	•		
	KKL 3			•	••				
A Größe	Seriengröße	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	XS-XL	1-7
B Weite	Weite	normal/ plus	normal/ plus	normal/ plus	normal/ plus	normal/ plus	normal	normal	normal
C Farbe	Karamell (0)	••	••	••	••				
	Rauch (1)	••	••	••					
	Apricot (2)	••	••	••	••				
	Schwarz (3)	••	••	••	••	••	•	•	
	Marineblau (4)	••			••		•	•	
	Weiß (5)	••	••	••			•		•
	Perle (6)	••	••	••					
	Mocca (7)	••							
	Schiefer (8)	••	••	••			•		
	Bordeaux (B)	••			••				
	Waldgrün (G)	••			••				
	Sand					••		•	
D Spitze	Spitze geschlossen	••	••	••	••	••	•	•	•
	Spitze offen	••	••	••	••	••			
E Fußlänge	Normal	•	•	•	•	•	•	•	•
	Klein	•	•	•	•	•	•		
	Groß	•	•	•	•	•	•		
	XL	•	•	•	•	•	•		
F Beinlänge	Normal	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kurz	•	•	•	•	•	•		
	Lang	•	•	•	•	•			
	Schwangerschaftshosenteil	••	••	••	••	••		17.99.99.2019	
	Leibteil mit Stomaöffnung	••	••	••	••	••		17.99.99.2020	
	Hüftbefestigung (für AF und AG)	••	••	••	••	••		17.99.99.2006	
	Hüftbefestigung (für Stumpfstrümpfe)	••	••	••	••	••		17.99.99.2007	
G Haftband/ Rand*	Haftbandstücke	••	••	••	••	••		17.99.99.2016	
	3 cm Tricotrand	••	••	••	••	••			
	5 cm Tricotrand	••	••	••	••	••			
	3 cm Micro-Noppen-Haftband	••	••	••	••	••			
	5 cm Micronoppenhaftband	••	••	••	••	••		17.99.99.2008	
	5cm Spitzen-Noppen-Haftband	••	••	••	••	••			
	5 cm Spitzen-Haftband	••	••	••	••	••			
	5 cm Groß-Noppen-Haftband	••	••	••	••	••			
G Leibteil	normal, kurz, lang, groß/normal, groß/kurz, groß/lang	••	••	••	••	••			
H Zwickel	normal, vorn, durchgehend, verstellbar offen	••	••	••	••	••			
Hosenband	Hosengummi, Softband, Komfortbund	••	••	••	••	••			
J Hosenteil	Kompression normal, halbe, volle, verstärkt (Tricot)	••	••	••	••	••		HVN	
Extras	Leibteil mit Eingriff	••	••	••	••	••		17.99.99.2018	
	Einbeinhosenteil (nicht komprimierend) für die Gegenseite des zu versorgenden Beines (ca. 10 cm lang)	••	••	••	••	••		17.99.99.2009	

* nicht alle Farben in allen Ausführungen

MAK

Lymphologie

Extras

Hand/Arm

Rücken/Hals

Knie

Fuß

Service

Ulcus Cruris

Die weiche Unterziehstrumpf.

HVN 17.99.99.2024

REF 73000X

Merkmale

- wird unter medizinischen Kompressionssystemen getragen
- verhindert ein Verrutschen der Wundauflage und erleichtert das An- und Ausziehen des Oberstrumpfes. Dient dem Hautschutz – insbesondere bei strapazierter Haut – und verbessert hier die Hygiene.
- angenehm weiches Gestrick
- nur als Set (3 Stück)
- in den Größen I bis VII

Materialien

91 % Polyamid, 9 % Elastan

Weiß



Business & Holiday

Der moderne Kompressions-Wadenstrumpf

HVN 17.06.01.1171

REF 15510X

Indikationen

KKL 2

- mittlere Kompression
- starke Varicosis
- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)

Merkmale

- Wadenstrumpf in Kompressionsklasse 2 für Arbeit, Sport und Reisen
- moderne, hochwertige Optik
- weiche Plüschsohle
- mit geschlossener Spitze
- in vier Farben

Material

86% Polyamid, 14 % Elastan



Reisestrumpf

Die semitransparente Kompressionsstrumpf-Eleganz.

REF 15520X

Merkmale

- leichte Kompression gegen schwache Beine auf Reisen
- atmungsaktives, hochwertiges Gestrick
- perfekter Sitz in drei bewährten Farben
- geschlossene Spitze
- in drei klassischen Farben
- von XS (36-27) bis XL (46-47)

Materialien

65% Polyamid, 35 % Elastan



Maßband aus, Zukunft an. „Let's Vapp!“

Starten Sie jetzt mit Ihrer App auf dem iPhone Pro:

Die 3D-Vapp misst blitzschnell für rundgestrickte Kompressionsstrümpfe, während Sie sich um Ihre Kunden kümmern. Weniger messen, mehr lächeln!



- » digital vermessen und bestellen
- » berührungslos, zuverlässig, mobil
- » schnell und intuitiv bedienbar

Schöpfen Sie das volle Potential der 3D-Vapp aus! Nutzen Sie ein Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit, das sich durch Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.



Mehr auf schiebler.de/vapp




Einfach gut gewickelt

Easywrap ist Ihre effektive Alternative zu herkömmlichen Kompressionsverbänden in der Entstauungsphase. Ob bei Lymphödemen, ausgeprägten venösen Ödemen oder venösen Beingeschwüren: Das Kompressionssystem lässt sich einfach anpassen und kann auch im individuellen Selbstmanagement verwendet werden. **Unkompliziert. Effektiv. Ressourcensparend.**

Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Medizinische adaptive Kompressionssysteme werden von der S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“ als Alternative zum gewohnten Wickelverband empfohlen¹. Nach der Entstauung wird die Kompressionstherapie je nach Indikation mit rund- oder flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrümpfen fortgesetzt.

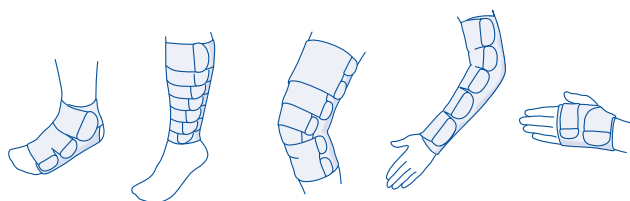

Easywrap ist ein patentiertes, weltweit genutztes medizinisches Hilfsmittel, dass bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Beins dient und zur Eigenanwendung durch den Patienten in häuslicher Umgebung vorgesehen ist. Die Easywrap Produktreihe wurde entwickelt, um eine Kompressionstherapie ähnlich der von Kurzzugbinden zu ermöglichen, die einen hohen Arbeits- und niedrigen Ruhedruck bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen, unelastischen Materialien bietet Easywrap jedoch auch bei abnehmender Schwellung eine wirksame Kompression. Dies führt zu einer Verringerung des Ödems bei gleichbleibendem Patientenkomfort und einfacher Nachjustierung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.schiebler.de/easywrap

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/037-005> (Stand: 31.12.2018).

easywrap[®]

Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Bei uns
auch als Maß-
anfertigung
erhältlich.

Phlebologie

MAK

Lymphologie

Extras

Hand/Arm

Rücken/Hals

Knie

Fuß

Service



Easywrap Strong Fuß

Die effektive Alternative zum Fuß-Wickelverband.



HVN 17.06.23.3010

Artikennr.: 99260X

Material: 83 % Polyamid,
17 % Elasthan

Farben: Sand, Schwarz

Indikationen

- Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum
- als Alternative zur Bandagierung mit Binden.


Wirkstrategie

- Textilbändern, die über einem schützenden Unterstrumpf getragen werden.

- erzeugt hohen Arbeitsdruck und niedrigen Ruhedruck ähnlich einer Kurzzugbinde
- die reduzierte Schwellung wird erhalten oder entstaut.

Schiebler-Vorteile

- leichtes Nachjustieren mit Klettverschlüssen, um Druckverluste zu vermeiden und die Ödemreduktion noch effektiver zu fördern
- ermöglicht selbstständige Anlage und fördert so die Akzeptanz des Patienten.
- in den Größen XS - XL sowie Fußlängen Normal und Groß
- auch als Maßanfertigung

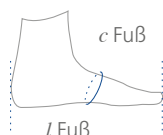

	XS	S	M	L	XL
c Fuß	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
l Normal	19,5-21,5	21-23	22,5-24,5	24-26	26-28
l Groß	21,5-23,5	23-25	24,5-26,5	26-28	28-30

c Fuß gemessen in der Fußmitte.

Easywrap Strong Unterschenkel

Die Alternative zum Unterschenkel-Wickelverband.



HVN 17.06.23.2011

Artikennr.: 99250X

Material: 83 % Polyamid,
17 % Elasthan

Farben: Sand, Schwarz

Indikationen

- Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum
- als Alternative zur Bandagierung mit Binden.


Wirkstrategie

- bestehen aus überlappenden Textilbändern, die über einem schützenden Unterstrumpf getragen werden.
- erzeugt hohen Arbeitsdruck und niedrigen Ruhedruck ähnlich einer Kurzzugbinde

- die reduzierte Schwellung wird erhalten oder entstaut.

Schiebler-Vorteile

- leichtes Nachjustieren mit Klettverschlüssen, um Druckverluste zu vermeiden und die Ödemreduktion noch effektiver zu fördern
- ermöglicht selbstständige Anlage und fördert so die Akzeptanz des Patienten.
- in den Größen XS - XL
- auch als Maßanfertigung

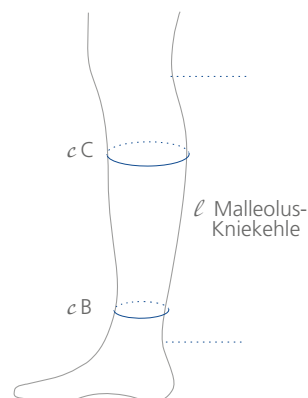

	XS	S	M	L	XL
c C	38-45	44-52	50-60	55-65	60-70
c B	23-27	28-32	33-38	39-44	45-52

Länge l Malleolus-Kniekehle

	XS	S	M	L	XL
Normal	30-34	30-34	30-34	30-34	30-34
Lang	34-38	34-38	34-38	34-38	34-38

Easywrap Strong Knie

Die effektive Alternative zum Knie-Wickelverband.



HVN 17.06.23.1004

Artikelnr.: 99280X

Material: 83 % Polyamid,
17 % Elastan

Farben: Sand, Schwarz

Indikationen

- Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum
- als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Wirkstrategie

- bestehen aus überlappenden Textilbändern, die über einem schützenden Unterstrumpf getragen werden.

- erzeugt hohen Arbeitsdruck und niedrigen Ruhedruck ähnlich einer Kurzzugbinde
- die reduzierte Schwellung wird erhalten oder entstaut.

Schiebler-Vorteile

- leichtes Nachjustieren mit Klettverschlüssen, um Druckverluste zu vermeiden und die Ödemreduktion noch effektiver zu fördern
- ermöglicht selbstständige Anlage und fördert so die Akzeptanz des Patienten.
- in den Größen XS - XL
- auch als Maßanfertigung

	XS	S	M	L	XL
c E ₁	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80

Easywrap Strong Oberschenkel

Die effektive Alternative zum Oberschenkel-Wickelverband.



HVN 17.06.23.0009

Artikelnr.: 99270X

Material: 83 % Polyamid,
17 % Elastan

Farben: Sand, Schwarz

Indikationen

- Für den temporären Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum
- als Alternative zur Bandagierung mit Binden.


Wirkstrategie

- bestehen aus überlappenden Textilbändern, die über einem schützenden Unterstrumpf getragen werden.
- erzeugt hohen Arbeitsdruck und niedrigen Ruhedruck ähnlich einer Kurzzugbinde

- die reduzierte Schwellung wird erhalten oder entstaut.

Schiebler-Vorteile

- leichtes Nachjustieren mit Klettverschlüssen, um Druckverluste zu vermeiden und die Ödemreduktion noch effektiver zu fördern
- ermöglicht selbstständige Anlage und fördert so die Akzeptanz des Patienten.
- in den Größen XS - XL
- auch als Maßanfertigung

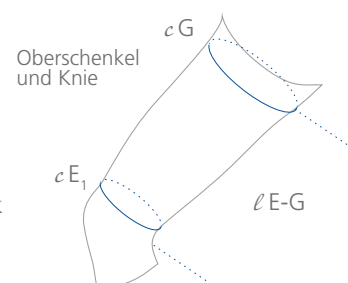

	XS	S	M	L	XL
c G	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100
c E1	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80

Länge l E-G

	XS	S	M	L	XL
Kurz	16-20	16-20	16-20	16-20	16-20
Normal	20-24	20-24	20-24	20-24	20-24
Lang	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30



Zusatzbänder

Erweiterungen für easywrap-Beinkompressionssysteme in den Breiten 8, 12 und 16 cm. Länge verfügbar in 5 cm-Schritten.
HVN online, Art. 99350X

Easywrap Fusion-Liner

Unterziehstrumpf und Kompressionsfußteil in einem.

Easywrap Unterziehstrumpf

Der weichelastische Strumpf zwischen Haut und Easywrap.



HVN siehe website

Artikennr.: 99360X

Material: Fusion Liner Light (KKL 2): 56 % Polyamid, 44 % Elastan; Fusion Liner Strong (KKL 3): 52 % Polyamid, 48 % Elastan


Farben: Sand, Schwarz

Einsatz

- Für den temporären Einsatz als Unterziehstrumpf in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum

Schiebler-Vorteile

- funktionaler Unterziehstrumpf mit integriertem Kompressionsfußteil
- in Light (20-30 mmHg) und Strong (30-40 mmHg)
- in Sand und Schwarz
- in fünf Größen verfügbar

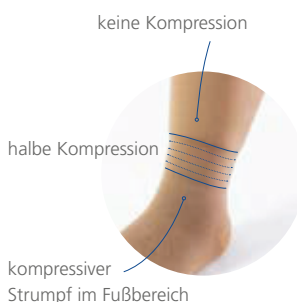

Unterziehstrumpf inkl. Kompressionsfußteil

Der Fusion-Liner wird unter dem easywrap Fuß- oder Unterschenkel-Element getragen. Das Fußteil ist als Vollkompressionszone bis zum Knöchel konzipiert. Zwischen der Bein- und der Fußzone befindet sich eine Halbkompressionszone, wo gegen die Beinzone keine kompressiven Fadeneinlagen beinhaltet. Dies gewährleistet eine gleichmäßig abgestufte Kompression ohne doppelte Druckzonen.

HVN siehe website

Artikennr.:

99240X (AD)

99243X (AG)

Material: 92 % Polyamid, 8 % Elastan

Farben: Sand, Schwarz

Einsatz

- Der Unterziehstrumpf für Ihr easywrap-Beinsystem in AG und AD. Nicht kompressiv

Schiebler-Vorteile


- äußerst angenehme Trageeigenschaften für den täglichen Gebrauch.
- in AD sowie AG in jeweils zwei Größen
- in Sand und Schwarz

	XS	S	M	L	XL
c C	≤ 45	≤ 50	≤ 60	≤ 65	≤ 70
c B	19-24	25-29	30-34	35-40	41-46
a1	19-24	25-29	30-34	35-40	41-46

AD 1 = S (für Unterschenkelgröße XXS, XS, S)
2 = L (für Unterschenkelgröße M, L, XL)
AG 1 = S (für Oberschenkelgröße XS, S, M)
3 = L (für Oberschenkelgröße L, XL)

Armstrümpfe und Handteile für die Kompressionstherapie

Schiebler steht für wirksame Kompression in der Arm- und Handtherapie. Fundiertes medizinisches Fachwissen, langjährige Strickkompetenz und handwerkliche Präzision bieten Ihren Patienten eine Vielzahl von Kompressionslösungen mit System.

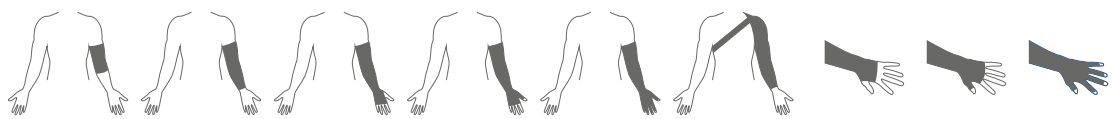

Armstrümpfe

Qualität	KKL	Maße	Art	HVN
Veni	1	CG	Maß	17.10.03.0002
Doktus	2	CG	Maß	17.10.03.1002
Doktus	2	AG	Maß	17.10.03.1003
Veni Dur	2	CG	Maß	17.10.03.1005
Venex Dur	2	CG	Maß	17.10.03.1004
Star Cotton	2	CG	Maß	17.10.03.1014
DN1*	2	CG	Maß	17.10.04.1002
GP75*	3	CG	Maß	17.10.04.2002
Doktus Dur	3	CG	Maß	17.10.03.2002
Doktus	2	CG	Serie	17.10.01.1015
Doktus	2	AG	Serie	17.10.01.1016
Pertex Leicht*	1	CG	Maß	17.10.04.0048



Wir können auch anders.

Als Manufaktur können wir mit unseren **Flachstrick-Specials** auch besondere Kompressionsmittel für Ihre Patienten anbieten. Von ganz klein, über ganz anders bis zu ganz speziell.

Mehr auf [schiebler.de/fss](https://www.schiebler.de/fss)

Handteile

Ausstattung	HVN
mit Daumenöffnung	17.99.99.2010
mit Daumenansatz	17.99.99.2011
mit Daumen und Fingern	17.99.99.2012

Zusatzausstattung

Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2013
Reißverschluss am Armstrumpf (zur leichteren Handhabung beim An- und Ausziehen)	17.99.99.2014
Komprimierender Fingerling	17.99.99.2023
schräger Armabschluß	

* mit Naht



Maßbögen zur Arm- und Handversorgung

erhalten Sie online im Downloadbereich sowie unter der Artikelnummer 38.08.11. (nur MBR).

24/7 bestellen

Rund um die Uhr ist unser B2B-Onlineshop für Sie da. Einmal angemeldet, nutzen Sie diverse Vorteile wie Bestellschnellerfassung, Maßüberprüfung oder reduzierte Versandkosten. Jetzt online bestellen auf

shop.schiebler.de

Wir sind für Sie da.

Kompetent und mit einem Lächeln nehmen wir Ihre Bestellungen und Fragen entgegen. **Montags bis freitags von 7.45 bis 16.30 Uhr** heißt es auch für Sie: Herzlich willkommen bei Schiebler :)

Telefon +49 (0) 4 61 978999200

Telefax +49 (0) 4 61 978999111

E-Mail info@schiebler.de



Sie finden uns digital auf
Youtube, Instagram, Facebook und
natürlich auf www.schiebler.de





Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Käufers sind ohne schriftliche Anerkennung des Lieferers für diesen unverbindlich.

Versandkosten	Preis
Maßaufträge in 24 Stunden	versandkostenfrei
Serien-Kleinaufträge unter 50 €	4,00 € je Auftrag und Lieferadresse
Serienaufträge von 50 bis 100 €	7,10 € Porto je Auftrag und Lieferadresse
Serienaufträge ab 100 €	je Auftrag und Lieferadresse portofrei
Expressversand	+ 19,60 €
Zustellung vor 09.00 Uhr	+ 24,50 €
Zustellung vor 10.00 Uhr	+ 12,30 €
Zustellung vor 12.00 Uhr	+ 4,50 €
Zustellung am Samstag	+ 11,20 €

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum, auch dann, wenn sie be- oder verarbeitet wird. Im Falle der Verarbeitung oder des Weiterverkaufs gehen die hieraus entstehenden Forderungen ohne Weiteres an uns über. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt gilt als vereinbart! Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Flensburg. Gerichtsstand: Flensburg.

Preise ohne Umsatzsteuer in Euro. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Gewährleistung

Der Besteller hat bei Wareneingang sofort die gelieferte Ware auf Beschaffenheit zu prüfen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Im übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe der Ware. Bei berechtigten Mängeln hat der Besteller Anspruch auf Ersatz bzw. Nachbesserung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehler, welche auf normalen Verschleiß, missbräuchliche Verwendung und Überbelastung sowie Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Zahlungsbedingungen

1 % Skonto innerhalb 10 Tagen

2 % Skonto bei Bankabruf (siehe Anlageschreiben)

30 Tage netto nach Rechnungsdatum

Reklamationen

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden! Retouren aus Lagerbereinigung und Auswahlendungen müssen vorab mit unserer Firma abgesprochen werden, ansonsten wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % erhoben.

Umtausch

Nicht mehr aktuelle Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Dem Lieferer bleibt das Recht vorbehalten, Rücksendungen abzulehnen. Umtausch erfolgt nur gegen original verpackte Ware bei portofreier Einsendung. Umtausch erfolgt unter Abzug von Bearbeitungsgebühren für Prüfung, Neuverpackung sowie Wiedereinlagerung. Maß- und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Lagerung und Transport

Bei der Lagerung und beim Transport von Schiebler Medizinprodukten müssen folgende Punkte stets eingehalten werden:

- Die Lagerung erfolgt an einem trockenen Ort
- Die Produkte werden vor Staub, Regen, direkter Sonneneinstrahlung und Ungeziefer geschützt.

Die optimale Lagertemperatur von Schiebler Medizinprodukten beträgt generell 5° bis 40° C. Vor der Anwendung von Schiebler Produkten am Patienten ist die jeweilige Gebrauchsanweisung zu beachten.



Heinz Schiebler GmbH & Co. KG
Marienallee 74 · 24937 Flensburg
Telefon 04 61/9789990 · Fax 04 61/9789991 11 · E-Mail info@schiebler.de
www.schiebler.de