

Sortiments- übersicht

2026

B.



BELSANA
Medizinische Erzeugnisse

Inhaltsverzeichnis

Vielfältige Produkte – einheitliche Verpackung

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rund- & Flachstrick __ 04

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rundstrick

(verordnungsfähige Medizinprodukte)

Für jede Venenerkrankung und jeden Patienten
die passende Versorgung __ 05

Rundgestrickte Kompressionsstrümpfe richtig anmessen __ 06
Schritt für Schritt zur richtigen Strumpfgröße __ 07

BELSANA classic __ 08-09

BELSANA classic mit Baumwolle __ 10-11

BELSANA comfortis __ 12-13

BELSANA power __ 14-15

BELSANA evo[®]lution __ 16-17

BELSANA microsoft __ 18-19

Pflege für trockene, empfindliche Haut
Innovation: Strümpfe mit Aloe vera Mikroverkapselung __ 20-21

BELSANA vivere __ 22-23
Notizen __ 24-25

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Flachstrick

(verordnungsfähige Medizinprodukte)

Individuelle Versorgung für spezielle Krankheitsbilder
und Patienten-Bedürfnisse __ 26

Besonderheiten und Verzerrungen bei **BELSANA impuls** __ 27
Beinstrümpfe richtig anmessen __ 28

Fuß- und Zehenteil richtig anmessen __ 29

Armstrümpfe richtig anmessen __ 30

Handschuhe richtig anmessen __ 31

BELSANA impuls Beinversorgung __ 32-33

BELSANA impuls Armversorgung __ 34-35

BELSANA impuls Handversorgung __ 36-37

BELSANA impuls Zusätze für Beinversorgung __ 38

BELSANA impuls Zusätze für Arm-/Handversorgung __ 39

Notizen __ 40-41

Freiverkäufliche kompressive Strümpfe – Medizinprodukte

Kompressive Strümpfe zur Vorbeugung
von venösen Beinbeschwerden __ 42-43

BELSANA medical cotton __ 44

BELSANA medical aloe vera __ 45

BELSANA work __ 46

BELSANA prenatal __ 47

Freiverkäufliche Stützstrümpfe – keine Medizinprodukte

Mitnahmeprodukte für den Alltag __ 48-49

YOURSPRING Vitalstrümpfe __ 50

SKY SOCKS Reisestrümpfe __ 51

BOB (BelsanaOnlineBestellen)

Ein Login – alle unsere Dienste __ 52

Zubehör

Hautpflege: Callusan Cremeschäume __ 53

Alles fürs Anziehen __ 54-55

Alles für die Strumpf-Pflege __ 55

Praktisches & Nützliches

Give-away __ 56

Alles fürs Anmessen __ 56-57

Für bessere Compliance und Kundenzufriedenheit:

Exzellente Produkte vom Experten
für medizinische Kompression __ 58

Qualitätsiegel und Gütezeichen

Wissen Sie eigentlich, was dahinter steckt? __ 59

Überblick über das Strumpfsortiment

Strumpfviefalt __ 60

Materialzusammensetzungen __ 61

Farbvielfalt

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rund- & Flachstrick __ 62

Kompressive Strümpfe & Stützstrümpfe __ 63

Indikationen & Kontraindikationen

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rund- & Flachstrick __ 64

Qualitäten, Ausführungen und Kompressionsklassen

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rundstrick __ 65

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Flachstrick __ 66-67

Kompressive Strümpfe & Stützstrümpfe __ 68

Fußspitzen

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rund- & Flachstrick __ 69

Kompressive Strümpfe & Stützstrümpfe __ 69

Haftband- / Abschluss-Möglichkeiten und Designs

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rundstrick __ 70

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Flachstrick __ 71

Kompressive Strümpfe & Stützstrümpfe __ 71

Größen

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rundstrick __ 72-73

Kompressive Strümpfe & Stützstrümpfe __ 74-75

Weitere Informationen


Änderungs- und Reparaturservice __ 76

Retourenregelung __ 77

AGB

Verkaufs- und Lieferbedingungen __ 78-79

Notizen __ 80-82

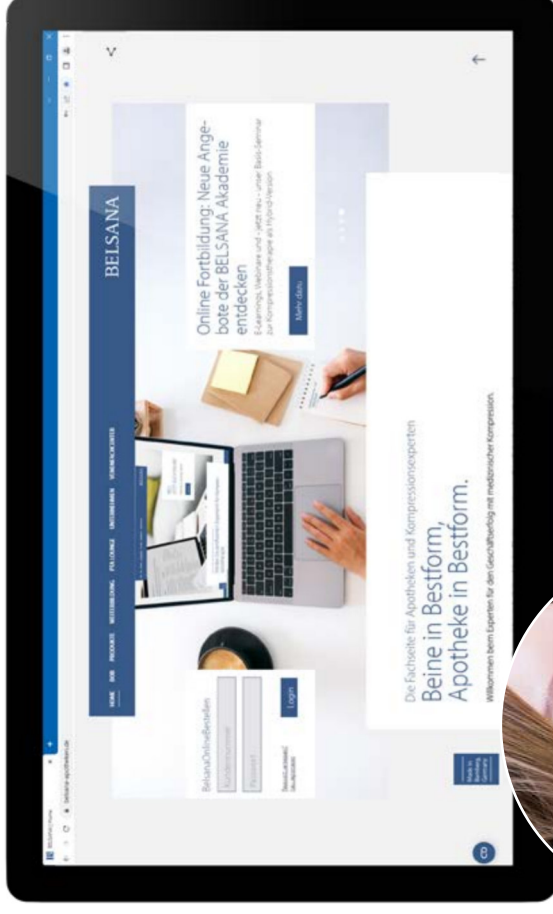

Kompetente Beratung: Unser Kundenservice

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen helfen wir Ihnen gerne weiter.



In Deutschland:

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
Tel 0951 309 303-0
Fax 0951 309 303-450
E-Mail service@belsana.de

Bestellungen und schriftliche
Nachrichten können Sie uns jeder-
zeit per Fax, E-Mail oder über BOB
(BelsanaOnlineBestellen) auf
www.belsana-apotheken.de
übermitteln.



In Österreich:

Ofa Austria
Mo.–Do. 8.00–16.00 Uhr
Fr. 8.00–13.00 Uhr
Lieferauskünfte:
Mo.–Fr. 8.00–12.00 Uhr
Tel +43 662 450229
Fax +43 662 451196
E-Mail service@belsana.at

Bestellungen und schriftliche Nach-
richten können Sie uns jederzeit per
Fax und E-Mail übermitteln.

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rund- & Flachstrick

Vielfältige Produkte – einheitliche Verpackung



Ansicht der aktuellen BELSANA Verpackung für medizinische Kompressionsstrümpfe. Durch das Fenster ist das jeweilige Keyvisual (im Beispiel für die Maßversorgung) sichtbar.

Medizinische Kompressionsstrümpfe – Rundstrick

Für jede Venenerkrankung und jeden Patienten die passende Versorgung

Was sind rundgestrickte Kompressionsstrümpfe?

Grundsätzlich sind es elastische Textilien mit Zweizug-Dehnung, d.h. sie sind quer und längselastisch. Sie werden auf speziellen Strickmaschinen mit Zylinder (siehe Abbildung unten) gestrickt. Die Maschenzahl bleibt über die gesamte Strümpflänge gleich, aber die Maschengröße variiert. Das unterscheidet rundgestrickte von flachgestrickten Kompressionsstrümpfen (siehe Seite 26 ff.). Alle medizinischen Kompressionsstrümpfe zeichnen sich durch den medizinisch korrekten, nach oben hin abnehmenden Druckverlauf aus, der für den exakten Druck an den richtigen Stellen am Bein sorgt, um die spezifischen Krankheitssymptome zu lindern.


Langzeit-Anwendungsgebiete:

- Venöse Insuffizienz
- Chronisch venöse Insuffizienz
- Hydrostatische Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme

Kurzzeit-Anwendungsgebiete:

- Prophylaxe in der Schwangerschaft
- Nachbehandlung der oberflächlichen Thrombophlebitis
- Nachbehandlung der tiefen Beinvenenthrombose
- Nachbehandlung bei Verödungstherapie
- Nachbehandlung bei Varizenoperationen

Gut zu wissen

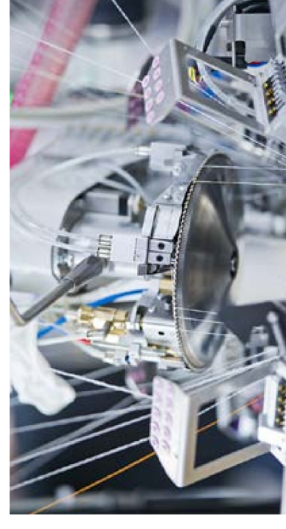

Die Abbildung zeigt den Blick in eine industrielle **Rundstrick-Maschine**.

Ob Kniestrümpfe, Schenkelstrümpfe, Strumpfhosen oder Spezialausführungen wie Einbeinhosen – medizinische Kompressionsstrümpfe sind in vielen **verschiedenen Ausführungen** erhältlich.

Kompressionsklassen (KKL)

Für rundgestrickte Strümpfe gibt es drei KKL, von leichter (1 mit 18-21 mmHg) über mittlere (2 mit 23-32 mmHg) und kräftige (3 mit 34-46 mmHg) Druckintensität.

Verordnungs- und abrechnungsfähig
sind alle Kompressionsklassen – auch die Kompressionsklasse 1.


Gute Passform beginnt mit dem richtigen Anmessen

Das fachgerechte Maßnehmen ist die entscheidende Voraussetzung für eine exakte Passform des Strumpfes und den medizinisch richtigen Druckverlauf am Bein. Gut sitzende Strümpfe verbessern die Akzeptanz der Kompressionstherapie beim Patienten.

Maßschema (alle Maße in cm)

Erläuterungen Messpunkte siehe Tabelle rechte Seite)

Linkes Patientenbein

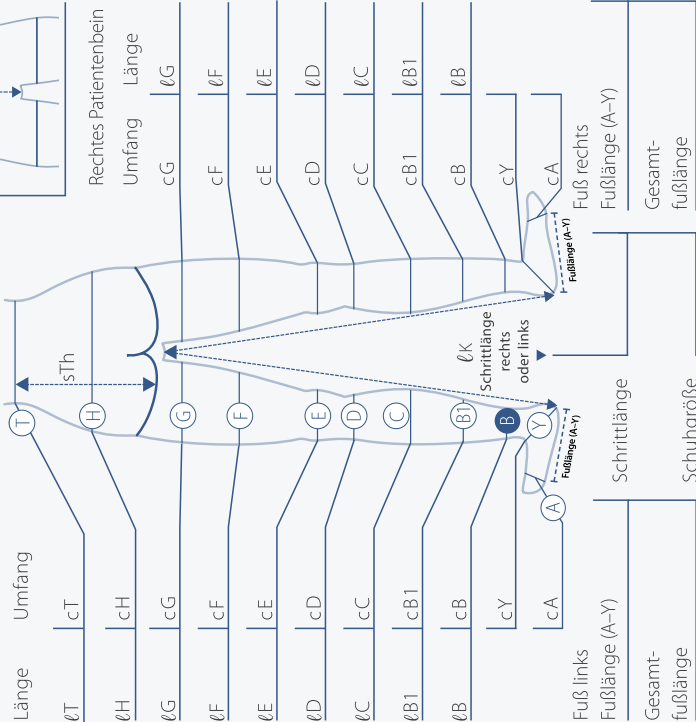

Erläuterungen Messpunkte siehe Tabelle

Gemessen wird wie folgt:

- Am unbedeckten, ödemfreien Bein (Fingerdruckprobe im Fesselbereich; Bei Wasseransammlungen bleibt eine Delle).
- Der Patient kann liegen, sitzen oder stehen.
- Der Fuß sollte einen 90°-Winkel zum Bein bilden.
- Die Muskulatur ist entspannt und das Maßband liegt an der Haut an.
- Arbeiten Sie mit Maßbrett, ermitteln Sie die Umfangmaße und lesen Sie die Längenmaße direkt am Maßbrett ab. Alternativ können die verschiedenen Messpunkte der Umfangmaße mit einem Hautstift (z.B. BELSANA Hautstift) markiert werden. Die Längenmaße können anhand der markierten Stellen im Stehen oder Liegen ermittelt werden.
- Die Längenmaße an der Außenseite bzw. an der Innenseite ablesen.
- Umfang- und Längenmaße der Punkte G bis T immer im Stehen messen.
- Fußmaße (Gesamtfußlänge, Fußlänge und cA) im Stehen messen.

Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
T	cT Taille	lT* Messpunkt cT bis Ferse sTv Schritt bis cT vorne sTh Po-Beinfalte bis cT hinten
H	cH Umfang an der breitesten Stelle des Beckens/Gesäß (zwischen Schritt und Taille)	lH* Messpunkt cH bis Ferse lK* Schritt bis Ferse
G	cG Etwa Oberschenkelende	lG* Messpunkt cG bis Ferse
F	cF Etwa Oberschenkelmitte	lF Messpunkt cF bis Ferse
E	cE Umfang Kniescheibe-Kniekehle (bei leicht gebeugtem Knie)	lE Messpunkt cE bis Ferse, Bein gestreckt
D	cD Umfang am Tibiakopf (ca. zwei fingerbreit unter der Kniescheibe und der Kniekehle)	lD Messpunkt cD bis Ferse
C	cC Größter Wadenumfang	lC Messpunkt cC bis Ferse
B1	cB1 Umfang in der Mitte von lB und lC	lB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
B	cB Fesselumfang (schlankste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	lB Messpunkt cB bis Ferse
Y	cY Umfang Ferse-Spann (bei maximaler Beugung des Fußes nach oben)	
A	cA Umfang am Kleinzehengrundgelenk	Fußlänge Messpunkt Kleinzehengrundgelenk bis Ferse Gesamt-Fußlänge Längste Zehenspitze bis Ferse

Bezeichnungen und Kürzel gemäß der RAL (verbindlich seit 01.07.2002) * Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken

Hinweis zu Kunden mit Hallux valgus und Diabetes

Wir empfehlen eine geschlossene Softspitze, jedoch bei schmerzhafter und/oder veränderter Fußform eine variable Softspitze (BELSANA comfortis).

Anmessen:

- Geschlossene Softspitze: cA wird vom Kleinzehengrundgelenk über das Großzehengrundgelenk gemessen (in diesem Fall kann das Maßband etwas schräg liegend, die Fußlänge bleibt gleich)
- Variable Softspitze: cA wird hinter dem Hallux valgus bzw. hinter dem Groß- und Kleinzehengrundgelenk (Richtung Spann) angelegt; dadurch verkürzt sich die Fußlänge. Die Länge der Softspitze ist variabel (mind. 5 cm max. 10cm).

Eigenschaften:

- Zuverlässige Kompression für den Alltag
- Angenehmer Tragekomfort und exakte Passform
- Robust und strapazierfähig dank Multifunktionsgarnen
- Große Auswahl an Strumpfausführungen

Material:

74% Polyamid, 26% Elastan

classic

BEWÄHRTE QUALITÄT SEIT 30 JAHREN

PROVEN QUALITY SINCE 30 YEARS

Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage, nur KKL 2. | Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Größen

cT	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115	cT	IT
cH	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148	cH	IK
cG	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80	cG	A-T Schrittlänge kurz 69–78 cm lang 78,1–88 cm
cG	Plus-Weite (cG, cF) nur für Schenkelsäume (A-G) mit HB, kombiniert mit Normal-Maß cB1, cC, cD für A-G plus	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	cG	A-G Beinlänge kurz 65–74 cm lang 74,1–84 cm
cG	für A-G plus	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	cG	A-GT Beinlänge lang 74,1–84 cm
cG	normal	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	cG	A-D Schrittlänge kurz 34–38 cm lang 38,1–43 cm
cF	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71	cF	IA
cF	für A-G plus	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	cF	IF
cE	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52	cE	IE
cE	Plus-Weite (cD, cC, cB1) nur für Kniestrümpfe (A-D) mit oder ohne HB	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	cD	ID
cD	für A-D plus	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	cD	IC
cD	für A-D normal	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	cC	IB1
cC	für A-D plus	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	cC	IB
cC	für A-D normal	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	cB1	
cB1	für A-D plus	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	cB1	
cB1	für A-D normal	19–5–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	cB	
cB	19–5–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33	cB	
cY	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41	cY	
cA	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33	cA	
	I	II	III	IV	V	VI		

Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40


Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40

! Wichtig:

- Plus-Weite A-G kann nicht mit Plus-Weite A-D kombiniert werden,

- Plus-Weite A-G kann nicht mit Plus-Weite A-D kombiniert werden,

Ausführungen


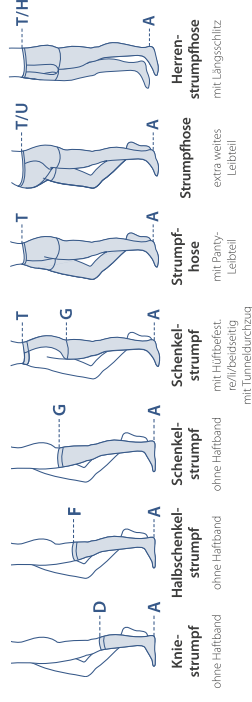


		Wie oft in der Gruppe?			
KKL 1	Serie	✓	✓	-	✓
	Maß	✓	✓	-	✓
KKL 2	Serie	✓	✓	✓	✓
	Maß	✓	✓	✓	✓

! Wichtig:

Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung bei Serie nur mit Tunneldurchzug und in langer Beinlänge erhältlich.

Zusätzlich wählbar

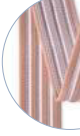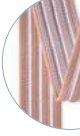Haftbänder	Ausführung	Beschreibung
		
		
		
		
		
		
Haftband	A-D	Noppen (schmal & breit)
	A-G	Noppen (schmal & breit), Gummi (schmal & breit)
	A-F, A-G	Noppen Fleur (breit), Spitzen (breit), Gummi (breit) Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Spitzen (breit), Gummi (breit)
Zwickel	A-T (KKL 1, KKL 2), A-T/U (nur KKL 2)	Doppelnaht hinten bis Taille
	A-T (KKL 1, KKL 2*), A-T/U (nur KKL 2)	Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen	alle	Bei Serie: Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
	alle	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
	alle	Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Fußgröße

* auch bei kompressivem Leichteil

classic
Baumwolle

NATÜRLICH AUF DER HAUT
NATURAL ON THE SKIN

Eigenschaften:

Material:

48% Polyamid, 21 % Elastan, 31 % Baumwolle

Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage. | Strumpffarben im Druck nicht farbeinbaufähig.

Größen

cT	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115	I
cH	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148	II
cG für A-T & A-G ohne HB	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80	III
cG Plus-Weite (cG, cF) nur für Schenkelstrümpfe (A–G) mit HB, kombiniert mit Normal-Maß cB1, cC, cD für A-G plus	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–88	IV
cG für A-G normal	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–80	V
cF für A-G plus	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71	VI
cF für A-G normal	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	49–62	VI
cE	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52	VI
cD für A-D plus	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	43–54	VI
cD für A-D normal	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	37–48	VI
cC für A-D plus	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55	VI
cC für A-D normal	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	39–49	VI
cB1 für A-D plus	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43	VI
cB1 für A-D normal	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40	VI
cB 19,5–20 20,1–22 22,1–24,5 24,6–27 30,1–33	19,5–20 20,1–22 22,1–24,5 24,6–27 30,1–33	20,1–22 22,2–24,5 24,5–27 30,2–33 30,3–34	22,1–24,5 24,5–27 30,2–33 30,3–34	24,6–27 30,2–33 30,3–34	27,1–30 30,3–34	30,1–33 30,2–33 30,3–34	VI
cY	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41	VI
cA	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33	VI

Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm


Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

! Wichtig:

- Plus-Weite A-G kann nicht mit Plus-Weite A-D kombiniert werden, für Plus-Weite A-G gelten bei cB1, cC und cD die normalen Maße!

Ausführungen

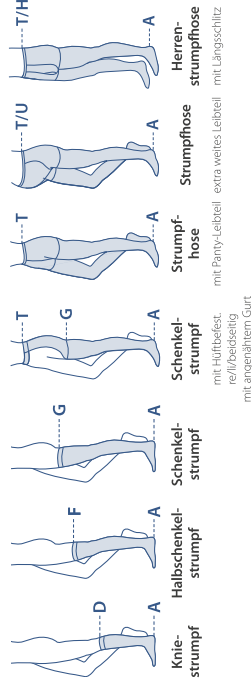

KKL 2	Serie	✓	-	✓**	✓	-	✓
	Maß	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
KKL 3	Serie	✓	-	✓**	✓	-	✓
	Maß	✓	✓*	✓	✓	✓	✓



! Wichtig:

- * Maß-Halbschenkelstrumpf nur in Kombination mit Noppen-Haftband breit bestellbar.

**** Serien-Schenkelstrumpf nur in Kombination mit Haftband (siehe „Zusätzlich wählbar“) bestellbar.**

Einzelstrumpf Serie (= 1/2 Medizinprodukt): Lieferung bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
 Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung bei Serie nur mit angenehmem Gurt (in langer oder kurzer Beinlänge) erhältlich.

Zusätzlich wählbar

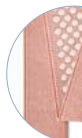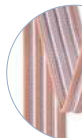Haftbänder				
	Noppen schmal mit Silikon			
	Noppen breit mit Silikon			
	Noppen Fleur breit mit Silikon			
	Gummi schmal mit Latex			
	Gummi breit mit Latex			
		</		

Eigenschaften:

- Komfortzonen an Knie und Spann
- Verstärkter Fersen- und Ballenbereich für mehr Haltbarkeit
- Ultraweiches Material
- Große Auswahl an Strumpfausführungen
- Moderne blickdichte Optik in acht modischen Farben
- Strapazierfähiges Gestrick


Material:

67% Polyamid, 33% Elastan

comfortis

WEICH IM GEFÜHL, STARK IN DER WIRKUNG
SOFT TOUCH, HIGHLY EFFECTIVE

Farben

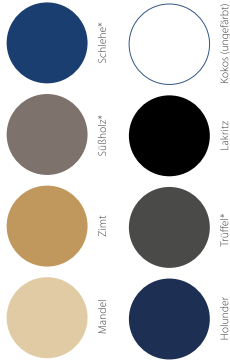

* Lieferzeit bis 14 Tage. | Strumpffarben im Druck nicht farbeinbildlich.

Größen

cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135	105–140
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125	100–130
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155	120–165
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145	120–155
cG für A-T	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84	62–89
cG für A-G plus	56,1–67	60,1–71	63,1–74	67,1–79	72,1–84	76,1–89
cG für A-G normal	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72	62–76
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64	49–68
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52	43–56
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28
	I	II	III	IV	V	VI

Offene Spitze

Kurzer Fuß: 15–18,4 cm
Langer Fuß: 18,5–22 cm

Geschlossene Spitze


Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

Besonders geeignet für:


- Männer und Frauen
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Schwaches Bindegewebe
- Patient*innen, die viel sitzen
- Patient*innen in Pflegebetreuung
- Patient*innen mit begrenzter Mobilität
- Modebewusste

Nicht geeignet für:

- Lip- und Lymphödem

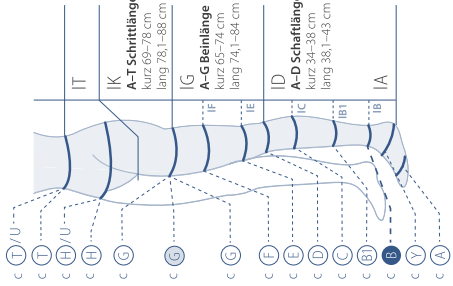

Ausführungen


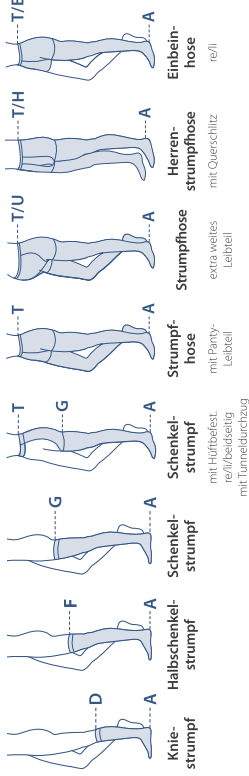


	Serie						
KKL 1	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KKL 2	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓

! Wichtig:

Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung bei Serie nur mit Tunneldurchzug und in langer Beinlänge erhältlich.

Zusätzlich wählbar

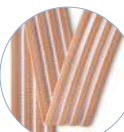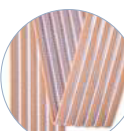Haftbänder	Ausführung	Beschreibung					
Haftband		Noppen schmal mit Silikon					
		Noppen breit mit Silikon					
		Noppen Fleur breit mit Silikon					
		Effekt breit mit Silikon					
		Gummi schmal mit Latex					
		Gummi breit mit Latex					
	<table><tr><td>Maß</td><td>Noppen (schmal & breit), Effekt (breit)</td><td>Gummi (schmal & breit)</td></tr><tr><td>Serie</td><td>Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; erhältlich nur in KKL 2; optisch identisch zu Noppen)</td><td>Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; optisch identisch zu Noppen)</td></tr></table>	Maß	Noppen (schmal & breit), Effekt (breit)	Gummi (schmal & breit)	Serie	Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; erhältlich nur in KKL 2 ; optisch identisch zu Noppen)	Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; optisch identisch zu Noppen)
Maß	Noppen (schmal & breit), Effekt (breit)	Gummi (schmal & breit)					
Serie	Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; erhältlich nur in KKL 2 ; optisch identisch zu Noppen)	Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Effekt (breit), Gummi (breit), Noppen strong (breit; optisch identisch zu Noppen)					

Leibteile							
Kompressiv	A-T, A-T/U	Maß	Durchgehend gestrickt, je nach Umfang mit Komfortzwickel, erhältlich nur in KKL 2				
Mit Längsschlitz	A-T/H	Maß	Längs gerähter Eingriff: erhältlich nur in KKL 2				
Mit Stoma-Öffnung	A-T	Maß	Platzierung angeben				
Offenes Leibteil	A-T/U	Maß	Ausgesparter U-Zwickel vorne				
Zwickel							
Komfortzwickel*	A-T, A-T/U	Maß	Doppelnaht hinten bis Taille				
Offener Schritt	A-T	Maß	Ausgesparter Schrittzwickel				
Verstärkter Schritt	A-T** A-T/U**, A-T/H	Maß	Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels				
Fußspitzen							
Offene Spitze	alle	Serie / Maß	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)				
Geschlossene Softspitze	alle	Serie / Maß	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)				
Asymmetrische Softspitze	alle	Maß	Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe				
Variable Softspitze	alle	Maß	Für mehr Bewegungsfreiheit an den Zehen: Länge individuell wählbar (5–10 cm, Anmess-Info siehe S. 6/7), empfohlen bei Hallux valgus				

* keine manuelle Auswahl nötig, Komfortzwickel wird bei Bedarf automatisch bei A-T und A-T/U eingestrickt
** auch bei kompressivem Leibteil

Eigenschaften:

- Blickdichtes Material mit hohem Anteil strapazierfähiger Baumwolle
- Angenehm zu tragen
- Weicher, glatter Abschlussbund
- Markante Rippstruktur
- Robust im Griff
- Verstärkter Fersen- und Ballenbereich für mehr Haltbarkeit
- Komfortzone am Fußspann
- Dezentte Farben, passend für Job und Freizeit

Material:


53 % Polyamid, 25 % Baumwolle, 22 % Elastan

power

DEZENTE FARBEN,
ZUVERLÄSSIGE WIRKUNG

DISCREET COLOURS, RELIABLE EFFECT

Farben

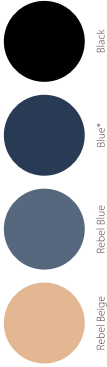

Rebel Beige Rebel Blue Blue* Black

* Lieferzeit bis 14 Tage. | Strumpffarben im Druck nicht farbeverbindlich.



Rebel Beige Rebel Blue Blue* Black

Besonders geeignet für:

- Männer
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Jede Art von Bindegewebe

Nicht geeignet für:

- Lip- und Lymphödem

Markante Rippstruktur
und besonderer Kontrast:

Die Farben Rebel Beige und Rebel Blue sind meliert. Spitze und Ferse sind jeweils uni gehalten. Original-Farbe und Gestrick sehen und fühlen Sie am besten an der Farbkarte / Farbmusterflasche.


Größen

cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cV	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45

Ausführung

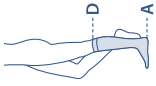

! Wichtig:
Einzelstrumpf Serie
(= ½ Medizinprodukt):
Lieferzeit bis 1 Woche,
kein Rückgaberecht,
kein Umtausch.

Generell immer ohne
Halbband ein nachträg-
liches Anbringen eines
Halbbands ist nicht
möglich.

	Serie	Maß
KKL 1	✓	
	✓	
KKL 2	✓	
	✓	

Schluss mit Vorurteilen gegen
Kompressionsstrümpfe:
BELSANA power – unser Bestes für den Mann!

Jeder

Nur

6.

7,5%

100%

Mann leidet an einem
Venenproblem*

der Männer tragen
einen Kompressions-
strumpf**

aller Männer bevorzugen
Kompressionsstrümpfe,
die nicht danach aussehen***

* Quelle: Bonner Venerstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie
** Quelle: Orthopädie Technik (5/2013): Therapie mit medizinischen Kompressions-
strümpfen in Deutschland, Ergebnis der Bonner Venerstudien I und II
*** Gefühfter Erfahrungswert



evo®lution

NACHHALTIG PRODUZIERT
FÜR DIE WELT VON MORGEN
SUSTAINABLE COMPRESSION STOCKINGS

VERORDNUNGSFÄHIG

Eigenschaften:

- Weich im Tragegefühl
- Blicklichtes Gestrick
- Verstärkter Fersen- und Balenbereich für mehr Haltbarkeit
- Komfortzone am Fußspann
- Natürliche Färbung ohne chemische Zusatzstoffe
- EVO® by Fulgar: die Biopolymer-Kunstfaser gewonnen aus der Rizinuspflanze

Material:
54 % Polyamid (EVO®), 28 % Elastan, 18 % Polyamid

Farbe



Walnuss

FÜR UMWELT-BEWUSSTE

Besonders geeignet für:

- Frauen und Männer
- Patient*innen, die innovative, ökologische Produkte bevorzugen und Natürlichkeit lieben
- Schwaches Bindegewebe
- Fortgeschrittenes Venenleiden

Nicht geeignet für:


- Lip- und Lymphödem



Strumpfarben im Druck nicht farbecht.

- Gefärbt ohne Einsatz von Chemie**
- Mit Naturfarbstoff aus den grünen, fleischigen Schalen der Walnuss (kann Allergene enthalten)
 - Keine Verwendung von Beizmitteln
 - Gleichmäßiger Farbverlauf

Ausführung

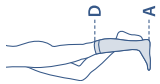

Knie-strumpf
ohne Haftband

	Serie	Maß
KKL 2	✓	-


! Wichtig:
Bestellung nur paarweise, keine Einzelstrumpfanfertigung möglich.
Generell immer ohne Haftband; ein nachträgliches Anbringen eines Haftbands ist nicht möglich.

Strumpfgarn aus Rizinusöl?

- Ja, denn die Rizinuspflanze ist der ideale Rohstofflieferant für nachhaltig produzierte Fasern:
- Nicht essbar für Menschen
 - Genügsame Kulturpflanze ohne hohen Wasserbedarf – wächst in dünnen Gebieten, die nicht für die Landwirtschaft genutzt werden können und sonst brach liegen
 - Ursprung in Nordafrika, Naher Osten, heute in allen tropischen Zonen
 - Keine Verschwendung von Lebensmitteln und Boden
 - Pressrückstände dienen als Viehfutter



Der BELSANA evo®lution besteht zu 54 % aus der Biopolymer-Kunstfaser EVO® by Fulgar – diese Faser ist 100 % nachhaltig produziert und 100 % biologischen Ursprungs, da sie aus Rizinusöl hergestellt wird.

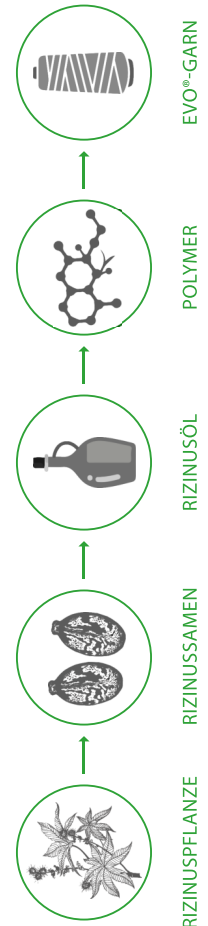


Größen

cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51	
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52	
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44	
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33	
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39	
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28	
	I	II	III	IV	V	VI	

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45

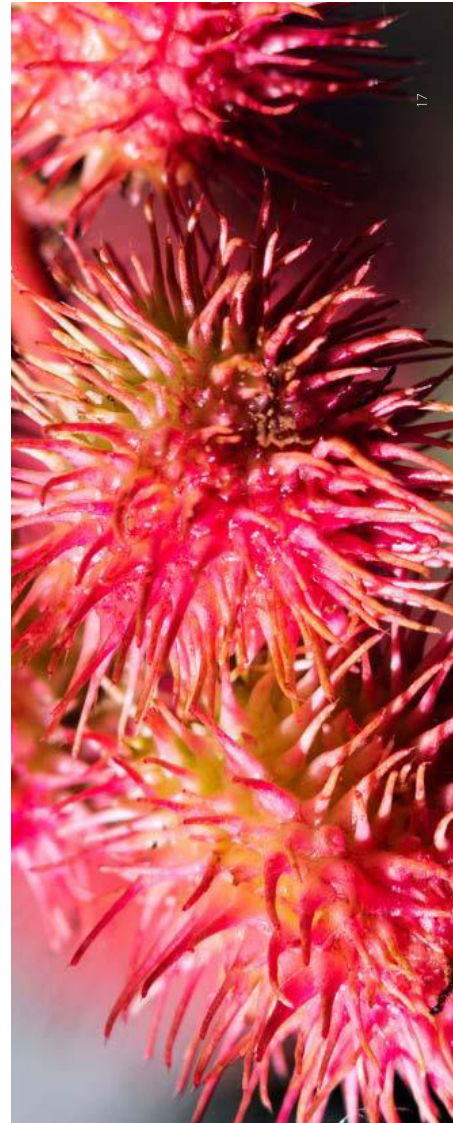


Eigenschaften:

- Mit feiner, atmungsaktiver Mikrofaser
- Feines, anschnittsames Material
- Liegt angenehm weich auf der Haut
- Elegante, transparente Optik mit leichtem Glanz
- Modische Farben

Material:

42% Polyamid, 42% Elastan, 16% Polyamid (Mikrofaser)

Farben

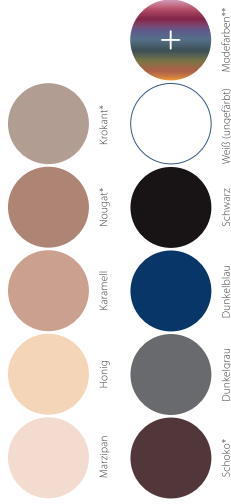

* Lieferzeit bis 14 Tage. | Strumpffarben im Druck nicht farbe verbindlich.

******Vier aktuelle Modifarben: keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch. Siehe Modifarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheken.de.

Farbliche Darstellung "Regenbogen" nur exemplarisch für jährlich wechselnde Modifarben.

Größen

cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145
cG	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84
cG für A-T					
cG für G					
cG für A/G normal					
cB	19–20	20–21	21–24,5	24,6–27	27,1–30
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27
	I	II	III	IV	V


Offene Spitze

Fußlänge: 15-17,5 cm


Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40

Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

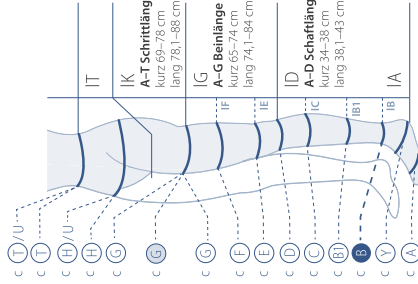

Ausführungen

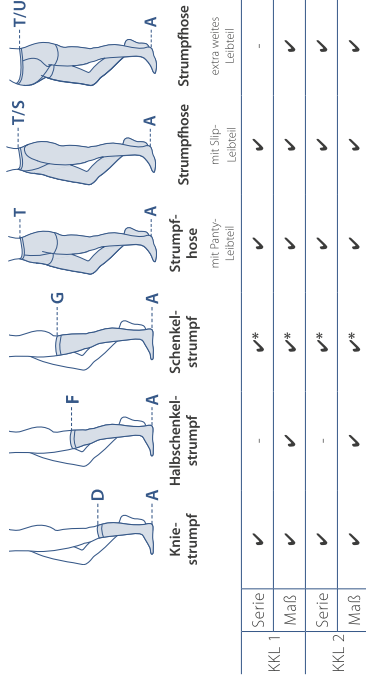


! Wichtig:

- **menge:**

* Schenkelstrumpf nur in Kombination mit Haftband (siehe „Zusätzlich wählbar“) bestellbar.

Einzelstrumpf Serie (= 1/2 Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Zusätzlich wählbar

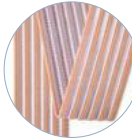Haftbänder	
	Noppen breit mit Silikon
	Noppen schmal mit Silikon
	Noppen Fleur breit mit Silikon
	Spitzen breit mit Silikon
	Gummi schmal mit Latex
	Gummi breit mit Latex
Haftband	A-D Maß
	A-D Serie
	A-G Serie
	A-F, A-G Maß
Leibteile	Kompressiv
	Zwickel
	Komfortzwickel*
	Verstärkter Schritt
Fußspitzen	Offene Spitze
	Geschlossene Softspitze
	Asymmetrische Softspitze

* keine manuelle Auswahl nötig, Komfortzwickel wird bei Bedarf automatisch bei A-T und A-T/U eingestrichelt

Pflege für trockene, empfindliche Haut

Innovation: Strümpfe mit Aloe vera Mikroverkapselung

Gut gegen geschwollene Füße, Krampfadern und müde Beine – natürlich biologische Aloe vera und Vitamin E für die gestresste Haut

Wie funktioniert die Aloe vera Mikroverkapselung?

Im Garn von BELSANA vivere und BELSANA medical aloe vera sind Millionen Mikrokapseln integriert, jede einzelne gefüllt mit einer kleinen Menge Aloe vera. Jede Kapsel ist mit unzähligen Nanoporen perforiert. Der Druck der Aloe vera im Inneren der Kapseln presst das Gel durch die Poren bis die Oberfläche gesättigt ist. Vereinfacht gesagt, funktioniert es wie bei einem mit Wasser gefüllten Ballon, den man mit Millionen von Nadelstichen perforiert: Die Oberfläche des Ballons wird feucht. Trocknet man die Oberfläche des Ballons mit einem Handtuch, wird sie sofort erneut feucht. Nach diesem Prinzip wird das Aloe vera Konzentrat durch das Tragen des Strumpfs von der Oberfläche der Mikrokapseln abgenommen und es kommt stets neues Konzentrat aus dem Inneren der Kapseln nach. Dadurch wird die Haut nach und nach immer mit pflegenden und feuchtigkeitsspendender Aloe vera versorgt.

Wirkung von Aloe vera:

Pflegend, gewebe- und zellerneuernd sowie beruhigend und vitalisierend. Lindert Hautirritationen und schützt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut.

Aktivstoffe der Aloe vera:

Aminosäuren, Mineralien, Vitamine, Enzyme, ätherische Öle, immunstimulierende Polymannose/Glykoproteine.

Gut zu wissen

Aloe vera ist ein natürliches Extrakt aus der Pflanze namens Aloe Barbadensis.

Aloe vera enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, essentielle Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe und eine ganze Reihe stoffwechselwirksamer Enzyme.

Der Effekt der Aloe vera Mikroverkapselung hält garantiert 100 Wäschen lang! Die Strümpfe hierfür bei maximal 40°C waschen und die entsprechenden Pflegehinweise beachten.

Aloe vera pflegt trockene und empfindliche Haut und wirkt entzündungshemmend.

Natürliche Wirkung zertifiziert.

Das OEKO-TEX® Zertifikat* bestätigt, dass das für BELSANA vivere und BELSANA medical aloe vera genutzte Garn den human-ökologischen Ansprüchen entspricht, die für Säuglingsprodukte festgelegt wurden. Das Diffusionszertifikat, herausgegeben und durchgeführt von der University of Zaragoza, bestätigt die Menge und die Art und Weise, auf die die Aloe vera mit der der Zeit freigesetzt wird, wenn sie direkt auf der Haut getragen wird. Cogis Iberia zertifiziert, dass die Aloe vera nicht genetisch manipuliert wurde.

* Mehr dazu unter <https://www.oeko-tex.com/de/hier-beantragen/standard-100-by-oeko-tex>

Diese BELSANA Strümpfe haben eine Aloe vera Mikroverkapselung:



BELSANA vivere
Medizinische Kompressionsstrümpfe
(siehe folgende Seiten)



BELSANA medical aloe vera
Kompressive Strümpfe
(siehe Seite 45)

Eigenschaften:

- Mikroverkapselte biologische Aloe vera und Vitamin E versorgen die Haut beim Tragen mit Feuchtigkeit
- Effekt der Aloe vera 100 Wäschen lang garantiert
- Ideal für trockene, juckende Haut


Material:

42% Elastan, 41 % Polyamid (mit Aloe vera & Vitamin E, kann Allergene enthalten), 17% Polyamid (Mikrofaser)

vivere

FÜR TROCKENE UND GESTRESSTE HAUT
FOR DRY AND STRESSED SKIN

Farben

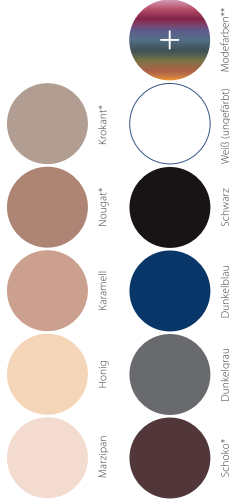

* Lieferzeit bis 14 Tage. | Strumpfarben im Druck nicht farbecht.
** Vier aktuelle Modelfarben: keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch. Siehe Modelfarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheken.de.
Farbliche Darstellung "Regenbogen" nur exemplarisch für jährlich wechselnde Modelfarben.

Größen


cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145
cG	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84
für A-T					
cG plus	56,1–67	60,1–71	63,1–74	67,1–79	72,1–84
für A-G					
cG normal	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30
cV	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27
	I	II	III	IV	V

Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–23,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

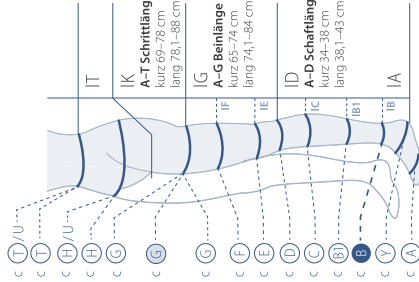

Ausführungen

Knie-strumpf	Halbschenkel-strumpf	Schenkel-strumpf	Strumpfhose	Strumpfhose mit Panty-Leibteil	Strumpfhose mit Slip-Leibteil	Strumpfhose extra weites Leibteil
A	A	A	A	A	A	A
D	F	G	T	T/S	T/U	
✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Maß						

! Wichtig:

* Schenkelstrumpf nur in Kombination mit Haftband (siehe, Zusätzlich wählbar) bestellbar.
Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Zusätzlich wählbar

Haftbänder	Ausführung	Beschreibung
	Noppen schmal mit Silikon	Gummi breit mit Latex
	Noppen breit mit Silikon	Gummi schmal mit Latex
	Noppen Fleur breit mit Silikon	Spitzen breit mit Silikon
	Maß	Noppen (schmal & breit), Gummi (schmal & breit)
	Serie	Noppen (schmal)
	Serie	Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Spitzen (breit), Gummi (breit)
	Maß	Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Spitzen (breit), Gummi (breit)
	A-G	Noppen (schmal & breit), Gummi (schmal & breit)
	A-D	Noppen (schmal)
	A-T	Durchgehend gestrickt, standardmäßig mit Komfortzwickel
	Maß	
	Maß	Doppelnaht hinten bis Taille
	Maß	Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
	Serie / Maß	Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
	Serie / Maß	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
	alle	Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe

Notizen

This image shows a full page of a document template designed to look like lined paper. It consists of a series of evenly spaced, vertical gray lines running from the top to the bottom of the page. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.

Notizen

This image shows a full page of a document template designed to look like lined paper. It consists of a series of evenly spaced, vertical gray lines running from the top to the bottom of the page. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.

Individuelle Versorgung für spezielle Krankheitsbilder und Patienten-Bedürfnisse

Was sind flachgestrickte Kompressionsstrümpfe?

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe werden, wie der Name schon sagt, flach wie ein Brett und von links nach rechts gestrickt. Darum haben flachgestrickte Strümpfe immer eine sichtbare Naht – über diese wird das zunächst flache Gestrick zum fertigen Strumpf zusammengeñäht. Die Maschenzahl ist bei flachgestrickten Kompressionsstrümpfen über die gesamte Strumpflänge variabel, dadurch können spezielle anatomische Körperformen problemlos versorgt werden.

Des Weiteren sind flachgestrickte Strümpfe sehr formstabil. Das muss auch so sein, da sie nach der Manuellen Lymphdrainage den weiteren Lymphabfluss unterstützen und die erneute Zunahme des Ödems verhindern. Der medizinisch korrekte Druckverlauf sowie die hohe Formstabilität des Gestricks sorgen dafür, dass die Lymphe in Richtung der intakten Gefäße befördert wird und mehr Flüssigkeit abtransportiert wird.

Kompressionsklassen (KKL)

Für flachgestrickte Kompressionsstrümpfe gibt es insgesamt vier KKL, von leichter (1 mit 18-21 mmHg) über mittlere (2 mit 23-32 mmHg) und kräftige (3 mit 34-46 mmHg) bis hin zu sehr kräftiger (4 mit > 49 mmHg) Druckintensität.

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe sind selbstverständlich **verordnungsfähig**.

Vielzahl an **individuellen Versorgung**en für obere und untere Extremitäten: Bein- und Armversorgungen, ausschließlich individuelle Maßanfertigung, Sonderausführungen und Zusätze optional wählbar.

Diverse Verzierungen für modische Kombinationen und attraktive Akzente und einen strahlenden Auftritt.

BELSANA impuls

Unsere flachgestrickten Kompressionsstrümpfe für die wirksame Ödemtherapie

- Angenehm weiche Naturfaser
- Atmungsaktiv und geruchsneutral
- Klimaregulierend
- Formstabile Mikrofaser



Weitere Informationen finden Sie im BELSANA impuls Salesfolder. Bestellbar im BELSANA Kundenservice unter Telefon 0951 309 303-0.

Besonderheiten und Verzierungen bei BELSANA impuls

Lymphpad strong (gestreift)

Besonders geeignet für Patienten mit extrem weichem Bindegewebe und starken Ödemen.

Das Lymphpad strong fördert den Lymphfluss stärker als gewöhnliche Schaumstoff-Lymphpads. Durch die integrierten Druckzonen, die sich in den Längskanälen befinden, drückt das Lymphpad strong stärker in die Haut als herkömmliche Schaumstoff-Lymphpads und regt somit den Lymphfluss verstärkt an.

Besondere Eigenschaften:

- 3D-Textil mit integrierten Druckzonen und Luftkanälen
- 100% Polyester
- Leicht und atmungsaktiv, dadurch Verringerung von Schweißbildung
- Sehr widerstandsfähig und trotzdem elastisch

- Luftdurchlässig
- Dünn und daher angenehm zu tragen
- Direkter Hautkontakt für bessere Massagewirkung
- Weicher, nahtloser Rand
- Waschbar



Ein Herz für das Selbstmanagement

Patientinnen (denen überwiegend sind Frauen betroffen) mit **Lymph- oder Lipödem** oder sogar beidem sind großem Leidensdruck ausgesetzt. Die Erkrankungen sind **nicht heilbar** und das Lipödem bereitet teils starke Schmerzen, behindert im Alltag und wird **in der Gesellschaft immer noch stigmatisiert**, da es für Laien auf den ersten Blick nicht von Adipositas zu unterscheiden ist.

Mit flachgestrickten Kompressionsstrümpfen kann man die Erkrankungen in der Regel **sehr gut behandeln** und bei täglichem Tragen schnelle Besserung der Symptome erzielen und eine Verschlechterung vermeiden.

Neben dem Tragen der Strümpfe ist auch das **Selbstmanagement sehr wichtig**, das heißt **ausgewogene Ernährung, Bewegung** und vor allem ein **starkes Selbstbewusstsein** für ein **positives Selbstwertgefühl**. Daran soll das eingestrickte Herz, das auch nur für die Trägerin selbst gut sichtbar ist, täglich erinnern. Mit Disziplin und Konsequenz werden Betroffene es schaffen, ihre Beschwerden zu lindern und ihren Leidensdruck zu minimieren.



Schmucksteinchen für den strahlenden Auftritt


Patientinnen mit Lymph- oder Lipödem müssen **keineswegs auf Style und Extravaganz verzichten**. Mit den **Schmucksteinchen im Metallic-Look** für BELSANA impuls Beinversorgungen und dem **Schmuckkettchen** für Armversorgungen können Patientinnen selbstbewusst auftreten.



Modefarben


Besondere Eigenschaften:

- Die jährlich wechselnden Modelfarben gibt es für Bein- und Zehnversorgungen in der KKL 1 bis KKL 3.
- Nicht für Arm- und Handversorgungen erhältlich.
- Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
- Die Möglichkeit, ein Lymphpad fest in den Futterstoff einzunähen, entfällt.
- Auch mit silbernem Schmuckband erhältlich

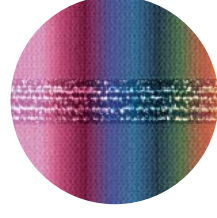

Beinstrümpfe richtig anmessen

- Messen Sie die **Beinumfänge mit Zug, ausgenommen** cV und cE.
- Am **jüngsten Abschluss des Strumpfes** (wenn cB, cB1, cC, cD, cE oder cG Endmaße sind und ggf. bei cT) sollte **ohne oder nur mit leichtem Zug** gemessen werden, um Abschnürungen zu vermeiden.
- Bei zweiteiliger Versorgung muss die Überlappung der oben liegende Versorgung mind. 15 cm betragen und ohne Zug gemessen werden.
- Messen Sie die Längen immer an der Außenseite des Beins entlang der Kontur, ausgenommen **VE** und **ÜK**. Siehe Hinweise in der Tabelle unten.
- Empfehlungen, welche Umfänge und Längen im Stehen und/oder im Liegen zu messen sind, entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.
- Umfänge, die im Stehen gemessen werden, werden von der Seite aus abgelesen. Bei Zugmaßen lässt sich der Patient leicht ins Maßband fallen. Wichtig: für sicheren Stand sorgen, Festhalten an Wand etc.
- Messen Sie Umfänge nicht direkt in Gelenk- oder Hautfalten.
- Verwenden Sie zum Messen unter Zug das gelbe nicht dehnbare Maßband mit Schlaufe und zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift.

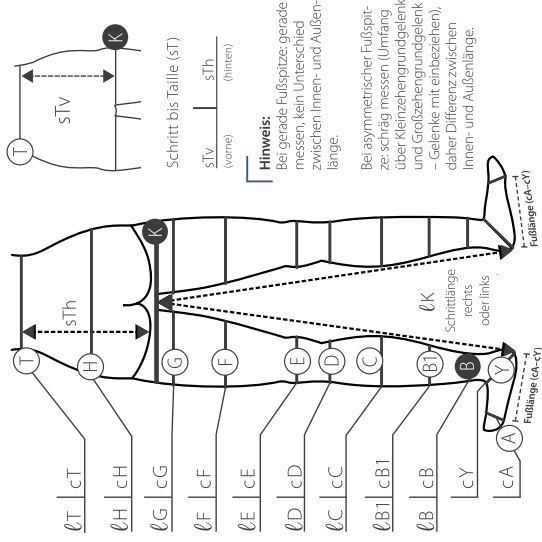

Hinweis: Bei gerade Fußspitze: gerade messen, kein Unterschied zwischen Innen- und Außenlänge.

Bei asymmetrischer Fußspitze: schräg messen (Umfang über Kleinzehengrundgelenk und Großzehengrundgelenk – Gelenke mit einbeziehen), daher Differenz zwischen Innen- und Außenlänge.


		Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (ℓ = length)
⊕ = mit Zug, ⊙ = ohne Zug * = wenn Abschluss, ohne oder nur mit leichtem Zug				
	⊙ *	T	Im Stehen, Umfang Taille, wir empfehlen, den Taillenumfang in Höhe des unteren Brustbein- satzes zu messen (s1v ist entsprechend länger), je nach Ödöform	ℓT* Messpunkt cT bis Ferse Im Stehen, Schritt= Leistenbeuge, seitlich am Schrittlinie cT (senkrecht nach oben messen)
	⊕	H	Im Stehen, Umfang stärkste Stelle Becken mit Po und Bauch	sTh Im Stehen, Po-Befälle bis cT hinten (senkrecht nach oben über die stärkste Stelle einer Gesäßpartie messen)
	⊕	K	Im Stehen, Umfang stärkster Stelle auf Höhe des Schritts (und um den Körper gemessen ausgehend von Schrittlinie, nicht über die Hüfte, sondern unterhalb der Hüfte, in der Mitte von Po, vorne und hinten horizontal wie Wasserpegel gemessen, kann bei starke(n) Reiterhosen ähnlich oder sogar größer cH sein)	ℓH* Messpunkt cH bis Ferse Messpunkt cH bis Ferse (Schritt= Leistenbeuge einmal der Kontur an der Beininnenseite entlang, dann ggf. Mitte mitten)
	⊕ *	G	Im Stehen, etwa Oberschenkelende (Schenkelknochen), Umfang 2 Finger breit unterhalb der Po-Bein- Falte, Strumpfphase/Versorgung mit Leibteil; Umfang zwei Finger breit unterhalb der Leistenbeuge)	ℓK Im Stehen, Messpunkt cG bis Ferse, am Bein entlang
	⊕ *	F	Im Sitzen oder Liegen, Umfang Oberschenkelmitte (Mitte zwischen Knie und Leiste)	ℓG Im Stehen, Messpunkt cG bis Ferse, am Bein entlang
	⊙	E	Im Sitzen oder Liegen, Umfang 1cm oberhalb der Kniekehle und Kniekehle bei leicht gebeugtem Knie	ℓF Messpunkt etwa Oberschenkelmitte bis Ferse
	⊕ *	D	Im Sitzen oder Liegen, Umfang am Tibiakopf (ca. zwei Fingerbreite unter der Kniekehle und der Kniekehle)	ℓE Im Stehen, Messpunkt Kniekehlenfalte bis Ferse, hinten über die Wade
	⊕ *	C	Im Sitzen oder Liegen, größter Wadenumfang	ℓD Messpunkt cD bis Ferse
	⊕ *	B1	Im Sitzen oder Liegen, Umfang in der Mitte von ℓB und ℓC (am Wadenansatz)	ℓC Messpunkt cC bis Ferse
	⊕ *	B	Im Sitzen oder Liegen, Fesselumfang (schlankste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	ℓB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
	⊙	Y	Im Sitzen oder Liegen, Umfang Ferse–Spann (bei maximaler Beugung Überhang mit einbeugen, bei Überhang nicht in Falduräte messen, Überhang mit einbeugen)	ℓB Messpunkt cB bis Ferse
	⊙	A	Im Stehen, Umfang am Kniegelenkgelenk	ℓA Im Stehen, Messpunkt cA bis Ferse*** Gesamt- fülllänge Längste Zehenspitze bis Ferse

* Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken. | ** Das Maßband an die Leistenbeuge anlegen und festhalten. Von dort das Maßband senkrecht nach oben, seitlich am Bauch vorbei bis zum Taillenband, dort die Länge ablesen. | *** Bei großer Fußspitze (FS): Kleinzehengrundgelenk bis Ferse, bei asym. FS außen cA: Kleinzehengrundgelenk (Gelenk mit einbeziehen), asym. FS innen: Großzehengrundgelenk bis Ferse (Gelenk mit einbeziehen), Unterschied zwischen innen- und Außenlänge höchstens 3 cm.

Fuß- und Zehenteil richtig anmessen

- Die Maße des Fußes und der Zehen werden **ohne Zug gemessen** und besonders die Zehenmaße müssen **millimetergenau** genommen werden.
- Die Zehe Nr. 5 ist nur selten betroffen und wird daher nur bestrumpft, wenn dort ein Ödem vorhanden ist.

- Damit Sie die Längenmaße des Fußes passend zu den Umfangsmaßen nehmen können, sollten Sie die Messpunkte mit dem abwaschbaren BELSANA Hautstift (299260) markieren.

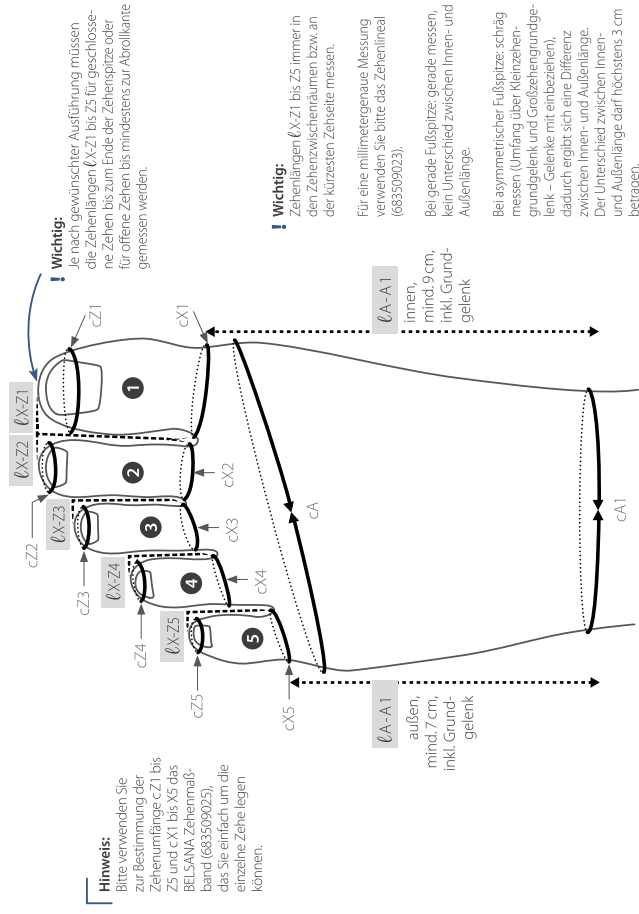

! Wichtig:
Zehenlän-
den Zehen-
der kürzest

Für eine mill
verwenden
(683509023)


Bei gerade Fußspitze: gerade messen, kein Unterschied zwischen Innen- und Außenlänge.

Bei asymmetrischer Fußspitze: schräg messen (Umfang über Kleinzehengrundgelenk und Großzehengrundgelenk – Gelenke mit einbeziehen), dadurch ergibt sich eine Differenz zwischen Innen- und Außenlänge. Der Unterschied zwischen Innen- und Außenlänge darf höchstens 3 cm betragen.

 = Mess- punkt ohne Zug	Mess- punkt	Umfang (c = circumference)	Länge (ℓ = length)
		Umfang auf Höhe der Mitte des Nagels $cZ1 - cZ5$	Länge vom Messpunkt cX bis cZ an der kürzesten Innenseite des Zehs messen. Bei geschlossenen Zehen bis zur jeweiligen Zehenspitze messen (Längenmaß bis in die Schwimmhaut nehmen)
		Umfang vom Ansatz des Zehs am Zehengrundgelenk (cX darf nicht kleiner sein als cZ)	-
		Umfang vom Kleinzehengrundgelenk über das Großzehengrundgelenk cA	Länge außen vom Kleinzehengrundgelenk bis zum Ansatz des Fußspanns (mind. 9 cm) $\ell A - A1$
		Ansatz des Fußspanns (über dem Mittelfuß messen) cA1	Länge innen vom Großzehengrundgelenk bis zum Ansatz des Fußspanns (mind. 7 cm) $\ell A - A1$

Armstrümpfe richtig anmessen

- Den Arm auf einer Unterlage leicht angewinkelt aufliegen lassen.
- Je nachdem, **wie stark der Arm ödematisiert** ist, müssen die Umfangmaße **ggf. unter Zug** gemessen werden. Am jeweiligen **Abschluss des Strümpfes** (wenn cD oder cF Endmaße sind und ggf. bei cG) sollte **ohne oder nur mit leichtem Zug** gemessen werden, um Abschnürungen zu vermeiden.
- Der Messpunkt cG wird am herunterhängenden Arm mit Hilfe eines Blattes unter der Achsel gemessen.
- Alle Längenmaße immer an der Arm-Innenseite messen. Ist der Arm stark ödematisiert, muss die **Gesamtlänge (C-G)** sowohl außen als auch innen gemessen werden und der **Mittelwert** daraus als finales Maß angegeben werden.
- Messen Sie Umfänge nicht direkt in Gelenk- oder Hautfalten.
- Verwenden Sie zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift (299260).
- Verwenden Sie zum Messen der Armmumfänge unter Zug das gelbe nicht dehnbare BELSANA Maßband mit Schlaufe (683509000).

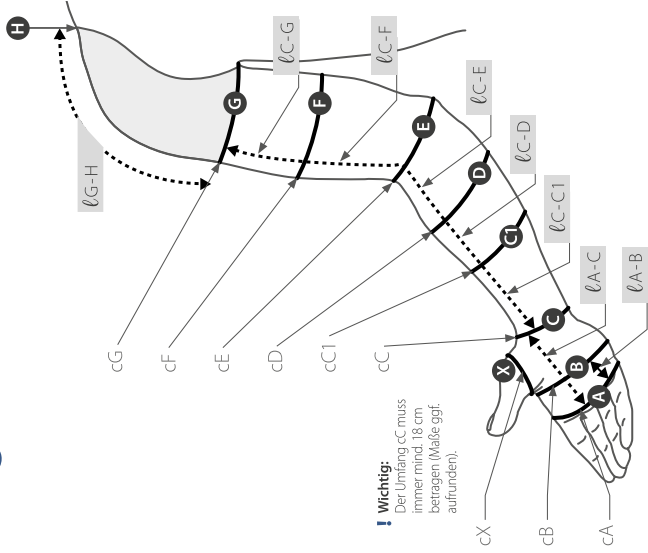


+ = mit Zug, 0 = ohne Zug * = wenn Abschluss, ohne oder nur mit leichtem Zug		Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (ℓ = length)
(H)	-	Messpunkt Mitte Schlüsselbein		ℓG-H Umfang cG bis H
(G)	*	Achselhöhle (Blatt unter den Arm schieben, Arm herunterhängen lassen, Messpunkt am oberen Rand des Blattes anzeichnen)	cG	ℓC-G Umfang cC bis cG
(F)	+	Mitte des Oberarms	cF	ℓC-F Umfang cC bis cF
(E)	0	circa 1 cm über Ellenbogen und Beugefalte im 45°-Winkel	cE	ℓC-E Umfang cC bis cE, direkt aus Ellenbeuge
(D)	+	stärkster Umfang des Unterarms	cD	ℓC-D Umfang cC bis cD
(C)	+	Umfang liegt mind. im ersten Drittel zwischen cC und cE. Bei Überlappung des Handschuhs = mind. 8 cm über cC	cC1	ℓC-C1 Umfang cC bis cC1
(C)	0	Umfang zweite Handgelenksfalte = mind. 18 cm	cC	ℓA-C Umfang cA bis cC (wenn Handteil inkl.)
(X)	0	Umfang Schwimmhaut am Daumengrundgelenk	cX	-
(B)	0	Umfang von der Daumenschwimmhaut rechtwinklig zur Handachse	cB	ℓA-B Umfang cA bis cB
(A)	0	Umfang von Kleinfingergrundgelenk und Zeigefingergrundgelenk	cA	-

Handschuhe richtig anmessen

- Umfänge bitte immer **ohne Zug** messen.
Ausnahme: bei einem A-D-Handschuh den Umfang cC1 mit leichtem Zug messen.
- Beim Messen der Umfangmaße muss die Hand gerade liegen, die Finger sollten leicht gespreizt sein und die Handfläche muss fest auf einer Unterlage aufliegen.
- Die Längenmaße an der Handinnenfläche messen.
- Beim Handschuh ohne Finger mit Daumenansatz muss der Handschuh über die Fingergrundgelenke reichen.

- Bei ödematisiertem Unterarm sollte ein verlängerter Handschuh (A-F) oder eine zweiteilige Versorgung zur Anwendung kommen (Überlappung des Handschuhs = Länge ℓA-C bis ℓA-C1 = mind. 8 cm und ohne Zug gemessen; vgl. Hinweis zur Zeichnung).
- Ein Lymphpad für den Handrücken sollte über das Handgelenk gehen (bei der Umfangmessung nicht berücksichtigen).
- Verwenden Sie zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift (299260).

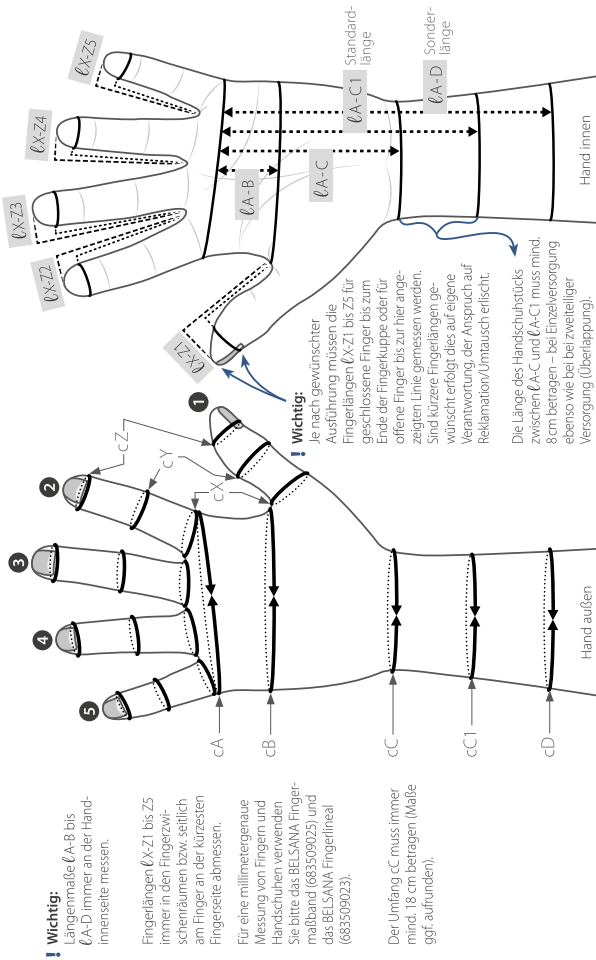

+ = mit Zug, 0 = immer ohne Zug * = Ausnahme bei A-D-Handschuh mit leichtem Zug messen		Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (ℓ = length)
(Z)	0	Umfang Anfang Nagel/Nagelbett/Fingerbeere	cZ	ℓX-Z Umfang cX bis cZ oder bis Fingerspitze
(Y)	0	Umfang Fingermittelglied	cY	-
(X)	0	Umfang Schwimmhaut am Finger- und Daumengrundgelenk (cX darf nicht kleiner sein als cY und cZ)	cX	-
(A)	0	Umfang von Kleinfingergrundgelenk und Zeigefingergrundgelenk	cA	-
(B)	0	Umfang von der Daumenschwimmhaut rechtwinklig zur Handachse	cB	ℓA-B Umfang cA bis cB
(C)	0	Umfang zweite Handgelenksfalte = mind. 18 cm	cC	ℓA-C Umfang cA bis cC
(C1)	*	Umfang liegt mind. im ersten Drittel zwischen cC und cD. Bei Überlappung des Handschuhs = mind. 8 cm über cC	cC1	ℓA-C1 Umfang cA bis cC1
(D)	0	Stärkster Umfang des Unterarms	cD	ℓA-D Umfang cA bis cD

impuls

KLIMAREGULIEREND, ANGENEHM ZU TRAGEN
CLIMATE REGULATING, PLEASANT TO WEAR


Eigenschaften:

- Kombination aus natürlicher Hochleistungsfaser vom Merino-Schaf und moderner Hightech-Mikrofaser
- Hervorragende Formstabilität
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitregulierend
- Kühlend im Sommer, wärmend im Winter
- Robust, stark belastbar und geruchsneutral
- Hautfreundlich und angenehm weich durch feinste Faserstruktur

Material:

64 % Polyamid (Mikrofaser), 23 % Elastan, 13 % Merino

Farben

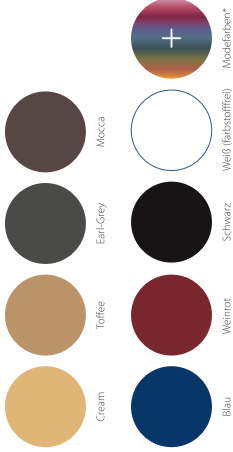

- Besonders geeignet für:
- Patient*innen mit Lymph- und Lipödemen
 - Patient*innen mit Verbrennungen
 - Narbenbehandlung

* Zwei aktuelle Modellfarben in KKL 1 bis KKL 3 in allen Ausführungen außer A-T/H und A-T/E erhältlich. Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch. Siehe Modellfarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheke.de. | Farbliche Darstellung "Regenbogen" nur exemplarisch für jährlich wechselnde Modellfarben. Strumpffarben im Druck nicht farbecht/bündlich.

Zusätzlich wählbar

Ausführung		Beschreibung
Schmuckbänder	alle außer A-T/H, A-T/E und Zehenkappe	Nacht mit Muster in Koko, Bronze, Python, Rubin und Silber (festgelegte Farbkombinationen wie abgebildet, Modellfarben jährlich wechselnd)



Ausführung		Beschreibung
Haftbänder/Bund	A-B1	Noppen (schmal), Gummi (schmal)
	A-D	Noppen (schmal & breit), Gummi (schmal & breit)
	A-G, B-G, C-G	Noppen (breit), Noppen Fleur (breit), Gummi (breit)
	A-B1, A-D, A-G, B-G, C-G	Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (breit) (ohne Abbildung)
A-D		Mikronoppen-Haftband (schmal & breit), feine, flache und kaum spürbare Mikronoppen für einen angenehmen Tragekomfort, speziell für empfindliche, sensible und zu Reizungen neigender Haut, in allen Farben außer Weinrot und Modellfarben



Ausführungen

	Socke	Kniestrumpf	Schenkelstrumpf	Schenkelstrumpf mit Hüftbest. re/ll/gedsseitig	Strumpfhose mit Percy-Leibteil	Strumpfhose extra weites Leibteil	Herrenstrumpfhose mit Querschlitzz re/ll	Einbeinhose	
nur Maß	ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband	mit Hüftbest. re/ll/gedsseitig	mit Percy-Leibteil	extra weites Leibteil	mit Querschlitzz re/ll		
KKL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T/E
KKL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T/H
KKL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T/U
KKL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A

	Beinstück B-G	Leggings	Beinstück C-G	Caprihose	Bermuda-hose	Radlerhose	Zehenkappe/Fußteil	Zehenteil	
nur Maß	ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband				offen/geschlossen		
KKL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
KKL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	F
KKL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E
KKL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C

Verzierungen



Beispiel in Cream




Beispiel auf Schwarz

Ausführung	Beschreibung
Eingestricktes Herz	Am Beinstrumpf gegenüber der Links-/Rechtsmarkierung (auf der gegenüberliegenden Seite der Naht, aus Sicht der Trägerin/des Trägers), erhältlich für alle Farben

Ausführung	Beschreibung
Schmucksteinchen	Schmucksteinchen mit Metallic-Effekt, fest auf Stoff aufgebracht, erhältlich für KKL 1 bis 4, erhältlich für die Farben Earl-Grey, Mokka, Blau und Schwarz

Die Schmucksteinchen können auch mit folgenden Schmuckbändern kombiniert werden: Python auf Earl-Grey, Silber auf Earl-Grey, Bronze auf Mokka, Python auf Schwarz, Silber auf Schwarz, Rubin auf Schwarz, Silber auf Blau

Weitere Zusätze auf Seite 38

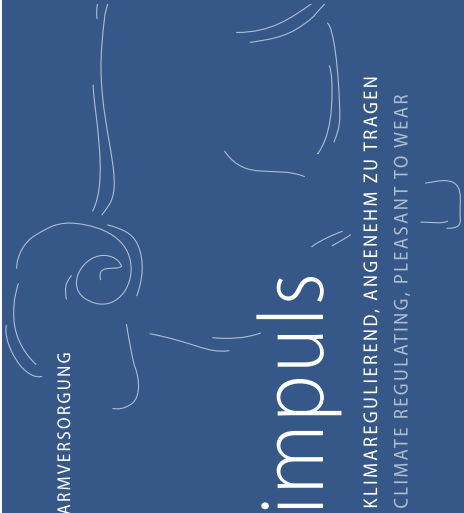

impuls

KLIMAREGULIEREND, ANGENEHM ZU TRAGEN
CLIMATE REGULATING, PLEASANT TO WEAR


Eigenschaften:

- Kombination aus natürlicher Hochleistungsfaser vom Merino-Schaf und moderner Hightech-Mikrofaser
- Hervorragende Formstabilität
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Kühlend im Sommer, wärmend im Winter
- Robust, stark belastbar und geruchsneutral
- Hautfreundlich und angenehm weich durch feinste Faserstruktur

Material:

70% Polyamid (Mikrofaser), 17% Elastan, 13% Merino

Farben

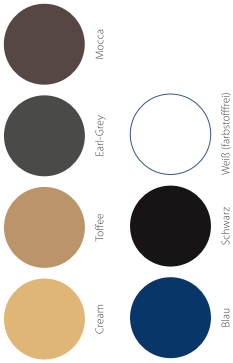

Besonders geeignet für:


- Patient*innen mit Lymph- und Lipödemem
- Patient*innen mit Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Strumpfarben im Druck nicht farbeinbildlich.

Zusätzlich wählbar

Schmuckbänder	Ausführung	Beschreibung
	C-G	Naht mit Muster in Krok, Python, Rubin und Silber (festgelegte Farbkombinationen wie abgebildet)

Haftbänder/Bund	Ausführung	Beschreibung
	alle außer C-H	Noppen (schmal & breit), Gummi (schmal & breit)
	A-G, C-G, D-G	Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (breit) Mikronoppen-Haftband (schmal), feine, flache und kaum spürbare Mikronoppen für einen angenehmen Tragekomfort, speziell für empfindliche, sensible und zu Reizungen neigender Haut

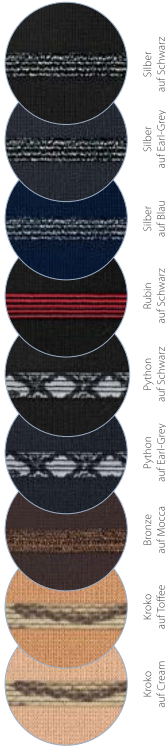

Ausführungen

nur Maß	Unterarm A-D	Oberarm A-G
mit Hand	ohne Daumen/Finger	ohne Daumen/Finger
KKL 1	✓	✓
KKL 2	✓	✓
KKL 3	✓	✓

nur Maß	Unterarm C-D	Unterarm C-E	Oberarm C-G	Oberarm mit Schulterkappe C-H	Ellenbogen D-G
ohne Hand	ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband
KKL 1	✓	✓	✓	✓	✓
KKL 2	✓	✓	✓	✓	✓
KKL 3	✓	✓	✓	✓	✓

Verzierungen



Beispiel in Cream

Eingestricktes Herz	Ausführung	Beschreibung
	A-D, A-G, C-D, C-G	Am Armstrumpf auf der Arminnenseite unterhalb des Abschlusses (aus Sicht der Trägerin/des Trägers), erhältlich für alle Farben

! Wichtig: Das Herz kann nicht bei zweiteiligen (Kombinations-)Versorgungen eingestrickt werden.




Beispiel auf Blau

Schmuckkettchen	Ausführung	Beschreibung
	C-D, C-E, C-G, C-H	Schmuckkettchen mit Metallic-Effekt; fest auf Stoff aufgebracht, erhältlich für KKL 1 bis 3, erhältlich für die Farben Earl-Grey, Mokka, Blau und Schwarz

Das Schmuckkettchen kann auch mit folgenden Schmuckbändern kombiniert werden: Python auf Earl-Grey, Silber auf Earl-Grey, Bronze auf Mokka, Python auf Schwarz, Silber auf Schwarz, Rubin auf Schwarz, Silber auf Blau

Weitere Zusätze auf Seite 39

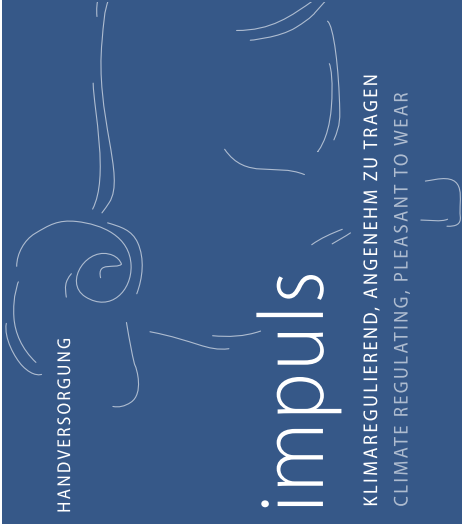


Eigenschaften:

Material:

70% Polyamid (Mikrofaser), 17% Elastan, 13% Merino

Farben

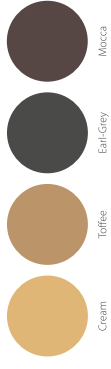

Zusätzlich wählbar

Bund	Ausführung	Beschreibung
	alle außer Fingerling	Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (breit)



Ausführungen



nur Maß mit Hand	Handschuh ohne Daumen	Handschuh mit Daumensatz	Handschuh mit Fingern	Fingerring
			(offen/geschlossen)	(offen/geschlossen)
KKL 1	✓	✓	✓	✓
KKL 2	✓	✓	✓	✓
KKL 3	✓	✓	✓	✓

Verzierungen



Beispiel in Cream

Ausführung	Beschreibung
Eingestricktes Herz A-C1	Am Handschuh unterhalb Links-/Rechtsmarkierung (aus Sicht der Trägerin/des Trägers), erhältlich für alle Farben

! Wichtig:

Das Herz kann nur eingestrickt werden, wenn die Mindestschäftlänge des Handschuhs von 8 cm eingehalten wird. Bei Abweichung ist ein Einstricken nicht möglich. Fehlendes Einstricken aufgrund von Nichteinhaltung der Mindestschäftlänge stellt keinen Reklamationsgrund dar! Das Herz kann nicht bei zweiteiligen (Kombinations-)Versorgungen einestrickt werden.

Weitere Zusätze auf Seite 39



Zusätze für Beinversorgung

nur Maß		bestellbar für genannte Ausführungen	Beschreibung
Haftbänder, -stücke und Halterungen			
Haftband / elastisches Band ohne Beschichtung	A-B1, A-D, A-G, B-G, C-G		
Mikronoppen-Haftband (schmal & breit)	A-D		feine, flache und kaum spürbare Mikronoppen für einen angenehmen Tragekomfort, speziell für empfindliche, sensible und zu Reizungen neigender Haut
Hafstücke	alle		Noppen (3+5cm), bei A-D: längs, quer, variable Länge oder ¾ cD-Umfang; bei A-G: längs, quer, variable Länge oder ¾ cG-Umfang
Haftfolien			3 cm x 4 cm oder 5 cm x 6 cm, bei A-D: längs, quer oder ¾ cD-Umfang; bei A-G: längs, quer oder ¾ cG-Umfang
Hüftbefestigung	A-G/T		Bei Wahl der Ausführung A-G/T automatisch dabei
Verzierungen			
Schmuckbänder	alle außer A-T/H, A-T/E und Zehenkappe		
Schmucksteintchen	A-D, A-G, A-T, A-T/U, B-T		
Eingestricktes Herz	A-B1, A-D, A-G, A-T, A-T/U		
Fuß			
Geschlossene Spitze			Anatomische Fußform angepasst für besseren Lymphfluss
Asymmetrischer Fuß offen	alle		Anatomische Fußform angepasst für besseren Lymphfluss
Asymmetrischer Fuß geschlossen			Gummiband zur Fixierung des Strumpfes
Mit Steg	B-T, B-G		
90° Fuß/T-Ferse	alle mit Fuß		Fußform im 90° Winkel für reduzierte Faltenbildung am Spann
Bein			
Laterale Erhöhung	A-B1, A-D, A-G, B-G, C-G		Erhöhung Bein-Außenseite (A-B1, A-D: 3 cm / A-G, B-G, C-G: 5 cm) für besseren Lymphfluss
Oberbeinerhöhung	A-G, B-G, C-G		Erhöhung Oberschenkel-Vorderseite (5 cm)
Anatomisches Knie	ab A-G		Einkehren am Knie
Stumpf (auf Anfrage)	alle		Für Patienten mit Beinamputation
Einbeinring (Standard)	A-T/E		Bei Wahl der Ausführung A-T/E automatisch dabei
Leibteile			
Kompressiv (Standard)	A-T, A-T/E, B-T, C-T, E-T, F-T		Leibteil mit Kompression
Slipform			
Elastisches Taillenband mit oder ohne Noppen möglich			Weiches, anschniegbares Taillenband (5 cm), mit oder ohne Noppenbeschichtung, verhindert unangenehmes Ummollen
Mit Längsschlitz und Reißverschluss	alle Leibteile		Längs: genähter Eingriff mit Reißverschluss
U-Leibteil			Extra weites Leibteil
Stoma-Öffnung			
Zwickel			
Armungsaktiv	alle Leibteile		Schritzwinkel mit luftdurchlässiger Perforation
Kompressiv	alle Leibteile außer A-T/U		Doppelgelagtes Gestrick für erhöhte Kompression im Schritt
Offener Schritt	A-T, B-T, C-T, E-T, F-T		Ausgesparter Schritzwinkel
Reißverschlüsse (inkl. Hakenband)			
Reißverschluss kurz	A-D		Kurzer Reißverschluss; Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Reißverschluss lang	A-G, B-G, C-G		Langer Reißverschluss; Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Reißverschluss im Leibteil	alle Leibteile		Individueller Reißverschluss; Platzierung links und/oder rechts in der Naht oder mittig
Pelotten/Pads			
Schaumstoff-Lymphpad oder Pelotte fest in Futterstoff eingenaht	alle außer in Modelfarben und in Weinrot		Schaumstoff-Pad oder Silikonpelotte auf Strumpfminnenseite in Futterstoff eingenaht
Schaumstoff-Lymphpad oder Pelotte in angenähter Tasche	alle		Schaumstoff-Pad oder Silikonpelotte in angenähter Tasche integriert, herausnehmbar
Lymphpad strong fest in Strumpf eingenaht	alle außer in Modelfarben und in Weinrot		Atmungsaktives Lymphpad mit integrierten, besonders starken Druckzonen für einen noch besseren Lymphfluss, fest in Strumpf eingenaht, direkter Hautkontakt, 100 % Polyester
Futterstoff einnähen			Eingenähter Stoff auf Strumpfminnenseite für verbesserten Tragekomfort, z.B. in der Kniebeuge

Zusätze für Arm-/Handversorgung

nur Maß		bestellbar für genannte Ausführungen	Beschreibung
Haftbänder, -stücke und Halterungen			
Haftband / elastisches Band ohne Beschichtung	Arm	alle außer C-H	
Elastisches Band ohne Beschichtung	Hand	alle außer Fingerling	
Mikronoppen-Haftband (schmal)	Arm	A-G, C-G, D-G	feine, flache und kaum spürbare Mikronoppen für einen angenehmen Tragekomfort, speziell für empfindliche, sensible und zu Reizungen neigender Haut
Hafstücke	Arm+ Hand	alle außer Fingerling	Noppen (3+5 cm), bei A-G: längs, quer, variable Länge oder ¾ cG-Umfang
Haftfolien			3 cm x 4 cm oder 5 cm x 6 cm, bei A-G: längs, quer oder ¾ cG-Umfang
BH-Halterung	Arm	C-H	Zum Einhängen in BH-Träger oder mit Klettverschluss
Schulterkappe			Bei Wahl der Ausführung C-H automatisch dabei
Verzierungen und Extras			
Schmuckbänder	Arm	C-G	
Schmuckkettchen	Arm	C-D, C-E, C-G, C-H	
Eingestricktes Herz (Handschuh-Schaftlänge mind. 6 cm)	Arm	A-D, A-G, C-D, C-G	
Hand	Hand	A-C1	
Smartphone-Finger			Integrierter Spezialfaden in Daumen und Zeigefinger zur Bedienung von Smartphones, für geschlossene Finger
Anti-Rutsch-Beschichtung	Hand	A-C1, A-D, A-G	Silikonfreie Beschichtung auf Handinnenfläche, Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger für einen sicheren Griff
Arm			
Laterale Erhöhung	Arm	alle	Erhöhung Arm-Außenseite (3 cm) für besseren Lymphfluss
Reißverschlüsse (standardmäßig mit Unterlegband)			
Reißverschluss kurz	Hand	A-C1, A-D, C-D, C-E, D-G	Kurzer Reißverschluss, Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Reißverschluss läng	Arm	A-G, C-G, C-H	Langer Reißverschluss; Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Pads			
Schaumstoff-Lymphpad fest in Futterstoff eingenaht			Schaumstoff-Pad auf Strumpfminnenseite in Futterstoff eingenaht
Schaumstoff-Lymphpad in angenähter Tasche	Arm+ Hand	alle außer Fingerling	Schaumstoff-Pad in angenähter Tasche integriert, herausnehmbar
Lymphpad strong fest in Strumpf eingenaht			Atmungsaktives Lymphpad mit integrierten, besonders starken Druckzonen für einen noch besseren Lymphfluss, fest in Strumpf eingenaht, direkter Hautkontakt, 100 % Polyester
Futterstoff einnähen			Eingenähter Stoff auf Strumpfminnenseite für verbesserten Tragekomfort