


Descriptif

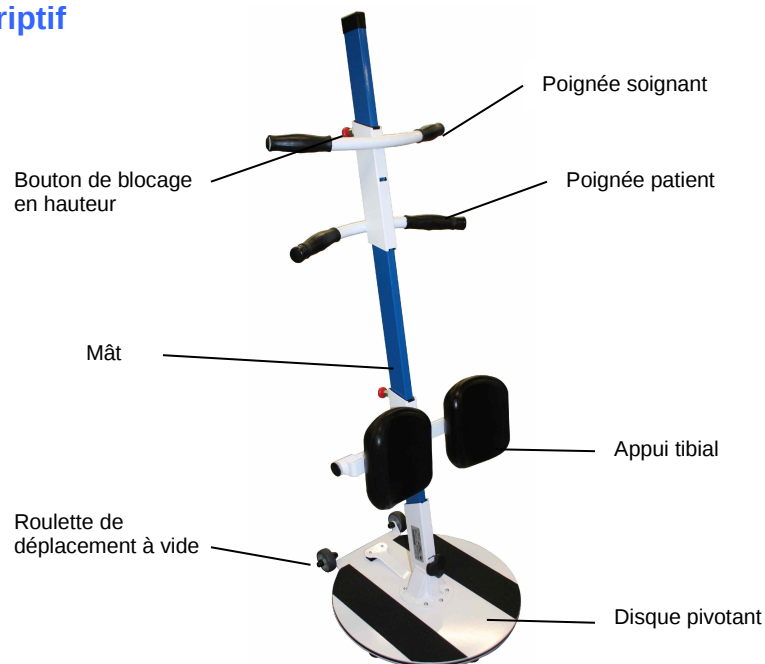

Recommandations

Avertissements :

- . Le *Vertic Easy* est destiné à réaliser un transfert en verticalisant et en pivotant le patient d'une position assise vers une autre position assise (lit vers fauteuil – fauteuil de repos vers fauteuil à roues ...).
- . Ne jamais utiliser seul ce dispositif. Le transfert ne peut s'effectuer qu'en présence d'une tierce personne qui stabilise et maintient le *Vertic Easy* durant toute la phase de transfert.
- . Ne jamais déplacer le *Vertic Easy* sur ses roulettes lors du transfert d'un patient (les roulettes sont destinées au déplacement à vide du dispositif).
- . Ne pas dépasser le poids maxi utilisateur de 150 kg indiqué sur le *Vertic Easy*.
- . Utiliser le *Vertic Easy* sur une surface plane.

Nettoyage :

- . Essuyer toutes les surfaces du *Vertic Easy* avec un non-tissé imprégné d'une solution de nettoyage adaptée (Anios détergent désinfectant surfaces hautes ou autre produit équivalent).
- . Proscrire impérativement : alcool pur, Acétone, Perchloréthylène et trichloréthylène, solvants détergents, produits d'entretien abrasifs et cires.
- . Ne pas nettoyer le *Vertic Easy* à grande eau ou au jet sous pression.

Entretien préventif :

Il est conseillé de réaliser une inspection annuelle pour conserver les performances du *Vertic Easy*. En fonction de la fréquence d'utilisation contrôlez les points suivants :

- . Fixation du support mât sur le disque.
- . Fonctionnement du réglage en hauteur et du blocage des poignées et appui tibial.
- . Propreté, état général du revêtement époxy.
- . Vérification de l'état d'usure des patins antidérapant





Notice d'utilisation




1266846

Appareil modulaire de verticalisation
modèle adulte

Montage:

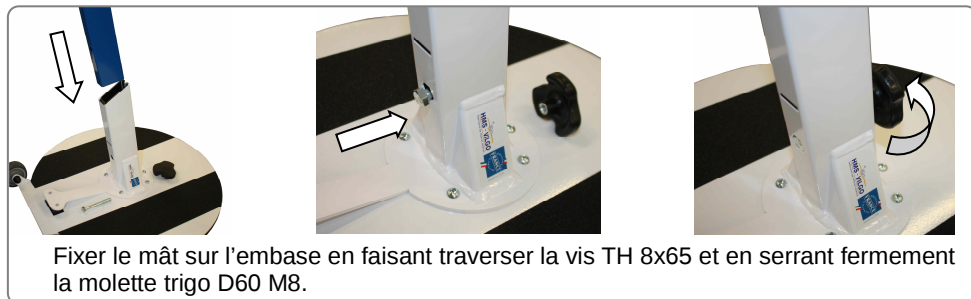


Fonctionnalités :

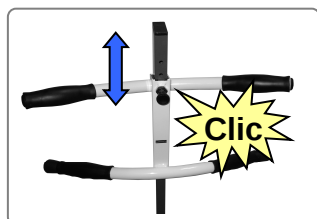

a/ Réglage en hauteur des poignées patient et soignant :

- . Tirez le bouton de blocage et réglez les poignées à la hauteur souhaitée.
- . Verrouillez le bouton de blocage sur l'un des 8 trous de réglage.

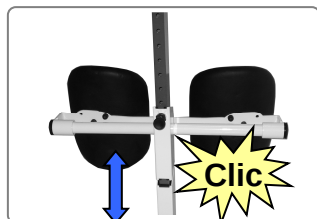


b/ Réglage en hauteur de l'appui tibial :

- . Tirez le bouton de blocage et positionnez l'appui tibial à la hauteur souhaitée (sous la rotule du patient).
- . Verrouillez le bouton de blocage sur l'un des 8 trous de réglage.



c/ Freinage rotation disque :

- Pour freiner la rotation du disque et stabiliser le Vertic Easy appuyez avec le pied sur la pédale centrale.

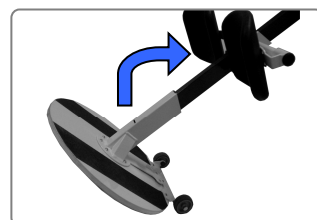

d/ Déplacement à vide :

- Inclinez le Vertic Easy et déplacez-le sur ses roulettes additionnelles.

IMPORTANT: Ne jamais incliner le Vertic Easy ou tenter de le déplacer lorsque le patient est sur le disque.

Utilisation du Vertic Easy :



- 1/ Positionnez le Vertic Easy à proximité du patient de manière à ce qu'il place ses pieds sur le disque pivotant.
- 2/ Réglez la hauteur des poignées
- 3/ Réglez l'appui tibial
- 4/ Tenez la poignée des 2 mains et appuyez sur la pédale.
- 5/ Demandez au patient de se lever tout en stabilisant le Vertic Easy avec le pied et les mains.



- 6/ Soulevez légèrement le pied de la pédale et faites pivoter le Vertic Easy de manière à positionner le patient à l'aplomb du nouveau siège.

- 7/ Tout en tenant la poignée des 2 mains et en maintenant le pied appuyé sur la pédale, demandez au patient de s'asseoir.
- 9/ Sortez le Vertic Easy une fois le patient correctement assis.



IMPORTANT: Durant toute la phase de transfert, conservez un contact visuel avec le patient, et veillez à stabiliser le dispositif avec les 2 mains et le pied appuyé sur la pédale.