



MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIES

FAUTEUILS RELEVEURS

Medtrade

FAUTEUIL RELEVEUR GOLDEN

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE



Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez fait l'acquisition d'un fauteuil releveur Golden Technologies et nous vous remercions pour votre choix et l'intérêt que vous portez à nos produits.

Nous avons veillé à apporter un soin tout particulier quant à la sélection et à la qualité des composants de nos fauteuils afin de vous en garantir la plus grande satisfaction d'utilisation possible, sans entretien particulier. Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses années du confort et des fonctionnalités de votre fauteuil releveur Golden Technologies et nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction dans son utilisation.

Veuillez prendre le temps de parcourir ce manuel afin de vous familiariser avec votre fauteuil et les conditions de garantie. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le revendeur chez qui vous l'avez acheté.

SECURITE : ce fauteuil releveur est conçu pour vous aider à vous asseoir et à vous relever. Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'en servir sans la surveillance d'un adulte. Lorsque vous ne vous en servez pas, le fauteuil doit être maintenu en position assise.

Nous vous remercions à nouveau d'avoir fait le choix d'un fauteuil Golden.

Cordialement,

Richard Golden

Chief Executive Officer

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Richard Golden'.



Consignes de sécurité

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans ce manuel et/ou sur le fauteuil pour identifier les mises en garde et vous informer des importantes consignes de sécurité. Assurez-vous de lire ce manuel complètement et d'en comprendre les informations.



ATTENTION ! Vous informe d'une situation à risque, qui si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures importantes. Ce symbole est représenté avec un point d'exclamation dans un triangle jaune.



OBLIGATOIRE ! Ne pas respecter une consigne obligatoire peut provoquer des blessures et/ou endommager le fauteuil. Ce symbole est représenté avec un carré blanc dans un rond bleu.



INTERDIT ! Vous indique une action à ne faire sous aucun prétexte. Ne pas respecter une consigne interdite peut provoquer des blessures et/ou endommager le fauteuil. Ce symbole est représenté par une barre oblique dans un rond rouge.

Symboles de sécurité

Les symboles ci-dessous identifient les mises en garde, les consignes obligatoires ou actions interdites. Ils se trouvent dans ce manuel et/ou sur le fauteuil. Assurez-vous de bien les avoir compris avant d'utiliser le fauteuil. Ne pas retirer ces indications du fauteuil.



Lire et suivre les consignes



Risque pour les enfants



Risque de pincement ou d'écrasement



Risque pour les animaux domestiques



Risque d'écrasement du transformateur



Risque de basculement



Risque d'incendie



Risque de basculement pour les enfants et les animaux


Consignes de sécurité (suite)



Utilisation uniquement en intérieur



Ne pas fumer

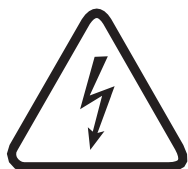

Risque électrique



Ne pas jeter dans les ordures ménagères



Besoin de 2 piles 2 Volts

**OBLIGATOIRE****Lire ce manuel avant d'installer et utiliser le fauteuil releveur.**

Votre fauteuil a été conçu du repose jambe jusqu'au haut du dossier pour vous fournir solidité et fiabilité. Le plus grand soin a été apporté pour votre confort et votre sécurité. Golden Technologies inspecte et teste chaque fauteuil avant son expédition.

! ATTENTION

Il vous est demandé d'utiliser votre fauteuil avec précaution pour votre sécurité et celle des personnes de votre entourage. Les consignes suivantes sont les principes pour une utilisation en toute sécurité de votre fauteuil.



Merci d'apporter le plus grand soin au déballage de votre fauteuil pour ne pas vous blesser ou abîmer le fauteuil. Jetez les emballages et housses en plastique car ils peuvent constituer un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.



Ne laissez pas les jeunes enfants ou animaux domestiques s'approcher du fauteuil quand vous vous en servez.



Ne jamais laissez les jeunes enfants jouer ou utiliser le fauteuil en aucune circonstance.



La télécommande doit être débranchée et placée hors de portée des enfants quand vous n'utilisez pas le fauteuil.



Quand vous vous asseyez, ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil, qu'il soit en position assise ou relevée. Cela peut endommager votre fauteuil ou vous pourriez vous blesser.



Ne laissez personne s'asseoir sur vos genoux, sur le repose jambes ou les accoudoirs du fauteuil. Cela pourrait faire basculer le fauteuil et vous blesser et/ou endommager le fauteuil.



Ne jamais mettre vos doigts ou vos mains entre l'assise et les accoudoirs lorsque le fauteuil est en fonction et branché à l'alimentation électrique.



Ne pas essayer de récupérer un objet à l'intérieur ou sous le fauteuil avant d'avoir préalablement débranché le fauteuil de son alimentation électrique.



N'utilisez pas le fauteuil si une personne, un animal domestique ou toute autre objet pouvant contraindre le fonctionnement du fauteuil se trouve sous ou devant le repose-jambes et sous ou derrière le fauteuil.



Ne mettez pas vous-même, un enfant ou un animal domestique trop vers l'arrière du fauteuil, quand le dossier est incliné. Le fauteuil risque de basculer. Assurez-vous que le fauteuil est conçu parfaitement pour votre corpulence avant d'utiliser le fauteuil.



Ne fumez pas quand vous utilisez le fauteuil, que ce soit assis ou en position allongée.



Pour éviter tout risque électrique, n'immerger aucun des composants électriques du fauteuil dans aucun liquide. N'aspergez d'aucun liquide les composants électriques. Ne pas les ouvrir.



La garantie des composants électriques sera annulée s'ils ont été ouverts par une personne non habilitée par Medtrade.



Assurez-vous que le fauteuil est mis à une distance suffisante du mur (ou tout autre obstacle) pour permettre l'utilisation du fauteuil sans risque. La distance à respecter est propre à chaque fauteuil. Elle vous est donnée avec la brochure commerciale. Son non-respect peut abîmer le fauteuil et annuler la garantie.



N'utilisez aucune rallonge électrique pour brancher votre fauteuil. Assurez-vous que vos autres appareils électriques (ex. : radiateur électrique...) et leur raccordements électriques soient à distance suffisante pour que le mécanisme du fauteuil releveur ne soit pas en contact et ne crée un risque d'incendie ou ne vous blesse.



N'utilisez pas votre fauteuil ou sous 'emprise de « stupéfiants » ou si vous prenez des médicaments, qui peuvent altérer vos capacités mentales et physiques pour utiliser votre fauteuil en toute sécurité. Consultez votre médecin si votre traitement médical peut affecter vos facultés à utiliser votre fauteuil en toute sécurité.



Consultez votre médecin quant à l'utilisation de la position Trendelenbourg.



Si vous placez votre fauteuil au milieu d'une pièce, les personnes qui traversent la pièce sont susceptibles d'heurter le câble d'alimentation, de se blesser en tombant et/ou d'abîmer l'alimentation électrique. Une batterie Lithium peut être une solution pour éviter ce risque d'accident, ou positionnez le fauteuil près d'un mur à proximité d'une prise murale.



Des « fuites » des batteries de secours 9V peuvent endommager le transformateur. Inspecter périodiquement les 2 batteries et changez-les si besoin est. Lire plus loin les instructions dans ce manuel.



Si l'utilisateur du fauteuil est inconscient ou dort, et que la télécommande est actionnée par inadvertance, l'utilisateur pourrait glisser du fauteuil.



Si vous rencontrez un problème avec l'utilisation de votre fauteuil, arrêtez de l'utiliser avant d'avoir analysé et diagnostiqué le problème. Contactez le service après-vente du magasin chez qui vous avez acheté votre fauteuil.



Si votre poids excède la limite de poids autorisé pour votre fauteuil, cela peut provoquer une instabilité du fauteuil et faire basculer le fauteuil en risquant de vous blesser. Le poids maximal autorisé est indiqué dans la brochure commerciale.

Votre fauteuil releveur

COMPOSANTS DU FAUTEUIL


Les fauteuils sont équipés d'un châssis en métal, d'une structure en bois et de composants électriques. Ces composants varient selon le modèle et les composants électriques fonctionnent différemment selon les modèles.

TELECOMMANDE

Fait fonctionner le fauteuil via des boutons enfoncés manuellement par l'utilisateur.

COMPOSANTS

1. Dossier
2. Accoudoirs
3. Assise
4. Coussin d'assise continue
5. Repose-pieds

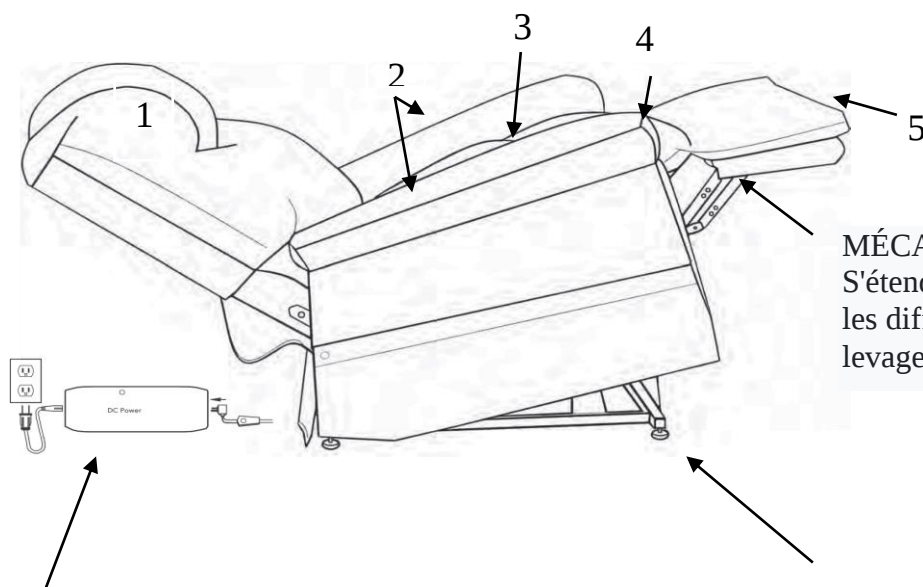

MÉCANISME À CISEAUX
S'étend/se rétracte pendant les différentes positions de levage/inclinaison.

TRANSFORMATEUR (source de courant externe)

Transformateur, cordon d'alimentation et câble moteur/transformateur. Permet au fauteuil de fonctionner en fournissant 12 V CC au boîtier de commande, aux moteurs et à la télécommande.

MÉCANISME DE LEVAGE, MÉCANISME D'INCLINAISON ET CHÂSSIS DU FAUTEUIL
Permet au fauteuil d'atteindre toutes les positions, par des mouvements mécaniques

PIEDS DE MISE A NIVEAU : (Réglage manuel)

Peut être ajusté vers le haut/bas pour stabiliser le fauteuil sur des surfaces inégales et sur différents poils de tapis.



Installation de votre fauteuil releveur

Afin de faciliter le transport et pour protéger votre fauteuil pendant les phases de manutention, votre fauteuil est livré dans un carton cubique avec le dossier démonté. Il est ainsi protégé des chocs éventuels. L'assemblage de votre fauteuil vous demandera quelques minutes, en suivant les étapes suivantes :




1. Retirez le transformateur de son emballage et insérez 2 piles alcalines 9 volts (non fournies) dans le transformateur. Détachez le câble d'alimentation, attaché avec un collier au vérin. Branchez le transformateur avec le câble d'alimentation. Placez le transformateur sur le sol derrière le fauteuil en faisant attention qu'il ne soit pas écrasé par le mécanisme du fauteuil.

Vue du dessus du transformateur

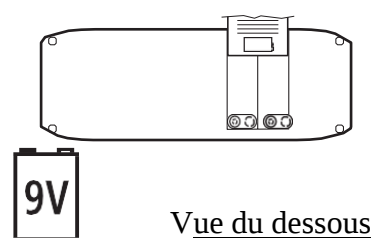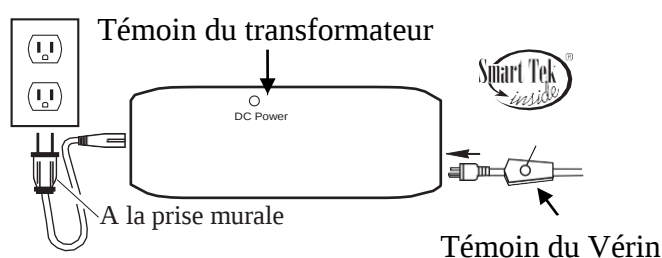

Vue du dessous

Insérez deux piles de « secours » de 9V à l'intérieur du transformateur ? En cas de coupure de courant, elles vous permettront de revenir en position assise (1 seul mouvement si les piles sont en bon état de fonctionnement).

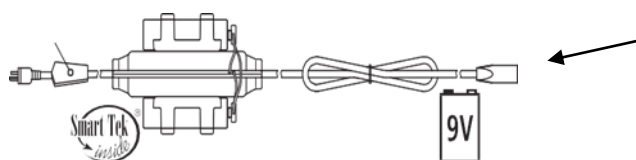

Remarque : selon votre modèle, votre fauteuil peut être équipé d'un système de secours additionnel.

2. Certains tapis (épais) peuvent gêner le bon fonctionnement de votre fauteuil. Assurez-vous que le repose-jambes ne frotte pas sur le tapis quand vous l'utilisez.
3. Installation du dossier : lire pages suivantes.
4. Assurez-vous que le sol soit « de niveau ». Sinon compensez le niveau à l'aide des pieds ajustables (réglage de la hauteur assuré par des patins antidérapants (ne marquant pas le sol) montés sur une tige fileté à visser ou dévisser). Un mauvais appui (calage) sur les pieds du fauteuil peut entraîner pendant son utilisation un bruit de craquement et/ou un mouvement *discontinu* et non régulier lors du fonctionnement des mécanismes.
5. Assurez-vous que le câble électrique (reliant le vérin au transformateur) ne soit pas pincé dans les articulations et le mécanisme du fauteuil.
6. Sécurisez la télécommande en accrochant son câble avec un crochet situé à l'extérieur de l'accoudoir droit. Le but étant que même si vous la laissez tomber, qu'elle ne touche pas le sol. Tout choc sur le sol peut endommager la télécommande.

Installation de votre fauteuil releveur

Selon votre modèle, le dossier peut être monté différemment.




- Avec des écrous sans vérin de dossier (fauteuil monomoteur)
- Avec fixation coulissante sans vérin de dossier (fauteuil monomoteur)
- Avec des écrous avec vérin de dossier (fauteuil bi-moteurs)
- Avec fixation coulissante avec vérin de dossier (fauteuil bi-moteurs)

Etape 1 : Raccordez en premier la télécommande au fauteuil (prise dans le fond de la poche latérale), puis raccordez le branchement du fauteuil (câble qui sort du fauteuil) au transformateur, puis branchez le transformateur à la prise de courant secteur.

Etape 2 : Appuyez sur la télécommande pour relever le repose jambe jusqu'à la position horizontale. Cela dégagera les pattes de fixation à l'arrière du fauteuil.





Etape 3 : Fixation du dossier

⇒ **Fixation du dossier avec des écrous**

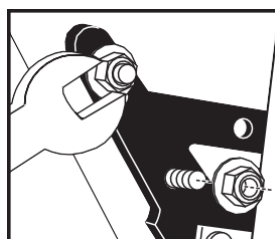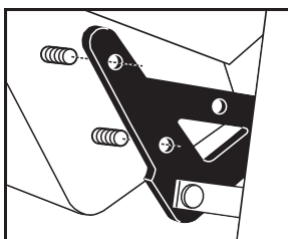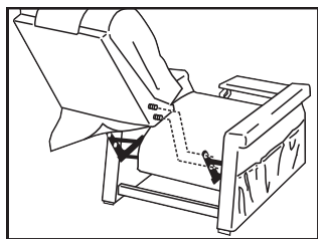

1. Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation pour faire coïncider les trous des supports avec les tiges filetées du dossier.
2. Vissez les écrous (fournis) et bien les serrer avec la clé (fournie).



⇒ **Fixation du dossier avec les fixations coulissantes**

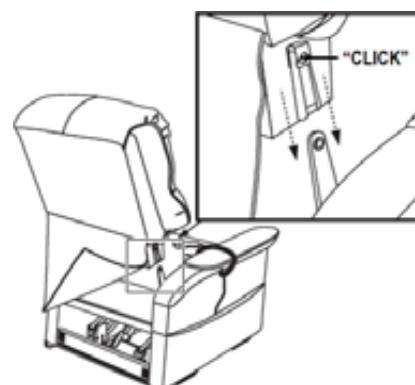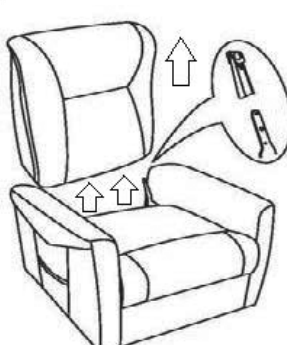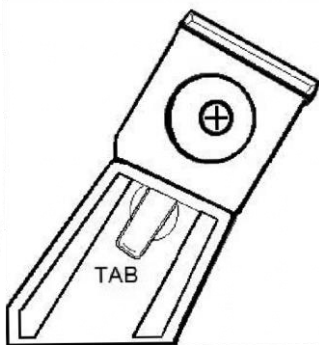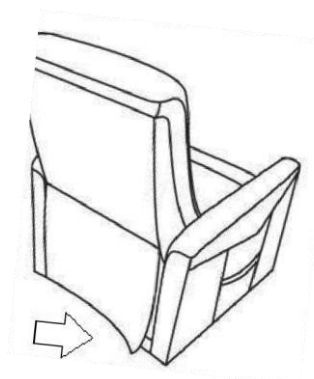

1. Alignez les deux supports, situés sur les côtés opposés du dossier, sous le tissu et le siège.
2. Poussez le dossier vers le bas pour le verrouiller en place. Remarque : un clic audible se fait entendre pour indiquer que les fixations coulissantes sont verrouillées.
3. Fixez le bas du dossier extérieur à la bande velcro de la barre transversale de l'accoudoir.

Etape 4 : Fixation du vérin de dossier (fauteuil bi-moteur)


Retirez la goupille de l'extrémité du vérin du dossier (vérin situé à l'arrière de l'assise, dont l'extrémité est libre). Faites coulisser la tête de fixation du vérin jusqu'à la barre de fixation du vérin sur le dossier (selon le schéma ci-dessous : pate de fixation du dossier à insérer au milieu du U formé par l'extrémité de la tête de vérin). Assemblez-les avec la goupille et sécurisez avec l'épingle de sécurité.

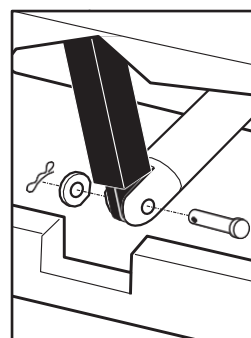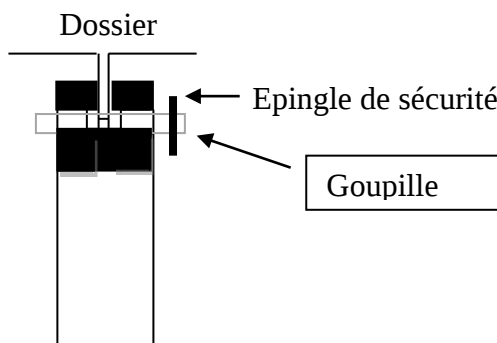

Etape 5 : Remettez le fauteuil en position assise à l'aide de la télécommande.

Etape 6 : Accrochez la jupe arrière du fauteuil grâce au velcro pour cacher le mécanisme du fauteuil.


Etape 7 : Placez votre fauteuil à l'endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale de 50 cm entre le mur et l'arrière de votre fauteuil.

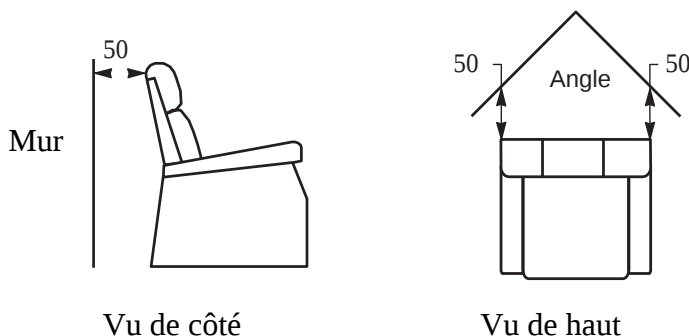

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de suivre ces différentes étapes de montage et vous souhaitons à présent de profiter pleinement du confort de votre fauteuil, pour lire, vous détendre, vous reposer ou apprécier votre série TV favorite.

Utilisation de votre fauteuil monomoteur

(Télécommande à 2 boutons pour tous les modèles à 1 moteur)

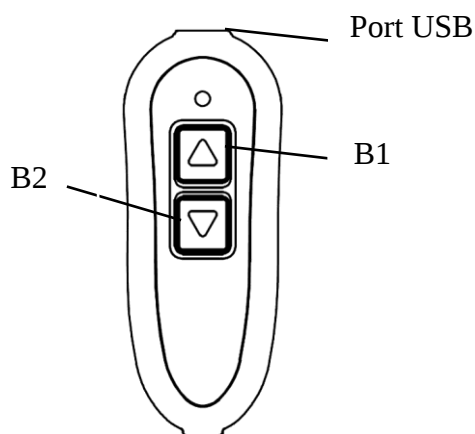

Utile :

La télécommande de fauteuil monomoteur est munie d'un port USB. Utilisez les appareils appropriés, type tablette ou téléphone. Référez-vous SVP aux recommandations de charge des fabricants de ces appareils avant tout branchement sur la télécommande. Golden Technologies exclut toute responsabilité pour tout type de dommages et/ou perte de données qui pourraient intervenir pendant un branchement au port USB de la télécommande de l'un de ces appareils électroniques.

1. **Pour passer de la position Relax à Assise ou de la position Assise à la position Releveur**, appuyez sur le bouton (B1) et maintenez appuyé ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la position souhaitée.
2. **Pour passer de la position Releveur à la position Assise ou de la position Assise à Relax** appuyez sur le bouton (B2) et maintenez appuyé, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la position souhaitée.
3. **S'installer dans le fauteuil (en position releveur)**, devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur le bouton (B1) et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. **Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil.** Appuyez sur le bouton (B2) pour faire descendre le fauteuil. Au fur et à mesure que l'assise descend, positionnez-vous dans le fauteuil pour être confortablement installé. Maintenez le bouton (B2) appuyé jusqu'à la position assise. Puis relâchez le bouton.
4. **Sortir du fauteuil (en position releveur)**, appuyez sur le bouton (B1) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez le bouton. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

Remarque : votre fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l'un des boutons de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est conçu de telle sorte qu'il s'arrête automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d'appuyer sur le bouton. Si vous avez passé la position souhaitée, sélectionner l'autre bouton pour revenir en arrière à la position voulue.

Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer

Utilisation de votre fauteuil bi-moteurs

Principe de fonctionnement d'un fauteuil releveur équipé de 2 moteurs :


Vous disposez d'une combinaison infinie de positions. Vous pouvez actionner le moteur du dossier et/ou le moteur du repose-jambes. Lorsque vous relevez le repose-jambes, avant qu'il n'atteigne la position horizontale, le fond de l'assise s'incline légèrement vers le bas pour une meilleure position dans le fauteuil afin d'éviter la position inconfortable en « équerre ». Dans ce cas de figure, le dossier, solidaire de l'arrière de l'assise, suit le mouvement tout en conservant le même angle d'inclinaison qu'il forme avec l'assise.

Nos fauteuils releveurs bi-moteurs peuvent être équipés de deux types de télécommandes, selon le modèle :

- **La télécommande Standard « 6 boutons »**
- **La télécommande préprogrammée « Autodrive »**

La télécommande Standard « 6 boutons » :

Cette télécommande équipe les fauteuils releveurs *CONFORT PREMIUM BI-MOTEURS*. Elle comprend 3 rangées de boutons. Une pour actionner en montée ou en descente le vérin du dossier. Une seconde rangée pour actionner le vérin du repose-jambes et la fonction releveur. La dernière rangée sert à la coordination et synchronisation des 2 moteurs ensemble agissant sur le fonctionnement du fauteuil comme s'il était équipé d'un seul moteur. Cette fonction simplifie et facilite l'utilisation de votre fauteuil releveur bi-moteurs.

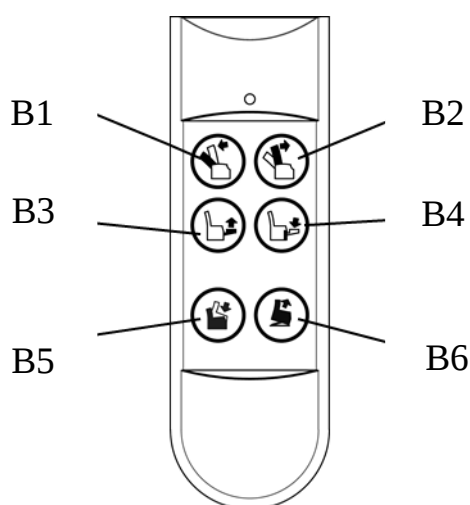

La touche **(B1)** permet d'incliner uniquement le dossier vers l'arrière.

La touche **(B2)** permet de ramener le dossier vers l'avant.

La touche **(B3)** permet de relever uniquement le repose-jambes.

La touche **(B4)** permet de baisser le repose-jambes.

La touche **(B5)** permet de ramener le fauteuil de la position Releveur à la position Assise, relax ou repos.

La touche **(B6)** permet de faire passer le fauteuil de la position repos, relax ou assise à la position Releveur.

1. **Pour incliner uniquement votre dossier**, appuyez sur le bouton **(B1)**
2. **Pour ramener votre dossier verticalement**, appuyez sur le bouton **(B2)**
3. **Pour lever uniquement le repose-jambes**, appuyez sur le bouton **(B3)**
4. **Pour baisser votre repose-jambes**, appuyez sur le bouton **(B4)**
5. **Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur**, appuyez sur le bouton **(B6)** et maintenez appuyé, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la position souhaitée.
6. **Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax**, appuyez sur le bouton **(B5)** et maintenez appuyé, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la position souhaitée.
7. **S'installer dans le fauteuil (en position releveur)**, devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur le bouton **(B6)** et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur

souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. **Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil.** Appuyez sur le bouton (B5) pour faire descendre le fauteuil. Au fur et à mesure que l'assise descend, positionnez-vous dans le fauteuil pour être confortablement installé. Maintenez le bouton (B5) appuyé jusqu'à la position assise. Puis relâchez le bouton.


8. **Sortir du fauteuil (en position releveur)**, appuyez sur le bouton (B6) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez le bouton. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assis (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrière du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer

La télécommande préprogrammée « AUTODRIVE » :

Cette télécommande est la toute dernière innovation pour les fauteuils releveurs bi-moteurs. Elle vous permet avec un seul bouton rapidement et très facilement de prendre une position préprogrammée : la position Zéro Gravité, la position pour regarder la télévision, dormir, s'asseoir tout en vous laissant la possibilité d'affiner chaque position à volonté. Elle équipe la plupart de nos modèles bi-moteurs.

- Les boutons RISE (B7) et RECLINE (B9) vous permettent de faire fonctionner votre fauteuil bi-moteurs comme un fauteuil mono moteur (avec une télécommande munie de 2 touches).
- Le bouton ZG (B6) met le fauteuil dans la position Zéro Gravité.
- Le bouton TV (B8) met le fauteuil dans la position Télévision
- Le bouton HOME (B5) met le fauteuil dans la position assise.
- Le bouton SLEEP (B10) met le fauteuil dans une position idéale pour dormir.
- Le bouton (M) sert à reprogrammer les différentes positions mémorisées.
- Les boutons ZG, TV, HOME et SLEEP correspondent à des positions préprogrammées par Golden Technologies. Seuls ZG, TV et SLEEP peuvent être modifiées.
- Les boutons (B1), (B2) (B3) et (B4) qui entourent le schéma d'un fauteuil permettent d'ajuster l'inclinaison du dossier ou du repose-jambes ou de personnaliser les touches programmables.

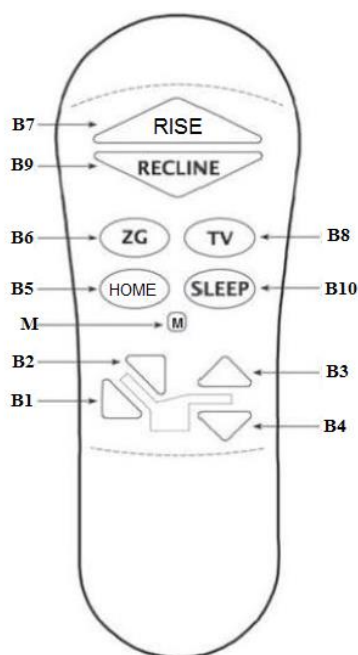

1. S'asseoir dans votre fauteuil en utilisant la fonction releveur.

Devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur le bouton (B7) et levez le fauteuil à la hauteur qui vous convient pour vous asseoir. La hauteur varie d'une personne à l'autre en fonction de sa morphologie. Levez l'assise à une hauteur suffisamment haute pour ne pas vous laisser tomber dans le fauteuil. **Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager votre fauteuil.** Pressez ensuite le bouton (B5). Pendant que le fauteuil descend, ajustez votre position pour être confortablement installé(e). Pressez le bouton jusqu'à ce que le fauteuil soit en position assise (les pieds du fauteuil reposant sur le sol), puis relâchez le bouton. Vous pouvez également appuyer sur les boutons (B6, B8, B9, B10) et le fauteuil prendra ces différentes positions.

2. **Sortir de votre fauteuil.** Appuyez sur le bouton (B7) et levez le fauteuil jusqu'à la hauteur qui vous permet de vous lever facilement. Relâchez le bouton. Une fois debout, ramenez le fauteuil dans sa position assise grâce au bouton (B5) (les pieds du fauteuil reposant sur le sol) pour qu'un enfant, un animal de compagnie, ou un objet ne puisse se glisser sous le fauteuil.

Ajustez votre position

1. **Pour incliner le dossier** : appuyez sur le bouton **(B1)** et maintenez la pression jusqu'à ce que le dossier atteigne la position désirée. Puis relâchez le bouton.
3. **Pour ramener le dossier en position relevée** : appuyez sur le bouton **(B2)** et maintenez la pression jusqu'à ce que le dossier atteigne la position désirée. Puis relâchez le bouton.
4. **Pour relever le repose-jambes** : appuyez sur le bouton **(B3)** et maintenez la pression jusqu'à ce que le repose-jambes atteigne la position désirée. Puis relâchez le bouton.
5. **Pour baisser le repose-jambes** : appuyez sur le bouton **(B4)** et maintenez la pression jusqu'à ce que le repose-jambes soit rentré. Puis relâchez le bouton.

Remarque : les moteurs sont conçus pour s'arrêter quand ils ont atteint leur « course » maximale (dans un sens ou dans un autre) quand bien même vous continuez à presser un bouton. Si vous avez dépassé la position désirée, appuyez sur la touche qui vous permettra de revenir en arrière. Vous pouvez répéter cela autant de fois que vous le souhaitez.

Remarque : les boutons sont rétroéclairés. Quand vous appuyez sur une touche, l'éclairage devient plus intensif.

Mise en service de la télécommande « AUTODRIVE »

Avant toute utilisation du fauteuil, il est recommandé d'effectuer la procédure suivante :
(Ne pas tenir compte d'une éventuelle incohérence de fonctionnement pendant cette procédure).

1. Appuyer sur la touche RISE **(B7)** en continu jusqu'à arrêt complet du fauteuil.
2. Appuyer sur la touche RECLINE **(B9)** en continu jusqu'à l'arrêt complet du fauteuil.

Vous pouvez maintenant utiliser votre télécommande

Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer**Reprogrammer les positions des boutons TV (télévision), ZG (zéro gravité) et SLEEP (dormir).**

1. Mettre le fauteuil dans une des 3 positions programmables TV, ZG ou SLEEP.
2. Régler et ajuster cette position comme vous le souhaitez.
3. Appuyer sur le bouton **(M)** 5 secondes et attendre que la télécommande clignote.
4. Une fois qu'elle clignote, appuyer sur un des 3 boutons TV, ZG ou SLEEP pour enregistrer votre nouvelle position de fauteuil.

Vous pouvez le faire aussi souvent que vous le souhaitez pour vous faciliter l'utilisation de votre fauteuil.

Réinitialiser les réglages usine des touches TV, ZG et SLEEP.

Vous souhaitez annuler toutes vos programmations des boutons TV, ZG ou SLEEP, et revenir aux réglages d'usine.

1. Appuyer sur le bouton **(M)** pendant 5 secondes et attendre que la télécommande clignote.
2. Appuyer sur les boutons **(B1)** puis **(B4)**.

Pour désactiver complètement la télécommande

Cette fonction vous permet de désactiver et réactiver **toutes** les touches de la télécommande.

1. Pour désactiver, appuyez sur le bouton **(M)** (le rétroéclairage disparaît - maintenir appuyé 4 secondes- le rétroéclairage clignote).
2. Appuyez sur la séquence de touches **(B1)** puis **(B2)** puis **(B10)** SLEEP (le clignotement cesse – rétroéclairage de nouveau fixe – « condamnation » enregistrée).
3. Pour réactiver la télécommande, répétez les étapes 1 et 2.

Pour activer la fonction extinction du rétroéclairage

Fonction recommandée si fauteuil équipé de l'option fonctionnement sur batterie

Cette fonction éteint automatiquement le rétro-éclairage de la commande manuelle après une période d'inactivité (environ 15 secondes).


1. Pour activer, appuyez sur le bouton **(M)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter.
2. Appuyez sur la séquence de touches : **(B1)** puis **(B2)** puis **(B5)** HOME
Pour désactiver la fonction "Extinction rétroéclairage", répétez les étapes 1 et 2.

Remarque : votre fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l'un des boutons de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est conçu de telle sorte qu'il s'arrête automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d'appuyer sur le bouton. Si vous avez passé la position souhaitée, sélectionner l'autre bouton pour revenir en « arrière » à la position voulue.

Utilisation de votre fauteuil mono moteur avec fonction bascule « *TWILIGHT* »

(Fauteuil 1+1 moteurs : 1 pour la fonction releveur, 1 pour la bascule)

1. **Pour incliner votre dossier**, appuyez sur le bouton (B2), maintenez appuyé jusqu'à la position désirée, puis relâchez le bouton.
2. **Pour retourner à la position Assise**, appuyez sur le bouton (B1), maintenez appuyé jusqu'à la position assise, puis relâchez le bouton.
3. **Pour lever le fauteuil avec la fonction bascule *Twilight***, appuyez sur le bouton (B4), maintenez appuyé jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le bouton.
4. **Pour descendre le fauteuil de sa fonction bascule *Twilight***, appuyez sur le bouton (B3), maintenez appuyé jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le bouton.
5. **Pour mettre le fauteuil en position Releveur**, appuyez sur le bouton (B1), maintenez appuyé jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le bouton.
6. **Pour retourner en position Assise**, appuyez sur le bouton (B2), maintenez appuyé jusqu'à la position assise, puis relâchez le bouton.
7. **Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur**, appuyez sur le bouton (B1) et maintenez appuyé ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se lever. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la hauteur souhaitée.
8. **Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax**, appuyez sur le bouton (B2) et maintenez appuyé, le fauteuil passera par la position Assise et commencera à s'incliner. Relâchez le bouton quand vous avez atteint la position souhaitée.
9. **S'installer dans le fauteuil (en position releveur)**, devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur le bouton (B1) et relever votre fauteuil jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d'une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d'assise doit venir soutenir les fessiers. **Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez d'endommager votre fauteuil.** Appuyez ensuite sur le bouton (B2) pour faire descendre le fauteuil. Au fur et à mesure que l'assise descend, positionnez-vous dans le fauteuil pour être confortablement installé. Maintenez le bouton (B2) appuyé jusqu'à la position assise. Puis relâchez le bouton.
10. **Sortir du fauteuil (en position releveur)**, appuyez sur le bouton (B1) et relevez votre fauteuil jusqu'à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez le bouton. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l'horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu'aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

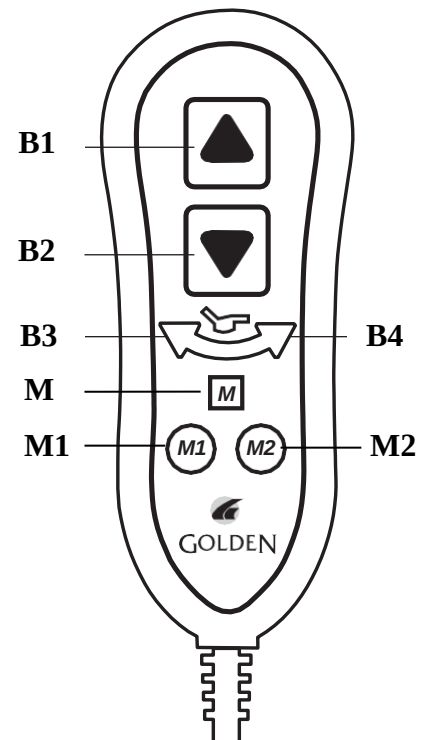

Remarque : votre fauteuil Golden peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l'un des boutons de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est conçu de telle sorte qu'il s'arrête automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d'appuyer sur le bouton. Si vous avez passé la position souhaitée, sélectionner l'autre bouton pour revenir en « arrière » à la position voulue.

Programmer les boutons Mémoire (M1) et (M2)

Ces 2 boutons vous permettent d'enregistrer vos 2 positions préférées.

Vous pouvez les reprogrammer très facilement aussi souvent que vous le souhaitez.

1. Mettez le fauteuil dans la position que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez et maintenez appuyé le bouton (M).
- (quand vous appuyez, l'éclairage de la télécommande s'éteint)
3. Au bout de 3 secondes la télécommande clignote.
4. Vous avez alors 5 secondes pour enregistrer la position en appuyant sur la touche (M1) ou (M2).
Le clignotement s'arrête vous indiquant que la position a bien été enregistrée.

Si vous n'avez pas appuyé dans les 5 secondes sur le bouton (M1) ou (M2), la séquence de programmation s'annule et vous devez recommencer le processus des étapes 2 à 4.

Pour réinitialiser les 2 boutons programmés (M1) et (M2) aux réglages usine

1. Appuyez et maintenez appuyé sur le bouton (B2) jusqu'à l'arrêt du vérin.
2. Appuyez et maintenez appuyé sur le bouton (B3) jusqu'à l'arrêt du vérin.
3. Appuyez et maintenez appuyé sur les boutons (B2) et (B3) en même temps jusqu'à ce que la télécommande s'allume de nouveau. L'opération est terminée.

Remarque : le fauteuil doit être en position assise pour réinitialiser la télécommande.

Releveur bi-moteurs Golden avec fonction Twilight

(Technologie exclusive de Golden Technologies)


TWILIGHT



Position TV



Position TV avec Twilight



Position Repos avec Twilight



Position Zéro Gravité (ZG)




Position Zéro Gravité + avec Twilight

Les accoudoirs ont été retirés des croquis pour simplifier la présentation des différentes positions.

Utilisation de votre fauteuil bi-moteurs avec fonction bascule « *TWILIGHT* »

(Fauteuil 2+1 moteurs : 2 pour les fonctions du releveur, 1 pour la bascule)

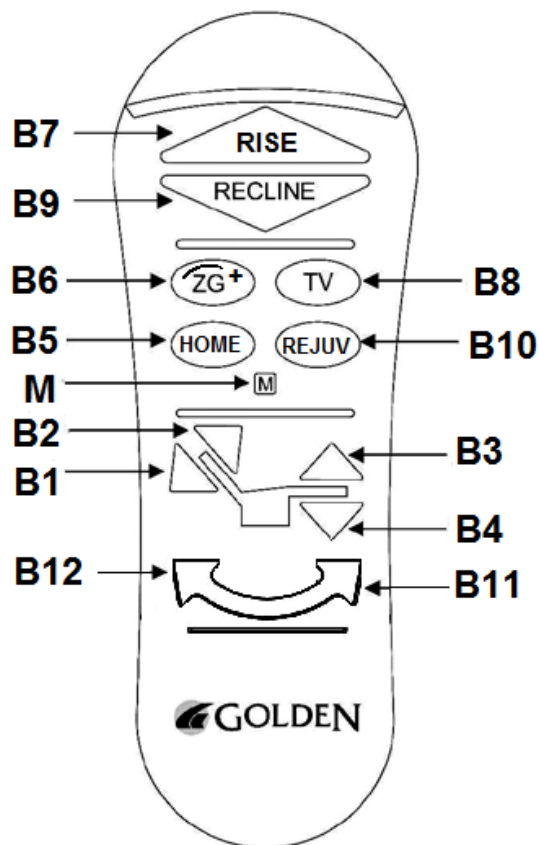

- Les boutons RISE (**B7**) et RECLINE (**B9**) vous permettent de faire fonctionner votre fauteuil bi-moteurs comme un fauteuil mono moteur (avec une télécommande munie de 2 touches).
- Le bouton ZG⁺ (**B6**) offre une sensation d'apesanteur combinée au mouvement d'inclinaison du berceau
- Le bouton TV (**B8**) met le fauteuil dans la position Télévision
- Le bouton HOME (**B5**) met le fauteuil dans la position assise.
- Le bouton REJUV (**B10**) permet de surélever confortablement pieds et les jambes pendant une longue période de temps.
- Le bouton (**M**) sert à reprogrammer les différentes positions mémorisées.
- Les boutons ZG⁺, TV, HOME et REJUV correspondent à des positions préprogrammées par Golden Technologies. Seuls ZG⁺, TV et REJUV peuvent être modifiées.
- Le bouton (**B11**) lève l'avant du fauteuil jusqu'à 30 ° au maximum.
- Le bouton (**B12**) redescend l'avant du fauteuil jusqu'au sol.
- Les boutons (**B1**), (**B2**) (**B3**) et (**B4**) qui entourent le schéma d'un fauteuil permettent d'ajuster l'inclinaison du dossier ou du repose-jambes ou de personnaliser les touches programmables

1. **S'asseoir dans votre fauteuil en utilisant la fonction releveur.** devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur le bouton **(B7)** et levez le fauteuil à la hauteur qui vous convient pour vous asseoir. La hauteur varie d'une personne à l'autre en fonction de sa morphologie. Levez l'assise à une hauteur suffisamment haute pour ne pas vous laisser tomber dans le fauteuil. **Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager votre fauteuil.** Pressez ensuite le bouton **(B9)**. Pendant que le fauteuil descend, ajustez votre position pour être confortablement installé(e). Pressez le bouton jusqu'à ce que le fauteuil soit en position assise (les pieds du fauteuil reposant sur le sol), puis relâchez le bouton.
2. **Sortir de votre fauteuil.** Appuyez sur le bouton **(B7)** et levez le fauteuil jusqu'à la hauteur qui vous permet de vous lever facilement. Relâchez le bouton. Une fois debout, ramenez le fauteuil dans sa position assise grâce au bouton **(B9)** (les pieds du fauteuil reposant sur le sol) pour qu'un enfant, un animal de compagnie, ou un objet ne puisse se glisser sous le fauteuil.
3. **Pour lever le fauteuil avec la fonction bascule *Twilight*,** appuyez sur le bouton **(B11)**, maintenez appuyé jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le bouton.
4. **Pour descendre le fauteuil de sa fonction bascule *Twilight*,** appuyez sur le bouton **(B12)**, maintenez appuyé jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le bouton

Ajustez votre position

5. **Pour incliner votre dossier,** appuyez sur le bouton **(B1)**, et maintenez appuyé jusqu'à la position désirée, puis relâchez le bouton.
6. **Pour redresser votre dossier,** appuyez sur le bouton **(B2)**, et maintenez appuyé jusqu'à la position désirée, puis relâchez le bouton.
7. **Pour relever le repose-jambes,** appuyez sur le bouton **(B3)**, et maintenez appuyé jusqu'à la position désirée, puis relâchez le bouton.
8. **Pour baisser le repose-jambes,** appuyez sur le bouton **(B4)**, et maintenez appuyé jusqu'à la position désirée, puis relâchez le bouton.

Mise en service et dépannage de la télécommande (calibration)

Vous devez effectuer la procédure d'étalonnage suivante avant la 1^{ère} utilisation du fauteuil. Le système de contrôle s'appuie sur les capteurs et la mémoire pour fonctionner correctement. L'exécution de cette procédure garantit le bon fonctionnement de votre fauteuil.

1. En vous tenant debout à côté de votre fauteuil, appuyez et maintenez simultanément les 3 boutons Suivants : **(B1) + (B3) + (B12)** jusqu'à ce que le fauteuil cesse de fonctionner.
2. Continuez à maintenir les 3 boutons simultanément pendant 3 secondes supplémentaires.

Une fois l'étalonnage terminé, vous pouvez utiliser votre fauteuil.

Dépannage

ATTENTION, de temps en temps, le système de contrôle peut avoir besoin d'être recalibré. Cela peut être dû à des circonstances anormales telles que la déconnexion brusque de l'alimentation, des surtensions ou des pannes de courant. Si le mouvement du fauteuil n'est pas correct, le recalibrage du système peut résoudre le problème.

Pour reprogrammer les positions des boutons ZG⁺ (B6), TV (B8) et REJUV (B10)

Si vous trouvez une position qui vous convient mieux que les positions préprogrammées, vous pouvez sauvegarder cette position sur l'une des positions préprogrammées. Vous pouvez enregistrer cette position à l'aide de l'une des touches préprogrammées.

1. Appuyez sur un des 3 boutons (**B6** ou **B8** ou **B10**) jusqu'à l'arrêt du fauteuil.
2. Ajustez la position à l'aide des 4 boutons (**B1**, **B2**, **B3**, **B4**) selon vos souhaits.
3. Une fois que vous êtes dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton (**M**). La télécommande s'éteint puis clignote une fois. Vous avez 5 secondes pour appuyer sur le bouton que vous avez choisi à l'étape 1. (**B6** ou **B8** ou **B10**) pour enregistrer la nouvelle position. La télécommande arrête de clignoter vous indiquant que la position a été enregistrée.

Si vous n'avez pas appuyé dans les 5 secondes sur un des 3 boutons (ou pas appuyé sur le bon bouton) la séquence de programmation est annulée et vous devez recommencer les étapes 1 à 3.

Vous pouvez reprogrammer ces 3 positions aussi souvent que vous le souhaitez.

Réinitialiser les réglages usine des touches TV, ZG et SLEEP.

Vous souhaitez annuler toutes vos programmations des boutons TV, ZG ou SLEEP, et revenir aux réglages d'usine.

1. Appuyer sur le bouton (**M**) pendant 5 secondes et attendre que la télécommande clignote.
2. Appuyer sur les boutons (**B1**) puis (**B4**).

Pour désactiver complètement la télécommande

Cette fonction vous permet de désactiver et réactiver **toutes** les touches de la télécommande.

1. Pour désactiver, appuyez sur le bouton (**M**) (le rétroéclairage disparaît - maintenir appuyé 4 secondes- le rétroéclairage clignote).
2. Appuyez sur la séquence de touches (**B1**) puis (**B2**) puis SLEEP (**B10**) (le clignotement cesse – rétroéclairage de nouveau fixe – « condamnation » enregistrée).
3. Pour réactiver la télécommande, répétez les étapes 1 et 2.


Pour activer la fonction extinction du rétroéclairage

1. Pour activer, appuyez sur le bouton (**M**) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter.
2. Appuyez sur la séquence de touches : (**B1**) puis (**B2**) puis HOME (**B5**)
Pour désactiver la fonction "Extinction rétroéclairage", répétez les étapes 1 et 2.

Remarque : votre fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l'un des boutons de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est conçu de telle sorte qu'il s'arrête automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d'appuyer sur le bouton. Si vous avez passé la position souhaitée, sélectionner l'autre bouton pour revenir en « arrière » à la position voulue.

Utilisation de la fonction « massant & chauffant »

(si cette option est installée sur votre fauteuil)

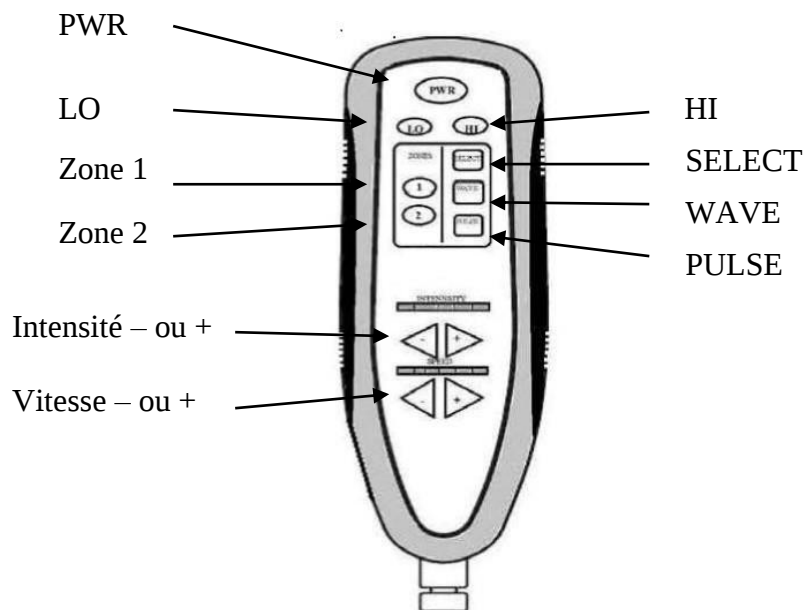

1. **Pour activer ou désactiver la fonction massage, appuyez sur le bouton (PWR).**
Vous pouvez également activer la fonction en appuyant sur les boutons (1) et (2) de sélection de la zone de massage.
2. **Choisir la durée du massage :**
Une seule pression sur **(PWR)**, le bouton prend la couleur verte et la fonction massage dure 15 minutes.
Une pression longue sur **(PWR)**, le bouton prend la couleur ambrée et la fonction massage dure 30 minutes.
Pour redémarrer la fonction massage après l'arrêt automatique de la minuterie (15 ou 30 minutes), appuyez sur le bouton **(PWR)** ou sur un des boutons de sélection **(1)** et **(2)** de sélection de zone.
3. **Deux intensités de chauffage sont disponibles : (LO) - chaleur douce et (HI) - chaleur soutenue.**
Pour activer ou désactiver la fonction chauffante, appuyez sur l'un des 2 boutons (LO) ou (HI). Le chauffage s'arrête après 30 minutes d'utilisation.
4. **Massage en continu.** Les boutons **(SELECT)** et de zone **(1)** et **(2)** vous permettent de choisir pour un massage en continu : **(1)** pour le bas du dos et **(2)** pour l'assise.
5. **Massage cyclique par « vagues ».** Appuyez sur le bouton **(WAVE)**. Vous pouvez choisir en plus la zone de massage en sélectionnant avec les boutons **(1)** et **(2)** : **(1)** pour le bas du dos et **(2)** pour l'assise.
6. **Massage par pulsations en alternance.** Appuyez sur le bouton **(PULSE)**. Vous pouvez choisir en plus la zone de massage en sélectionnant avec les boutons **(1)** et **(2)** : **(1)** pour le bas du dos et **(2)** pour l'assise.
7. **Les boutons « INTENSITY » (-) et (+) servent à doser l'intensité du massage.** Appuyez sur le bouton (-) ou (+) pour diminuer ou augmenter l'intensité du massage, quel que soit le type de massage.
8. **Les boutons « SPEED » (-) et (+) servent à réguler la fréquence du massage.** Appuyez sur le bouton (-) ou (+) pour diminuer ou augmenter la fréquence en mode **(PULSE)** ou la rapidité des cycles en mode **(WAVE)**.

Système de sécurité

Votre fauteuil releveur Golden est équipé d'un système de sécurité de 2 piles standard de 9V à insérer dans le transformateur. Ce système vous permet de ramener votre fauteuil en position Assise en cas de panne de courant secteur. Ces piles suffisent à ramener votre fauteuil de la position Releveur ou Repos à la position Assise. Ces piles n'ont pas suffisamment d'autonomie, d'énergie ou de puissance pour faire fonctionner votre fauteuil de façon continue, régulière et prolongée en cas d'absence d'alimentation électrique (220V) délivrée par le courant secteur. Les piles doivent être changées après chaque utilisation. Ces piles doivent être changées tous les ans car elles se déchargent même si vous ne vous en êtes pas servi. (Piles non fournies)

Témoin de fonctionnement

Votre fauteuil est équipé d'un témoin lumineux pour la télécommande 1 moteur et 2 moteurs "Standard", et de touches rétroéclairées pour les télécommandes « Autodrive » et « Twilight ». Ce témoin s'allume ou l'éclairage des touches rétroéclairées s'intensifie lorsque vous appuyez sur un des boutons de la télécommande (vous indiquant ainsi que votre télécommande est branchée et fonctionne).

Votre fauteuil Golden est également pourvu de deux témoins lumineux sur le transformateur et sur le cordon électrique qui relie le moteur au transformateur. Ces témoins sont allumés en permanence (vert) lorsque votre fauteuil est branché sur le courant (220V).

Ces témoins constituent la Technologie « Smartek ».



Lorsque le témoin lumineux du câble du transfo est éteint, votre fauteuil ne fonctionne pas ; vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous que tous les branchements sont correctement connectés et qu'il y a du courant en sortie de prise murale dans laquelle le fauteuil est branché. (branchez par exemple une lampe de chevet et vérifiez son fonctionnement)

Ces témoins lumineux d'auto diagnostic vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (transformateur grillé suite à une surtension après un orage par exemple). Ces témoins peuvent vous servir à diagnostiquer un éventuel dysfonctionnement. En cas de besoin, ils permettront également à votre revendeur d'identifier un type de panne, la ou les pièces défectueuses.

Si votre fauteuil rencontre un problème de fonctionnement, cessez d'utiliser votre fauteuil avant d'avoir décelé d'où vient le problème (Problème de transformateur, de télécommande, de cordons ou de raccordements électriques, problème de mécanisme, ou de vérin...).

Contactez votre revendeur chez qui vous avez acheté votre fauteuil. Il sera capable de résoudre le problème, d'intervenir et d'effectuer les changements si nécessaire.

Il vous posera quelques questions simples à propos de votre fauteuil, tel que le modèle et le numéro de série. Vous trouverez le modèle et le numéro de série de votre fauteuil sur votre facture ou sur votre fauteuil au dos de la télécommande et à l'arrière de votre fauteuil sur le châssis.

Il vous demandera si tous les témoins lumineux sont allumés (vert) ou s'il y en a un qui ne s'allume pas. Vérifiez que les branchements sont correctement réalisés.

Entretien et Maintenance

Votre fauteuil nécessite quelques contrôles épisodiquement. Vous pouvez réaliser vous-même certains de ces contrôles et demander à votre revendeur de vous assister pour les autres. En suivant ces recommandations, vous vous assurez que vous pourrez utiliser votre fauteuil pendant des années sans problème. Si vous avez des questions relatives à cet entretien, contactez votre Magasin.

- Avant de nettoyer le revêtement de votre fauteuil, consultez votre Magasin pour utiliser les substances adéquates et la méthode de nettoyage préconisée.
- Gardez au sec, à l'abri de l'humidité et évitez toute projection de liquide. **Votre fauteuil est à usage intérieur exclusivement.**
- Inspectez régulièrement les câbles pour vous assurer qu'ils ne soient pas endommagés, dénudés ou déconnectés. Si un des câbles est abîmé, débranchez votre fauteuil de la prise secteur et contactez votre Magasin.
- Inspectez les différentes attaches (qui fixent les câbles) régulièrement pour vous assurer qu'elles soient bien serrées et pas endommagées. En cas de problème, débranchez votre fauteuil de la prise secteur et contactez votre Magasin.
- Changez les deux piles 9V (à l'intérieur du transformateur) après chaque utilisation (en cas de coupure de courant). Changez ces piles tous les ans même si elles n'ont pas servi. Elles se déchargent même si vous ne vous en êtes pas servi.

Garanties

Golden, au travers de son distributeur **Medtrade**, garantit le 1^{er} utilisateur du fauteuil contre les défauts des éléments électriques ou de fabrication de la façon listée ci-dessous. Golden choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées (lire ci-dessous). Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de **Medtrade**.

Garantie 10 ans

Golden garantit 10 ans le châssis fixe métallique du fauteuil releveur. La main d'œuvre est comprise dans la limite de 2 ans. La garantie ne prend pas en compte les frais de transport (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic.

Garantie limitée à 5 ans

Golden garantit 5 ans le ou les moteurs. **La garantie** ne prend pas en compte les frais de transport (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic.

Garantie limitée à 3 ans

Golden garantit 3 ans le châssis en bois. **La garantie** ne prend pas en compte les frais de transport (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic.

Garantie limitée à 2 ans

Golden garantit 2 ans le transformateur et le mécanisme du fauteuil. **La garantie** ne prend pas en compte les frais de transport (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil (ou pièces défectueuses) et établir un diagnostic.

Golden garantit 2 ans la télécommande. **La garantie** ne prend pas en compte les frais de transport (de la télécommande défectueuse) ou les dépenses engagées pour inspecter la télécommande et établir un diagnostic.

CES GARANTIES S'APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.

A titre d'exemple, la garantie ne s'applique pas :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements tissus, velours...
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées
- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol, un crochet est prévu pour éviter cette situation)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre)
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil
- Lorsque le fauteuil est utilisé au delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale)
- Pour couvrir les coûts de visites inutiles à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défectueuse, informations- renseignements sur le produit)

Garantie de 5 ans sur le revêtement *Brisa* du fabricant Japonais **Ultrafabrics**



La société Medtrade garantit le revêtement Brisa contre tout vice de matériau ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est non transférable et est limitée à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les réclamations pour des conditions ou des dommages causés par un usage abusif, des accidents, une mauvaise utilisation, une négligence ou un manque de soin dans le nettoyage et l'entretien du tissu. Cette garantie ne couvre pas non plus les réclamations pour des éraflures, égratignures, déchirures et usure excessive ou abrasive et ne couvre pas les réclamations pour des dommages dus à une réparation, à une altération ou à une modification du produit par une personne autre que Medtrade, à moins que cette réparation, cette altération ou modification est autorisée par écrit par Medtrade.

Informations à conserver

Ces informations seront utiles si vous devez faire intervenir une personne ou sur votre fauteuil, ou s'il vous faut remplacer une pièce.

- Date d'achat :/...../ 20.....
- Modèle :
- Numéro de série : OS2.....
- Coordonnées du Magasin qui vous a vendu le fauteuil :

.....



ATTENTION



Ne laissez pas les enfants jouer avec le fauteuil.

Le repose-jambes se plie en se referment, un enfant pourrait se blesser.

Gardez toujours le fauteuil en position assise quand vous ne l'utilisez pas. Gardez mains et pieds en dehors du mécanisme.

Seul son utilisateur habituel devrait l'utiliser.