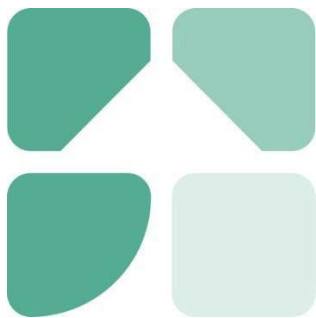


Manuel d'utilisation pour le professionnel de santé (PS)



Un traitement personnalisé, avec une meilleure compréhension et une implication accrue dans le parcours de soins.

Version de l'application: 2.1.0 et postérieure

Manual version : 17.1

Données du manuel de publication: 02/12/2025

Données du manuel de publication: <https://moveup.talentlms.com/index>

Table des matières

Table des matières	2
DESCRIPTION DU PRODUIT	3
<i>Usage prévu</i>	<i>3</i>
<i>Utilisateurs visés</i>	<i>4</i>
<i>Population cible / indication d'utilisation</i>	<i>5</i>
<i>Affirmation</i>	<i>5</i>
<i>moveUP app & devices</i>	<i>5</i>
<i>Avertissements et précautions</i>	<i>6</i>
<i>Contre-indications et effets secondaires potentiels</i>	<i>7</i>
<i>Notification des incidents graves</i>	<i>7</i>
<i>Contact corporel humain</i>	<i>8</i>
<i>Accessoires/produits utilisés en combinaison</i>	<i>8</i>
<i>Durée de vie de l'appareil</i>	<i>8</i>
<i>Détails de l'entreprise</i>	<i>9</i>
Application patient	10
Module médical	10
<i>INTÉGRATION DES PATIENTS</i>	<i>10</i>
<i>FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ</i>	<i>13</i>
<i>FONCTIONS DU PLAN DE SOINS DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ</i>	<i>20</i>
MODULE BIEN-ÊTRE	24
<i>ACTIVATION DU MODULE BIEN-ÊTRE</i>	<i>24</i>
<i>APERÇU DU MODULE BIEN-ÊTRE</i>	<i>25</i>
<i>Aperçu du module bien-être</i>	<i>26</i>
<i>Rapport de bien-être</i>	<i>26</i>

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lisez attentivement toutes les informations et précautions contenues dans ce manuel. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement, les écrans et les limitations de l'application moveUP avant d'utiliser le service. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter moveUP.

Pour des raisons de sécurité, moveUP recommande à son utilisateur de lire attentivement et de comprendre le manuel des appareils utilisés en lien avec l'application moveUP.

Durant toute la durée de l'utilisation du service, un support technique et un soutien thérapeutique sont à votre disposition. En cas de problème technique ou de défaillance avec l'application, vous pourrez contacter l'équipe moveUP via la messagerie intégrée à l'application, par téléphone ou par e-mail.

Usage prévu

Pour les prestataires de soins de santé

Pour les prestataires de soins de santé, moveUP assure une prise en charge clinique efficace des pathologies et des traitements. Grâce à l'utilisation de moveUP, le personnel soignant et l'équipe de soins reçoivent des informations précieuses sur l'état du patient et son évolution.

Pour les patients

Pour les patients, moveUP fournit des informations et des instructions personnalisées pour les aider à gérer leurs symptômes et à progresser dans leur rééducation. L'intensité du suivi est adaptée en fonction des besoins des patients et du moment où ils se trouvent dans leur trajet:

- moveUP **COMPANION** = surveillance et information, pas de suivi actif
 - moveUP companion offre des informations ciblées et des rapports d'évolution aux patients. Leur équipe de soins tient compte des rapports d'évolution pour la suite de leur rétablissement, le cas échéant.
- moveUP **COACH** = suivi actif par l'équipe de soins de santé
 - moveUP coach fournit des informations ciblées et des rapports d'évolution aux patients. Leur équipe de soins de santé est plus activement impliquée et prend en compte les rapports d'évolution. Elle peut fournir des conseils et des suggestions d'exercices par le biais de la plateforme numérique.
- moveUP **THERAPY** = suivi actif par l'équipe de soins, avec un protocole de soins validé basé sur des données
 - La thérapie moveUP offre un protocole de soins validé basé sur des données avec certaines catégories et niveaux d'exercices et d'activités, spécifiquement ciblés sur le patient individuel. Leur équipe de soins peut adapter manuellement le

protocole validé basé sur des données en cas de besoin. Les patients peuvent se réadapter complètement avec moveUP sans quitter leur environnement domestique.

Une fonctionnalité optionnelle peut être activée : l'interopérabilité avec un dispositif médical de classe IIa à mouvement passif continu (CPM).

Pour les patients souffrant du genou ou de la hanche qui utilisent un dispositif médical CPM de classe IIa, moveUP peut interagir avec le logiciel CPM de classe IIa. moveUP agit comme un facilitateur pour attribuer facilement à un patient un protocole d'exercice CPM désigné et choisi par un médecin et pour afficher les exercices CPM effectués dans le tableau de bord médical.

Utilisateurs visés

moveUP est destiné à être utilisé par les patients et les prestataires de soins de santé.

Patient

Le patient est le principal utilisateur de l'application mobile et du site web du patient. Les patients utilisateurs doivent être alertes, mentalement compétents et capables d'utiliser une tablette/un smartphone et un tracker d'activité.

Inclusion:

- Âge:
 - minimum: 18 ans,
 - maximum: sans limite
- Pids: Sans objet
- Santé et condition physique: capable d'effectuer les activités de la vie quotidienne
- Langue: maîtrise d'une des langues disponibles dans l'application (néerlandais, français, allemand, anglais).

Exclusion:

- Les patients présentant une incapacité mentale ou des difficultés à exprimer leurs sentiments (par exemple, les personnes atteintes de troubles mentaux ou résidant en EHPAD) sont exclus.
- Les patients incapables d'utiliser une tablette ou un smartphone.
- Les patients ne comprenant pas l'une des langues disponibles dans l'application (néerlandais, français, allemand, anglais).

Prestataire de santé

L'utilisateur principal de l'interface web médicale est un praticien de santé (groupe) ou un chercheur clinique (groupe), nommé l'équipe de soins. L'équipe de soins est en mesure de faire fonctionner une interface via un navigateur sur PC/tablette/smartphone. Le professionnel de santé doit comprendre l'une des langues disponibles de l'interface (aujourd'hui uniquement disponible en anglais).

Seuls les professionnels de santé qualifiés, les titulaires d'un diplôme ou d'une certification dans le domaine de la santé, ou les chercheurs cliniciens qualifiés peuvent accéder à la plateforme et suivre les formations en ligne moveUP.

Population cible / indication d'utilisation

moveUP companion & coach est utilisé par les patients musculo-squelettiques, oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, cardiovasculaires et neurologiques, tels que les patients:

- qui ont subi ou envisagent de subir un bypass gastrique ou une sleeve gastrique
- qui ont ou ont eu un accident vasculaire cérébral, un myélome multiple, la covid, une hypercholestérolémie familiale
- qui ont ou ont eu des problèmes de dos ou d'articulations ou des opérations

moveUP therapy est utilisé par les patients ayant subi une arthroplastie du genou ou de la hanche.

Affirmation

moveUP : accompagnement, coaching et thérapie

L'intensité du suivi est adaptée aux besoins du patient grâce à l'outil de suivi des symptômes et de la qualité de vie moveUP.

moveUP améliore la prise en charge clinique des patients grâce à la détection et à la gestion précoces des complications permises par l'outil de suivi des symptômes et de la qualité de vie.

Une prise en charge clinique plus efficace, notamment grâce à la réduction du nombre de consultations, est possible.

Favorise l'observance du traitement.

L'information pertinente est fournie au bon moment.

Thérapie moveUP

Grâce à la thérapie moveUP, les patients ayant subi une arthroplastie du genou ou de la hanche peuvent bénéficier d'une rééducation complète à domicile, avec l'aide de l'équipe soignante intégrée à l'application.

moveUP app & devices

L'application moveUP fonctionne sur:

- iPhones/iPads (iOS 11.0 et versions ultérieures)
- Systèmes Android (Android 7.0.0 et versions ultérieures).

Si le patient ne possède pas de tablette/smartphone compatible, moveUP peut faire louer ces appareils.

- Lenovo Tab 3 : Android 6.0.1 ou version ultérieure
- Huawei MediaPad T3 : Android 7.0.0 ou version ultérieure

L'application moveUP nécessite une connexion Internet pour être utilisée.

Si le patient ne possède pas de tablette ou de smartphone compatible, moveUP peut lui louer ces appareils.

- Garmin Vivofit 3 et Vivofit 4
- Nokia Withings Go
- Tous les appareils compatibles avec HealthKit (iOS)
- Tous les appareils compatibles avec Google Fit (iOS et Android)







L'application moveUP est compatible avec les navigateurs suivants:

- Chrome
- Safari
- Edge
- Firefox

Nous vous recommandons vivement d'utiliser la dernière version de votre navigateur.

Pour la sécurité de vos données, veuillez activer l'authentification à deux facteurs (2FA) et utiliser un réseau sécurisé.

Avertissements et précautions

	<ul style="list-style-type: none"> • moveUP n'est pas un outil d'urgence. En cas d'urgence, veuillez contacter votre médecin ou appeler le 112.
	<ul style="list-style-type: none"> • moveUP n'est pas destiné à surveiller/traiter les paramètres vitaux des maladies graves.
	<ul style="list-style-type: none"> • MoveUP companion ne remplace pas les traitements que vous devez suivre, mais est utilisé en complément.
	<ul style="list-style-type: none"> • Les patients doivent savoir que si les questionnaires ne sont pas remplis fréquemment ou s'ils ne sont pas remplis de manière fiable, l'équipe de soins a plus de difficulté à connaître leur état de santé et leur évolution.
	<ul style="list-style-type: none"> • L'application moveUP offre des soins de santé personnalisés basés sur le profil du patient et ne peut donc pas être partagée, empruntée ou échangée entre utilisateurs. Les informations et conseils de l'application moveUP ne s'appliquent pas à un patient autre que celui dont le profil est stocké dans l'application. Le patient ne peut pas accorder l'accès à l'application moveUP à des tiers. Toute autre personne peut, même accidentellement, envoyer des informations erronées ou modifier le profil du patient, de sorte que les conseils guidés par moveUP ne correspondent plus aux besoins du patient.
	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les logiciels, il existe toujours un risque résiduel de dysfonctionnement. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas ou si vous n'obtenez pas de réponse dans l'application, veuillez nous contacter via support@moveup.care ou appeler le 0800 88 008.

Les instructions d'utilisation de moveUP sont fournies uniquement au format électronique. Si vous souhaitez recevoir une version imprimée complète, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail info@moveup.care. Cette adresse est disponible 24h/24 et 7j/7.

Contre-indications et effets secondaires potentiels

Il n'y a pas de contre-indications ni d'effets secondaires connus.

Notification des incidents graves

Un incident grave désigne tout incident qui a directement ou indirectement entraîné, aurait pu entraîner ou pourrait entraîner l'un des événements suivants : le décès d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne,

- la détérioration grave, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, ayant entraîné l'un des éléments suivants:
 - maladie ou blessure mettant la vie en danger,
 - atteinte permanente à une structure ou à une fonction corporelle, hospitalisation
 - prolongation de l'hospitalisation du patient, intervention médicale ou chirurgicale visant à prévenir une maladie ou une blessure mettant la vie en danger

- atteinte permanente à une structure ou à une fonction corporelle,
 - maladie chronique,
- une menace grave pour la santé publique;

Si vous détectez l'un de ces cas, veuillez envoyer un courriel à info@moveUP.care et à votre autorité compétente:

- Pays-Bas: meldpunt@igj.nl
- Belgique: meddev@fagg.be
- France: dedim.ugsv@ansm.sante.fr
- Allemagne: zlg@zlg.nrw.de

Contact corporel humain

Aucun contact physique avec le patient ou l'utilisateur, en raison de la nature du produit (logiciel).

Accessoires/produits utilisés en combinaison

Il n'y a pas d'accessoires.

Si le patient n'a pas de tablette/smartphone ou de tracker d'activité compatible, moveUP se charge de lui louer ces appareils. Les appareils loués sont des appareils marqués CE qui répondent aux critères de compatibilité décrits dans l'IFU pour l'application.

Durée de vie de l'appareil

Deux ans, selon la volonté de l'utilisateur de mettre à jour l'application. Nous envoyons une notification recommandant la mise à jour afin de garantir le maintien des performances et des fonctionnalités récemment ajoutées.

Détails de l'entreprise

 moveUP NV/SA	Tel: +32 800 88 008	UDI: ++G166MOVEUP210MDDD0  (01) G166G166MOVEUP210MDDD0 (10) +\$+210MDD (11) /16D20251202 (21) Q
Siège social à Bruxelles : Cantersteen 47, B-1000 Bruxelles, Belgique Bureau secondaire: Kliniekstraat 27A 9050; Ghent, Belgium	Email: info@moveUP.care www.moveup.care	

Pour toute question concernant l'application ou la tablette, vous pouvez contacter moveUP par les moyens suivants, par ordre de priorité: via la messagerie de l'application; par e-mail à l'adresse support@moveup.care; ou par téléphone pendant les heures de bureau au +3280088008.

MoveUP garantit la livraison de l'eIFU sous sept (7) jours sur demande. Veuillez contacter info@moveUP.care si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit.

Application patient

Veuillez lire le manuel d'utilisation destiné aux patients sur www.moveup.care/appinfo pour découvrir les fonctionnalités de l'application patient.

Module médical

Étape 1 : Le professionnel de santé s'inscrit sur la plateforme de soins de santé à l'adresse https://v1.medical.moveup.care/	
Étape 2 : moveUP contactera le professionnel de santé pour ajouter son profil à l'organisation appropriée.	
Étape 3 : Mesures de sécurité : Il est important d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA) car vous avez accès à des données de santé sensibles.	
Formation en ligne : Il est recommandé aux professionnels de santé qui utiliseront la plateforme de soins de santé de suivre les formations en ligne relatives aux indications listées sur https://moveup.talentlms.com . Nous leur demandons de s'inscrire à la formation en ligne dans leur langue.	

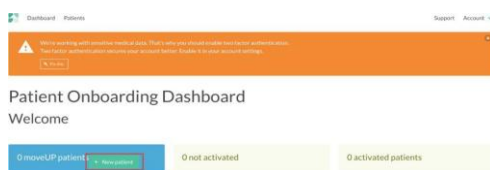
INTÉGRATION DES PATIENTS

L'intégration est le processus d'enregistrement d'un nouveau patient sur la plateforme de santé.

Une étape cruciale consiste à ajouter un plan de soins au profil du patient. Ce plan détermine les informations visibles pour le patient dans l'application, comme le type d'exercices, les modules d'information, la messagerie, etc. Un plan de soins comprend généralement une intervention, un traitement et une ou plusieurs équipes soignantes.

Accueil des patients

Patients Onboarding



Le tableau de bord d'accueil est facilement accessible depuis la plateforme de soins de santé, en haut à gauche, en cliquant sur «Accueil». Il est également accessible via <https://patient-onboarding-admin.moveup.care/dashboard> en utilisant les identifiants de professionnel de santé de la plateforme.

Cliquez sur « Nouveau patient » pour enregistrer un nouveau patient et renseigner ses informations.

Une fois les informations du patient saisies, appuyez sur «Enregistrer».

New patient

Remarque importante: Une seule adresse e-mail peut être associée à un seul compte. Il est impossible de réutiliser une adresse e-mail déjà enregistrée dans notre base de données, par exemple pour le compte d'un conjoint ou d'un parent.


Patient's care plans



Ensuite, sélectionnez le plan de soins: cliquez sur «Créer un nouveau plan de soins». Glissez-déposez une intervention et un traitement dans le plan de soins, puis renseignez les dates, le nom du médecin traitant et de l'équipe soignante.

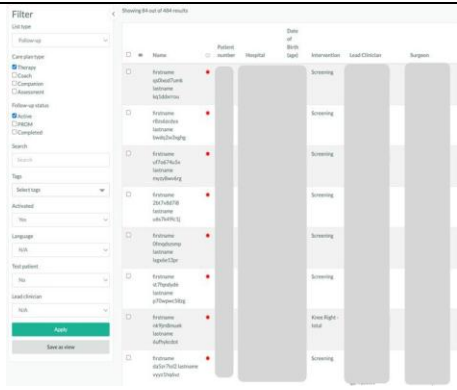
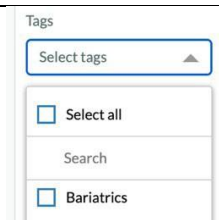
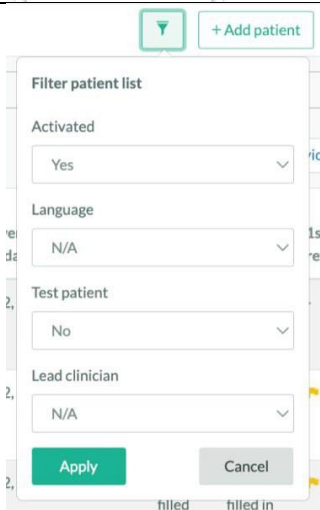

Glissez-déposez une étude, le cas échéant. Cliquez sur «Enregistrer».

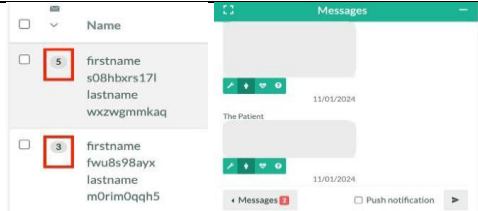
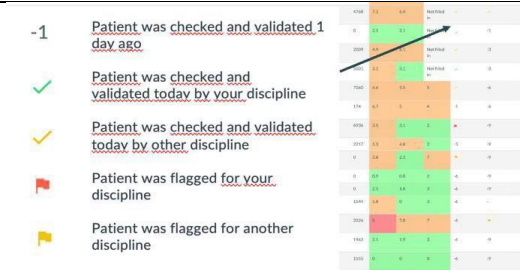
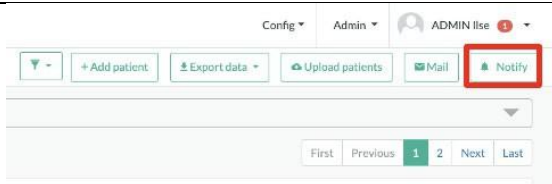
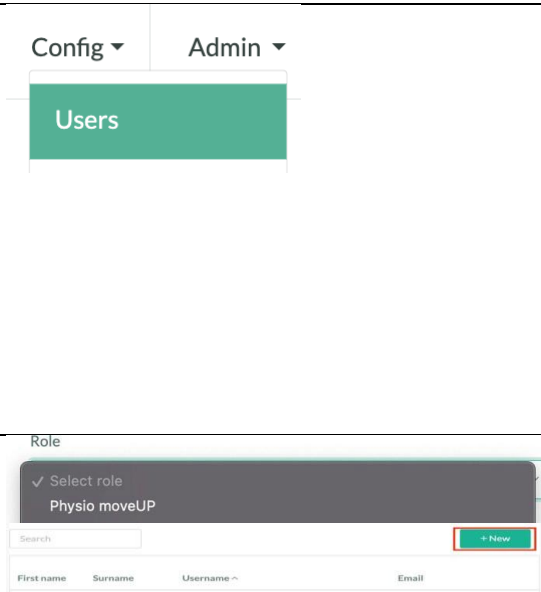
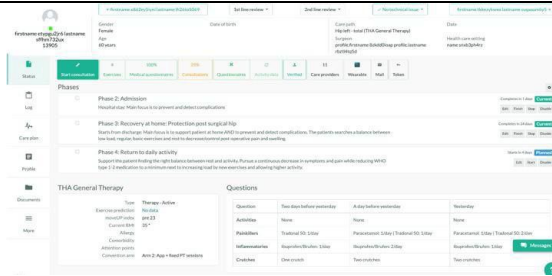
Un modèle d'e-mail s'affiche. Le professionnel de santé vérifie les paramètres de l'e-mail et clique sur «Envoyer le(s) e-

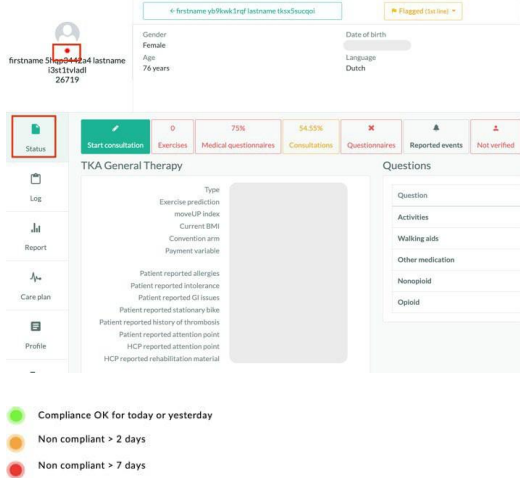
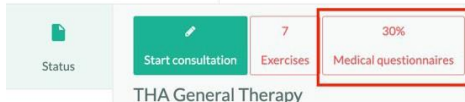

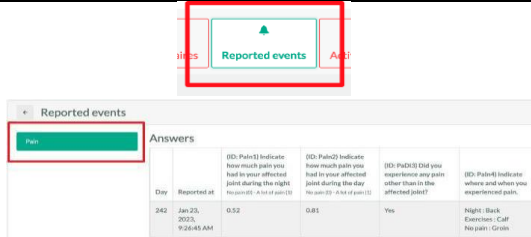
		<p>mail(s) sélectionné(s)».</p> <p>Un e-mail d'invitation contenant toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'activation de l'application sera envoyé au patient.</p>
		<p>Un modèle d'e-mail s'affiche. Le professionnel de santé vérifie les paramètres de l'e-mail et clique sur «Envoyer le(s) e-mail(s) sélectionné(s)».</p> <p>Un e-mail d'invitation contenant toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'activation de l'application sera envoyé au patient.</p>

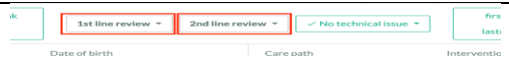
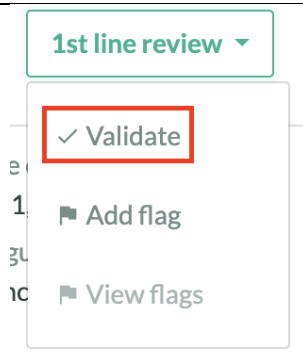

FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ

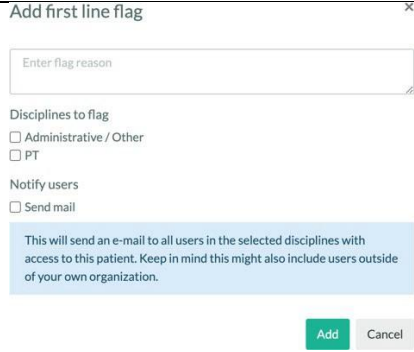
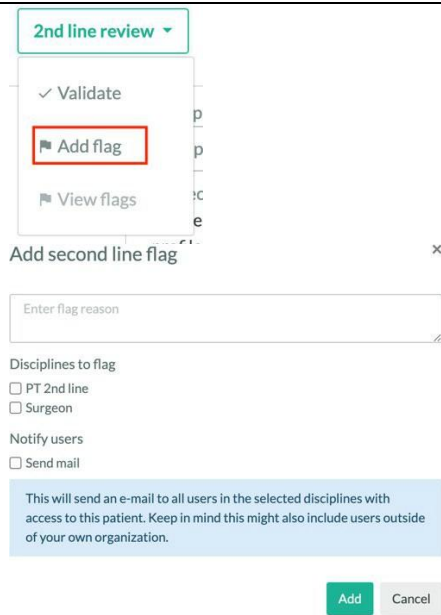
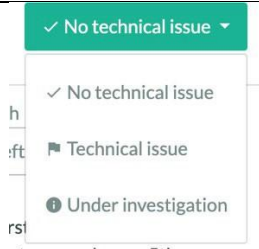
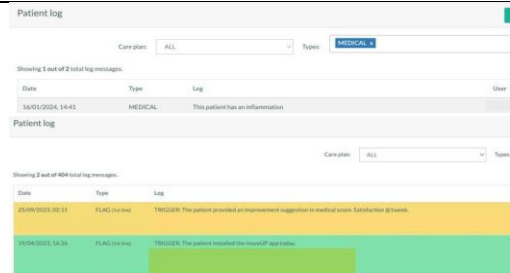
Ci-dessous, le professionnel de santé peut accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Les fonctionnalités disponibles s'affichent en fonction de son inscription . L'étendue des informations patient accessibles dépend de l'inscription du patient et de son taux d'observance.




<p>Aperçu du patient</p>		<p>La plateforme de soins de santé offre une vue d'ensemble claire des patients des professionnels de santé.</p> <p>La barre supérieure affiche les catégories pertinentes permettant d'identifier le patient et d'afficher ses paramètres de santé, les messages non lus, le médecin référent et l'observance du traitement. Par défaut, à l'ouverture de la plateforme, la vue d'ensemble des patients est triée par date d'intervention.</p>
<p>Étiquettes</p>		<p>Sélectionnez les patients présentant une pathologie spécifique à l'aide d'étiquettes.</p>
<p>Étiquettes</p>		<p>Sélectionnez les patients en fonction de la langue, du statut de patient test, du clinicien référent ou de leur statut d'activation. L'activation peut signifier deux choses: soit le patient s'est inscrit lui-même à l'aide d'un code via l'application, soit il a été marqué comme activé immédiatement lors de son intégration. Les patients non activés ne se sont pas encore inscrits via l'application et n'ont pas été marqués comme activés immédiatement.</p>
<p>Codes de couleur</p>		<p>Les codes couleur indiquent quels patients nécessitent une attention particulière.</p>

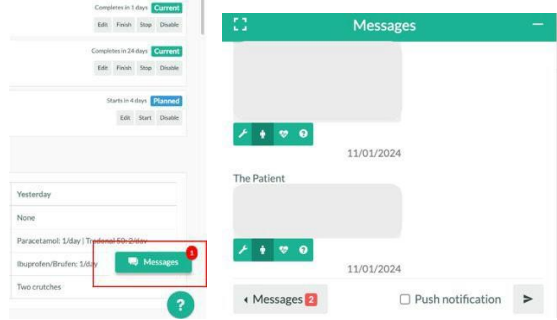
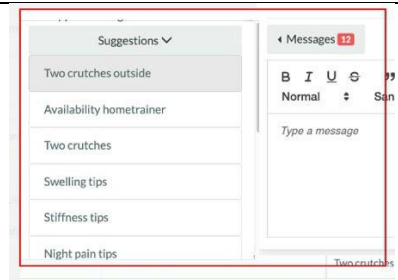
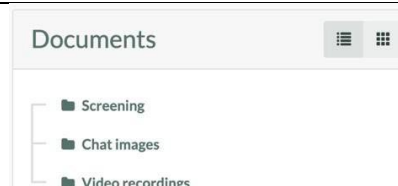


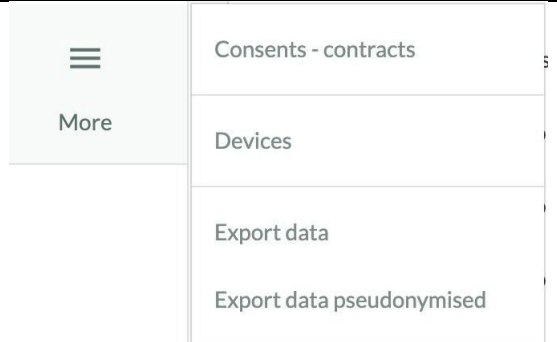
Messagerie		Le nombre de messages non lus est affiché dans l'aperçu.
Avis / Signalements		Grâce aux indicateurs de révision, on sait quand le patient a été examiné ou qui doit le faire. Pour plus d'informations, consultez la section «Détails du patient» – «Révision / Indicateurs».
Notifications		Les notifications peuvent être envoyées directement sur l'écran d'accueil de l'appareil du patient.
Gestion des utilisateurs		Seuls certains professionnels de santé d'une organisation sont autorisés à ajouter des utilisateurs. Si un professionnel de santé dispose de cette autorisation, il peut ajouter des utilisateurs en cliquant sur le bouton «+ New», en renseignant les informations d'identification et en sélectionnant
Informations patient - Aperçu		Dans la fiche patient, toutes les informations de santé pertinentes sont accessibles. Les flèches gauche et droite permettent au professionnel de santé de naviguer rapidement entre les patients, en affichant le nom du patient précédent ou suivant. La barre latérale gauche permet de naviguer entre le statut, le journal, le plan de soins, le profil, les documents et

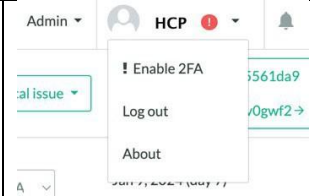
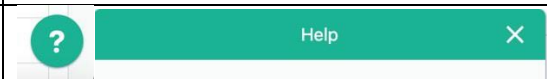
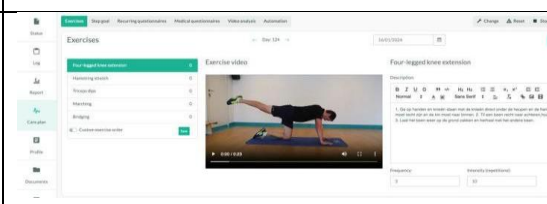
		plus encore.
Informations patient – Statut		<p>Les données de santé enregistrées sont accessibles dans la section « Statut ». De là, vous pouvez consulter les résultats des questionnaires médicaux et récurrents, les exercices et bien plus encore.</p> <p>Un point de statut VERT, JAUNE ou ROUGE indique le degré d'adhésion du patient au plan de soins ; par exemple, remplir tous les questionnaires médicaux et récurrents suggérés et effectuer les exercices suggérés se traduira par un point de statut VERT.</p>
Informations patient – Questionnaires médicaux		<p>Il est affiché via le bouton «questionnaire médical» :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quels questionnaires médicaux sont actifs pour un patient? ✓ Nombre de questionnaires complétés ou non. Quels sont les résultats obtenus pour chaque question du questionnaire médical? <p>À quoi servent les sous-scores et les scores totaux? Donner une indication rapide de la progression du patient.</p>
Informations patient – Questionnaires récurrents		<p>Grâce à ces réponses rapportées par les patients, il est possible de suivre fréquemment l'évolution de paramètres de santé importants.</p>
Informations sur le patient - Événements signalés		<p>Les événements signalés sont classés par catégorie. Pour chaque événement signalé, vous pouvez consulter: (1) La date à laquelle l'événement a été signalé (jour dans le plan de soins); (2) Les réponses à toutes</p>

		les questions posées au patient.
Informations patient- Avis / Signalements		L'évaluation de première ligne est destinée au professionnel de santé qui n'est pas le clinicien principal (par exemple, un kinéthérapeute), l'évaluation de deuxième ligne est destinée au clinicien principal (par exemple, un chirurgien).
		<p>Cliquez sur «Valider» lorsqu'un patient a été suivi. La surveillance peut comprendre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réponses aux questions – Conseils prodigués ✓ Exercices ajustés ou vérifiés ✓ Objectif de pas ajusté ou vérifié ✓ Paramètres quotidiens vérifiés : douleur, gonflement, activité... ✓ Protocole postopératoire vérifié: utilisation de béquilles/déambulateur, médicaments...Questions answered – Advice given <p>Même principe pour la révision de deuxième niveau.</p>
		<p>Signalez quelqu'un de la première ligne</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le patient doit être examiné par un professionnel de santé de première ligne (par exemple, un kinésithérapeute). ✓ Indiquez le motif du signalement.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sélectionnez la discipline concernée. ✓ Facultatif: ajoutez une notification par courriel. La discipline concernée recevra un courriel à ce sujet. <p>Un signalement ajoutera une nouvelle ligne dans le dossier du patient avec la raison du signalement (voir plus loin).</p>
		<p>Signaler quelqu'un de la deuxième ligne</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le patient doit être examiné par un professionnel de santé de deuxième ligne (par exemple, un chirurgien). ✓ Indiquez la raison du signalement. ✓ Sélectionnez la discipline concernée par le signalement. <p>Facultatif: ajouter une notification par courriel pour signaler le problème. La discipline concernée recevra un courriel à ce sujet.</p>
		<p>Signaler un problème technique.</p>
<p>Informations patient – Journal</p>		<p>Les alertes et les mises à jour techniques apparaissent automatiquement dans le journal du patient.</p> <p>En cas d'alerte:</p>

		<p>✓ VERT: Problème résolu</p> <p>✓ ROUGE: Problème non résolu pour la discipline de l'utilisateur connecté (ex. : kinésithérapeute)</p> <p>✓ JAUNE: Problème non résolu pour une autre discipline que celle de l'utilisateur connecté (ex. : chirurgien).</p> <p>D'autres informations importantes peuvent être ajoutées manuellement au journal. Les tags appropriées sont ajoutées au journal afin de faciliter les recherches.</p>
Informations patient - Rapport		<p>Le rapport peut être téléchargé au format PDF en cliquant sur le bouton «Download report» (Télécharger le rapport). Le professionnel de santé pourra ainsi l'envoyer au patient. Il est également possible de partager directement le lien du rapport en utilisant le bouton "Copy report link" (Copier le lien du rapport)</p>
Informations patient - Profil		<p>Le professionnel de santé peut consulter, modifier ou ajouter toutes les données pertinentes de base, cliniques, administratives ou spécifiques au plan de soins dans le profil du patient.</p>

<p>Informations patient - Messagerie</p>		<p>La fenêtre contextuelle de messages (extensible) est fermée par défaut et le nombre de nouveaux messages est visible sur le bouton 'Messages'. Cette fonctionnalité permet de conseiller les patients et de répondre à leurs questions. Elle peut également servir à demander des photos, par exemple pour suivre l'évolution de la cicatrisation, l'apparition d'un gonflement, de rougeurs, etc.</p>
		<p>En cliquant sur « messages », une liste de messages personnalisés prédéfinis s'affiche, parmi lesquels le professionnel de santé peut sélectionner le message approprié pour ce patient.</p>
		<p>Cliquez sur le symbole de la première ligne pour marquer la question comme lue.</p>
		<p>Les messages envoyés par un professionnel de santé peuvent être modifiés ou supprimés. En survolant un message, un bouton permettant de le modifier ou de le supprimer apparaît.</p>
<p>Informations patient - Documents</p>		<p>Les documents peuvent être téléchargés dans la section « Documents ». Les captures d'écran et les enregistrements vidéo des conversations y sont automatiquement regroupés afin de faciliter leur accès.</p>
<p>Informations sur le patient - Plus d'informations</p>		<p>Consultez les documents/contrats signés par le patient.</p> <p>Consultez l'appareil utilisé par le patient pour accéder à l'application, ainsi que les dates de première et dernière utilisation.</p> <p>L'exportation des données est</p>

		réservée à un nombre limité de professionnels de santé pour des raisons de sécurité et afin de préserver l'intégrité des données.
Déconnexion		Dans le coin supérieur droit, le professionnel de santé peut se déconnecter. Notez que la déconnexion automatique a lieu tous les 14 jours; il est donc recommandé de se déconnecter plus fréquemment afin d'éviter tout accès non autorisé.
Déconnexion		Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse support@moveup.care ou utiliser le bouton «?» sur la plateforme.
Gestion du plan de soins		Dans la gestion du plan de soins, il est possible de naviguer entre de multiples fonctions applicables à l'indication du patient, telles que les exercices, l'objectif de pas, les questionnaires récurrents, l'analyse vidéo, l'automatisation, etc. Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

FONCTIONS DU PLAN DE SOINS DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ

Il est possible de prodiguer des soins via la plateforme de santé. Grâce aux fonctionnalités ci-dessous, le professionnel de santé peut adapter le plan de traitement par défaut de chaque patient.

Seules les fonctionnalités applicables au plan de soins seront affichées.

Gestion de l'exercice

The screenshot displays the 'Exercices' (Exercises) module interface. It includes sections for 'Exercise video', 'Circulation', 'Daily message', and 'Manage patient scheme'. The 'Manage patient scheme' section shows a grid of exercises with their frequency and intensity. A 'Plan exercise' dialog box is open, allowing users to configure exercise parameters.

Plan exercise dialog box details:

- Start day / End day: 5 / 5
- Repeat: Daily
- Intensity start (repetitions): 10
- Intensity target (repetitions): 10
- Frequency start: 3
- Frequency target: 3

Le module de gestion des exercices comprend les possibilités d'adaptation suivantes:

- ✓ Adapter la description, la fréquence et l'intensité des exercices du jour.
- ✓ Adapter le message du jour.
- ✓ Adapter le programme d'exercices:
 - Les cases bleues indiquent les exercices actifs, accompagnés de leur fréquence et de leur intensité.
 - Planifiez vos exercices sur une période plus longue.

Complétez le programme d'exercices standard par une série d'exercices qui ne font pas partie de ceux définis dans le plan de soins.

Questionnaire récurrent

The screenshot displays the 'Recurring questionnaires' module interface. It includes sections for 'Questionnaires', 'Using treatment scheme', and 'Personalize'. A 'Personalize' button is highlighted. Below, a table lists existing questionnaires, and a dialog box allows adding a new questionnaire to the personalized care plan.

Add questionnaire to personalized care plan dialog box details:

- Questionnaire: (dropdown menu)
- Start date: (text input)
- End date: (text input)
- Frequency: Daily
- Activation hour: 15
- Activation minutes: 0

Il est possible de supprimer, de réorganiser ou d'ajouter de nouveaux questionnaires récurrents. La liste par défaut des questionnaires récurrents, incluant leur date de début, leur date de fin, leur fréquence et les rappels, est prédéfinie dans le plan de soins.

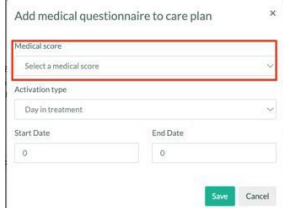
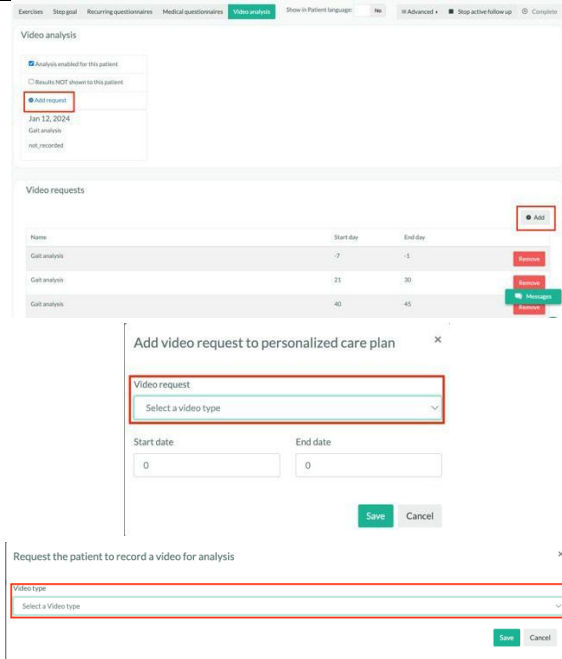
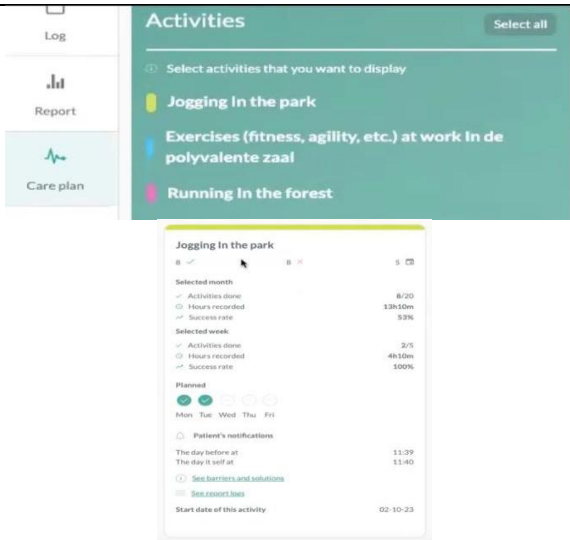
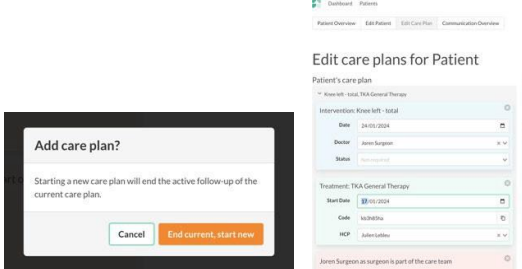
Questionnaire médical

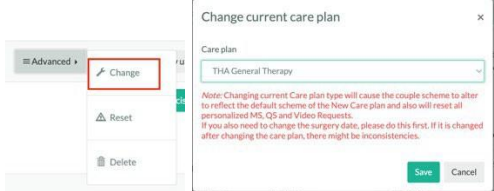
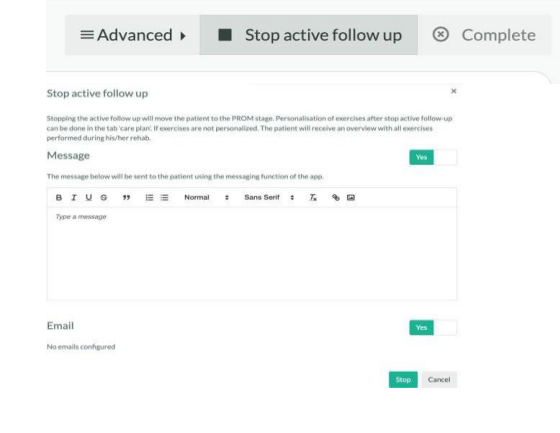
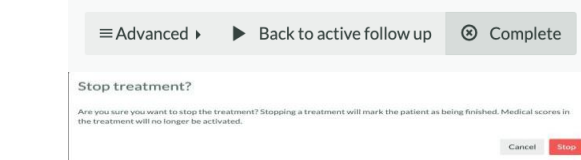
The screenshot displays the 'Medical questionnaires' module interface. It includes sections for 'Medical scores scheme' and 'Add'. A table lists existing medical questionnaires, and an 'Add' button is highlighted.

Medical scores scheme table:

Name	Start day	End day	Provider	Remove
HIP PROM collection month 6	170	210	Provider	Remove
HIP PROM collection Year 1	340	500	Provider	Remove
Discharge Questionnaire HIP	0	15	Provider	Remove

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des questionnaires médicaux du dispositif par défaut. La liste par défaut des questionnaires médicaux, incluant leurs dates de début

		et de fin, est prédéfinie dans le plan de soins.
Analyse vidéo		<p>Les demandes d'enregistrement vidéo permettent d'obtenir des informations plus objectives, par exemple sur l'analyse de la marche ou l'amplitude des mouvements d'une articulation opérée.</p> <p>La liste des demandes d'enregistrement vidéo est prédéfinie dans le plan de soins. Vous pouvez ajouter une demande directement en cliquant sur le bouton «Ajouter une demande» ou la programmer pour une période plus longue en cliquant à nouveau sur le bouton «Ajouter» et en indiquant une date de début et une date de fin.</p>
Gestionnaire d'objectifs		Le professionnel de santé peut activer ou désactiver un outil de changement comportemental permettant aux patients de définir leurs objectifs personnels, d'identifier les obstacles et les solutions pour adopter un mode de vie sain. Il peut également suivre les progrès du patient par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés.
Changement de plan de soins		Le plan de soins peut être adapté en fonction des interventions, des besoins et des souhaits du patient. Cette adaptation peut se faire via l'outil d'accueil ou via la plateforme de santé en

		<p>cliquant sur le bouton « Avancé ». Les instructions pour modifier un plan de soins sont clairement indiquées dans les outils.</p>
Arrêter le suivi actif		<p>Une fois le suivi actif terminé (les éléments relevant du suivi actif sont prédéfinis dans le plan de soins), appuyez sur « Arrêter le suivi actif ». Le patient sera alors redirigé vers un suivi passif à long terme, le cas échéant (également prédéfini dans le plan de soins si un suivi à long terme est nécessaire).</p>
		<p>Une fois que le professionnel de santé ou le patient n'a plus d'actions à effectuer, le patient peut être marqué comme « Terminé »</p>

MODULE BIEN-ÊTRE

Le module de bien-être est un module optionnel non médical ; les données affichées ne sont donc pas destinées à la prise de décisions cliniques.

Ces données donnent un aperçu du bien-être général du patient.

Le module de bien-être est masqué par défaut et doit être activé pour consulter les données de bien-être du patient.

ACTIVATION DU MODULE BIEN-ÊTRE

Pour activer le module bien-être, vous devez accéder aux paramètres de votre profil et activer l'option :

- Activer les données de bien-être

The screenshot shows the 'Edit Laurens Baes' profile page. The page has a header with 'moveUP Patients Onboarding' and a user menu for 'Laurens'. The profile details are organized into two columns:

- Left Column:**
 - First name: Laurens
 - Surname: Baes
 - Username: laurens@moveup.care
 - Email: laurens@moveup.care
 - Telephone number: +32496123456
 - Social security number: [redacted]
 - RIZIV nr: [redacted]
 - Authentication: ☒ Two factor authentication
- Right Column:**
 - Address: Oltroolplein 1
 - City: Gent
 - Postal code: 9000
 - Country: Belgium
 - Title: [redacted]
 - Image: [redacted]
 - Language: English
 - Wellness module: ☐ Enable wellness module

At the bottom, there are three buttons: 'Save', 'Set new password', and 'Manage consent/contracts'.

Lors de l'activation, une fenêtre contextuelle d'accusé de réception obligatoire s'affiche. Elle vous informe que les données du module Bien-être ne doivent pas être utilisées pour appuyer la prise de décisions cliniques.

Platform notice

Wellness module terms of use

Dear User,
You are about to activate the Wellness Module.

What is the Wellness Module?

The wellness module provides you with additional data about the general wellbeing and activity levels of your patients. The data in the Wellness Module can come from:

- imported data from general-purpose devices such as e.g. activity trackers
- manual entry by patients

This data does not come from medical devices. This means that neither the devices from which the data is imported, nor the manual entries by the patients have been verified or validated by moveUP, and therefore, it should not be used for clinical decision-making.

What is the purpose of this data?

We provide the option to see wellness data to give you a broader idea about the general wellbeing of the patients and to give you the opportunity to discuss and give further guidance regarding wellbeing.

This module is an optional module and is not linked to the medical data presented in the "Medical data" tab of the dashboard.

The data in the wellness module is not intended to be used for clinical decisions.

How to recognize the wellness data?

Wellness data is displayed in a separate tab in the dashboard or in a separate report.

Whenever wellness data is displayed in a column, together with other data it has a grey background to visually indicate that this does not concern medical data. Furthermore, it has a warning sign next to it.

Enabling/Disabling the Wellness Module

At any time, a user can enable/disable the Wellness Module in the user settings.

Acknowledgement

By clicking on the button below, you acknowledge that you have read and understood that the Wellness Module is an optional module that provides you with additional data regarding the general wellbeing of the patient. This data is not validated by moveUP and is not intended for clinical decision making.

☐ I agree

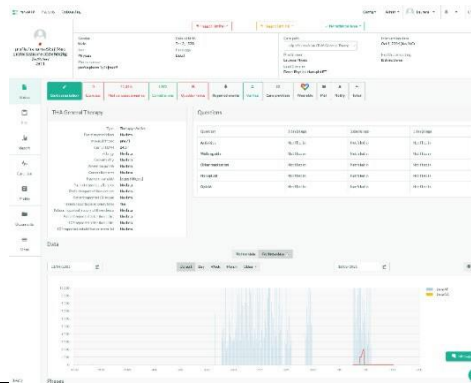
Sign

Cancel

Une fois votre compte validé, vous accédez aux données de bien-être. Cette action vous permet de consulter ces données et d'exporter les rapports de bien-être.

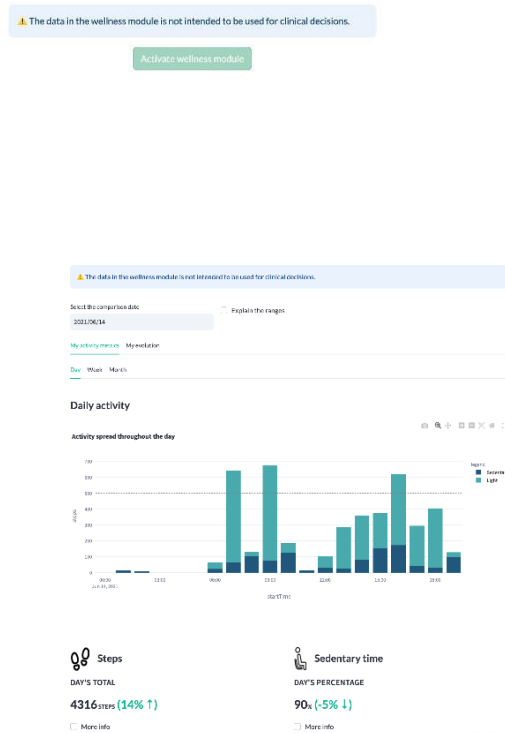
APERÇU DU MODULE BIEN-ÊTRE

Aperçu du module bien-être



Dans cet onglet, vous pourrez consulter les données de suivi du patient et observer leur évolution.

Rapport de bien-être



Vous pouvez consulter les rapports de bien-être en cas de besoin.