

JETLAVAGE

Netzteil für Druckwundspülsystem mit Erdungsanschluss
Art. Nr. MST2500ADG-AC

mst⁺
medical service team
www.mst-gmbh.eu

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

Eine umweltfreundliche Entscheidung. Die Netzteilösung bietet Ihnen die Möglichkeit vollständig auf Batterien zu verzichten und reduziert die Abfallmenge.

Spezifikationen

- Wechselstrom Eingang 100~240 V 1.0A 50~60 Hz
- DC output 8V 3.0A

Systemanzeigen/-anschlüsse

- A** LED Anzeige für Netzbetrieb (Grünes LED)
- B** Anschluss für Jet Lavage Stromkabel
- C** Anschluss für 220 V Wechselstromstecker
- D** Erdungsanschluss

Anwendung

1. Verbinden Sie das 220 V Stromkabel mit dem Netzteil (Anschluss C) und stecken Sie anschließend den Stecker an eine Stromquelle. Wenn eine Stromverbindung besteht leuchtet die LED Anzeige „grün“.
2. Verbinden Sie das Jet Lavage Stromkabel mit dem Netzteil. Anschluss (B) und vergewissern Sie sich, dass der Stecker sicher verbunden ist.
3. Hängen Sie das Netzteil an einem Infusionsständer oder legen Sie es an einen anderen geeigneten Platz.

Reinigung


- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein weiches Tuch, das mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet ist.
- Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, dieses kann eindringen und Schäden verursachen kann.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel.

Transport und Lagerung

- Lagerung: kühl und trocken
- Temperatur: -10° C ~ +40° C
- Luftfeuchtigkeit: < 75 % RH

Entsorgung

- Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß EG-Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden.

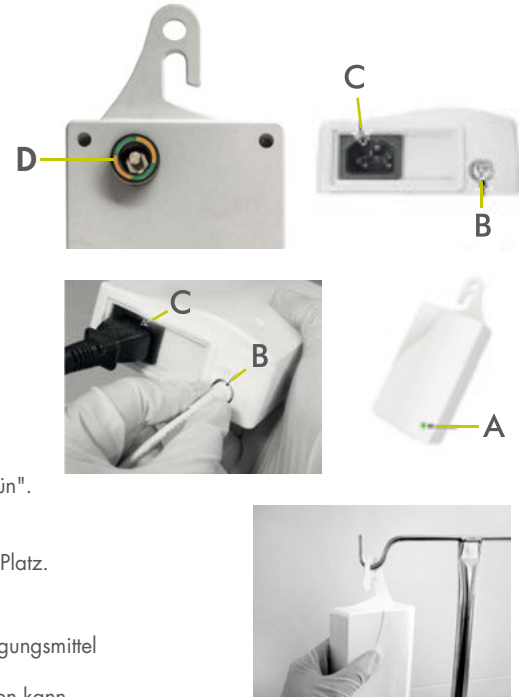

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Bitte beachten Sie:

- Ein beschädigter Artikel darf NICHT verwendet werden!
- Betreiben Sie dieses Produkt NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen, um einen Stromschlag zu vermeiden!
- Verwenden Sie nur das für dieses Produkt angegebene Netzkabel, um Brandgefahr zu vermeiden!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden!
- Nur für den Gebrauch des MST-Jetlavage Systems!
- Dies ist ein wiederverwendbares Gerät und NICHT steril!

Warnung:

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Methode und nicht für andere Zwecke!
- Tauchen Sie das Instrument NICHT in Flüssigkeit!
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen!
- Modifikationen dieses Artikels sind nicht erlaubt!


Labeling Symbols

-  Refer to instruction manual/booklet
-  General warning sign / Caution
-  European Union WEEE Directive Logo
-  Do not use if package is damaged
-  Keep dry
-  Storage temperature range
-  Catalog number
-  Batch code
-  Complies with EU directives
-  Manufacturer
-  Authorized Representative in the European Community
-  Direct current
-  Double insulated
-  Indoor use only
-  Date of manufacture
-  Use by date
-  Premature unpacking warning
-  Medical Device
-  Non-sterile
-  BF type

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!

Vertrieb durch:
mst medical-service gmbh
eichkampredder 9
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20
Telefax: +49 4344 818 36-29
E-Mail: info@mst-gmbh.eu

 Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,
Hengli Town, Dongguan City,
523462 Guangdong, P.R. China


MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster
Germany