

Vine Holter Jantung

Panduan Warna LED Holter Jantung

Saat pengisian daya baterai




LED warna hijau berkedip sekali setiap detik

Menandakan bahwa holter dalam pengisian daya baterai.

LED warna hijau menyala terus

Menandakan daya holter 100%.

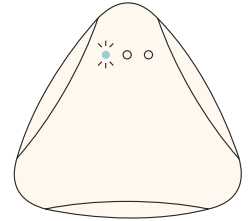


Saat digunakan




LED warna hijau berkedip sekali setiap dua detik

Akan berubah menjadi warna hijau saja dan berkedip satu kali setiap 2 detik saat alat telah terikat dengan baik di dada pasien. Menandakan alat terikat dengan baik di dada pasien.

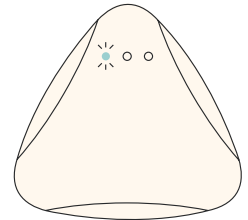

LED warna hijau, merah dan kuning menyala bersamaan

Apabila pasien menepuk alat holter untuk merekam gejala atau jika tidak sengaja tersentuh.

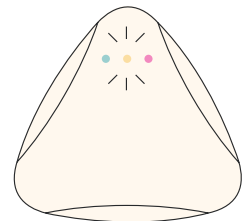


Saat holter jantung baru dipasang pada pasien



LED warna hijau, merah dan kuning menyala bersamaan

Setelah terpasang di dada pasien dan terikat dengan baik, maka warna Hijau akan berkedip satu kali setiap dua detik.

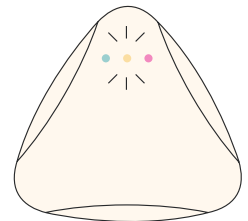

Durasi holter jantung selesai



LED merah dan hijau berkedip

Hijau dan merah berkedip menandakan bahwa durasi perekaman jantung telah selesai.

